



Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la pompe à insuline t:slim X2, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.



1

Touchez **OPTIONS** sur l'écran d'accueil, puis **Ma pompe**.



2

Touchez **Profils personnels**.



3

Touchez le nom du Profil personnel à afficher ou à modifier.



4

Touchez **Modifier** pour modifier ou afficher les paramètres.



5

Touchez les paramètres actuels pour une liste complète des paramètres programmés pour l'ensemble de la journée.



6

Touchez la plage horaire que l'utilisateur souhaite modifier. Si les plages horaires ne sont pas toutes visibles, touchez la **flèche vers le bas**.



7

Touchez **Basale**, **Fact. de corr.**, **Ratio gluc.** ou **Cible** pour apporter des modifications, puis touchez . Une fois terminé, touchez .



8

Confirmer les paramètres. Les modifications récentes sont affichées en orange. Touchez pour confirmer.

Renseignements importants sur la sécurité : Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. La pompe à insuline t:slim X2 est approuvée pour une utilisation chez des individus à partir de 6 ans. Pour consulter des renseignements importants sur la sécurité, veuillez visiter tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© Tandem Diabetes Care, Inc., 2022. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ML-1004818_B

