


Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la pompe à insuline t:slim X2, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.

## Arrêter l'administration d'insuline

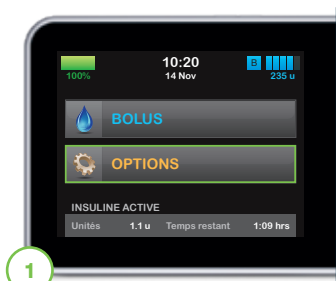


Touchez **OPTIONS**.



Touchez **ARRÊTER INSULINE**.



Touchez  pour accepter le réglage affiché. Pour modifier le réglage de l'alarme Reprise pompe, touchez le volet au centre de l'écran.

**Remarque :** La pompe NE reprendra PAS automatiquement l'administration d'insuline une fois le délai écoulé. L'utilisateur recevra une alarme Reprise pompe après la durée sélectionnée (15 min, 30 min, 45 min ou 1 heure).




Sélectionnez le bouton correspondant à la durée de l'alarme Reprise pompe que vous souhaitez afficher.

Si une valeur différente est sélectionnée, la pompe reviendra à l'écran de confirmation précédent où la sélection mise à jour sera affichée.

## Reprendre l'administration d'insuline

**Remarque :** Si le compteur d'un débit temporaire est toujours actif lorsque l'administration d'insuline est reprise, le débit temporaire se poursuivra. Si un bolus est administré avant l'arrêt de l'insuline, le reste de l'insuline à administrer sera annulé.

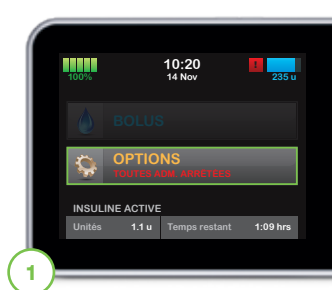

Touchez **OPTIONS**.



Touchez **REPRENDRE INSULINE**.



Touchez  pour confirmer.

**Renseignements importants sur la sécurité :** Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. La pompe à insuline t:slim X2 est approuvée pour une utilisation chez des individus à partir de 6 ans. Pour consulter des renseignements importants sur la sécurité, veuillez visiter [tandemdiabetes.com/safetyinfo](http://tandemdiabetes.com/safetyinfo).

© Tandem Diabetes Care, Inc., 2022. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. ML-1004819\_B

