




Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la pompe à insuline t:slim X2, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.

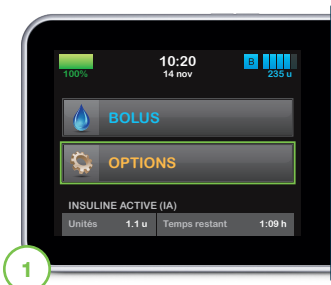

Touchez **OPTIONS**.




Depuis le menu **Activité**, appuyez sur **Débit temporaire**.



Touchez à nouveau **Débit temporaire**.


**Remarque :** Pour les utilisateurs de la technologie Control-IQ les débits temporaires ne sont accessibles que lorsque la technologie est désactivée.



Saisissez le pourcentage souhaité à l'aide du clavier à l'écran. Touchez  pour continuer.


**Remarque :** Le débit actuel est réglé à 100 %. Une augmentation correspond à un débit de plus de 100 %; une diminution correspond à un débit de moins de 100 %.



Touchez **Durée**. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez la durée souhaitée pour le débit temporaire. Touchez  pour continuer.

**Remarque :** Pour afficher les unités réelles à administrer, touchez **Voir les unités**.

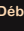


Vérifiez les réglages et touchez  pour confirmer. L'écran **DÉBIT TEMP DÉMARRÉ** s'affiche pour confirmer le démarrage du débit temporaire.



L'écran Verrouillage s'affiche avec une icône en « T » orange indiquant qu'un débit temporaire est actif.

**Remarque :** Si un débit temporaire de 0 % est actuellement en cours, l'icône en « T » orange est remplacée par une icône en « T » rouge.



Pour arrêter un débit temporaire à n'importe quel moment, touchez **OPTIONS**, puis **Activité**, puis appuyez sur « X ». Un écran de confirmation s'affiche. Touchez  pour confirmer.

**Renseignements importants sur la sécurité :** Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 est approuvée chez les personnes de 6 ans et plus. Pour consulter des renseignements importants sur la sécurité, veuillez visiter [www.tandemdiabetes.com/safetyinfo](http://www.tandemdiabetes.com/safetyinfo).

© Tandem Diabetes Care, Inc., 2022. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, Control-IQ et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. ML-1004821\_B

