



Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la pompe à insuline t:slim X2, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.



1

Touchez **0 grammes** pour saisir les glucides pour le bolus.

Remarque : Si cette zone indique « unités », la fonction des glucides est désactivée dans le profil en cours.



2

Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « grammes » est affiché au-dessus du clavier pour les bolus repas. Touchez **✓** pour continuer.



3

Touchez **✓** pour continuer, puis **✓** pour confirmer.

Remarque : Si une glycémie supérieure à la cible est saisie, le bolus de correction ne sera pas prolongé.

Remarque : Si certaines fonctionnalités avancées sont utilisées, la valeur actuelle de la SGC du Dexcom G6 peut être générée automatiquement dans la calculatrice de bolus. Consultez le Guide d'utilisation pour en savoir plus.



4

Placez le bouton à bascule en position activée pour prolonger le bolus. Touchez **✓** pour continuer.



5

Touchez **✓** pour utiliser les paramètres par défaut ou **MAINTENANT** et **DURÉE** pour régler les valeurs souhaitées, puis touchez **✓** pour continuer.



6

Touchez **✓** pour confirmer.

Remarque : Si la technologie Control-IQ est activée, la durée des bolus prolongés est limitée à deux heures. Consultez le Guide d'utilisation pour en savoir plus.



7

L'écran d'administration confirmera la quantité d'insuline qui sera administrée immédiatement, la quantité qui sera administrée plus tard et la durée de l'administration. Touchez **✓** pour démarrer le bolus. L'écran **BOLUS LANCÉ** s'affiche pour confirmer le démarrage de l'administration.



8

Pour annuler la partie du bolus non administrée, touchez la croix en face de **BOLUS** sur l'écran d'accueil, puis touchez **✓** pour confirmer l'annulation du bolus.

Renseignements importants sur la sécurité : Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. La pompe à insuline t:slim X2 est approuvée pour une utilisation chez des individus à partir de 6 ans. Pour consulter des renseignements importants sur la sécurité, veuillez visiter tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© Tandem Diabetes Care, Inc., 2022. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, Control-IQ et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ML-1004824_B

