



Il sera nécessaire de modifier certains paramètres du téléphone intelligent pour assurer le fonctionnement sûr de l'application. Pour plus de détails, consultez la section Configuration du téléphone intelligent.



1 Cherchez l'application mobile Tandem t:slim dans la boutique d'applications de votre téléphone intelligent et installez-la.



2 Ouvrez l'application mobile et connectez-vous en utilisant les identifiants existants ou créez un compte.




3 À l'écran d'accueil de votre pompe, touchez **OPTIONS**.



4 Touchez la flèche vers le bas, puis **Réglages dispositif**.



5 Touchez **Paramètres Bluetooth**.

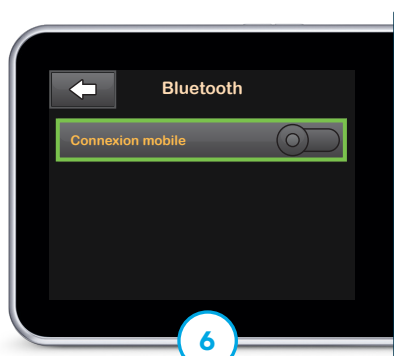

6 Touchez la commande d'activation/de désactivation à côté de Connexion mobile.



7 Touchez ☒ pour continuer.



8 Un écran de confirmation s'affiche pour confirmer l'appariement. Touchez ☒ pour continuer.

Association de l'application mobile (suite)



Sélectionnez **Démarrer**, puis **OK** à l'écran de confirmation, sur l'application mobile.



Sélectionnez le bouton adjacent à la pompe et touchez **Suivant**.



Le code unique d'appariement sera automatiquement généré. Veillez à **NE PAS** appuyer sur **X**, car cela annulerait le processus.



Sur l'application mobile, entrez le code d'appariement, puis touchez **Appariement avec la pompe**.



Un écran de confirmation apparaît sur la pompe. Touchez **OK** pour continuer.



Appuyez sur **Synchronisation des données de la pompe** dans l'application mobile pour importer les données récentes provenant de la pompe à insuline.



Une fois que l'application mobile affiche les données de la pompe, elle est prête à l'emploi.



Configuration du téléphone intelligent



Désactivez le mode zoom

lorsque vous utilisez l'application mobile Tandem t:slim. Vous trouverez cette option dans les paramètres d'accessibilité du téléphone intelligent.



Désactivez les mises à jour automatiques

afin que l'utilisateur puisse confirmer la compatibilité de l'application avec la nouvelle version logicielle du système d'exploitation avant d'effectuer la mise à jour manuellement.



Activez la sécurité du téléphone intelligent

(p. ex., verrouillage écran, mot de passe, reconnaissance faciale) avant d'ajuster l'administration de l'insuline et de programmer la pompe.



Activez les notifications, désactivez le mode Faible charge et acceptez toutes les demandes de permission pour recevoir les alertes, les alarmes et les notifications de la pompe.



Compte utilisateur

Si vous avez déjà un compte Tandem Source, connectez-vous avec l'adresse courriel et le mot de passe existants. Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte Parent/tuteur ou Personnel.

Gardez l'application ouverte

L'application mobile doit fonctionner en arrière-plan afin de recevoir et de transmettre les données à destination et en provenance de la pompe à insuline t:slim X2 et permettre à l'utilisateur de recevoir les notifications.

Téléphone endommagé

Arrêtez d'utiliser l'application en cas d'endommagement de votre téléphone intelligent ou d'une partie importante de l'affichage. Utilisez alors votre pompe à insuline t:slim X2 pour administrer l'insuline jusqu'au remplacement du téléphone.

Protégez votre mot de passe

Veillez à ne jamais partager le mot de passe de sécurité ni autoriser une autre personne à accéder au téléphone intelligent par le biais de ses données biométriques afin d'éviter tout changement involontaire dans l'administration d'insuline.


Problèmes de connexion

Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés pour connecter la pompe à l'application mobile Tandem t:slim, arrêtez ou fermez de force la session en cours, puis touchez l'icône de l'application mobile pour la redémarrer.

Dissocier le téléphone intelligent de la pompe



Si l'utilisateur remplace sa pompe à insuline t:slim X2 ou rencontre des difficultés persistantes avec l'application, il devra suivre ces instructions pour les désappairier l'une de l'autre puis les réappairier.

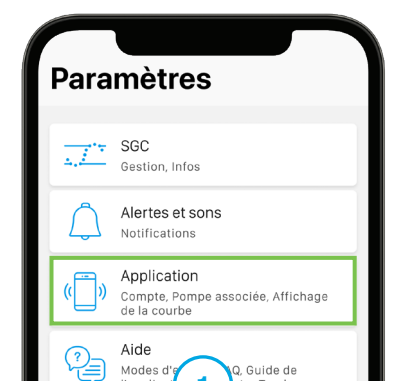

Touchez **Paramètres** dans la barre de navigation, puis **Application**.



Touchez **Pompe associée**.



Touchez **Déconnexion**.
Un message de confirmation s'affiche.

Rendez-vous sur le site tandemdiabetes.com pour consulter des ressources supplémentaires.

Ces instructions sont fournies à titre de référence aux personnes ayant déjà utilisé une pompe à insuline Tandem Diabetes Care. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la pompe t:slim X2, consultez le guide d'utilisation.

Il est possible que ce produit ne réponde pas à vos besoins. Lisez l'étiquette et suivez toujours les instructions.

Renseignements importants sur la sécurité : Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration d'insuline sous-cutanée, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. Visitez le site tandemdiabetes.com/fr-ca/legal/important-safety-information pour de plus amples renseignements importants sur la sécurité.

AVERTISSEMENT : La technologie Control-IQ ne doit pas être utilisée chez des personnes de moins de 6 ans. Elle ne doit pas non plus être utilisée chez les personnes qui ont besoin de moins de 10 unités d'insuline par jour ou qui pèsent moins de 25 kg.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, les logos Tandem, t:slim, t:slim X2, Tandem Source et Control-IQ sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. MAT-0774_1



TANDEM
Diabetes Care

(833) 509-3598
tandemdiabetes.ca

POUR UTILISATION AU
CANADA SEULEMENT

