


Perfiles personales


en la bomba de insulina t:slim X2

Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba de insulina y con la terapia con insulina en general.


No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la bomba de insulina de Tandem t:slim X2™.

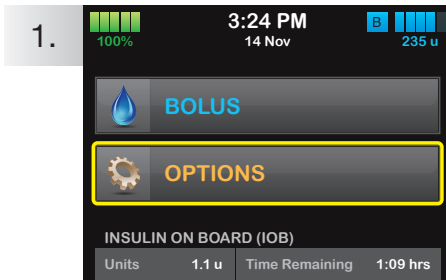


1. Presione **OPTIONS** (OPCIONES).

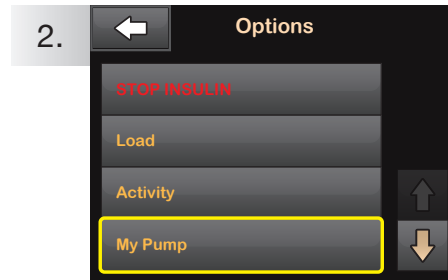


2. Presione **My Pump** (Mi bomba).

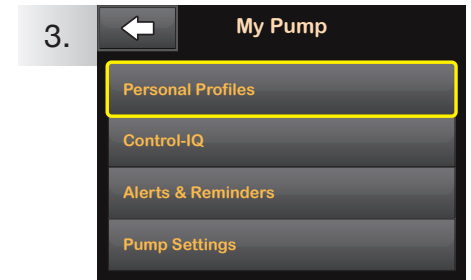


3. Presione **Personal Profiles** (Perfiles personales).

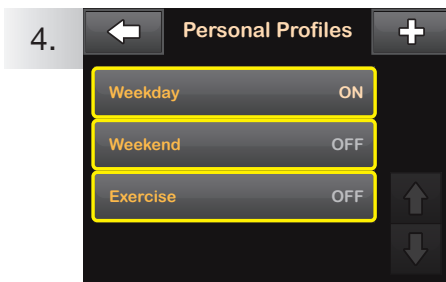


4. Presione el nombre del Perfil personal para verlo o editarlo.

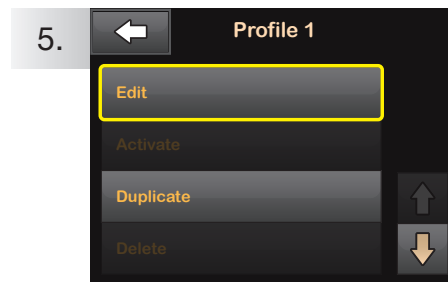

5. Presione **Edit** (Editar) para editar o ver la configuración.

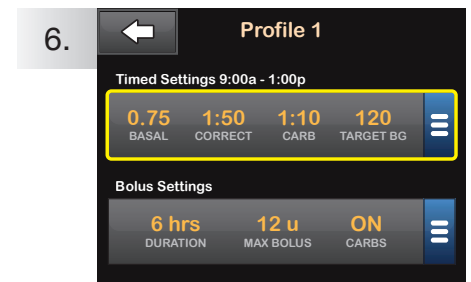

6. Presione su configuración actual para ver la lista completa de parámetros de configuración programados de todo el día.

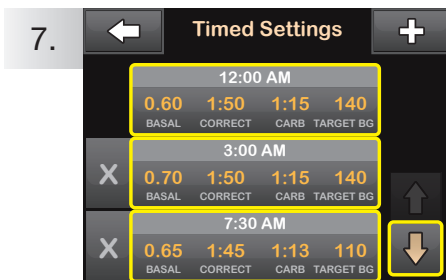

7. Presione el segmento de hora que el usuario desea editar.

Si no se ven todos los segmentos, presione **Down Arrow** (flecha hacia abajo).



8. Presione **Basal**, **Correction Factor** (Factor de corrección), **Carb Ratio** (Ratio de carbohid.) u **Target BG** (Objetivo de glucemia) para realizar cambios; luego presione **Down Arrow**.

Una vez que termine, presione **Up Arrow**.



9. Confirme la configuración. Los cambios recientes se muestran en anaranjado.

Presione **Up Arrow** para continuar.



TANDEM
DIABETES CARE

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com

t:simulator App
Una demostración virtual gratuita de la bomba

