

t:slim X2

Insulinepomp

MET Control-IQ TECHNOLOGIE

Gebruikershandleiding



GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE T:SLIM X2-INSULINEPOMP MET CONTROL-IQ-TECHNOLOGIE

Softwareversie: Control-IQ (7.8.1)

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u of uw vertrouwde mantelzorger te helpen met de kenmerken en functies van de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ™ technology. Hij bevat belangrijke waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot een correcte bediening en technische informatie om uw veiligheid te waarborgen. Hij bevat verder stapsgewijze instructies om de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie correct te programmeren, beheren en verzorgen.

Er worden periodiek wijzigingen aangebracht in apparatuur, software en procedures; informatie over deze wijzigingen wordt opgenomen in toekomstige versies van deze gebruikershandleiding.

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een opvraagstelsel, verzonden op elektronische, mechanische of andere wijze, ongeacht in welke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandem Diabetes Care.

Neem contact op met uw lokale klantenservice om de gebruikershandleiding aan te vragen die hoort bij uw pomp. De contactgegevens voor uw regio staan vermeld op het achteromslag van deze gebruikershandleiding.

Tandem Diabetes Care, Inc.
12400 High Bluff Drive
San Diego, CA 92130 USA
tandemdiabetes.com

WAARSCHUWINGEN:

Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan zes jaar. Control-IQ-technologie mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die minder dan een totale dagelijkse insulinedosis van 10 eenheden per dag nodig hebben of die minder dan 25 kilo (55 Am. pond) wegen, aangezien dit de vereiste minimumwaarden zijn die nodig zijn om de Control-IQ-technologie veilig te laten werken.

CONTACTINFORMATIE IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR

AUSTRALIË / AUSTRALIA

Australasian Medical & Scientific Ltd
Suite 4.01, Building A
The Park, 5 Talavera Rd,
Macquarie Park, Sydney,
NSW 2113, Australië
1300 851 056
diabetes@amsl.com.au
www.amsldiabetes.com.au

BAHAMA'S / BAHAMAS

Family Medicine Center
Blake Road, P.O. Box N1658
Nassau, Bahama's
(242) 702-9310

BELGIË / BELGIQUE

Air Liquide Medical nv
Erasmuslaan 40
1804 Zemst
+32(0)2 255 96 00
www.makingdiabeteseasier.com/be-nl

BELGIË / BELGIQUE

Air Liquide Medical sa
Erasmuslaan 40
1804 Zemst
+32(0)2 255 96 00
www.makingdiabeteseasier.com/be-fr

DENEMARKEN / DANMARK

Rubin Medical ApS
Postboks 227
0900 København C
+45 70 27 52 20
info_dk@rubinmedical.dk
www.rubinmedical.dk

DUITSLAND / DEUTSCHLAND

VitalAire GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt, Duitsland
0800-1001644
diabetes@vitalaire.de
www.vitalaire.de/kontakt

FINLAND / SUOMI

Rubin Medical Oy
Tiilenlyöjankatu 9b
01720 Vantaa
+358 34 22 11 50
info_fi@rubinmedical.fi
www.rubinmedical.fi

CONTACTINFORMATIE IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR

FRANKRIJK / FRANCE

Dinno Santé
1 Rue Raoul Follereau
77600 Bussy-Saint-Georges
Frankrijk
09 809 890 60
www.dinnosante.fr

IERLAND

Air Liquide Healthcare
Unit 23 North Park
North Road, Dublin 11
Eirecode D11 F791, Ierland
1800124912
makingdiabeteseasier.com/uk

IMPORTEUR EU

Tandem Diabetes Care Europe B.V.
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Nederland
KVK nr. 85766364

ISRAEL

Padagis Israel Agencies
1 Rakefet St.
Shoham, Israel
+972-(0)3-5773800, +972-(0)53-3515989
Tandemservice@padagis.com

ITALIË / ITALIA

Movi SpA
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano MI, Italië
+3902509051
www.diabete.movigroup.com

LUXEMBURG / LUXEMBOURG / LËTZEBUERG

Air Liquide Medical sa
Erasmuslaan 40
1804 Zemst
+32(0)2 255 96 00
vitalaire.belgium@airliquide.com

NEDERLAND

VitalAire Nederland BV
Archimedeslaan 11
8218 ME Lelystad
+31 (0) 88 250 3500
www.makingdiabeteseasier.com/nl

NIEUW-ZEELAND / NEW ZEALAND

NZMS Diabetes
2A Fisher Crescent
Mt Wellington, Auckland 1060
Nieuw-Zeeland
0508 634 103
www.nzmsdiabetes.co.nz

CONTACTINFORMATIE IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR

NOORWEGEN / NORGE

Rubin Medical AS
Hegsbroveien 72, Postboks 147
N-3401 Lier, Noorwegen
+47 480 80 830
post@rubinmedical.no
www.rubinmedical.no

PORTUGAL

VitalAire, SA
Rua Dr. António Loureiro Borges,
nº4 - 3º - Arquiparque - Miraflores
1495-131 Algés
808788877
ptvitalaire-diabetes@airliquide.com
www.vitalaire.pt

REPUBLIEK TSJECHIË

A.IMPORT.CZ spol s r.o.
Petrská 29
Praha, 110 00
Bezplatná linka: 800 100 261
Technická podpora: 773 743 371
tech.podpora@aimport.cz
www.aimport.cz

SAUDI-ARABIË / SAUDI ARABIA

VitalAire Arabia
4063 Prince Fawaz Bin Abdulaziz St
Ar Rabwah, Riyadh 12813, Saudi-Arabië
9200 23202
vitalairesa.contactus@airliquide.com
vitalaire.com.sa

SLOWAKIJE / SLOVAKIA

A.IMPORT.SK spol.s r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Bezplatná linka: 800 22 11 30
info@aimport.sk
www.aimport.sk

SPANJE / ESPAÑA

Air Liquide Heathcare España S.L
Calle Orense, 34. 3a planta,
28020 Madrid. España
Corporativo: 918024515
Atención a paciente: 900103443
www.novalab.es

CONTACTINFORMATIE IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR

VERENIGD KONINKRIJK / UNITED KINGDOM

Air Liquide Healthcare
Alpha House, Wassage Way
Hampton Lovett
Droitwich, WR9 0NX
0800 012 1560
diabetes.info@airliquide.com
www.makingdiabeteseasier.com/uk/products-and-support

ZUID-AFRIKA

Continuous Oxygen Supplies Proprietary Limited T/A VitalAire
4-6 Skeen Boulevard
Bedfordview, 2008
Zuid-Afrika
086 133 9266
za.vitalaire.com

ZWEDEN / SVERIGE

Rubin Medical AB
Per Albin Hanssons väg 41
SE-205 12 Malmö
Zweden
+46 40-15 54 80
info@rubinmedical.se
www.rubinmedical.se

ZWITSERLAND / SCHWEIZ (IMPORTEUR)

VitalAire Schweiz AG
Waldeggstrasse 38, 3097
Liebefeld Zwitserland
0800 480 000
www.vitalaire.ch/diabetes/

INHOUD

Deel 1: Voordat u begint

Hoofdstuk 1 • Inleiding

1.1	Conventies in deze handleiding	20
1.2	Verklaring van symbolen	22
1.3	Systeembeschrijving	24
1.4	Over deze gebruikershandleiding	25
1.5	Indicaties voor gebruik	25
1.6	Contra-indicaties	26
1.7	Bruikbare insulines	26
1.8	Compatibele CGM's	26
1.9	Belangrijke gebruikersinformatie	27
1.10	Belangrijke informatie voor pediatrisch gebruik	27
1.11	Noodpakket	28

Deel 2: Functies van de t:slim X2-insulinepomp

Hoofdstuk 2 • Belangrijke veiligheidsinformatie

2.1	Waarschuwingen t:slim X2-insulinepomp	32
2.2	Veiligheid bij beeldvorming met magnetische resonantie (MRI)	35
2.3	Radiologie en medische procedures en uw t:slim X2-pomp	35
2.4	Waarschuwingen van de Tandem t:slim-app	36
2.5	Voorzorgsmaatregelen t:slim X2-insulinepomp	37
2.6	Voorzorgsmaatregelen in verband met de Tandem t:slim-app	40
2.7	Preventieve cyberbeveiligingsmaatregelen van Tandem	41

2.8	Mogelijke voordelen van het gebruik van de pomp	42
2.9	Mogelijke risico's van het gebruik van de pomp	43
2.10	Samenwerken met uw zorgverlener	43
2.11	Verificatie van een goede functionaliteit	44

Hoofdstuk 3 • Vertrouwd raken met uw t:slim X2-insulinepomp

3.1	Inhoud van het pakket met de t:slim X2-pomp	46
3.2	Pompterminologie	46
3.3	Verklaring van de pictogrammen op de t:slim X2-insulinepomp	49
3.4	Verklaring van de kleuren op de pomp	51
3.5	Achterkant van de pomp	52
3.6	Vergrendelingsscherm	54
3.7	Startscherm	56
3.8	Scherm Actuele status	58
3.9	Bolusscherm	60
3.10	Scherm Opties	62
3.11	Scherm Mijn pomp	64
3.12	Scherm Apparaatinstellingen	66
3.13	Scherm Numeriek toetsenbord	68
3.14	Scherm Lettertoetsenbord	70

Hoofdstuk 4 • Vertrouwd raken met uw Tandem t:slim-app

4.1	Overzicht	74
4.2	De Tandem t:slim-app installeren	75
4.3	Verbinding maken met een smartphone	76
4.4	Mobiele meldingen instellen	79
4.5	Beveiliging mobiele verbinding	80
4.6	Pompverbinding verbroken	80
4.7	De Tandem t:slim-app herstarten	82
4.8	Dashboardscherm Tandem t:slim-app	83

4.9	Scherf Bolus van de Tandem t:slim-app	86
4.10	Scherf Meldingen van de Tandem t:slim-app	88
4.11	Scherf Instellingen van de Tandem t:slim-app	90
4.12	Instellingen van de Tandem t:slim-app – scherm App	92
4.13	Instellingen van de Tandem t:slim-app – scherm Help	94

Hoofdstuk 5 • Aan de slag

5.1	De t:slim X2-pomp opladen	98
5.2	Het aanzetten van de pomp	100
5.3	Gebruik van het aanraakscherf	100
5.4	Het t:slim X2-pompscherf inschakelen	100
5.5	Uw taal selecteren	100
5.6	Het pompscherf uitschakelen	101
5.7	De pomp uitschakelen	101
5.8	Het t:slim X2-pompscherf ontgrendelen	101
5.9	Tijd bewerken	101
5.10	Datum bewerken	102
5.11	Basale grens	102
5.12	Weergave-instellingen	103
5.13	Geluidsvolume	103
5.14	Beveiligingspin in- of uitschakelen	104
5.15	Mobiele verbinding	105

Hoofdstuk 6 • Instellingen insulinetoeoiening

6.1	Overzicht persoonlijke profielen	108
6.2	Een nieuw profiel aanmaken	110
6.3	Een nieuw persoonlijk profiel programmeren	111
6.4	Een bestaand profiel bewerken of raadplegen	113
6.5	Een bestaand profiel kopiëren	114
6.6	Een bestaand profiel activeren	114

6.7	Naam van een bestaand profiel wijzigen	114
6.8	Een bestaand profiel verwijderen	115
6.9	Een tijdelijke basaalsnelheid starten	115
6.10	Een tijdelijke snelheid stoppen	116

Hoofdstuk 7 • Verzorging infuusplaats en laden reservoir

7.1	Selectie en verzorging van een infuusplaats	118
7.2	Gebruiksaanwijzing voor reservoir	120
7.3	Vullen en laden van een t:slim X2-reservoir	120
7.4	Een reservoir laden	124
7.5	Slang vullen	125
7.6	Slang vullen zonder het reservoir te vervangen	126
7.7	Canule vullen	127
7.8	Instelling Herinnering locatie	128

Hoofdstuk 8 • Handmatige bolus

8.1	Overzicht handmatige bolus	130
8.2	Een bolus starten	131
8.3	Berekening van een correctiebolus	131
8.4	Bolus negeren	135
8.5	Voedingsbolus met eenheden	135
8.6	Voedingsbolus met grammen	135
8.7	Verlengde bolus	136
8.8	Max. bolus	138
8.9	Snelle bolus	138
8.10	Een bolus annuleren of afbreken met de pomp	140
8.11	Bolustoediening met behulp van de Tandem t:slim-app	141
8.12	Correctiebolus met de Tandem t:slim-app	142
8.13	Bolus overschrijven met behulp van de Tandem t:slim-app	144
8.14	Voedingsbolus met de Tandem t:slim-app	145

8.15	Een bolus annuleren of afbreken met de Tandem t:slim-app	145
8.16	Pompverbinding verbroken	146

Hoofdstuk 9 • Insuline starten, stoppen of hervatten

9.1	Toediening van insuline starten	150
9.2	Toediening van insuline stoppen	150
9.3	Insulinetoediening hervatten	151
9.4	Loskoppelen bij gebruik van Control-IQ-technologie	151

Hoofdstuk 10 • Informatie en geschiedenis voor de t:slim X2-insulinepomp

10.1	t:slim X2 Pompinfo	154
10.2	t:slim X2 Pompgeschiedenis	154
10.3	Info over de Tandem t:slim-app	155

Hoofdstuk 11 • Herinneringen op de t:slim X2-insulinepomp

11.1	Herinnering lage BG	158
11.2	Herinnering hoge BG	159
11.3	Herinnering BG na bolus	159
11.4	Herinnering gemiste-maaltijdbolus	160
11.5	Herinnering locatie	160

Hoofdstuk 12 • Door gebruiker instelbare waarschuwingen en alarmen

12.1	Waarschuwing bij lage insuline	162
12.2	Alarm Autom. uitschakelen	162
12.3	Waarsch. Max. basaal	163

Hoofdstuk 13 • Waarschuwingen van de t:slim X2-insulinepomp

13.1	Waarschuwing bij lage insuline	167
13.2	Waarschuwingen zwakke voeding	168
13.3	Waarschuwing bolus onvolledig	170

13.4	Waarschuwing tijdelijke snelheid niet voltooid	172
13.5	Waarschuwingen onvoltooide laadprocedure	173
13.6	Waarschuwing instelling niet voltooid	176
13.7	Waarschuwing basaalsnelheid vereist	177
13.8	Waarschuwing max. bolus per uur	178
13.9	Waarschuwingen Max. bolus	179
13.10	Waarsch. Max. basaal	181
13.11	Waarschuwingen Min. basaal	182
13.12	Waarschuwing aansluitingsfout	184
13.13	Time-out koppelingscode	185
13.14	Waarschuwing energiebron	186
13.15	Waarschuwing datafout	187
13.16	Waarschuwing Pompverbinding verbroken - Tandem t:slim-app	188

Hoofdstuk 14 • Alarmen van de t:slim X2-insulinepomp

14.1	Alarm hervatten pomp	191
14.2	Alarm zwakke voeding	192
14.3	Alarm leeg reservoir	193
14.4	Alarm reservoirfout	194
14.5	Alarm verwijdering reservoir	195
14.6	Temperatuuralarm	196
14.7	Verstoppingalarmen	197
14.8	Knopalarm Scherm aan/Snelle bolus	199
14.9	Alarm hoogte	200
14.10	Alarm resetten	201

Hoofdstuk 15 • Storing van de t:slim X2-insulinepomp

15.1	Storing	204
------	---------	-----

Hoofdstuk 16 • Onderhoud van uw pomp

16.1	Overzicht	208
------	-----------	-----

Hoofdstuk 17 • Problemen in verband met levensstijl en reizen

17.1	Overzicht	210
------	-----------	-----

Deel 3: CGM-functies

Hoofdstuk 18 • Belangrijke veiligheidsinformatie bij gebruik van de t:slim X2-insulinepomp met een compatibele CGM

18.1	CGM-waarschuwingen	214
18.2	Voorzorgsmaatregelen voor CGM	214
18.3	Mogelijke voordelen van het gebruik van de t:slim X2-insulinepomp met CGM	215
18.4	Mogelijke risico's van het gebruik van de t:slim X2-insulinepomp met CGM	215

Hoofdstuk 19 • Vertrouwd raken met uw CGM-systeem

19.1	CGM-terminologie	218
19.2	Uitleg van CGM-pictogrammen op de pomp	220
19.3	CGM-vergrendelingsschermb	222
19.4	CGM-startscherm	224
19.5	Schermb Dexcom G6	226
19.6	Schermb Dexcom G7	228

Hoofdstuk 20 • Overzicht van CGM

20.1	CGM-systeemoverzicht	232
20.2	Overzicht van aansluitingen op het apparaat	232
20.3	Overzicht ontvanger (t:slim X2-insulinepomp)	233
20.4	Overzicht Dexcom G6-zender	233
20.5	Sensoroverzicht	233

Hoofdstuk 21 • CGM-instellingen

21.1	Over Bluetooth-technologie	236
21.2	De koppeling met de Dexcom-ontvanger verbreken	236
21.3	CGM-volume instellen	236
21.4	CGM-info	239

Hoofdstuk 22 • CGM-waarschuwingen instellen

22.1	Uw waarschuwing bij hoge glucose en de functie Herhalen instellen	242
22.2	Uw waarschuwing bij lage glucose en de functie Herhalen instellen	243
22.3	Snelheidswaarschuwingen	244
22.4	Uw waarschuwing bij stijging instellen	245
22.5	Uw waarschuwing bij daling instellen	245
22.6	Uw waarschuwing buiten bereik instellen	245

Hoofdstuk 23 • Een CGM-sensorsessie starten of stoppen

23.1	Uw sensortype kiezen	248
23.2	Uw Dexcom G6 zender-ID invoeren	248
23.3	De Dexcom G6-sensor starten	249
23.4	Opstartperiode Dexcom G6-sensor	250
23.5	Automatisch uitschakelen Dexcom G6-sensor	252
23.6	Een Dexcom G6-sensorsessie beëindigen vóór automatisch uitschakelen	253
23.7	De Dexcom G6-sensor en -zender verwijderen	253
23.8	De Dexcom G7-sensor starten	253
23.9	Opstartperiode Dexcom G7-sensor	254
23.10	Automatisch uitschakelen Dexcom G7-sensor	255
23.11	Een Dexcom G7-sensorsessie beëindigen vóór automatisch uitschakelen	255
23.12	De Dexcom G7-sensor verwijderen	256

Hoofdstuk 24 • Het kalibreren van uw Dexcom CGM-systeem

24.1	Kalibratieoverzicht	258
------	---------------------	-----

24.2	Opstartkalibratie	259
24.3	Kalibratie van BG-waarde en correctiebolus	260
24.4	Redenen waarom kalibreren nodig kan zijn	260

Hoofdstuk 25 • CGM-gegevens weergeven op uw t:slim X2-insulinepomp

25.1	Overzicht	262
25.2	CGM-trendgrafieken	263
25.3	Pijlen voor veranderingssnelheid	264
25.4	CGM-geschiedenis	267
25.5	Gemiste waarden	267

Hoofdstuk 26 • CGM-waarschuwingen en -fouten

26.1	Waarschuwing opstartkalibratie – Alleen Dexcom G6	271
26.2	Waarschuwing tweede opstartkalibratie – Alleen Dexcom G6	272
26.3	Kalibratiewaarschuwing na 12 uur – Alleen Dexcom G6	273
26.4	Kalibratie niet voltooid	274
26.5	Time-out kalibratie	275
26.6	Waarschuwing kalibratiefout	276
26.7	Waarsch. kalibratie vereist – Alleen Dexcom G6	277
26.8	CGM-waarschuwing hoog	278
26.9	CGM-waarschuwing laag	279
26.10	Vaste CGM-waarschuwing laag	280
26.11	CGM-waarschuwing bij stijging	281
26.12	CGM-waarschuwing snel stijgend	282
26.13	CGM-waarschuwing bij daling	283
26.14	CGM-waarschuwing snel dalend	284
26.15	Onbekende sensorglucosewaarde	285
26.16	Waarschuwing Buiten bereik	286
26.17	Waarschuwing zenderbatterij zwak – Alleen Dexcom G6	287
26.18	Zenderfout – Alleen Dexcom G6	288

26.19	Foutmelding Sensor defect	289
26.20	Waarschuwing incompatibele sensor – Alleen Dexcom G7	290
26.21	CGM niet beschikbaar	291
26.22	CGM-fout – Alleen Dexcom G7	292
26.23	Kan niet koppelen – Alleen Dexcom G7	293
26.24	CGM-systeemfout	294

Hoofdstuk 27 • CGM Problemen oplossen

27.1	Problemen koppeling met CGM oplossen	296
27.2	Kalibratieproblemen oplossen	296
27.3	Probleem Onbekende sensorwaarde oplossen	296
27.4	Probleem Buiten bereik/geen antenne oplossen	297
27.5	Probleem Sensor defect oplossen	298
27.6	Sensoronnauwkeurigheden	298

Deel 4: Functies van Control-IQ-technologie

Hoofdstuk 28 • Belangrijke veiligheidsinformatie in verband met Control-IQ-technologie

28.1	Waarschuwingen in verband met Control-IQ-technologie	302
28.2	Voorzorgsmaatregelen in verband met Control-IQ technology	303

Hoofdstuk 29 • Vertrouwd raken met de Control-IQ-technologie

29.1	Verantwoord gebruik van de Control-IQ-technologie	306
29.2	Verklaring van de pictogrammen van Control-IQ-technologie	307
29.3	Control-IQ-vergrendelingsscherm	308
29.4	Control-IQ-startscherm	310
29.5	Control-IQ-scherm	312

Hoofdstuk 30 • Inleiding tot de Control-IQ-technologie

30.1	Overzicht van Control-IQ-technologie	316
30.2	Hoe Control-IQ-technologie werkt	316
30.3	Control-IQ-technologie en activiteit	325

Hoofdstuk 31 • Configureren en gebruiken van Control-IQ-technologie

31.1	Vereiste instellingen	330
31.2	Gewicht instellen	330
31.3	Het instellen van totale dagelijkse insuline	331
31.4	Het in- en uitschakelen van Control-IQ-technologie	331
31.5	Slaap inplannen	332
31.6	Een slaapschema in- of uitschakelen	333
31.7	Het handmatig starten of stoppen van Slaap	334
31.8	Beweging in- of uitschakelen	335
31.9	Control-IQ-technologie-informatie op uw scherm	336

Hoofdstuk 32 • Waarschuwingen Control-IQ-technologie

32.1	Waarschuwing Buiten bereik – Control-IQ-technologie uitgeschakeld	341
32.2	Waarschuwing Buiten bereik – Control-IQ-technologie ingeschakeld	342
32.3	Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie	343
32.4	Waarschuwing hoog door Control-IQ	344
32.5	Waarschuwing bij maximale insuline	345

Hoofdstuk 33 • Overzicht van klinische studies met Control-IQ-technologie

33.1	Inleiding	348
33.2	Overzicht klinisch onderzoek	348
33.3	Demografie	350
33.4	Interventienaleving	351
33.5	Primaire analyse	354
33.6	Secundaire analyse	357

33.7	Verschillen in insulinetoediening	359
33.8	Nauwkeurigheid van waarschuwingen hoog en laag door Control-IQ-technologie	361
33.9	Aanvullende analyse van het automatisch invullen van de sensorglucosewaarde met CGM	363

Deel 5: Technische specificaties en garantie

Hoofdstuk 34 • Technische specificaties

34.1	Overzicht	368
34.2	Specificaties t:slim X2-pomp	368
34.3	t:slim X2 Opties en instellingen pomp	373
34.4	t:slim X2 Prestatiekenmerken pomp	375
34.5	Elektromagnetische compatibiliteit	380
34.6	Draadloze co-existentie en gegevensbeveiliging	380
34.7	Veiligheid van de Tandem t:slim-app	381
34.8	Elektromagnetische emissies	382
34.9	Elektromagnetische immuniteit	383
34.10	IEC 60601-1-10: Systeem met fysiologisch gesloten regelaars	385
34.11	Kwaliteit van draadloze verbinding	386
34.12	Draadloze technologie	387
34.13	Kennisgeving van de FCC met betrekking tot interferentie	388
34.14	Garantie-informatie	388
34.15	Beleid retourgezonden goederen	388
34.16	Voorvalgegevens t:slim X2-insulinepomp (zwarte doos)	388
34.17	Productenlijst	388

Index

390

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

1 Voordat u begint

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Conventies in deze handleiding

Hieronder volgt een lijst van conventies die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt (zoals termen, pictogrammen, tekstopmaak en andere conventies) met een uitleg ervan.

Opmaakconventies

Conventie	Uitleg
Vetgedrukte tekst	Vetgedrukte tekst in een zin of stap wordt gebruikt voor de naam van een scherm/pictogram of fysieke knop.
Cursieve tekst	Cursieve tekst wordt gebruikt voor de naam van een scherm of menu op de pompsdisplay.
Genummerde items	Genummerde items zijn stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een specifieke taak.
Blauwe tekst	Geeft een verwijzing naar een andere locatie in de gebruikershandleiding of naar een website-link.

Terminologiedefinities

Term	Definitie
Aanraakscherm	Het glazen scherm aan de voorzijde van uw pomp, waarop alle informatie over de programmering, bediening en alarmen/waarschuwingen wordt weergegeven.
Tikken	Een snelle en lichte aanraking van het scherm met uw vinger.
Drukken	Met uw vinger een fysieke knop indrukken (de knop Scherm aan/Snelle bolus is de enige fysieke/hardwareknop op uw pomp).
Indrukken	Een knop ingedrukt houden of een pictogram of menu blijven aanraken totdat de functie is voltooid.
Menu	Een lijst met opties op uw aanraakscherm waarmee u specifieke taken kunt uitvoeren.
Pictogram	Een afbeelding op uw aanraakscherm die een optie of informatie-item aangeeft, of een symbool op de achterzijde van uw pomp of de verpakking daarvan.

Symbooldefinities

Symbool	Definitie
	Wijst op een belangrijke opmerking over het gebruik of de bediening van het systeem.
	Wijst op veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden om licht tot matig letsel te voorkomen.
	Biedt cruciale informatie die tot ernstig letsel of de dood kan leiden als de informatie wordt genegeerd.
	Geeft aan hoe de pomp of de Tandem t:slim™-app reageert op de voorgaande instructie.

1.2 Verklaring van symbolen

Hieronder staan symbolen (met uitleg) die u kunt tegenkomen op uw pomp, uw pompbenodigdheden en/of op de verpakking daarvan. Deze symbolen informeren u over correct en veilig gebruik van de pomp. Sommige van deze symbolen zijn misschien niet relevant in uw regio en worden uitsluitend ter informatie vermeld.

Uitleg van de symbolen op de t:slim X2-insulinepomp

Symbol	Definitie
	Let op
	Raadpleeg de gebruikershandleiding/het instructieboekje
Rx ^{Only}	Mag alleen door of in opdracht van een specialist worden verkocht (Verenigde Staten)
	Catalogusnummer
	Modelnummer
	Batchcode
	IP-classificatie
	Alleen compatibel met U-100-insuline

Symbol	Definitie
	Toegepast onderdeel van type BF (geïsoleerd van de patiënt, niet beschermd tegen defibrillator)
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing
	Niet-ioniserende elektromagnetische straling
	Serienummer
	Fabrikantnummer
	Medisch apparaat
	Onveilig voor magnetische resonantie (MR); uit de buurt houden van apparatuur voor beeldvorming met magnetische resonantie (MRI)
	Conformiteitsmarkering

Uitleg van de symbolen op de t:slim X2-insulinepomp (vervolg)

Symbol	Definitie
	Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Fabrikant
	Productiedatum
	Gelijkspanning
	Gescheiden inzameling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
	Elektrische apparatuur die hoofdzakelijk ontworpen is voor gebruik binnenshuis
	USB-adapter voor stopcontact
	Hulpmiddel voor verwijdering van het reservoir
	USB-kabel
	Gebruikershandleiding
	Pomphoesje

Symbol	Definitie
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland
	Verantwoordelijke persoon in het Verenigd Koninkrijk
	Conformiteitsmarkering VK volgens conformiteitsbeoordeling (UKCA)
	CE-markering
	Importeur (EU MDR)
	Apparatuur van IEC-klasse II
	Vochtigheidsbereik
	Temperatuurbereik
	Droog houden
	Adapter voor stopcontact

1.3 Systeembeschrijving

De t:slim X2™-insulinepomp met Control-IQ-technologie™, aangeduid als de “pomp” of de “t:slim X2-pomp” bestaat uit de t:slim X2-insulinepomp, het ingebedde Control-IQ-algoritme en het t:slim X2-reservoir van 3 ml (300 eenheden). De t:slim X2-pomp moet worden gebruikt met een compatibele infuusset.

De t:slim X2-pomp met Control-IQ-technologie kan worden gebruikt in combinatie met een compatibele sensor voor continue glucosemonitoring (CGM).

Zowel de Dexcom G6 CGM als de Dexcom G7 CGM is compatibel met de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie. De Dexcom G6-zender wordt ook wel een “zender” genoemd. De Dexcom G6-sensor wordt ook wel een “sensor” genoemd. De Dexcom G6-zender en Dexcom G6-sensor samen worden ook wel “compatibele CGM” genoemd. De Dexcom G7-sensor heeft een ingebouwde zender. Dit wordt ook wel “compatibele CGM” genoemd.

De mobiele Tandem t:slim™-app kan ook samen met de pomp worden gebruikt om pompgegevens te bekijken en een beperkt aantal functies van de pomp via uw smartphone aan te sturen. Deze functionaliteit is beperkt tot compatibele smartphone-besturingssystemen en pompsoftwareversies. Het kan zijn dat de mobiele Tandem t:slim-app in uw regio nog niet beschikbaar is.

De Tandem t:slim X2-insulinepomp, de mobiele Tandem t:slim-app en een compatibele CGM worden samen ook wel “het systeem” genoemd.

De pomp dient op twee manieren insuline toe: basaal (continu) en als een bolus. Het reservoir is gevuld met maximaal 300 eenheden U-100-insuline, is bevestigd aan de pomp en wordt na gebruik weggegooid. Het reservoir wordt om de 48–72 uur vervangen.

De geautomatiseerde insulinedoseringsfunctie van Control-IQ is een algoritme ingebed in de software van de t:slim X2-pomp. Met deze functie kan de t:slim X2-pomp de insulinetoevoering automatisch aanpassen op basis van CGM-sensormetingen; de functie is echter geen vervanging voor uw

eigen actieve diabetesbeheer. De Control-IQ-technologie maakt gebruik van de CGM-sensormetingen om een voorspelde bloedglucosewaarde 30 minuten in de toekomst te berekenen. Voor meer informatie over de activering van Control-IQ-technologie: zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

De pomp kan worden gebruikt voor basaal- en bolustoediening van insuline, met of zonder CGM. Als er geen CGM wordt gebruikt, worden de sensorglucosemetingen niet naar het scherm van de pomp gezonden en zult u geen Control-IQ-technologie kunnen gebruiken.

De sensor is een wegwerphulpmiddel, dat onder de huid wordt ingebracht om de glucosespiegel continu te meten. De CGM stuurt elke 5 minuten draadloos de meting naar de pomp. De pomp toont glucosemetingen, een trendgrafiek en pijlen voor de veranderingsrichting en -snelheid.

De zender meet glucose in de interstitiële vloeistof onder de huid en niet in het bloed. De sensormetingen zijn niet identiek aan metingen van een bloedglucosemeter.

Met de Tandem t:slim-app, indien beschikbaar in uw regio, kunt u een smartphone met de pomp verbinden met behulp van draadloze *Bluetooth*®-technologie om uw pompgegevens weer te geven en enkele pompfuncties via de smartphone aan te sturen en pompmeldingen te bekijken. De Tandem t:slim-app kan pomp- en therapiegegevens van de pomp naar de cloud verzenden zolang uw smartphone is verbonden met het internet. Download de Tandem t:slim-app via Google Play™ of de App Store® en ga naar support.tandemdiabetes.com voor installatie-instructies.

OPMERKING

Ga voor een actuele lijst met ondersteunde smartphones naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna op **Apphandleiding**.

1.4 Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding behandelt belangrijke informatie over het gebruik van uw pomp. Hij biedt stapsgewijze

instructies om u te helpen bij het correct programmeren, beheeren en onderhouden van de pomp. Verder bevat het belangrijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een correcte bediening en technische informatie om uw veiligheid te waarborgen.

De gebruikershandleiding is onderverdeeld in delen. Deel 1 bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u de pomp gaat gebruiken. Deel 2 bevat instructies voor het gebruik van de t:slim X2 pomp en het gebruik van de Tandem t:slim-app met de pomp. Deel 3 bevat instructies voor gebruik van CGM met de pomp. Deel 4 bevat instructies voor gebruik van Control-IQ-technologie op de pomp. Deel 5 bevat informatie over de technische specificaties van de pomp.

De schermen van de pomp en de Tandem t:slim-app die in deze gebruikershandleiding worden getoond, laten zien hoe de functies moeten worden gebruikt en dienen uitsluitend als voorbeeld. Ze mogen niet worden opgevat als suggesties voor uw individuele behoeften.

Aanvullende productinformatie kan worden verstrekt door de klantenservice in uw regio.

1.5 Indicaties voor gebruik

De t:slim X2-insulinepomp is bedoeld voor de subcutane toediening van insuline, met vaste en variabele snelheden, voor de behandeling van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben. De pomp kan betrouwbaar en veilig communiceren met compatibele, digitaal aangesloten apparaten.

Control-IQ-technologie is bedoeld voor gebruik met een compatibele continue glucosemonitor (CGM) en de t:slim X2-insulinepomp om de toediening van basale insuline automatisch te verhogen, verlagen en op te schorten op basis van CGM-metingen en voorspelde bloedglucosewaarden. Het kan ook correctiebolussen toedienen wanneer wordt voorspeld dat de bloedglucosewaarde een vooraf gedefinieerde drempel overschrijdt.

De pomp is geïndiceerd voor gebruik bij personen van zes jaar en ouder die een totale dagelijkse insulinedosis van

minimaal 10 eenheden nodig hebben en minimaal 25 kilo wegen.

De pomp is geïndiceerd voor gebruik bij een en dezelfde patiënt.

De Tandem t:slim-app is een accessoire dat is bedoeld voor gebruik als gekoppeld software-apparaat dat op betrouwbare en veilige wijze kan communiceren met compatibele insulinepompen, met inbegrip van het ontvangen en weergeven van pompinformatie en het verzenden van opdrachten voor de insulinetoediening naar een aangesloten en compatibele t:slim X2-insulinepomp van een gebruiker.

1.6 Contra-indicaties

De t:slim X2-pomp, -zender en -sensor moeten worden verwijderd vóór beeldvorming met magnetische resonantie (MRI), computertomografie (CT) of diathermiebehandeling. Blootstelling aan MRI, CT of een diathermiebehandeling kan de componenten beschadigen.

Gebruik GEEN Control-IQ-technologie als u hydroxyurea gebruikt, een medicijn dat wordt gebruikt voor de

behandeling van ziekten zoals kanker en sikkelcelanemie. Uw Dexcom CGM-metingen kunnen foutievelijk verhoogd zijn en dit kan resulteren in overmatige toediening van insuline, wat kan leiden tot ernstige hypoglykemie.

1.7 Bruikbare insulines

De t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie is ontworpen voor gebruik met snelwerkende analogen van insuline die zijn getest en veilig zijn bevonden voor gebruik in de pomp:

- NovoLog/NovoRapid 100 eenheden/ml insuline
- Humalog 100 eenheden/ml insuline
- Lyumjev U-100-insuline (alleen Europese Unie, Israël, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk)
- Admelog/Insuline lispro Sanofi U-100-insuline (alleen Finland, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk)
- Trurapi/Insuline aspart Sanofi U-100-insuline (alleen Finland, Duitsland,

Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk)

NovoLog/NovoRapid en Trurapi/Insuline aspart Sanofi zijn compatibel met het systeem voor gebruik tot maximaal 72 uur (3 dagen). Humalog, Admelog/Insuline lispro Sanofi en Lyumjev zijn compatibel met het systeem voor gebruik tot maximaal 48 uur (2 dagen).

Neem contact op met uw zorgverlener als u vragen hebt over het gebruik van andere insuline. Raadpleeg vóór gebruik altijd uw zorgverlener en raadpleeg het etiket van de insuline.

1.8 Compatibele CGM's

Compatibele CGM's zijn onder meer:

- Dexcom G6 CGM
- Dexcom G7 CGM

Ga voor informatie over de productspecificaties en prestatiekenmerken van de Dexcom CGM naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

Alle CGM-componenten worden afzonderlijk door Dexcom of lokale distributeurs van Dexcom verkocht en geleverd.

OPMERKING

Dexcom CGM's kunnen momenteel slechts met één medisch hulpmiddel tegelijk worden gekoppeld (de t:slim X2-pomp of de Dexcom-ontvanger), maar u kunt de Dexcom G6 CGM-app of de Dexcom G7-app en uw t:slim X2-pomp wel nog steeds tegelijkertijd gebruiken.

OPMERKING

De instelling voor mobiele verbinding op uw pomp heeft geen betrekking op de Bluetooth-verbinding tussen uw CGM en de pomp. Raadpleeg voor het aansluiten van een CGM op uw pomp [Deel 21.1 Over Bluetooth-technologie](#). Raadpleeg [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor het aansluiten van uw pomp op de Tandem t:slim-app.

OPMERKING

De productinstructies voor beide Dexcom CGM-systemen bevatten belangrijke informatie over het gebruik van Dexcom CGM (waaronder sensorglucosemetingen, trendgrafiek, trendpijl, alarm/waarschuwingen) om behandelingsbeslissingen te nemen. Zorg dat

u deze informatie hebt gelezen en deze met uw zorgverlener bespreekt: deze kan u helpen bij het correct gebruik van de Dexcom CGM-informatie voor het nemen van behandelingsbeslissingen.

1.9 Belangrijke gebruikersinformatie

Lees alle instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de pomp gebruikt.

Als u de pomp niet kunt gebruiken volgens de instructies in deze gebruikershandleiding en andere toepasselijke gebruikershandleidingen, kunt u uw gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Als CGM nieuw is voor u, blijf uw bloedglucose (BG)-meter dan gebruiken tot u weet hoe u CGM moet gebruiken.

Of u nu gebruik maakt van een Dexcom CGM of niet, het is nog steeds zeer belangrijk dat u alle instructies in deze gebruikershandleiding doorneemt.

Lees vooral de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen worden aangegeven door een - of een -symbool.

Hebt u nog vragen nadat u deze gebruikershandleiding hebt gelezen? Dan kunt u contact opnemen met de technische klantondersteuning in uw regio.

Meld ernstige incidenten die zich voordoen met betrekking tot de producten van Tandem Diabetes Care aan VitalAire Nederland. Meld ze in Europa ook aan de competente autoriteit van de lidstaat waarin u woont.

1.10 Belangrijke informatie voor pediatrisch gebruik

De volgende aanbevelingen zijn bedoeld om jongere gebruikers en hun verzorgers te helpen bij het programmeren, beheren en onderhouden van de pomp.

Het is aan de zorgverlener of verzorger om te bepalen of de gebruiker geschikt is voor een behandeling met dit hulpmiddel en de Tandem t:slim-app.

Jonge kinderen kunnen per ongeluk op de pomp of de Tandem t:slim-app drukken of tikken, wat kan leiden tot onbedoelde toediening van insuline.

Wij adviseren om de functies Snelle bolus en Beveiligingspin van de pomp door te nemen en te bepalen hoe deze het beste in uw verzorgingsplan kunnen worden opgenomen. Deze functies staan beschreven in [Deel 8.9 Snelle bolus](#) en [Deel 5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen](#).

Onbedoeld loskomen van de infuusplaats kan bij kinderen vaker voorkomen. Overweeg daarom om de infuusplaats en slang vast te maken.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt door mensen die minder dan 10 eenheden insuline per dag gebruiken of minder dan 25 kilogram (55 Am. pond) wegen. Dit is de minimale input die nodig is om de Control-IQ-technologie te laten starten en veilig te laten werken.

⚠ WAARSCHUWING

De t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.

⚠ WAARSCHUWING

Laat **NIET** toe dat kleine kinderen (zowel pompgebruikers als niet-gebruikers) kleine onderdelen inslikken, zoals de rubberen USB-poortafdekking of onderdelen van het reservoir. Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar opleveren. Wanneer deze kleine onderdelen worden ingeslikt, kunnen ze inwendig letsel of infectie veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

De pomp bevat onderdelen (zoals de USB-kabel en de slang van de infuusset) die een risico van verwurging of verstikking kunnen opleveren. Gebruik altijd de juiste lengte infuussetslang en leg de kabels en slang zodanig dat het risico van verwurging wordt geminimaliseerd. **ZORG** dat deze onderdelen op een veilige plaats worden bewaard wanneer ze niet worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Bij patiënten die hun ziekte niet zelf behandelen, moet de functie Beveiligingspin **ALTIJD** aan zijn wanneer de pomp niet wordt gebruikt door een zorgverlener. De functie Beveiligingspin is bedoeld om te voorkomen dat het scherm per

ongeluk wordt aangetikt of knoppen worden ingedrukt waardoor insuline wordt toegediend of pompinstellingen worden gewijzigd. Zulke veranderingen kunnen resulteren in voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG). Zie [Deel 5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen](#) voor details over het inschakelen van de functie voor beveiligingspin.

⚠ WAARSCHUWING

Bij patiënten voor wie de insulinetoediening wordt beheerd door een verzorger, moet de functie Snelle bolus **ALTIJD** worden uitgeschakeld om onbedoelde toediening van een bolus te voorkomen. Als de Beveiligingspin is ingeschakeld, is de functie Snelle bolus automatisch uitgeschakeld. Per ongeluk op het scherm tikken, op knoppen drukken of manipuleren van de insulinepomp kan leiden tot te veel of te weinig toegediende insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG). Zie [Deel 5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen](#) voor informatie over het uitschakelen van de beveiligingspinfunctie.

1.11 Noodpakket

U moet altijd een geschikt noodpakket bij u hebben. Dit pakket moet in ieder geval een insulinespuit en flacon

insuline bevatten, of een voorgevulde insulinepen als back-up voor noodsituaties. Overleg met uw zorgverlener welke artikelen dit pakket moet bevatten.

Enkele voorbeelden van wat u moet opnemen in uw dagelijkse noodpakket zijn:

- Benodigdheden voor het testen van BG: meter, strips, controleoplossing, lancetten, batterijen voor de meter
- Snelwerkende koolhydraten om lage BG te behandelen
- Extra snack voor een langer effect dan snelwerkende koolhydraten
- Noodpakket met glucagon
- Snelwerkende insuline en spuiten of een voorgevulde insulinepen en pennaalden
- Infusussets (minimaal 2 stuks)
- Reservoirs voor de insulinepomp (minimaal 2 stuks)
- Producten om de infuuslocatie voor te bereiden (antiseptische doekjes, huidkleefmiddel)
- Diabetesidentificatiekaart of -sieraad

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 2

Belangrijke veiligheidsinformatie

Hieronder volgt belangrijke veiligheidsinformatie over uw t:slim X2™-pomp en de bijbehorende componenten. De informatie in dit hoofdstuk omvat niet alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in verband met de pomp. Besteed aandacht aan de andere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding, omdat ze verband houden met speciale omstandigheden, functies of gebruikers.

2.1 Waarschuwingen t:slim X2-insulinepomp

▲ WAARSCHUWING

Start het gebruik van de pomp of de Tandem t:slim™-app **NIET** voordat u de gebruikershandleiding hebt gelezen. Het niet volgen van de instructies in de gebruikershandleiding kan leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG). Bel de klantenservice in uw regio of raadpleeg uw zorgverlener als u vragen hebt of meer over het gebruik van uw pomp wilt weten.

▲ WAARSCHUWING

Start het gebruik van de pomp **NIET** voordat u in het gebruik ervan bent voorgelicht door een gediplomeerd opleider of via het trainingsmateriaal online, als u uw pomp bijwerkt. Overleg met uw zorgverlener over uw individuele opleidingsbehoeften voor de pomp. Het niet afronden van de noodzakelijke opleiding voor de pomp kan ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **ALLEEN** U-100-insulineanaloga die zijn getest en compatibel zijn bevonden voor gebruik in combinatie met de in [Deel 1.7 Bruikbare insulines](#) genoemde pomp. Gebruik van insuline met een lagere of hogere concentratie kan leiden tot toediening van te veel of te weinig insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG).

▲ WAARSCHUWING

Vul het reservoir van uw pomp **NIET** met andere medicijnen. De pomp is uitsluitend getest op continue subcutane infusie van insuline (CSII) met de U-100-insulineanaloga die worden vermeld in [Deel 1.7 Bruikbare insulines](#). De pomp kan beschadigd raken als andere geneesmiddelen worden gebruikt en een infuus kan de gezondheid schaden.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** handmatige injecties of geïnhaleerde insuline terwijl u de pomp gebruikt. Door het gebruik van insuline die niet door de pomp wordt toegediend, kan het systeem te veel insuline toedienen, wat kan leiden tot ernstige voorvallen van hypoglycemie (lage BG).

▲ WAARSCHUWING

De pomp is niet bedoeld voor personen die niet in staat of niet bereid zijn om:

- » de pomp, CGM en alle andere systeemcomponenten te gebruiken in overeenstemming met hun respectievelijke gebruiksinstructies;
- » BG-waarden te testen zoals aanbevolen door een zorgverlener
- » voldoende vaardigheden te tonen bij het tellen van koolhydraten
- » vaardigheden voor zelfbehandeling van diabetes op peil te houden
- » regelmatig afspraken te maken met hun zorgverlener(s).

Ook het gezichtsvermogen en/of gehoor van de gebruiker moeten goed genoeg zijn om alle functies van de pomp te herkennen, inclusief waarschuwingen, alarmen en herinneringen.

▲ WAARSCHUWING

Start de pomp **NIET** voordat u met uw zorgverlener hebt besproken welke functies het meest geschikt zijn voor u. Alleen uw zorgverlener kan uw basaalsnelheid/-snelheden, koolhydratenverhouding(en), correctiefactor(en), doel-BG en duur van de insulinerwerking bepalen en u helpen met het aanpassen daarvan. Bovendien kan alleen uw zorgverlener bepalen wat uw CGM-instellingen horen te zijn en hoe u de trendgegevens van uw sensor moet gebruiken bij de behandeling van uw diabetes. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG).

▲ WAARSCHUWING

Zorg dat u er **ALTIJD** op bent voorbereid om insuline te injecteren via een andere methode, voor het geval dat de toediening door welke oorzaak dan ook wordt onderbroken. Uw pomp is ontworpen voor een betrouwbare toediening van insuline, maar omdat hij alleen snelwerkende insuline gebruikt, krijgt u geen langwerkende insuline in uw lichaam. Als u geen alternatieve methode voor insulinetoediening achter de hand houdt, loopt u het risico van zeer hoge BG of diabetische ketoacidose (DKA).

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **UITSLUITEND** reservoirs en infuussets met passende connectors en volg de instructies voor gebruik. Als u dit niet doet, kan dit een te hoge of te lage toediening van insuline veroorzaken, met hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) tot gevolg.

▲ WAARSCHUWING

Plaats uw infuusset **NIET** op littekens, knobbels, moedervlekken, zwangerschapsstriemen of tatoeages. Als u uw infuusset op deze plaatsen aanbrengt, kan dat leiden tot zwelling, irritatie of infectie. Dit kan de absorptie van insuline aantasten en hoge of lage BG veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING

Volg **ALTIJD** nauwkeurig de gebruiksaanwijzing van de infuusset voor correcte plaatsing en verzorging van de infusieplaats, omdat er anders te veel of te weinig insuline kan worden toegediend, of een infectie kan optreden.

▲ WAARSCHUWING

Vul uw slang **NOOIT** wanneer uw infusieset is verbonden met uw lichaam. Zorg altijd dat de infusieset is losgekoppeld van uw lichaam voordat u het reservoir vervangt of de slang vult. Als u uw infusieset niet losmaakt van uw lichaam voordat u het reservoir vervangt of de slang vult, kan er teveel insuline worden toegediend. Dat kan resulteren in een hypoglykemie (lage BG).

▲ WAARSCHUWING

NOOIT reservoirs hergebruiken of reservoirs gebruiken die niet zijn gemaakt door Tandem Diabetes Care. Het gebruik van reservoirs die niet zijn geproduceerd door Tandem Diabetes Care of hergebruik van reservoirs kan leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG).

▲ WAARSCHUWING

Zorg er **ALTIJD** voor dat de slang van het reservoir en de infuusslang goed zijn aangesloten. Door een losse aansluiting kan insuline lekken, waardoor er te weinig insuline wordt toegediend. Maak in het geval van een losse aansluiting de infuusset eerst los van uw lichaam voordat u de aansluiting vastdraait. Dat kan een voorval van hyperglycemie (hoge BG) veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING

De slangconnector tussen de reservoirslang en de infuussetslang **NIET** ontkoppelen. Maak in het geval van een losse aansluiting de infuusset eerst los van uw lichaam voordat u de aansluiting vastdraait. Als u de infuusset niet eerst losmaakt, kan dit een te hoge toediening van insuline tot gevolg hebben. Dat kan hyperglycemie (lage BG) veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING

Verwijder **GEEN** insuline uit een gevuld reservoir en voeg er **GEEN** insuline aan toe nadat het reservoir in de pomp is geplaatst. Dit heeft een onnauwkeurige weergave van het insulineniveau op het **startscherm** tot gevolg en de insuline kan opraken voordat de pomp een leeg reservoir detecteert. Dit kan zeer hoge BG of diabetische ketoacidose (DKA) veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING

Dien **GEEN** bolus toe voordat u de berekende bolushoeveelheid hebt gecontroleerd. Als u te veel of te weinig insuline toedient, kan dat resulteren in voorvallen van hypoglykemie (lage BG) of hyperglykemie (hoge BG). U kunt de eenheden insuline altijd hoger of lager instellen voordat u de bolus toedient.

▲ WAARSCHUWING

Het toedienen van grote bolussen of het achter elkaar toedienen van meerdere bolussen kan voorvallen van hypoglykemie (lage BG) veroorzaken. Let op de hoeveelheid actieve insuline (AI) en de door de boluscalculator aanbevolen dosis voordat u één grote of meerdere bolussen toedient.

▲ WAARSCHUWING

Als u na het starten van een bolus geen daling van de bloedglucosespiegel ziet, is het

raadzaam om uw infuusset te controleren op verstopping, luchtbellens, of op lekkage of losraken van de canule. Als de toestand aanhoudt, bel dan de klantenservice in uw regio of zoek zo nodig medische hulp.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** de USB-kabel die bij uw t:slim X2-insulinepomp is geleverd om het risico op brand of brandwonden te minimaliseren.

▲ WAARSCHUWING

Laat **NIET** toe dat kleine kinderen (zowel pompgebruikers als niet-gebruikers) kleine onderdelen inslikken, zoals de rubberen USB-poortafdekking of onderdelen van het reservoir. Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar opleveren. Wanneer deze kleine onderdelen worden ingeslikt, kunnen ze inwendig letsel of infectie veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING

De pomp bevat onderdelen (zoals de USB-kabel en de slang van de infuusset) die een risico van verwurging of verstikking kunnen opleveren. Gebruik **ALTIJD** de juiste lengte infuussetslang en leg de kabels en slang zodanig dat het risico van verwurging wordt geminimaliseerd. **ZORG** dat deze onderdelen op een veilige plaats worden bewaard wanneer ze niet worden gebruikt.

▲ WAARSCHUWING

Bij patiënten die hun ziekte niet zelf behandelen, moet de functie Beveiligingspin **ALTIJD** aan zijn wanneer de pomp niet wordt gebruikt door een zorgverlener. De functie Beveiligingspin is bedoeld om te voorkomen dat het scherm per ongeluk wordt aangetikt of knoppen worden ingedrukt waardoor insuline wordt toegediend of pompinstellingen worden gewijzigd. Zulke wijzigingen zouden kunnen leiden tot hypo- of hyperglykemische episodes.

▲ WAARSCHUWING

Bij patiënten voor wie de insulinetoediening wordt beheerd door een verzorger, moet de functie Snelle bolus **ALTIJD** worden uitgeschakeld om onbedoelde toediening van een bolus te voorkomen. Als de Beveiligingspin is ingeschakeld, is de functie Snelle bolus automatisch uitgeschakeld. Per ongeluk op het scherm tikken, op knoppen drukken of manipuleren van de insulinepomp kan leiden tot te veel of te weinig toegediende insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG).

▲ WAARSCHUWING

Het gebruik van andere accessoires, kabels, adapters en laders dan gespecificeerd of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur kan leiden tot verhoogde elektromagnetische

emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur, wat kan leiden tot een onjuiste werking.

▲ WAARSCHUWING

Draagbare RF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur als antennekabels en externe antennes) mag niet worden gebruikt binnen een afstand van 30,5 cm (12 inch) van enig onderdeel van de t:slim X2-pomp; dit geldt ook voor kabels gespecificeerd door de fabrikant. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van deze apparatuur.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur dient vermeden te worden, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal werken.

2.2 Veiligheid bij beeldvorming met magnetische resonantie (MRI)

▲ WAARSCHUWING

De pomp is niet veilig voor beeldvorming met magnetische resonantie (MRI). U moet uw pomp verwijderen en buiten de behandelkamer laten.

2.3 Radiologie en medische procedures en uw t:slim X2-pomp

Lees de instructies van de fabrikant van uw smartphone voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt tijdens een van de onderstaande radiologische of medische procedures.

▲ WAARSCHUWING

Stel **ALTIJD** uw zorgverlener/de laborant op de hoogte van uw diabetes en uw pomp. Als u het gebruik van de pomp moet stoppen in verband met een medische ingreep, volg dan de instructies van uw zorgverlener voor het inhalen van gemiste insuline wanneer u de pomp weer aansluit. Controleer uw BG voordat u de pomp ontkoppelt en opnieuw wanneer u die aansluit, en behandel hoge BG zoals aanbevolen door uw zorgverlener.

▲ WAARSCHUWING

Stel uw pomp **NIET** bloot aan:

- » röntgenstraling
- » computertomografische (CT) scan
- » magnetische-resonantiebeeldvorming (MRI)
- » positronemissietomogram (PET)-scan
- » andere blootstelling aan straling

▲ WAARSCHUWING

Stel uw pomp **NIET** bloot aan:

- » het inbrengen of herprogrammeren van een pacemaker/automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator (AICD)
- » cardiale katheterisatie
- » een nucleaire stresstest

U moet uw pomp verwijderen en buiten de behandelkamer laten als u een van de bovenstaande medische procedures moet ondergaan.

▲ WAARSCHUWING

Het is niet nodig om het systeem los te koppelen voor een electrocardiogram (ECG) of een colonoscopie. Neem contact op met de klantenservice in uw regio als u vragen hebt.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik de pomp **NIET** als u een aandoening heeft die u naar het oordeel van uw zorgverlener in gevaar zou kunnen brengen. Voorbeelden van personen die de pomp niet mogen gebruiken zijn personen met onbeheersbare schildklier-aandoeningen, nierfalen (m.a.w. dialyse of eGFR <30), hemofilie of andere bloedingsstoornissen, of instabiele cardiovasculaire aandoeningen.

▲ WAARSCHUWING

Er zijn andere procedures waarbij voorzichtigheid geboden is:

- » **Laserchirurgie** – Uw pomp kan gewoonlijk tijdens de procedure worden gedragen. Sommige lasers kunnen echter interferentie veroorzaken en ertoe leiden dat de pomp een alarm afgeeft.
- » **Narcose** – Afhankelijk van de gebruikte apparatuur moet u mogelijk uw pomp verwijderen. Vergeet niet om dit aan uw zorgverlener te vragen.

2.4 Waarschuwingen van de Tandem t:slim-app

▲ WAARSCHUWING

Start **NIET** met het gebruik van de bolusfunctie van de Tandem t:slim-app voordat u de juiste training hebt gehad in het gebruik ervan. Het niet volgen van de instructies in deze gebruikershandleiding en de in-app-hulp voor de bolusfunctie van de Tandem t:slim-app kan leiden tot vertraging van de therapie. Als de informatie die aan u wordt getoond in uw Tandem t:slim-app niet past bij uw tekenen en symptomen, raadpleeg dan **ALTIJD** de t:slim X2-insulinepomp voordat u een behandelbeslissing neemt.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** smartphone die jailbroken of geroot is, of waarbij de Android-ontwikkelaarsmodus ingeschakeld is. Gegevens kunnen kwetsbaar worden als u de mobiele Tandem t:slim-app op een telefoon installeert die jailbroken of geroot is, of werkt met een niet-vrijgegeven of voorlopig vrijgegeven besturingssysteem. Download de Tandem t:slim-app alleen op Google Play™ of uit de App Store. Raadpleeg [Hoofdstuk 4 Vertrouwd raken met uw Tandem t:slim-app](#) voor de installatie van Tandem t:slim-app.

▲ WAARSCHUWING

Telkens wanneer u een bolus aanvraagt, hebt u na het aanvragen 10 seconden de tijd om de bolus te annuleren om te voorkomen dat er insuline wordt toegediend. Zowel op de pomp als in de Tandem t:slim-app is gedurende deze tijd de melding “Bolus wordt aangevraagd” te zien zolang uw pomp en de Tandem t:slim-app verbonden zijn. U kunt de bolus annuleren via pomp of de app, ongeacht de wijze waarop u de bolus hebt aangevraagd.

▲ WAARSCHUWING

Vertrouw **ALTIJD** op uw pomp voor het nemen van therapiebeslissingen, wanneer u een smartphone gebruikt die niet compatibel is met de bolustoedieningsfunctie.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** uw t:slim X2-insulinepomp voor therapiebeslissingen als de Bluetooth-verbinding tussen uw smartphone en de pomp is uitgeschakeld.

▲ WAARSCHUWING

Het gebruik van andere accessoires, kabels, adapters en laders dan gespecificeerd of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur, wat kan leiden tot een onjuiste werking.

▲ WAARSCHUWING

Draagbare RF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur als antennekabels en externe antennes) mag niet worden gebruikt binnen een afstand van 30,5 cm (12 inch) van enig onderdeel van de t:slim X2-pomp; dit geldt ook voor kabels gespecificeerd door de fabrikant. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van deze apparatuur.

2.5 Voorzorgsmaatregelen t:slim X2-insulinepomp

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Probeer **NIET** om uw insulinepomp te openen of deze te repareren. De pomp is een afgedicht apparaat dat alleen mag worden geopend en gerepareerd door Tandem Diabetes Care. Wijzigingen aan het apparaat kunnen leiden tot een veiligheidsrisico. Als de afdichting van uw pomp is verbroken, is de pomp niet meer waterdicht en is de garantie niet meer geldig.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

VERVANG uw infusieset om de 48 uur bij gebruik van Humalog, Admelog/Insuline lispro Sanofi of Lyumjev-insuline en om de 72 uur bij gebruik van NovoLog/NovoRapid of Trurapi/Insuline aspart Sanofi-insuline. Was uw handen met antibacteriële zeep voordat u de infusieset hanteert en maak de inbrenglocatie op uw lichaam goed schoon om infectie te voorkomen. Neem contact op met uw zorgverlener indien u symptomen van infectie waarneemt op uw infuusplaats voor insuline.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Verwijder **ALTIJD** alle luchtballen uit de pomp voordat u begint met de insulinetoeiening. Controleer of er geen luchtballen aanwezig zijn wanneer u insuline in de spuit zuigt, laat de

witte vulpoort op de pomp omhoog wijzen wanneer u de slang vult en zorg ervoor dat de slang tijdens het vullen geen luchtballen bevat. Lucht in het reservoir en de slang neemt ruimte in waar insuline moet zijn, en kan de insulinetoeiening beïnvloeden.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

CONTROLEER uw infuusplaats dagelijks op goede plaatsing en lekkage. **VERVANG** uw infuusset als u lekken opmerkt rond de infuusplaats. Een slechte plaatsing of lekkage rond de infuusplaats kan leiden tot een te lage toediening van insuline.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

CONTROLEER de slang van uw infusieset dagelijks op lekkage, luchtballen of knikken. Lucht in de slang, lekken in de slang of een geknikte slang kan de toediening van insuline belemmeren of geheel stoppen en tot een te lage toediening van insuline leiden.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

CONTROLEER de slangaansluiting tussen uw reservoirslang en infuusslang om er zeker van te zijn dat deze goed is gemaakt en stevig vastzit en of er geen barsten, schilfers of andere beschadigingen zijn. Lekkage rond de slangaansluiting kan leiden tot een te lage toediening van insuline.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Vervang uw infuusset **NIET** voordat u naar bed gaat, want u kunt uw BG dan pas weer 1 tot 2 uur nadat de infuusset is geplaatst testen. Het is belangrijk dat wordt gecontroleerd of de infuusset correct is ingebracht en insuline toedient. Het is ook belangrijk dat snel wordt gereageerd op eventuele problemen met het inbrengen, om ervoor te zorgen dat de toediening van insuline doorgaat.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Controleer voordat u naar bed gaat **ALTIJD** of er voldoende insuline in uw reservoir zit voor de hele nacht. Wanneer u slaapt, is het mogelijk dat u het alarm bij een leeg reservoir niet hoort en u een toediening van basale insuline mist.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

CONTROLEER de persoonlijke instellingen van uw pomp regelmatig om er zeker van te zijn dat ze juist zijn. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Raadpleeg indien nodig uw zorgverlener.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Zorg **ALTIJD** dat de juiste tijd en datum zijn ingesteld op uw insulinepomp. Als de tijd en datum niet goed zijn ingesteld, kan dat een veilige toediening van insuline verhinderen.

Controleer bij het bewerken van de tijd altijd of de AM/PM-instelling juist is, als u de 12-uursklok gebruikt. AM is voor het gebruik van middernacht tot 11:59 uur. PM moet van 12 uur 's middags tot 23:59 uur worden gebruikt.

▲ VOORZORGSMATREGEL

CONTROLEER of het scherm inschakelt, u pieptonen hoort, de pomp voelt trillen en de groene LED ziet knipperen rond de rand van de knop **Scherminaan/Snelle bolus** wanneer u een energiebron aansluit op de USB-poort. Deze functies worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van waarschuwingen, alarmen en andere situaties die uw aandacht vereisen. Staak het gebruik van de pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als deze functies niet werken.

▲ VOORZORGSMATREGEL

CONTROLEER uw pomp regelmatig op alarmtoestanden die kunnen worden weergegeven. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de toediening van insuline en uw aandacht vereisen, zodat u zo snel mogelijk kunt reageren.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Gebruik de trifunctie voor waarschuwingen en alarmen **NIET** terwijl u slaapt, tenzij uw zorgverlener hiervoor toestemming geeft. Door

het volume voor waarschuwingen en alarmen op hoog in te stellen, voorkomt u dat u een waarschuwing of alarm niet opmerkt.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Wanneer u de functie Snelle bolus nog maar net gebruikt, klikt u **ALTIJD** op het scherm om de juiste programmering van de bolushoeveelheid te bevestigen. Door op het scherm te kijken, bent u er zeker van dat u de opdrachten in de vorm van pieptonen/trillingen correct gebruikt voor het programmeren van de beoogde bolushoeveelheid.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Controleer **ALTIJD** of de decimale punt juist is geplaatst wanneer u informatie in uw persoonlijk profiel invoert. Een onjuiste plaatsing van de decimale punt kan ertoe leiden dat u niet de juiste hoeveelheid insuline krijgt toegediend die uw zorgverlener heeft voorgeschreven.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Gebruik uw pomp **NIET** als u vermoedt dat deze is beschadigd door een val op of stoten tegen een hard oppervlak. Controleer of de pomp goed werkt door een energiebron in de USB-poort te steken en te controleren of het scherm inschakelt, u pieptonen hoort, de pomp voelt trillen en een groene LED ziet die knippert rond de rand van de knop **Scherminaan/Snelle bolus**.

Staak het gebruik van de pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als u vermoedt dat de pomp beschadigd zou kunnen zijn.

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERMIJD blootstelling van uw pomp aan temperaturen onder 5 °C (41 °F) of boven 37 °C (99 °F). Insuline kan bij lage temperaturen bevriezen en bij hoge temperaturen degraderen. Insuline die blootgesteld is geweest aan omstandigheden buiten de door de fabrikant aanbevolen waarden, kan de veiligheid en prestaties van de pomp aantasten.

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERMIJD onderdompeling van uw pomp in een vloeistof met een diepte van meer dan 0,91 meter (3 voet) of langer dan 30 minuten (IP27-classificatie). Als uw pomp is blootgesteld aan vloeistof voorbij deze limieten, controleer dan op tekenen van het binnendringen van vloeistof. Staak het gebruik van de pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als u tekenen van het binnendringen van vloeistof ziet.

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERMIJD plaatsen waar ontvlambare anesthetica of explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. De pomp is niet geschikt voor

gebruik op deze plaatsen en er bestaat een explosiegevaar. Verwijder uw pomp voordat u een van deze plaatsen binnengaat.

▲ VOORZORGSMATREGEL

ZORG ervoor dat u binnen de lengte van de USB-kabel blijft wanneer u op de pomp en op een oplaadbron bent aangesloten. Als u verder gaat dan de lengte van de USB-kabel, kan de canule uit de infuusplaats worden getrokken. Om deze reden wordt aanbevolen om de pomp niet op te laden terwijl u slaapt.

▲ VOORZORGSMATREGEL

ONTKOPPEL de infuusset van uw lichaam tijdens ritten op hoge snelheid of met hoge krachten in een attractiepark of kermis. Snelle veranderingen in hoogte of zwaartekracht kunnen van invloed zijn op de toediening van insuline en letsel veroorzaken.

▲ VOORZORGSMATREGEL

ONTKOPPEL de infuusset van uw lichaam voordat u vliegt in een vliegtuig zonder geregleerde cabinedruk of in een vliegtuig dat wordt gebruikt voor kunstvliegen of gevechtssimulaties (met of zonder geregleerde cabinedruk). Snelle veranderingen in hoogte of zwaartekracht kunnen van invloed zijn op de toediening van insuline en letsel veroorzaken.

▲ VOORZORGSMATREGEL

RAADPLEEG uw zorgverlener over veranderingen van levensstijl zoals gewichtstoename of -verlies en het beginnen of stoppen van lichaamsbeweging. Uw insulinebehoefte kan veranderen door wijzigingen in uw levensstijl. Uw basaalnelheid/-snelheden en andere instellingen moeten mogelijk worden aangepast.

▲ VOORZORGSMATREGEL

CONTROLEER uw BG met een BG-meter na een geleidelijk hoogteverschil van maximaal elke 305 meter (1.000 voet), zoals bij skiën of wanneer u door de bergen rijdt. De nauwkeurigheid van de toediening kan variëren tot 15% totdat er 3 eenheden insuline zijn toegediend of totdat de hoogte met meer dan 305 meter (1.000 voet) is veranderd. Veranderingen in de nauwkeurigheid van de toediening kunnen de toediening van insuline beïnvloeden en letsel veroorzaken.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Vraag uw zorgverlener **ALTIJD** of er specifieke richtlijnen zijn wanneer u de pomp om welke reden dan ook moet of wilt losmaken. Afhankelijk van de duur en de reden waarom u ontkoppelt, kan het nodig zijn dat u de gemiste basaalinsuline en/of bolusinsuline

inhaalt. Controleer uw BG voordat u de pomp ontkoppelt en opnieuw wanneer u die aansluit, en behandel hoge BG zoals aanbevolen door uw zorgverlener.

▲ VOORZORGSMATREGEL

ZORG ERVOOR dat uw persoonlijke instellingen voor de insulinetoediening in de pomp zijn geprogrammeerd voordat u de pomp gaat gebruiken als u onder garantie een vervangende pomp hebt ontvangen. Als u uw instellingen voor de toediening van insuline niet invoert, kan dat leiden tot te veel of te weinig toegediende insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglykemie (lage BG) of hypoglykemie (hoge BG). Raadpleeg indien nodig uw zorgverlener.

▲ VOORZORGSMATREGEL

In de nabijheid van mobiele telefoons kan interferentie met de elektronica van uw pomp optreden. Het wordt aangeraden bij het dragen van uw pomp en mobiele telefoon een tussenafstand van minimaal 16,3 cm (6,4 inch) aan te houden.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Voer gebruikte onderdelen zoals reservoirs, spuitjes, naalden, infuussets en CGM-sensoren **ALTIJD** af volgens de plaatselijke regelgeving.

Naalden moeten worden afgevoerd in een geschikte container voor scherpe voorwerpen. Probeer niet de dop terug te plaatsen op een naald. Was uw handen grondig na het hanteren van gebruikte componenten.

▲ VOORZORGSMaatregel

Als u ervoor kiest om een pomphoesje te gebruiken of andere accessoires die niet door Tandem worden geleverd, zorg er dan voor dat u de zes ventilatieopeningen aan de achterkant van de pomp **NIET** afdekt. Het afdekken van de ventilatieopeningen kan de insulinetoediening beïnvloeden.

2.6 Voorzorgsmaatregelen in verband met de Tandem t:slim-app

▲ VOORZORGSMaatregel

Zet **ALTIJD** de zoommodus uit wanneer u de Tandem t:slim-app gebruikt. Als de zoommodus op uw smartphone is ingeschakeld, moet u voor alle therapiebeslissingen vertrouwen op uw pomp.

▲ VOORZORGSMaatregel

Als u een handmatige bolusaanvraag op de pomp start, moet u deze op de pomp voltooien. U kunt geen bolus aanvragen via de Tandem t:slim-app terwijl er een bolusaanvraag actief is op de pomp.

▲ VOORZORGSMaatregel

Pommeldingen kunnen niet worden gewist vanuit uw Tandem t:slim-app. Pompwaarschuwingen, -alarmen en -meldingen kunnen worden bekeken op uw smartphone, maar moeten worden gewist op de t:slim X2-pomp.

▲ VOORZORGSMaatregel

De Tandem t:slim-app ontvangt gegevens van de aangesloten pomp via een beveiligde draadloze Bluetooth-verbinding. Als de Bluetooth-verbinding tussen de pomp en de Tandem t:slim-app verbroken is, geeft de Tandem t:slim-app geen actuele informatie over de insulinepomp weer en kan de app niet worden gebruikt om een bolus aan te vragen. Om de draadloze verbinding tussen de insulinepomp en de Tandem t:slim-app in stand te houden, wordt aanbevolen de smartphone met de Tandem t:slim-app binnen een straal van 1,5 meter van de compatibele insulinepomp te houden.

▲ VOORZORGSMaatregel

Zorg er **ALTIJD** voor dat uw pomp een draadloze Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt. Controleer of de informatie die aan u wordt getoond overeenkomt met uw tekenen en symptomen.

▲ VOORZORGSMaatregel

Gebruik van de Tandem t:slim-app in combinatie met uw insulinepomp kan de levensduur van de batterij van uw pomp beïnvloeden vanwege de draadloze gegevensoverdracht tussen de apparaten.

▲ VOORZORGSMaatregel

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmen en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Als u uw Tandem t:slim-app sluit of geforceerd stopt, wordt deze niet uitgevoerd op de achtergrond.

▲ VOORZORGSMaatregel

Negeer **GEEN** symptomen van een te hoge of te lage bloedglucose. Als de meetwaarden in uw Tandem t:slim-app niet overeenkomen met uw symptomen, controleert u het scherm van uw pomp en controleert u of uw pomp een Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone.

▲ VOORZORGSMaatregel

Vertrouw **ALTIJD** op uw pomp voor therapiebeslissingen als:

- » uw smartphone niet compatibel is met de bolustoedieningsfunctie van de Tandem t:slim-app
- » uw smartphone kwijt of beschadigd is
- » uw smartphone geen Bluetooth-verbinding meer heeft met uw pomp

▲ VOORZORGSMATREGEL

Werk het besturingssysteem van uw smartphone **NIET** bij zolang u niet zeker weet of het compatibel is met de bolustoedienings- en de weergave- en gegevensuploadfunctie van de Tandem t:slim-app. Als u het besturingssysteem bijwerkt naar een incompatibele versie, verliest u de mogelijkheid om een bolus aan te vragen, af te breken of te annuleren vanuit de Tandem t:slim-app.

▲ VOORZORGSMATREGEL

STOP met het gebruik van de Tandem t:slim-app als uw smartphone beschadigd is, of als een aanzienlijk deel van het scherm is beschadigd of niet oplicht.

▲ VOORZORGSMATREGEL

De Tandem t:slim-app is niet bedoeld ter vervanging van zelfcontrole zoals geadviseerd door een arts.

▲ VOORZORGSMATREGEL

De Tandem t:slim-app is niet bedoeld voor gebruik door personen die niet in staat zijn om een smartphone te gebruiken. Gebruikers moeten voldoende gezichtsvermogen en/of gehoor hebben om de Tandem t:slim-app te kunnen gebruiken.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Het gebruik van mobiele apparaten die niet voldoen aan IEC 60950-1, IEC 62368-1 of een gelijkwaardige norm kan het risico van elektrische gevaren verhogen.

Ondersteunde mobiele apparaten en de oplaadapparatuur die door de fabrikanten ervan wordt geleverd voldoen aan de toepasselijke elektrische veiligheidsnormen (IEC 60950-1, IEC 62368-1 of gelijkwaardig). Ga voor meer informatie over ondersteunde apparaten naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna **Apphandleiding**.

2.7 Preventieve cyberbeveiligingsmaatregelen van Tandem

Medische apparaten kunnen, net als andere computersystemen, kwetsbaar zijn voor cyberbeveiligingsrisico's en

kunnen de veiligheid en effectiviteit van het apparaat beïnvloeden. Als u de t:slim X2-insulinepomp onjuist gebruikt of de instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in deze gebruikershandleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot een onbruikbare pomp of kan uw t:slim X2-insulinepomp worden blootgesteld aan cyberbeveiligingsrisico's.

- Houd uw pomp, smartphone en de Tandem t:slim-app onder uw toezicht of houd ze altijd bij u.
- Koppel altijd uw pomp los van de computer en USB-kabel wanneer u deze niet gebruikt om pompgegevens te uploaden of software-updates uit te voeren met de Tandem Device Updater.
- Deel het serienummer van uw pomp of de koppelingscode van de Tandem t:slim-app niet met onbevoegden. Schrijf deze nummers niet ergens op waar ze toegankelijk zijn voor onbevoegden.
- Sluit geen apparaten van derden aan op uw pomp die geen deel uitmaken van het Tandem-systeem en laat deze niet koppelen met uw

pomp. Zie [Deel 1.3 Systeembeschrijving](#) voor een volledige systeembeschrijving

- Gebruik geen software of toepassingen van derden die niet door Tandem zijn geautoriseerd als veilig voor gebruik met uw pomp.
- Neem contact op met uw lokale klantenservice als u vermoedt dat uw pomp is blootgesteld aan een cyberbeveiligingsincident of -kwetsbaarheid.

2.8 Mogelijke voordelen van het gebruik van de pomp

- De pomp biedt een geautomatiseerde manier om basale en bolusinsuline toe te dienen. De toediening kan worden afgesteld op basis van zes aanpasbare persoonlijke profielen, elk met maximaal 16 tijdsinstellingen voor basaalsnelheid, koolhydratenratio, correctiefactor en doel-BG. Daarnaast biedt de functie Tijdelijke snelheid de mogelijkheid om een tijdelijke verandering van de basaalsnelheid te programmeren voor maximaal 72 uur.
- De pomp biedt u de mogelijkheid om een bolus in een keer toe te dienen, of om een percentage toe te dienen over een langere periode, zonder dat u door verschillende menu's hoeft te navigeren. U kunt een bolus ook op een discretere manier programmeren met behulp van de functie Snelle bolus, die kan worden gebruikt zonder dat u op de pomp hoeft te kijken en die kan worden geprogrammeerd in stappen van eenheden insuline of gram koolhydraten.
- De boluscalculatorfunctie is toegankelijk via het scherm *Bolus* en biedt u de mogelijkheid om verschillende koolhydraatwaarden in te voeren en bij elkaar op te tellen. De boluscalculator van de insulinepomp raadt een bolus aan op basis van de totale hoeveelheid ingevoerde koolhydraten, waardoor u minder hoeft te gissen.
- De pomp houdt de hoeveelheid actieve insuline van voedings- en correctiebolussen, de Insulin on Board (IOB), bij. Tijdens het programmeren van extra voedings- of correctiebolussen trekt de pomp de hoeveelheid AI af van de aanbevolen bolus indien uw BG lager is dan het doel dat is ingesteld in uw actieve persoonlijke profiel. Dit helpt bij het voorkomen van het ophopen van insuline, wat tot hypoglykemie (lage BG) kan leiden.
- U kunt een aantal herinneringen programmeren waardoor u de oproep ontvangt om uw BG opnieuw te testen nadat een lage of hoge BG is ingevoerd, evenals "een herinnering voor bolus bij gemiste maaltijd", die u waarschuwt als een bolus niet is ingevoerd tijdens een specifieke periode. Wanneer deze zijn geactiveerd, kan dat de kans verkleinen dat u uw BG of bolus voor maaltijden vergeet te controleren.
- U hebt de mogelijkheid om uiteenlopende gegevens op uw scherm te bekijken, inclusief het tijdstip en de hoeveelheid van uw laatste bolus, de totale toediening van insuline per dag en opgesplitst in basaal, voedingsbolus en correctiebolus.

2.9 Mogelijke risico's van het gebruik van de pomp

Zoals bij alle medische apparaten het geval is, zijn er risico's verbonden aan het gebruik van de pomp. Veel van deze risico's zijn kenmerkend voor insuliner therapie in het algemeen, maar er zijn aanvullende risico's verbonden aan de continue infusie van insuline en continue glucosemonitoring. Het lezen van de gebruikershandleiding en het opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van cruciaal belang voor een veilige werking van uw pomp. Bespreek met uw zorgverlener hoe deze risico's op u van toepassing kunnen zijn.

Het inbrengen en dragen van een infuusset kan infectie, bloeden, pijn of huidirritatie (roodheid, zwelling, kneuzing, jeuk, littekenvorming of huidverkleuring) veroorzaken.

Er bestaat een kleine kans dat een deel van een canule van een infusieset onder uw huid achterblijft wanneer de canule breekt tijdens het dragen. Als u denkt dat een canule onder uw huid is gebroken, neem dan contact op met uw zorgverlener en bel de klantenservice in uw regio.

Andere risico's in verband met het gebruik van infuussets zijn verstoppingen en luchtbellens in de slang, waardoor de toediening van insuline kan worden gehinderd. Als uw BG niet afneemt na het starten van een bolus, of als u een andere onverklaarbare hoge BG heeft, is het raadzaam om uw infuusset te controleren op verstopping of luchtbellens en te controleren of de canule niet is losgeraakt. Als de toestand aanhoudt, bel dan de klantenservice in uw regio of zoek zo nodig medische hulp.

De volgende risico's kunnen het gevolg zijn van een defecte pomp:

- kans op hypoglycemie (lage BG) door een te hoge toediening van insuline als gevolg van een hardwaredefect of een softwarefout.
- hyperglycemie (hoge BG) en ketose, mogelijk met diabetische ketoacidose (DKA) als gevolg van een storing van de pomp en het stoppen van de insulinetoediening door een hardwaredefect, een softwarefout of een storing in de infuusset. Het hebben van een

back-upmethode voor insulinetoediening vermindert het risico op ernstige hyperglycemie of DKA aanzienlijk.

2.10 Samenwerken met uw zorgverlener

Alle klinische taal die wordt gebruikt in deze gebruikershandleiding is gebaseerd op de aanname dat uw zorgverlener bepaalde termen aan u heeft uitgelegd en heeft uitgelegd hoe deze van toepassing zijn op uw diabetesbehandeling. Uw zorgverlener kan u helpen met het bepalen van richtlijnen voor diabetesbehandeling die het beste aansluiten bij uw levensstijl en behoeften.

Bespreek met uw zorgverlener welke functies voor u het meest geschikt zijn voordat u de pomp gaat gebruiken. Alleen uw zorgverlener kan uw basaalsnelheid/-snelheden, insuline-koolhydratenratio('s), correctiefactor(en), BG-doel en duur van de insulinewerking bepalen en u helpen met het aanpassen daarvan. Bovendien kan alleen uw zorgverlener bepalen wat uw CGM-instellingen horen te zijn en hoe u de

trendgegevens van uw sensor moet gebruiken bij de behandeling van uw diabetes.

2.11 Verificatie van een goede functionaliteit

Pompfunctionaliteit

Er wordt een elektrische voeding (net-adapter met micro-USB-connector) met de pomp meegeleverd. Controleer of het volgende gebeurt wanneer u uw voedingseenheid aansluit op de USB-poort van uw pomp voordat u de pomp gaat gebruiken:

- U hoort een geluidswaarschuwing
- U ziet het groene licht om de rand van de knop **ScherM aan/Snelle bolus** oplichten
- U voelt een waarschuwing in de vorm van een trilling
- U ziet een laadsymbool (bliksemflits) op de batterijniveau-indicator.

Controleer daarnaast het volgende voordat u de pomp gebruikt:

- Druk op de knop **ScherM aan/Snelle bolus** om het scherm aan te zetten zodat u de weergave kunt zien.
- Wanneer het weergavescherM aan is, reageert het aanraakscherM op aanrakingen van uw vingers.

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

CONTROLEER of het scherm van de pom aan gaat, u pieptonen hoort, de pomp voelt trillen en de groene led ziet knipperen rond de rand van de knop **ScherM aan/Snelle bolus** wanneer u een energiebron aansluit op de USB-poort. Deze functies worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van waarschuwingen, alarmen en andere situaties die uw aandacht vereisen. Staak het gebruik van uw pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als deze functies niet werken.

Tandem t:slim-appfunctionaliteit

Voordat u de mobiele Tandem t:slim-app gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens die worden weergegeven in uw Tandem t:slim-app overeenkomen met de gegevens die op uw pompscherM worden getoond.

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

Zorg er **ALTIJD** voor dat uw pomp een draadloze Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt. Controleer of de informatie die aan u wordt getoond overeenkomt met uw tekenen en symptomen.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 3

Vertrouwd raken met uw
t:slim X2-insulinepomp

3.1 Inhoud van het pakket met de t:slim X2-pomp

Het pomppakket hoort het volgende te bevatten:

1. t:slim X2™-insulinepomp
2. pomphoesje
3. Gebruikershandleiding voor de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ™-technologie
4. USB-kabel
5. USB-adapter voor stopcontact
6. Hulpmiddel voor verwijdering reservoir

Neem contact op met de klantenservice in uw regio als er artikelen ontbreken.

Als u een CGM gebruikt, worden de componenten afzonderlijk rechtstreeks door de fabrikant van de CGM verkocht en verzonden.

Uw pomp wordt geleverd met een transparante schermbeschermer. Verwijder de schermbeschermer niet.

Uw pomp wordt geleverd met een beschermende afdekking op de plaats waar normaal gesproken het reservoir wordt geplaatst. Deze afdekking moet worden verwijderd en worden vervangen door een reservoir voordat u begint met de toediening van insuline.

Het t:slim X2-reservoir van 3 ml met t:lock™-connector bestaat uit de reservoirkamer en een micro-toedieningskamer voor de toediening van zeer kleine hoeveelheden insuline. Een verscheidenheid aan compatibele infusiesets met de t:lock-connector zijn verkrijgbaar bij Tandem Diabetes Care, Inc. De t:lock-connector zorgt voor een veilige verbinding tussen het reservoir en de infusieset. Gebruik alleen t:slim X2-reservoirs en compatibele infuussets met t:lock-connectoren vervaardigd voor Tandem Diabetes Care, Inc.

Uw pomp omvat ook verbruiksartikelen, die gedurende de levensduur van de pomp mogelijk moeten worden vervangen, zoals:

- pomphoesje(s)/-clip(s)
- schermbeschermer
- rubberen klep van de USB-poort
- USB-kabel

Bestellen van benodigdheden

Neem voor het bestellen van reservoirs, infuussets, verbruiksartikelen, accessoires of schermbeschermers contact op met de klantenservice in uw regio of met uw gebruikelijke leverancier van diabetesproducten.

3.2 Pompterminologie

Actieve Insuline (AI)

AI is de insuline die nog actief is (de bloedglucose kan verlagen) in het lichaam nadat er een bolus is toegediend.

Basaal

Basaal is een langzame, voortdurende toediening van insuline, waardoor de bloedglucosespiegel tussen maaltijden en tijdens de slaap stabiel blijft. De dosis wordt uitgedrukt in eenheden per uur (eenheden/uur).

BG

BG is een afkorting voor bloedglucose. Dit is de hoeveelheid bloedglucose in het bloed, gemeten in mg/dl.

BG-doel

BG-doel is een specifiek streefdoel voor bloedglucose. Het is een exact cijfer, geen bereik. Als er een

bloedglucosewaarde wordt ingevoerd in de pomp, wordt de berekende insulinebolus naar boven of beneden aangepast om dit doel te bereiken.

Bolus

Een bolus is een snelle dosis insuline, die meestal wordt toegediend als tegenwicht voor gegeten voedsel of om een hoge bloedglucose te corrigeren. Met de pomp kan een standaardbolus, een correctiebolus, een verlengde bolus of een snelle bolus worden toegediend.

Canule

De canule is het deel van de infuusset dat onder de huid wordt ingebracht en waardoor de insuline wordt toegediend.

Correctiebolus

Een correctiebolus wordt toegediend om een hoge bloedglucosespiegel te corrigeren.

Correctiefactor

Een correctiefactor is de hoeveelheid bloedglucose die wordt verlaagd door 1 eenheid insuline. Dit wordt ook wel de insulinegevoeligheidsfactor (Insulin Sensitivity Factor, ISF) genoemd.

Eenheden

Eenheden zijn de meeteenheid voor insuline.

Gram

De gram is een meeteenheid voor koolhydraten.

Insulineduur

De insulineduur geeft aan hoelang de insuline actief en beschikbaar is in het lichaam nadat een bolus is toegediend. Dit houdt ook verband met de berekening van de AI.

Koolhydraten

Koolhydraten zijn suikers en zetmeel die door het lichaam worden omgezet in bloedglucose en worden gebruikt als energiebron, gemeten in gram.

Koolhydratenratio

De koolhydratenratio is het aantal gram koolhydraten dat door 1 eenheid insuline wordt omgezet. Dit wordt ook wel de insuline-koolhydratenratio genoemd.

Koppelingscode

Een unieke, tijdelijke code die wordt gegenereerd door de t:slim X2-pomp en wordt gebruikt om de pomp te

koppelen aan een enkele smartphone. De code is 5 minuten geldig. Deze koppelingscode staat los van de CGM-koppelingscode.

Laden

Laden is het proces van het verwijderen, vullen en plaatsen van een nieuw reservoir en een nieuwe infuusset.

Persoonlijk profiel

Een persoonlijk profiel is een groep instellingen waarmee de toediening van basale en bolusinsuline binnen specifieke tijdsegmenten over een periode van 24 uur wordt bepaald.

Snelle bolus

Snelle bolus (met behulp van de knop **Schermbaan/Snelle bolus**) is een manier om een bolus toe te dienen door opdrachten in de vorm van pieptonen/trillingen uit te voeren, zonder dat u door het pompscherm hoeft te navigeren of erop hoeft te kijken.

Tijdelijke snelheid

Tijdelijke snelheid is een afkorting voor tijdelijke basaalsnelheid. Deze term wordt gebruikt om de actuele basaalsnelheid kortstondig te verhogen

of verlagen om te reageren op bijzondere situaties. 100% is dezelfde basaalsnelheid als de geprogrammeerde snelheid. 120% betekent 20% meer en 80% betekent 20% minder dan de geprogrammeerde basaalsnelheid.

USB-kabel

USB is een afkorting voor Universal Serial Bus (universele seriële bus). De USB-kabel wordt aangesloten op de micro-USB-poort van de pomp.

Verlengde bolus

Een verlengde bolus is een bolus die gedurende een bepaalde periode wordt toegediend. Deze wordt gewoonlijk gebruikt voor voedsel dat langzaam wordt verteerd. Als u een verlengde bolus toedient met uw pomp, moet u bij NU TOEDIENEN opgeven welk percentage van de insuline onmiddellijk moet worden toegediend. Het resterende percentage wordt dan verspreid over een bepaalde periode toegediend.


WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** de USB-kabel die bij uw t:slim X2-insulinepomp is geleverd om het risico op brand of brandwonden te minimaliseren.

3.3 Verklaring van de pictogrammen op de t:slim X2-insulinepomp

De volgende pictogrammen kunnen verschijnen op uw pomp:

Definities pomppictogrammen

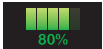Symbool	Definitie
	De resterende capaciteit van de pompbatterij.
	Er is een pompherinnering, -waarschuwing, -foutmelding of -alarm actief.
	Hierdoor worden alle insulinetoeleveringen gestopt.
	Basale insuline is geprogrammeerd en wordt toegediend.
	Draadloze <i>Bluetooth</i> -technologie.
	Accepteren. Tik hierop om door te gaan naar het volgende scherm of om een bericht op het pompscherm met Ja te beantwoorden.
	Opslaan. Tik hierop om de instellingen op het scherm op te slaan.
	Verwijderen. Tik hierop om tekens of cijfers op een toetsenbord te verwijderen.
	Nieuw. Tik hier om een nieuw item toe te voegen.

Symbool	Definitie
	De resterende hoeveelheid insuline in het reservoir.
	Er is een tijdelijke basaalsnelheid actief.
	Er is een basaalsnelheid van 0 eenheden/uur actief.
	Er is een tijdelijke basaalsnelheid van 0 eenheden/uur actief.
	Er wordt een bolus toegediend.
	Annuleren. Tik hierop om de huidige bewerking te annuleren.
	Afwijzen. Tik hierop om het scherm af te sluiten of om een bericht op het pompscherm met Nee te beantwoorden.
	Terug. Tik hierop om naar het vorige scherm te gaan.
	Totaal. Tik hierop om de waarden op een toetsenbord bij elkaar op te tellen.

Definities pomppictogrammen (vervolg)

Symbool	Definitie
	Spatie. Tik hierop om een spatie op het tekentoetsenbord in te voeren.
	OK. Tik om de huidige instructie of instelling op het scherm te bevestigen.
	Er is een voedings- en/of correctiebolus toegediend. Dit pictogram verschijnt alleen wanneer een CGM-sensorsessie actief is.
	Er is een verlengde bolus toegediend. Het vierkant geeft het deel van de bolus aan voor NU TOEDIENEN en de lijn het deel van de bolus voor LATER TOEDIENEN. Dit pictogram verschijnt alleen wanneer een CGM-sensorsessie actief is.

Symbool	Definitie
	De beveiligingspin is ingeschakeld. Zie Deel 5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen .
	De bijbehorende instelling wordt ingeschakeld.
	De bijbehorende instelling wordt uitgeschakeld.
	Tandem-logo. Wanneer het pompscherm is ingeschakeld en ontgrendeld, tikt u om terug te keren naar het <i>start</i> scherm.

3.4 Verklaring van de kleuren op de pomp

	Rode led 1 keer rood knipperen om de 30 seconden geeft een storing of alarmsituatie aan.
	Gele led 1 keer geel knipperen om de 30 seconden geeft een waarschuwings- of herinneringssituatie aan.
	Groene led • 1 keer groen knipperen om de 30 seconden geeft aan dat de pomp normaal functioneert. • 3 keer groen knipperen om de 30 seconden geeft aan dat de pomp wordt opgeladen.
	Oranje markering Tijdens het bewerken van instellingen worden wijzigingen ter controle oranje gemarkeerd voordat ze worden opgeslagen.

3.5 Achterkant van de pomp

1. **t:slim X2-reservoir:** een reservoir voor eenmalig gebruik kan maximaal 300 eenheden (3,0 ml) insuline bevatten.
2. **Ventilatieopeningen:** zorgen ervoor dat de pomp naar behoren werkt. Het is belangrijk dat deze ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

▲PVOORZORGSMATREGEL


Als u ervoor kiest om een pomphoesje te gebruiken of andere accessoires die niet door Tandem worden geleverd, zorg er dan voor dat u de zes ventilatieopeningen aan de achterkant van de pomp **NIET** afdekt. Het afdekken van de ventilatieopeningen kan de insulinetoediening beïnvloeden.



3.6 Vergrendelingsscherm


Het *vergrendelingsscherm* verschijnt altijd als u het scherm aanzet. Tik een voor een op 1–2–3 om de pomp te ontgrendelen.

1. **Weergave van tijd en datum:** geeft de actuele tijd en datum weer.
2. **Waarschuwingspictogram:** geeft aan dat er een herinnering, waarschuwing of alarm actief is achter het *vergrendelingsscherm*.
3. **Batterijniveau:** geeft de resterende batterijcapaciteit weer. Wanneer de batterij wordt opgeladen, wordt het laadpictogram (bliksemschicht) weergegeven.
4. **1–2–3:** ontgrendelt het pompscherm.
5. **Actieve insuline (AI):** resterende hoeveelheid en tijd van de actieve insuline.
6. **Pictogram Actieve bolus:** geeft aan dat er een bolus actief is.
7. **Status:** geeft de huidige pompinstellingen en de status van de insulinetoediening weer.
8. **Insulineniveau:** geeft de actuele hoeveelheid insuline in het reservoir weer.

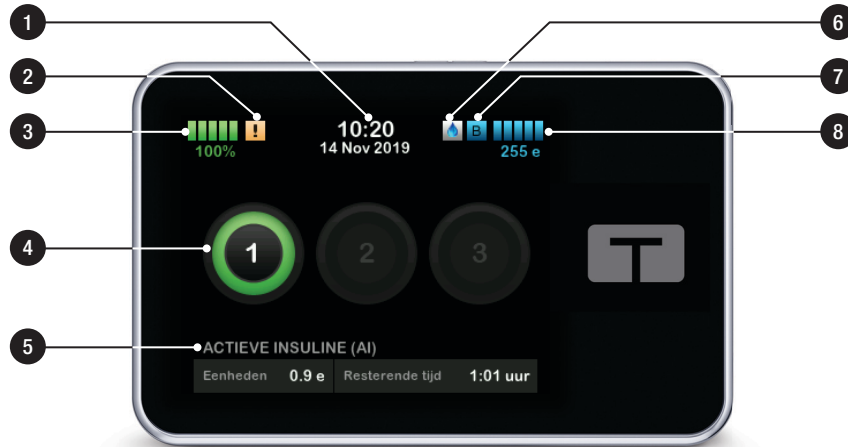

3.7 Startscherm

1. **Batterijniveau:** geeft de resterende batterijcapaciteit weer. Wanneer de batterij wordt opgeladen, wordt het laadpictogram (bliksemschicht) weergegeven.
2. **USB-poort:** poort voor het opladen van uw pompbatterij. Sluit de afdekking wanneer de USB-poort niet in gebruik is.
3. **Bolus:** een bolus programmeren en toedienen.
4. **Opties:** insulinetoediening stoppen/hervatten, pomp- en CGM-instellingen beheren, activiteiten starten/stoppen, reservoir laden en geschiedenis weergeven.
5. **Actieve insuline (AI):** resterende hoeveelheid en tijd van de actieve insuline.
6. **Weergave van tijd en datum:** geeft de actuele tijd en datum weer.
7. **Status:** geeft de huidige pompinstellingen en de status van de insulinetoediening weer.
8. **Insulineniveau:** geeft de actuele hoeveelheid insuline in het reservoir weer.
9. **Tandem-logo:** om terug te keren naar het *startscherm*.
10. **Reservoirslang:** slang die is bevestigd aan het reservoir.
11. **Slangconnector:** verbindt de reservoirslang met de slang van de infusieset.
12. **Knop Scherm aan/Snelle bolus:** schakelt het pompscherm in/uit of programmeert een snelle bolus (indien geactiveerd).
13. **Led-indicator:** geeft licht bij verbinding met elektrische voeding en geeft goede werking aan.

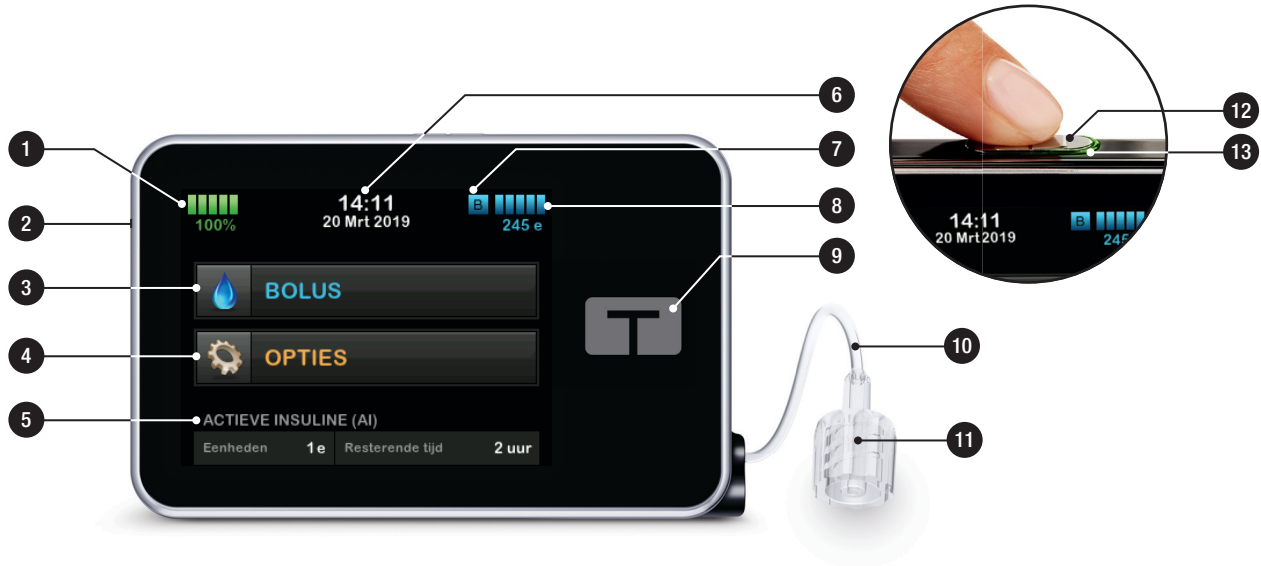

3.8 Scherm Actuele status

Het scherm *Actuele status* is toegankelijk via het *vergrendelingsscherm* en het *startscherm* door op het symbool voor het insulineniveau te tikken. Het is alleen voor weergave; er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht via dit scherm.

1. : keert terug naar het *startscherm*.
2. **Profiel:** geeft het actuele actieve persoonlijke profiel weer.
3. **Basaalsnelheid:** geeft de actuele basaalsnelheid weer die in eenheden/uur wordt toegediend. Als een tijdelijke snelheid actief is, zal deze rij veranderen om de actuele tijdelijke snelheid weer te geven in eenheden/uur.
4. **Laatste bolus:** geeft hoeveelheid, datum en tijd van de laatste bolus weer.
5. **Control-IQ Status:** geeft de status van de Control-IQ-technologie weer.
6. **Pijl omhoog/omlaag:** geeft aan dat er meer informatie is.
7. **Correctiefactor:** geeft de actuele correctiefactor weer die wordt gebruikt om een bolus te berekenen.
8. **Koolhydratenratio:** geeft de actuele koolhydratenratio weer die wordt gebruikt om een bolus te berekenen.
9. **Doel-BG:** geeft het actuele BG-doel weer dat wordt gebruikt om een bolus te berekenen.
10. **Insulineduur:** geeft de actuele ingestelde insulineduur weer die wordt gebruikt om de insuline aan boord te berekenen.
11. **Laatste kalibratie:** geeft datum en tijd van de laatste kalibratie weer.
12. **Tijd sensor gestart:** geeft de datum en tijd weer van het moment waarop de sensor voor het laatst werd gestart.
13. **Zenderbatterij (alleen Dexcom G6):** geeft de status van de CGM-zenderbatterij weer.
14. **Mobiele verbinding:** geeft aan of de mobiele verbinding is in- of uitgeschakeld, of er een smartphone met de pomp is gekoppeld, en zo ja, of de smartphone actief met de pomp is verbonden.
15. **Resterende tijdsensor (alleen Dexcom G7):** geeft de resterende tijd van de huidige CGM-sensorsessie weer.



3.9 Bolusscherm

Het scherm Bolus gebruikt standaard eenheden insuline voor het berekenen van een bolus. U kunt deze instelling in uw persoonlijk profiel wijzigen om in plaats daarvan gram koolhydraten te gebruiken. Van beide schermen wordt op de volgende pagina een voorbeeld weergegeven.

1. : keert terug naar het *startscherm*.
2. **Insuline:** voer het aantal eenheden insuline in. U kunt deze instelling wijzigen naar gram koolhydraten. Zie [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#) voor informatie over het instellen van het type stap.
3. **Eenheden:** geeft het totale aantal berekende eenheden weer. Tik hierop om een bolusaanvraag in te voeren of om een berekende bolus te wijzigen (overschrijven).
4. **Berekening weergeven:** geeft weer hoe de insulinedosis is berekend aan de hand van de actuele instellingen.

5. **Bloedglucose:** voor de BG- of sensorglucosespiegel in. Deze waarde wordt automatisch ingevuld als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Control-IQ-technologie is ingeschakeld en beschikbaar
- Er is een CGM-sessie actief
- Er is een CGM-waarde aanwezig
- Er is een CGM-trendpijl beschikbaar op het *CGM-startscherm*


OPMERKING

Raadpleeg de productinstructies van de fabrikant van de CGM voor meer informatie over CGM-trendpijlen en hoe u deze kunt gebruiken voor behandelbeslissingen. U kunt ook kijken in [Deel 25.3 Pijlen voor veranderingssnelheid](#).

U kunt ervoor kiezen deze waarde te gebruiken of een andere waarde in te voeren via een alternatieve testmethode.

6. : verdergaan naar de volgende stap.
7. **Koolhydraten:** aantal gram koolhydraten invoeren. U kunt deze waarde wijzigen naar eenheden insuline. Zie [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#) voor informatie over het instellen van het type stap.

Gebruik van eenheden

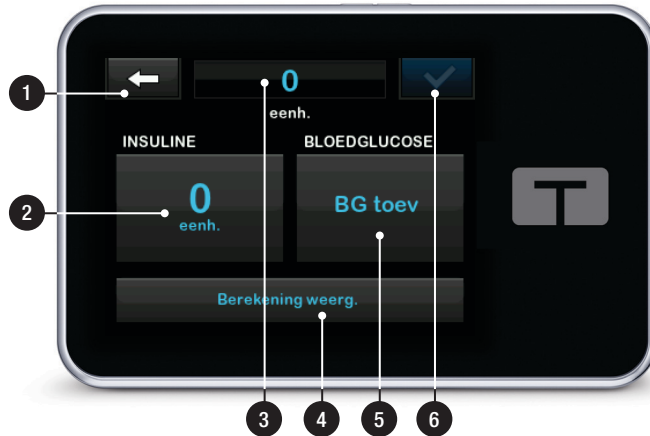

Gebruik van grammen



3.10 Scherm Opties

1. : keert terug naar het *startscherm*.
2. **Insuline stoppen:** stopt de toediening van insuline. Als de insulinetoediening is gestopt, wordt INSULINE VOORTZETTEN weergegeven.
3. **Laden:** reservoir vervangen, slang vullen, canule vullen en herinnering locatie.
4. **Activiteit:** programmeert Lichaamsbeweging, Slaap en tijdelijke Basaalsnelheden.
5. **Mijn pomp:** Persoonlijke profielen, Control-IQ, waarschuwingen en herinneringen, en pompinfo.
6. **Pijl omhoog/omlaag:** geeft aan dat er meer informatie is.
7. **Mijn CGM:** toont opties voor het configureren en gebruiken van een compatibele CGM.
8. **Apparaatinstellingen:** weergave-instellingen, Bluetooth-instellingen, tijd en datum, geluidsvolume en beveiligingspin.
9. **Geschiedenis:** geeft een historisch logboek van pomp- en CGM-gebeurtenissen weer.



3.11 Scherm Mijn pomp

1. : keert terug naar het *optiesscherm*.
2. **Persoonlijke profielen:** een groep instellingen waarmee basale en bolustoediening worden gedefinieerd.
3. **Control-IQ:** schakel de Control-IQ-technologie in/uit en voer de vereiste waarden in.
4. **Waarschuwingen en herinneringen:** aanpassen van pompherinneringen en pompwaarschuwingen.
5. **Pompinfo:** geeft het serienummer van de pomp, de contactgegevens van de klantenservice in uw regio, de website en andere technische informatie weer.




3.12 Scherm Apparaatinstellingen

1. : keert terug naar het *optiesscherm*.
2. **Scherminstellingen:** aanpassen van de time-out scherminstellingen.
3. **Bluetooth-instellingen:** in-/uitschakelen van de mobiele verbinding.
4. **Tijd en datum:** bewerken van de tijd en datum die op de pomp worden weergegeven.
5. **Geluidsvolume:** aanpassen van het geluidsvolume voor pompalarmen, pompwaarschuwingen, herinneringen, toetsenbord, bolus, snelle bolus, slang vullen en CGM-waarschuwingen.
6. **Beveiligingspin:** in-/uitschakelen van de beveiligingspin.




3.13 Scherm Numeriek toetsenbord

1. Waarde ingevoerd.
2. : terugkeren naar het vorige scherm.
3. Toetsenbordcijfers.
4. : hiermee kunnen cijfers worden toegevoegd op het gramscherm. Als Eenheden actief is, wordt dit weergegeven met een decimale punt.
5. : hiermee wordt de taak voltooid en de ingevoerde informatie opgeslagen.
6. **Eenheden/gram**: maateenheid die is gekoppeld aan de ingevoerde waarde.
7. : Hiermee wordt het laatst ingevoerde cijfer verwijderd.

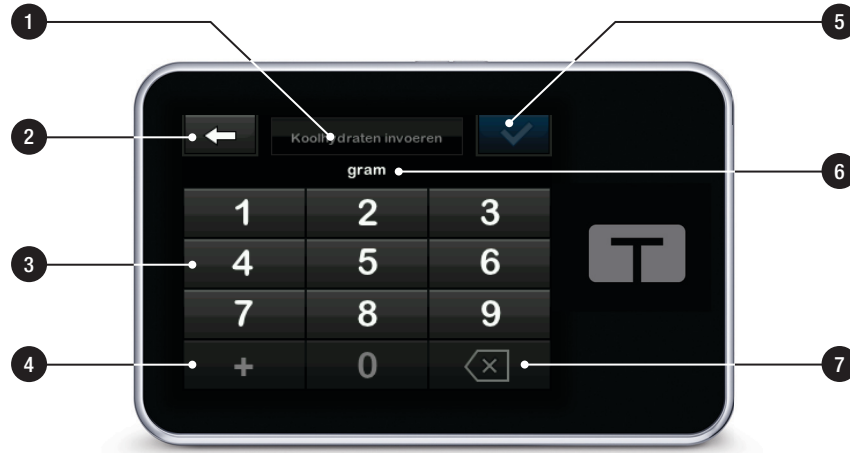

3.14 Scherm Lettertoetsenbord

1. Naam van profiel.
2. : terugkeren naar het vorige scherm.
3. : voor het invoeren van een spatie.
4. **123**: wijzigt de modus van het toetsenbord van letters (ABC) naar cijfers (123).
5. : hiermee wordt de ingevoerde informatie opgeslagen.
6. **Letters**: tik één keer voor de eerste letter, 2 keer snel voor de middelste letter of 3 keer snel voor de derde letter.
7. : hiermee wordt de laatst ingevoerde letter of het laatst ingevoerde cijfer verwijderd.

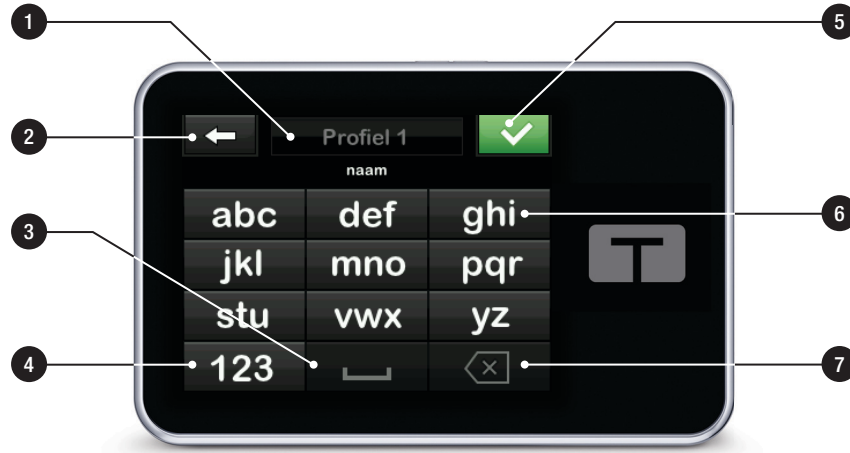

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 4

Vertrouwd raken met uw Tandem t:slim-app

4.1 Overzicht

De Tandem t:slim™-app is een bijbehorende app voor de t:slim X2™-insulinepomp. Controleer voordat u begint of uw smartphone en de Tandem t:slim-app compatibel zijn en schakel de automatische updates van het besturingssysteem (OS) van uw smartphone uit. De functieset die beschikbaar is in de Tandem t:slim-app is afhankelijk van de softwareversie van de pomp en het model en besturingssysteem van de compatibele smartphone. Beschikbare functiesets zijn:

- **Weergave en gegevensupload:** Deze functieset biedt een secundaire weergave van uw pomp en gegevens van de continue glucosebewaking (CGM), inclusief weergave van uw pompwaarschuwingen en -alarmen, en maakt het draadloos uploaden van pomp- en CGM-gegevens naar de Tandem-cloud mogelijk.
- **Bolustoeiening plus weergave en gegevensupload:** Naast de functies Weergave en Gegevensupload kunt u met de bolustoeieningsfunctie

de Tandem t:slim-app gebruiken om een bolus aan te vragen, een bolus af te breken en een bolus te annuleren. Consistent gebruik van de Tandem t:slim-app met de functie voor mobiele bolus kan leiden tot een lagere gemiddelde bloedglucosespiegel zonder de hypoglykemie tijd te verhogen.

Ga naar Google Play™ of de App Store om de Tandem t:slim-app te downloaden. Ga voor installatie-instructies naar support.tandemdiabetes.com.

OPMERKING

Ga voor een actuele lijst met ondersteunde smartphones naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna op **Apphandleiding**.

Ga voor meer informatie over de set-up en configuratie van uw smartphone voor de Tandem t:slim-app naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna op **Apphandleiding**.

In bepaalde situaties kunnen de functies van de Tandem t:slim-app

beperkt zijn, onder andere bij het gebruik van een incompatibele smartphone of pomp.

WAARSCHUWING

Vertrouw **ALTIJD** op uw pomp voor het nemen van therapiebeslissingen, wanneer u een smartphone gebruikt die niet compatibel is met de bolustoeieningsfunctie.

VOORZORGSMAATREGEL

Vertrouw **ALTIJD** op uw pomp voor therapiebeslissingen als:

- » uw smartphone niet compatibel is met de bolustoeieningsfunctie van de Tandem t:slim-app
- » uw smartphone kwijt of beschadigd is
- » uw smartphone geen Bluetooth-verbinding meer heeft met uw pomp

VOORZORGSMAATREGEL

Pompmeldingen kunnen niet worden gewist vanuit uw Tandem t:slim-app. Pompwaarschuwingen, -alarmen en -meldingen kunnen worden bekeken op uw smartphone, maar moeten worden gewist op de t:slim X2-pomp.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Werk het besturingssysteem van uw smartphone **NIET** bij zolang u niet zeker weet of het compatibel is met de bolustoedienings- en de weergave- en gegevensuploadfunctie van de Tandem t:slim-app. Als u het besturingssysteem bijwerkt naar een incompatibele versie ervan, verliest u de mogelijkheid om een bolus aan te vragen of te beheren vanuit de Tandem t:slim-app.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Stop met het gebruik van de Tandem t:slim-app als uw smartphone beschadigd is, of als een aanzienlijk deel van het scherm is beschadigd of niet oplicht.

4.2 De Tandem t:slim-app installeren

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** smartphone die jailbroken of geroot is, of waarbij de Android-ontwikkelaarsmodus ingeschakeld is. Gegevens kunnen kwetsbaar worden als u de mobiele Tandem t:slim-app op een telefoon installeert die jailbroken of geroot is, of werkt met een niet-vrijgegeven of voorlopig vrijgegeven besturingssysteem. Download de Tandem t:slim-app alleen op Google Play™ of uit de App Store.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Zet **ALTIJD** de zoommodus uit wanneer u de Tandem t:slim-app gebruikt. Als de zoommodus op uw smartphone is ingeschakeld, moet u voor alle therapiebeslissingen vertrouwen op uw pomp.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Het gebruik van mobiele apparaten die niet voldoen aan IEC 60950-1, IEC 62368-1 of een gelijkwaardige norm kan het risico van elektrische gevaren verhogen.

Ondersteunde mobiele apparaten en de oplaadapparatuur die door de fabrikanten ervan wordt geleverd voldoen aan de toepasselijke elektrische veiligheidsnormen (IEC 60950-1, IEC 62368-1 of gelijkwaardig). Ga voor meer informatie over ondersteunde apparaten naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna **Apphandleiding**.

■ OPMERKING

De Tandem t:slim-app moet op de achtergrond worden uitgevoerd om gegevens te kunnen ontvangen en verzenden van en naar uw pomp, en naar de Tandem-cloud. Wanneer u de Tandem t:slim-app aansluit op de pomp, moet u de batterijoptimalisatie op uw smartphone uitschakelen om ervoor te zorgen dat de Tandem t:slim-app waarschuwingen en alarmen

kan ontvangen. Het wordt aanbevolen om bij het opladen de instructies van de fabrikant van uw smartphone te volgen.

Schakel de beveiliging van de smartphone in (bijv. schermvergrendeling, wachtwoord, gezichtsherkenning) voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt om een bolus toe te dienen. Deel nooit uw beveiligingspin/wachtwoord en machtig niemand anders om toegang te krijgen tot uw smartphone via diens biometrische gegevens om onbedoelde wijzigingen in uw toediening van insuline te voorkomen.

Nadat u de Tandem t:slim-app hebt gedownload, zoekt u deze op uw smartphone en opent u de app. Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven.

- U moet alle toestemmingsaanvragen van de Tandem t:slim-app toestaan om ervoor te zorgen dat u alle meldingen van uw pomp ontvangt. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) om uw meldingsinstellingen te configureren.

- Bij Android-gebruikers kan de Tandem t:slim-app om toegang tot de apparaatlocatie vragen om Bluetooth te gebruiken; tik op **Toestaan**.

Als u een nieuwe gebruiker bent:

1. Tik op **Account aanmaken**.
2. Voer uw accountgegevens in, waaronder naam, accounttype en inloggegevens.

OPMERKING

Minderjarigen kunnen op dit moment geen persoonlijk account aanmaken. Als u zorgt voor of handelt namens een minderjarig kind, selecteert u een ouder-/voogd- of verzorgeraccount.

3. Sluit de Tandem t:slim-app aan op de pomp zoals beschreven in [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#).

OPMERKING

Gebruik altijd de Tandem t:slim-app om uw pomp te koppelen aan uw smartphone. Probeer niet het Bluetooth-menu van uw smartphone te gebruiken.

Als Tandem Source beschikbaar is in uw regio en u een bestaand account hebt, log dan in met uw inloggegevens.

De Tandem t:slim-app bijwerken

Verwijder de app niet wanneer er updates voor de Tandem t:slim-app beschikbaar zijn op Google Play of in de App Store. Wanneer u een update downloadt en installeert, blijft uw Tandem t:slim-app verbonden met uw Tandem t:slim-account. De smartphone is nog steeds gekoppeld aan uw pomp en uw app-instellingen zullen hetzelfde blijven.

Als u de Tandem t:slim-app verwijdt en de Tandem t:slim-app opnieuw installeert, wordt u gevraagd om in te loggen met uw inloggegevens. Zodra u ingelogd bent, worden de instellingen van uw Tandem t:slim-app hersteld op basis van de laatste keer dat u met de Tandem-cloud hebt gesynchroniseerd.

Uw smartphone bijwerken

Voordat u het besturingssysteem van uw telefoon handmatig bijwerkt, moet u controleren of de Tandem t:slim-app compatibel is met het nieuwe besturingssysteem. Tik voor meer

informatie over het beheren van updates op **Help** op het scherm *Instellingen* van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

Werk het besturingssysteem van uw smartphone **NIET** bij zolang u niet zeker weet of het compatibel is met de bolustoedienings- en de weergave- en gegevensuploadfunctie van de Tandem t:slim-app. Als u het besturingssysteem bijwerkt naar een incompatibele versie ervan, verliest u de mogelijkheid om een bolus aan te vragen of te beheren vanuit de Tandem t:slim-app. Ga voor meer informatie naar tandemdiabetes.com/mobilesupport, of tik op **Help** in het scherm *Instellingen* van de Tandem t:slim-app en vervolgens op **App-handleiding**.

4.3 Verbinding maken met een smartphone

U kunt de pomp verbinden met één compatibele smartphone om pompinformatie te bekijken en een aantal pompfuncties uit te voeren op die smartphone met behulp van de Tandem t:slim-app.

OPMERKING

Deze instelling voor de mobiele verbinding houdt geen verband met de Bluetooth-verbinding van uw CGM. Zie [Deel 21.1 Over Bluetooth-technologie](#) voor informatie over de Bluetooth-verbinding van de CGM.

Wanneer u de Tandem t:slim-app aansluit op de pomp, moet u de batterijoptimalisatie op uw smartphone uitschakelen om ervoor te zorgen dat de Tandem t:slim-app waarschuwingen en alarmen kan ontvangen. Het wordt aanbevolen om bij het opladen de instructies van de fabrikant van uw smartphone te volgen.

OPMERKING

Ga voor meer informatie over de set-up en configuratie van uw smartphone voor de Tandem t:slim-app naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna **Apphandleiding**.

Een Smartphone koppelen**OPMERKING**

Gebruik altijd de Tandem t:slim-app om uw pomp te koppelen aan uw smartphone. Probeer niet het Bluetooth-menu van uw smartphone te gebruiken.

OPMERKING

Indien beschikbaar in uw regio, raden wij u sterk aan om pompgegevens te uploaden naar het Tandem Source-platform met behulp van de USB-kabel die bij uw pomp is geleverd voordat u het koppelingsproces hebt voltooid, om ervoor te zorgen dat al uw pompgegevens zo snel mogelijk worden geüpload naar de Tandem-cloud. De eerste upload van gegevens naar de Tandem-cloud kan vele uren duren als de internetverbinding van uw smartphone langzaam is.

Koppel de Tandem t:slim-app als volgt aan uw pomp:

1. Open de Tandem t:slim-app vanaf uw smartphone.
 - » Als u een nieuwe gebruiker bent, maakt u een account aan zoals beschreven in [Deel 4.2 De Tandem t:slim-app installeren](#).
 - » Als Tandem Source beschikbaar is in uw regio en u een bestaand account hebt, log dan in met uw inloggegevens.
- ✓ De Tandem t:slim-app vraagt u om te beginnen met het koppelingsproces.
2. Op het *startscherm* van de pomp:

- a. Tik op **OPTIES**.
- b. Tik op de **Pijl omlaag**.
- c. Tik op **Apparaatinstellingen**.
- d. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
- e. Tik op de schakeltoets aan/uit naast **Mobiele verbinding** en tik op  om te bevestigen. **Apparaat koppelen** wordt nu weergegeven.



3. In de Tandem t:slim-app op uw smartphone:
 - a. Tik op **Beginnen** in de Tandem t:slim-app. Er verschijnt een bevestigingsprompt.

- b. Kies het juiste serienummer van de pomp in het scherm *Selecteer uw pomp* en tik op **Volgende**.

❗ OPMERKING

Als u het serienummer van uw pomp niet weet, kijkt u op het scherm *Pompinfo* zoals weergegeven in [Deel 10.1 t:slim X2 Pompinfo](#).

4. Tik in het scherm *Bluetooth-instellingen* van uw pomp op **Apparaat koppelen**.
5. Uw pomp toont een scherm *Melding mobiele app*. Tik op  om een koppelingscode voor uw apparaat te genereren.
- ✓ Uw pomp geeft een unieke koppelingscode weer.

❗ OPMERKING

De code is slechts 5 minuten geldig - als u meer dan 5 minuten nodig hebt, tikt u nog een keer op **Apparaat koppelen** om een nieuwe code te genereren.

❗ OPMERKING

Tik **NIET** op  op uw pomp. Als u op  tikt, keert u terug naar het scherm Bluetooth-instellingen om stap 4 te herhalen.

6. Voer op uw smartphone de koppelingscode in die gegenereerd is in stap 4 in in de Tandem t:slim-app en tik op **Koppelen met pomp**.

- ✓ Op uw pomp verschijnt een bevestigingsscherm.
7. Tik op uw smartphone op **Pompgegevens synchroniseren** in de Tandem t:slim-app om door te gaan met uw normale gebruik van de pomp. De Tandem t:slim-app geeft uw dashboard weer en begint met de weergave van pompgegevens.

❗ OPMERKING

Als uw smartphone niet met uw pomp kan worden gekoppeld, controleert u de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en herhaalt u de stappen 1 - 7. Let op: Als uw smartphone u vraagt om communicatie met een extern apparaat toe te staan, moet u dit accepteren.

8. Tik op uw pomp op  om het scherm *Koppelingscode* te sluiten. Als de pomp is gekoppeld aan uw smartphone, wordt het scherm *Apparaat gekoppeld* weergegeven.

Uw Tandem t:slim-app blijft gesynchroniseerd met uw pomp zolang er een Bluetooth-verbinding is. De Tandem t:slim-app uploadt ongeveer eenmaal per uur pompgegevens naar de Tandem-cloud wanneer hij is verbonden met wifi of een mobiel netwerk, afhankelijk van uw instellingen voor gegevensgebruik. Hierdoor hebben u en uw zorgverlener eenvoudig toegang tot uw gegevens vanaf het Tandem Source-platform, indien beschikbaar in uw regio, zonder dat u toegang hoeft te hebben tot uw pomp of verbindingkabels.

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

Zorg er **ALTIJD** voor dat uw pomp een draadloze Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt. Controleer of de informatie die aan u wordt getoond overeenkomt met uw tekenen en symptomen.

Een Smartphone koppelen

U kunt een smartphone loskoppelen van een pomp:

- Als u uw smartphone vervangt, moet u uw eerder gekoppelde smartphone ontkoppelen van uw

pomp voordat u uw nieuwe smartphone kunt koppelen.

- Als u uw pomp vervangt, moet u uw oude pomp loskoppelen van uw smartphone voordat u uw nieuwe pomp kunt koppelen.

Koppel een smartphone als volgt los van uw pomp:

1. In de Tandem t:slim-app:
 - a. Tik op **Instellingen** in de *navigatiebalk*.
 - b. Tik op **App**.
 - c. Tik op **Gekoppelde pomp**.
 - d. Tik op **Pomp ontkoppelen**. Er verschijnt een bevestigingsprompt.
 - e. Tik op **Ontkoppelen**. De Tandem t:slim-app toont een banner die bevestigt dat uw pomp ontkoppeld is en keert terug naar het koppelingsscherf.
2. Deactiveer vanuit het *startscherm* van uw pomp de schakelaar **Mobiele verbinding** van uw pomp:

- a. Tik op **OPTIES**.
- b. Tik op **Apparaatinstellingen**.
- c. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
- d. Tik op de schakeltoets aan/uit naast **Mobiele verbinding** en tik op  om te bevestigen.
Apparaat koppelen verdwijnt.

3. Verwijder uw pomp van uw smartphone uit de lijst met Bluetooth-apparaten van uw smartphone.

Als uw pomp defect is, of als u anderszins geen toegang hebt tot uw pomp (bijv. omdat u de pomp bent verloren of omdat deze is teruggestuurd naar Tandem), gebruikt u uw Tandem t:slim-app om uw smartphone als volgt los te koppelen van uw pomp:

1. Tik op **Instellingen** in de *navigatiebalk*.
2. Tik op **App**.
3. Tik op **Gekoppelde pomp**.

4. Tik op **Pomp ontkoppelen**. Er verschijnt een bevestigingsprompt.
5. Tik op **Ontkoppelen**. De Tandem t:slim-app toont een banner die bevestigt dat uw pomp ontkoppeld is en keert terug naar het koppelingsscherf.


Nadat u uw smartphone van uw pomp hebt losgekoppeld, kunt u een andere combinatie van smartphone en pomp koppelen, zoals beschreven in [Een Smartphone koppelen](#).

4.4 Mobiele meldingen instellen

De Tandem t:slim-app kan meldingen weergeven die door uw pomp zijn gegenereerd of vanuit de Tandem-cloud zijn verzonden, waaronder pompwaarschuwingen, alarmen en herinneringen.

1. Tik op **Instellingen** in de *navigatiebalk*.
2. Tik op **Waarschuwingen en geluiden**.

3. Tik op **Instellingen app-meldingen** om pushmeldingen naar wens te schakelen. Het volgende voorbeeld toont mogelijke instellingen voor pushmeldingen.

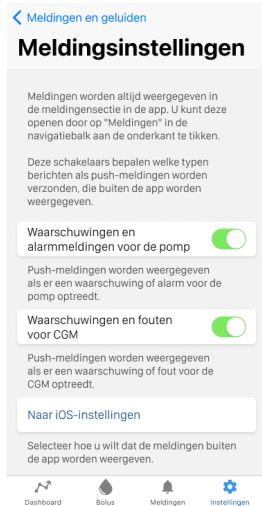

Om ervoor te zorgen dat u meldingen ontvangt op de Tandem t:slim-app, controleert u of de geluidsmodus voor de smartphone niet is ingesteld op dempen en schakelt u de volgende instellingen in:

- Meldingen van de Tandem t:slim-app
- Bluetooth

Controleer de instellingen van uw smartphone om er zeker van te zijn dat uw Tandem t:slim-app verbinding kan maken met het internet.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmen en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor meer informatie of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.

► OPMERKING

Controleer de instellingen voor pushmeldingen van uw smartphone en die in de Tandem t:slim-app om er zeker van te zijn dat de waarschuwingen en alarmen van uw pomp en CGM zijn ingesteld op uw voorkeur.

4.5 Beveiliging mobiele verbinding

Er kan slechts één telefoon en één Tandem t:slim-app aan uw pomp worden gekoppeld. Wanneer u uw pomp koppelt aan een Tandem t:slim-app, wordt er een unieke code gegenereerd en gebruikt om de communicatie tussen de pomp en de smartphone te beveiligen. Alle transmissies tussen de pomp en de telefoon zijn versleuteld. Alle ongeautoriseerde of niet-herkende verbindingen worden door de pomp geweigerd.

De pomp is ontworpen om de integriteit te controleren van alle opdrachten en gegevens die zijn ontvangen van de Tandem t:slim-app. Als de pomp onverwachte opdrachten of gegevens ontvangt van de Tandem t:slim-app, zal de pomp deze negeren en doorgaan met werken zoals beoogd.

4.6 Pompverbinding verbroken

Als uw smartphone meer dan 1,5 meter (5 voet) van de pomp verwijderd is of verbindingproblemen ondervindt, geeft


de Tandem t:slim-app geen pompgegevens weer totdat u de verbinding tussen uw smartphone en de pomp hebt hersteld.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

Zorg er **ALTIJD** voor dat uw pomp een draadloze Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt. Controleer of de informatie die aan u wordt getoond overeenkomt met uw tekenen en symptomen.

De banner met de melding *Pompverbinding verbroken* komt in de plaats van de huidige pompstatus

totdat u de Bluetooth-verbinding weer tot stand hebt gebracht.

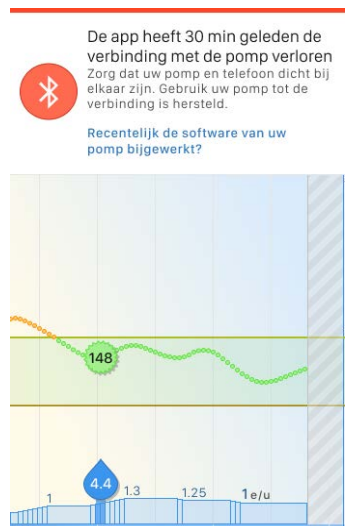


U ziet ook een grijs gekleurd gebied in de grafiek omdat er geen gegevens kunnen worden weergegeven wanneer de verbinding verbroken is. Wanneer de verbinding is verbroken, gebruikt u de pomp voor de therapie terwijl u probeert de verbinding te herstellen.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

Negeer **GEEN** symptomen van een te hoge of te lage bloedglucose. Als de meetwaarden in uw Tandem t:slim-app niet overeenkomen met uw symptomen, controleert u het scherm van uw pomp en controleert u of uw pomp een Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone.

Als uw smartphone en de pomp niet zijn aangesloten, en u tikt op **Bolus** in de navigatiebalk, dan verschijnt de waarschuwing *Bolus niet beschikbaar*, zoals getoond in het volgende voorbeeld.

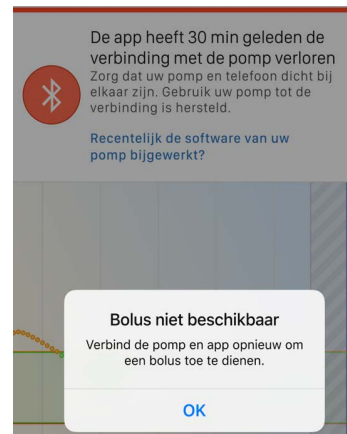

Bluetooth opnieuw verbinden

Wanneer u de banner met de melding *Pompverbinding verbroken* ziet:

- Zorg ervoor dat uw pomp en smartphone zich binnen 1,5 meter (5 voet) van elkaar bevinden en zonder obstakels (ook geen lichaamsdelen) ertussen.
- Controleer of Bluetooth-technologie op uw smartphone is ingeschakeld.

Als de verbinding niet binnen vijf minuten wordt hersteld, reset u de verbinding tussen uw smartphone en uw pomp:

1. Sluit de Tandem t:slim-app geforceerd af.
2. Open de Tandem t:slim-app.
3. Als uw verbinding opnieuw wordt verbroken, schakelt u de Bluetooth-verbinding van uw smartphone uit.
4. Schakel de Bluetooth-verbinding van uw smartphone in.
5. Als uw verbinding opnieuw wordt verbroken, meld u zich af bij de Tandem t:slim-app.

6. Koppel uw smartphone aan uw pomp zoals beschreven in [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#).

Staak het gebruik van de Tandem t:slim-app en neem contact op met de klantenservice in uw regio als de verbinding wederom wordt verbroken.

4.7 De Tandem t:slim-app herstarten

Als er blijvende problemen zijn met de Tandem t:slim-app, sluit de Tandem t:slim-app dan al dan niet geforceerd af om de huidige sessie te beëindigen.

Voor iOS-apparaten:

1. Dubbeltik op de knop Start of veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast.
2. Zoek de Tandem t:slim-app en veeg naar beneden om deze te sluiten.
3. Open de Tandem t:slim-app opnieuw.

Voor Android-apparaten:

1. Open het menu Instellingen van uw smartphone.
2. Open applicatiebeheer op uw smartphone.
3. Tik op **Tandem t:slim**. Het kan zijn dat u door uw lijst met toepassingen moet scrollen om deze bij uw apps te vinden.
4. Tik op **Geforceerd afsluiten**.
5. Open de Tandem t:slim-app opnieuw.

▲ VOORZORGSMAATREGEL

Laat uw Tandem t:slim-app **ALTIJD** op de achtergrond uitvoeren, zodat pompwaarschuwingen, alarmen en meldingen op uw smartphone kunnen worden weergegeven. Deze meldingen worden alleen ontvangen wanneer de Tandem t:slim-app actief is of op de achtergrond draait. Als u uw Tandem t:slim-app sluit of geforceerd stopt, wordt deze niet uitgevoerd op de achtergrond.


Probeer de pomp opnieuw te koppelen als het probleem aanhoudt:

1. Tik in de Tandem t:slim-app op **Instellingen**.

2. Tik op App.
3. Tik op Gekoppelde pomp.
4. Tik op Pomp ontkoppelen.
5. Herhaal het koppelingsproces zoals getoond in [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#).

4.8 Dashboardscherm Tandem t:slim-app

1. **Batterijniveau pomp:** geeft de resterende batterijcapaciteit van de pomp weer. Wanneer de pomp is aangesloten om te worden opgeladen, wordt het laadpictogram (bliksemschicht) weergegeven.
2. **Meest recente bloedglucosewaarde en trendpijl.**
3. **BG-invoer:** uw BG-waarde op het moment dat u deze hebt ingevoerd in uw boluscalculator.
4. **Grafiek van meest recente glucosewaarden:** toont CGM-sensorwaarden van de afgelopen 24 uur. U kunt naar links en rechts vegen om alle 24 uur in de grafiek te zien. In deze grafiek worden ook bloedglucosemetingen (BG) weergegeven die zijn ingevoerd in de boluscalculator.
5. **Toegediende bolus:** de hoeveelheid bolusinsuline die daadwerkelijk is toegediend voor een bepaald bolusvoorval.
6. **Basaal toegediend:** de als basaal toegediende hoeveelheid insuline in de afgelopen periode van 24 uur. Dit omvat wijzigingen in de insulinetoeiening met betrekking tot het gebruik van Control-IQ™-technologie.
7. **Status:** geeft de huidige pompinstellingen en de status van de insulinetoeiening weer. Veeg naar boven om naar beneden te scrollen in de Tandem t:slim-app en bekijk de volledige statusinformatie. Dit scherm kan enigszins variëren afhankelijk van het type CGM dat u gebruikt.
8. **Navigatiebalk:** toont pictogrammen van elke pagina van de mobiele app. Het pictogram voor de actieve Tandem t:slim-app-pagina is blauw gemarkeerd.
9. **Insulineniveau:** geeft de actuele hoeveelheid insuline in het reservoir weer. U kunt ook op het pictogram voor insulineniveau tikken om automatisch naar beneden te scrollen en volledige statusinformatie te bekijken.
10. **Actieve insuline (AI):** resterende hoeveelheid en tijd van de actieve insuline.
11. **Dashboard:** geeft de pompstatusbalk, actuele glucosemeting, AI-status, CGM-grafiek, informatie over het tijdbereik en de actuele status weer.
12. **Bolus:** navigeer naar het scherm *Bolus* om een bolus te programmeren en toe te dienen (alleen beschikbaar bij compatibele apparaten).
13. **Meldingen:** geeft actieve pompwaarschuwingen, -alarmen, -herinneringen en -storingen weer. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) voor meer informatie.
14. **Instellingen:** navigeer naar het scherm *Instellingen* met CGM-informatie, app-meldingsinstellingen, instellingen voor de Tandem t:slim-app zelf en Help.

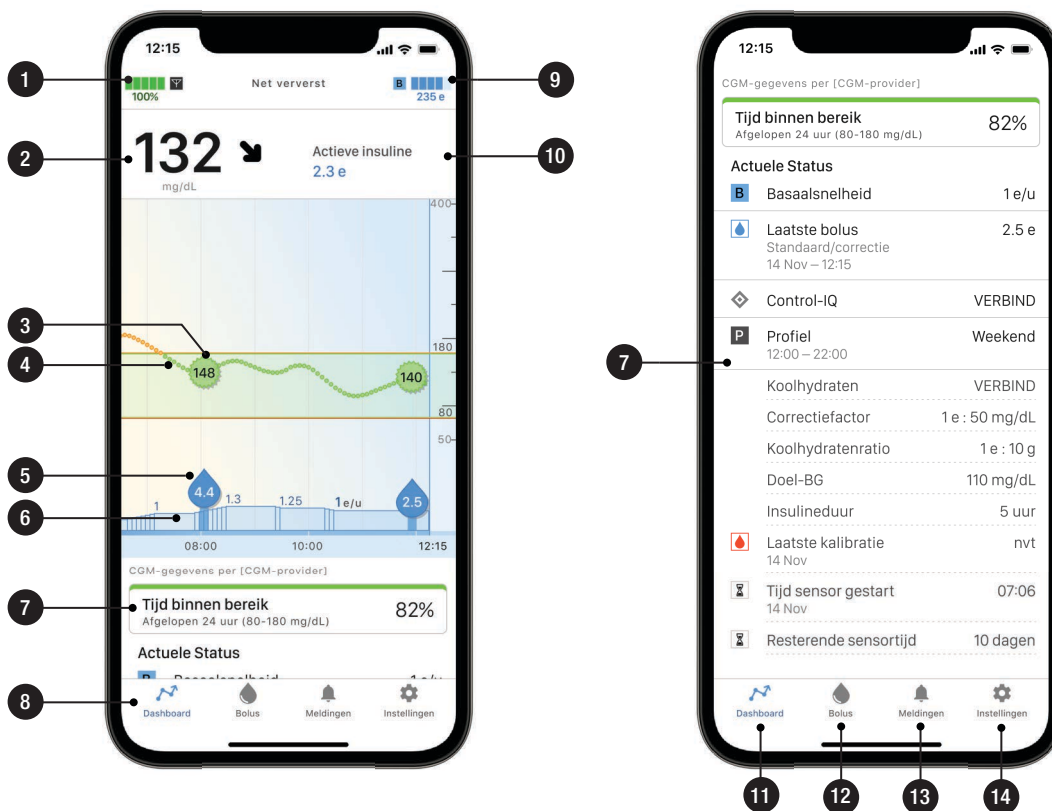

4.9 Scherm Bolus van de Tandem t:slim-app

1. **Annuleren:** verlaat het scherm *Bolus* en ga terug naar het dashboard.
2. **Eenheden:** geeft het totale aantal berekende eenheden weer. Tik hierop om een bolusaanvraag in te voeren of om een berekende bolus te wijzigen (overschrijven).
3. **Insuline:** voer het aantal eenheden insuline in. U kunt deze instelling op de pomp wijzigen naar gram koolhydraten. Raadpleeg [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#) voor meer informatie.
4. **Berekening toediening:** berekent automatisch de hoeveelheid bolusinsuline die daadwerkelijk is toegediend voor een bepaald bolusvoerval, inclusief een overzicht van de berekende correctiebolus, de bolus voor ingenomen voeding en de actieve insuline (AI).

5. **Volgende:** accepteer de invoer van wijzigingen in het scherm *Bolus* en ga naar het scherm *Bolusbevestiging*.

6. **Bloedglucose:** voer de BG- of sensorglucosespiegel in. Deze waarde wordt automatisch ingevuld als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Control-IQ-technologie is ingeschakeld en beschikbaar
- Er is een CGM-sessie actief
- Er is een CGM-waarde aanwezig
- Er is een CGM-trendpijl beschikbaar op het *CGM-startscherm*

OPMERKING


Raadpleeg de gebruikershandleiding van de CGM-fabrikant voor meer informatie over CGM-trendpijlen en hoe u deze kunt gebruiken voor behandelbeslissingen. U kunt ook [Deel 25.3 Pijlen voor veranderingssnelheid](#) raadplegen.

7. **Koolhydraten:** aantal gram koolhydraten invoeren. U kunt deze

waarde wijzigen naar eenheden insuline. Raadpleeg [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#) voor meer informatie.

8. **Toetsenbordcijfers.**

9. **Gereed:** Hiermee wordt de taak voltooid en de ingevoerde informatie opgeslagen.

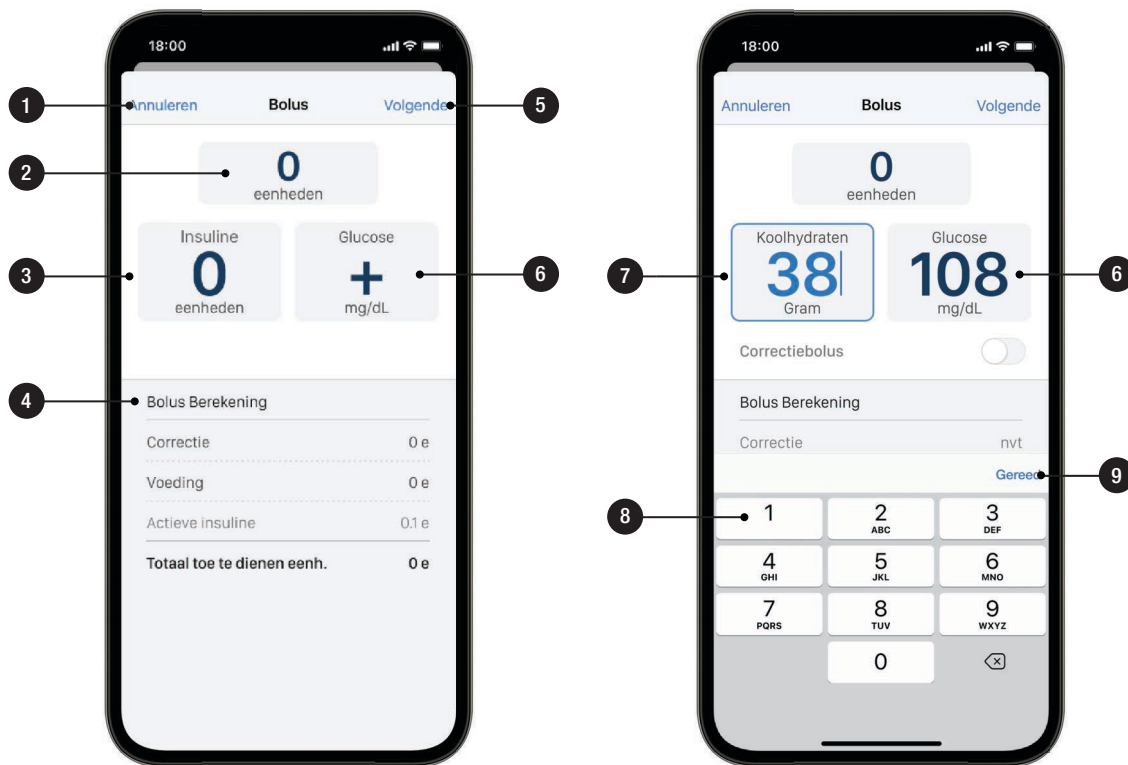


4.10 Scherm Meldingen van de Tandem t:slim-app

⚠️ VOORZORGSMAATREGEEL

Pompmeldingen kunnen niet worden gewist vanuit uw Tandem t:slim-app. Pompwaarschuwingen, -alarmen en -meldingen kunnen worden bekeken op uw smartphone, maar moeten worden gewist op de t:slim X2-pomp.

1. **Alarm:** toont een pompalarm. Alarmen worden in de Tandem t:slim-app rood omlijnd.
2. **Waarschuwing:** toont een pompwaarschuwing. Waarschuwingen worden in de Tandem t:slim-app geel omlijnd.
3. **Herinnering:** toont een pompherinnering. Herinneringen worden in de Tandem t:slim-app blauw omlijnd.
4. **Ontslaan:** Verschijnt als u een waarschuwing melding (geel omlijnd) met uw vinger naar links schuift. Tik op dit pictogram om de waarschuwing te negeren.
5. **Verwijderen:** verschijnt als u een herinnering of informatieve melding (blauw omlijnd) met uw vinger naar links schuift. Tik op dit pictogram om de herinnering of het informatieve bericht te verwijderen.
6. **Dashboard:** geeft de pompstatusbalk, actuele glucosemeting, AI-status, CGM-grafiek, informatie over het tijdbereik en de actuele status weer.
7. **Bolus:** navigeer naar het scherm *Bolus* om een bolus te programmeren en toe te dienen (alleen beschikbaar bij compatibele apparaten).
8. **Meldingen:** geeft actieve pompwaarschuwingen, -alarmen, -herinneringen en -storingen weer. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) voor meer informatie.
9. **Instellingen:** navigeer naar het scherm *Instellingen* met CGM-informatie, app-meldingsinstellingen, instellingen voor de Tandem t:slim-app zelf en Help.

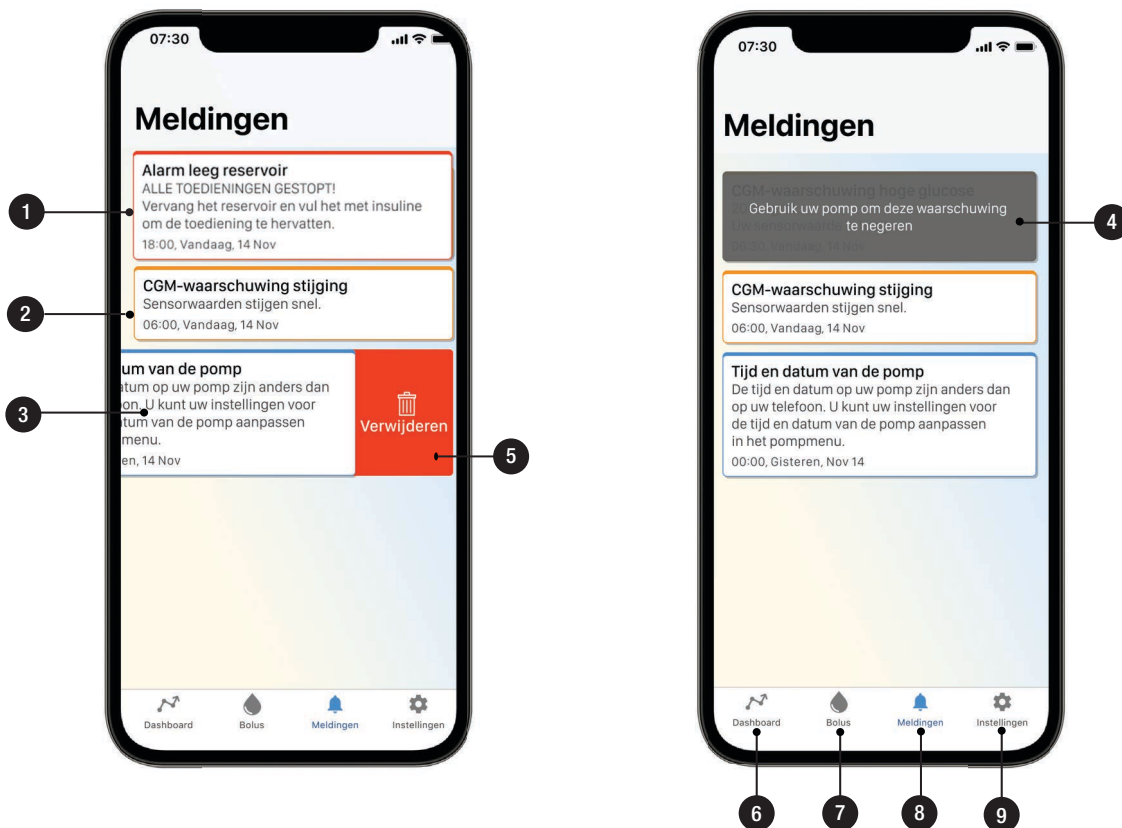


4.11 Scherm Instellingen van de Tandem t:slim-app

1. **CGM:** bekijk CGM-informatie voor de huidige sensor sessie.
2. **Waarschuwingen en geluiden:** schakel push-meldingen in of uit (bijv. pompwaarschuwingen en -alarmen, CGM-waarschuwingen en -fouten) en krijg rechtstreeks toegang tot de instellingen van het besturingssysteem van uw smartphone die relevant zijn voor de Tandem t:slim-app (bijv. om mobiel gegevensgebruik voor het uploaden van gegevens al dan niet toe te staan).
3. **App:** bekijk accountinformatie, gegevens van de gekoppelde pomp, gegevensbeheer, weergave-instellingen voor grafieken, geschiedenis van de pomp en CGM en aanvullende informatie over Tandem en het bedrijfsbeleid.
4. **Help:** krijg toegang tot Help-informatie in de app, waaronder veelgestelde vragen, de gebruikershandleiding voor de pomp, een lijst met pictogrammen en afbeeldingen en een app-handleiding met informatie over de compatibiliteit van smartphones, het instellen van uw smartphone en het oplossen van problemen.
5. **Dashboard:** geeft de pompstatusbalk, actuele glucosemeting, AI-status, CGM-grafiek, informatie over het tijdsbereik en de actuele status weer.
6. **Bolus:** navigeer naar het scherm *Bolus* om een bolus te programmeren en toe te dienen (alleen beschikbaar bij compatibele apparaten).
7. **Meldingen:** geeft actieve pompwaarschuwingen, -alarmen, -herinneringen en -storingen weer. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) voor meer informatie.
8. **Instellingen:** navigeer naar het scherm *Instellingen*, met CGM-informatie, instellingen voor meldingen van de app, instellingen voor de Tandem t:slim-app zelf en Help.




4.12 Instellingen van de Tandem t:slim-app – scherm App

1. **Instellingen:** keer terug naar het scherm *Instellingen*.
 2. **Account:** werk accountgegevens bij, waaronder uw naam, geboortedatum, e-mailadres en beveiligingsvraag.
 3. **Gekoppelde pomp:** bekijk en beheer welke pomp is gekoppeld aan uw Tandem t:slim-app.
-  **OPMERKING**
Gebruik altijd de Tandem t:slim-app om uw pomp te koppelen aan uw smartphone. Probeer niet het Bluetooth-menu van uw smartphone te gebruiken.
4. **Gegevensbeheer:** beheer het gegevensgebruik van de Tandem t:slim-app.
 5. **Grafische weergave:** werk de doelstellingen bij voor het in kaart brengen van de glucosewaarden en de frequentie voor het vervangen van het reservoir en de infusieset.
 6. **Over:** krijg toegang tot aanvullende informatie, waaronder verschillende productidentificaties, links naar belangrijke veiligheidsinformatie, toestemmingsverklaringen en gebruiksaanwijzingen.
 7. **Dashboard:** geeft de pompstatusbalk, actuele glucosemeting, AI-status, CGM-grafiek, informatie over het tijdbereik en de actuele status weer.
 8. **Bolus:** navigeer naar het scherm *Bolus* om een bolus te programmeren en toe te dienen (alleen beschikbaar bij compatibele apparaten).
 9. **Meldingen:** geeft actieve pompwaarschuwingen, -alarmen, -herinneringen en -storingen weer. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) voor meer informatie.
 10. **Instellingen:** navigeer naar het scherm *Instellingen*, met CGM-informatie, instellingen voor meldingen van de app, instellingen voor de Tandem t:slim-app zelf en Help.

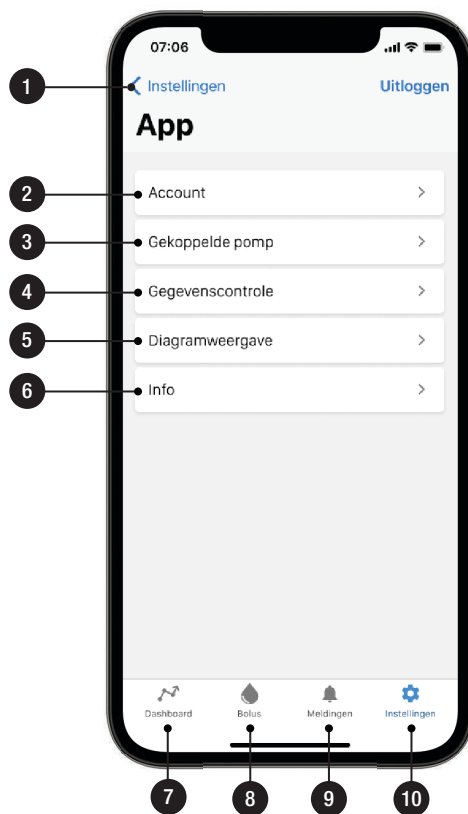

4.13 Instellingen van de Tandem t:slim-app – scherm Help

1. **Instellingen:** keer terug naar het scherm *Instellingen*.
2. **Lijst van pictogrammen en afbeeldingen:** bekijk een lijst met pictogrammen en symbolen die in de Tandem t:slim-app worden gebruikt.
3. **Bediening gebruikershandleiding pomp:** bekijk de meest recente gebruikershandleiding voor de pomp in een afzonderlijk browservenster.
4. **Veelgestelde vragen:** bekijk de Help-artikelen voor de mobiele app in een afzonderlijk browservenster.
5. **Apphandleiding:** bekijk informatie over het gebruik van de app, waaronder smartphonecompatibiliteit, het instellen van uw smartphone en informatie over probleemoplossing.
6. **Dashboard:** geeft de pompstatusbalk, actuele glucosemeting, AI-status, CGM-grafiek, informatie over het tijdbereik en de actuele status weer.
7. **Bolus:** navigeer naar het scherm *Bolus* om een bolus te programmeren en toe te dienen (alleen beschikbaar bij compatibele apparaten).
8. **Meldingen:** geeft actieve pompwaarschuwingen, -alarmen, -herinneringen en -storingen weer. Raadpleeg [Deel 4.4 Mobiele meldingen instellen](#) voor meer informatie.
9. **Instellingen:** navigeer naar het scherm *Instellingen* met CGM-informatie, instellingen voor meldingen van de app, instellingen voor de Tandem t:slim-app zelf en Help.

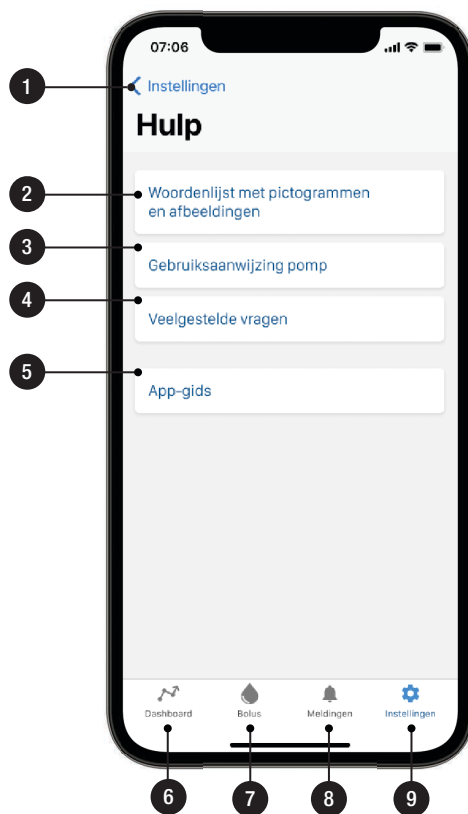

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 5

Aan de slag

5.1 De t:slim X2-pomp opladen

De pomp wordt gevoed door een interne oplaadbare lithiumpolymeerbatterij. Met een volledig opgeladen batterij doet u doorgaans 4 tot 7 dagen, afhankelijk van uw gebruik van CGM en de Tandem t:slim™-app. Als u zowel CGM als de Tandem t:slim-app gebruikt, gaat uw batterij naar verwachting tot 4 dagen mee. Op basis van individueel gebruik, waaronder de toegediende insuline, de tijd waarin de display aan is, en de frequentie van herinneringen, waarschuwingen en alarmen kan een geheel geladen batterij soms aanzienlijk korter of langer meegaan.

Bij de pomp zijn accessoires inbegrepen voor het opladen via het stopcontact, evenals via een USB-poort van uw pc. Gebruik uitsluitend de met uw systeem meegeleverde accessoires om de pomp op te laden. Neem contact op met de klantenservice in uw regio als u accessoires bent kwijtgeraakt of deze vervangen moeten worden.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** de USB-kabel die bij uw t:slim X2™-insulinepomp is geleverd om het risico op brand of brandwonden te minimaliseren.

De batterijniveau-indicator wordt linksboven op het *startscherm* weergegeven. De batterijcapaciteit neemt af of toe in stappen van 5% (bijvoorbeeld 100%, 95%, 90%, 85%). Wanneer de capaciteit minder is dan 5%, vermindert deze in stappen van 1% (bijvoorbeeld 4%, 3%, 2%, 1%).

Wanneer u uw pomp ontvangt, moet u deze eerst aansluiten op een oplaadbron voordat u de pomp kunt gebruiken. Laad de pomp op totdat de batterijniveau-indicator linksboven op het *startscherm* 100% weergeeft (de eerste keer opladen kan tot 2,5 uur duren).

Tandem Diabetes Care raadt aan om periodiek de batterijniveau-indicator te controleren, de pomp elke dag korte tijd (10 tot 15 minuten) op te laden en te voorkomen dat de batterij vaak volledig leeg raakt.

📌 OPMERKING

Als de batterij volledig leeg is, is het mogelijk dat het scherm van de pomp niet onmiddellijk opstart wanneer de pomp wordt aangesloten op een oplaadbron. De LED rond de knop **Schermbaan/Snelle bolus** knippert groen totdat er genoeg capaciteit is om het aanraakscherm op te starten.

De pomp blijft tijdens het opladen normaal werken. U hoeft de pomp tijdens het opladen niet los te koppelen.

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

ZORG ervoor dat u binnen de lengte van de USB-kabel blijft wanneer u op de pomp en op een oplaadbron bent aangesloten. Als u verder gaat dan de lengte van de USB-kabel, kan de canule uit de infuusplaats worden getrokken. Om deze reden wordt aanbevolen om de pomp niet op te laden terwijl u slaapt.

📌 OPMERKING

Zorg dat de oplaadkabel tijdens het opladen uitgelijnd blijft met de USB-poort van de pomp. Spanning op de oplaadkabel kan de pomp beschadigen.

Als u de pomp wilt ontkoppelen tijdens het opladen, raadpleeg dan eerst uw zorgverlener voor specifieke

aanwijzingen. Afhankelijk van hoelang u niet bent aangesloten, is het mogelijk dat u gemiste basaal- en/of bolusinsuline moet toedienen. Controleer uw BG voordat u de pomp ontkoppelt en opnieuw wanneer u hem weer aansluit.

De pomp opladen via een contactdoos:

1. Steek de meegeleverde USB-kabel in de netadapter.
2. Steek de netadapter in een geaarde contactdoos.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro-USB-poort van de pomp. Lijn het Tandem-logo op de kabel uit met het Tandem-logo op de pomp.

Ga als volgt te werk om de pomp op te laden via een USB-poort van een computer:

Controleer of de computer voldoet aan de veiligheidsnorm IEC 60950-1 (of gelijkwaardig).

1. Steek de meegeleverde USB-kabel in uw computer.

2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro-USB-poort van de pomp. Lijn het Tandem-logo op de kabel uit met het Tandem-logo op de pomp.

De oplaadtijd kan per computer verschillen. Als de pomp niet goed wordt opgeladen, wordt het bericht Waarsch. aansluitingsfout weergegeven.

Ga als volgt te werk om de pomp op te laden met een USB-adapter voor de auto:

▲ WAARSCHUWING

Als u de optionele USB-autoadapter gebruikt, moet de lader zijn aangesloten op een geïsoleerd, door een accu gevoed 12V-systeem, zoals in een auto. Het is verboden om de autoadapter aan te sluiten op een elektrische voeding van 12 V gelijkspanning die wordt gegenereerd via netvoeding (wisselspanning).

1. Steek de USB-kabel in de USB-autoadapter.
2. Steek de USB-autoadapter in een geaarde voedingsaansluiting.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro-USB-poort van de

pomp. Lijn het Tandem-logo op de kabel uit met het Tandem-logo op de pomp.

Wanneer u de pomp oplaadt, zult u het volgende opmerken:

- Het scherm licht op
- Een geluidswaarschuwing
- De LED (rand rond de knop **Schermbaan/Snelle bolus**) knippert groen
- Een trillende waarschuwing
- Er verschijnt een laadsymbool (bliksemflits) op de batterijniveau-indicator.

▲ VOORZORGSMAATREGEL

CONTROLEER of het scherm inschakelt, u pieptonen hoort, de pomp voelt trillen en de groene LED ziet knipperen rond de rand van de knop **Schermbaan/Snelle bolus** wanneer u een energiebron aansluit op de USB-poort. Deze functies worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van waarschuwingen, alarmen en andere situaties die uw aandacht vereisen. Staak het gebruik van de t:slim X2-pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als deze functies niet werken.

5.2 Het aanzetten van de pomp

Sluit uw pomp aan op een oplaadbron. De pomp maakt een hoorbaar geluid wanneer deze is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.

5.3 Gebruik van het aanraakscherm

Druk om uw pompscherm aan te zetten eerst op de knop **Scherm aan/Snelle bolus** en tik daarna snel en licht met uw vingertop op het scherm. Gebruik niet uw vingernagel of een ander voorwerp om te communiceren met het scherm. Hierdoor wordt het scherm of de functies daarvan niet geactiveerd.

De pomp is ontworpen om u snel en eenvoudig toegang te geven tot de functies die u gebruikt bij de dagelijkse beheersing van uw diabetes, zowel basisfuncties als meer gevorderde functies.

De pomp heeft een aantal veiligheidsfuncties om onbedoelde interactie met het aanraakscherm te voorkomen. Het scherm moet worden ontgrendeld door achtereenvolgend op

1–2–3 te tikken. Voor alle schermen geldt dat wanneer drie niet-actieve delen van het aanraakscherm worden aangetikt voordat een actief deel wordt aangetikt, het scherm wordt uitgeschakeld om onbedoelde interactie met het scherm te voorkomen. Er is tevens een beveiligingspin die kan worden ingesteld om onbedoelde toegang te voorkomen. Zie [Deel 5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen](#).

OPMERKING

Tijdens het gebruik van de pomp kunt u terugkeren naar het *startscherm* door op het **Tandem-logo** te tikken of naar het vorige scherm door op  te tikken.

5.4 Het t:slim X2-pompscherm inschakelen

Druk eenmaal op de knop **Scherm aan/Snelle bolus** boven op de pomp om uw pompscherm aan te zetten.

- ✓ Het *vergrendelingsscherm* wordt weergegeven.

5.5 Uw taal selecteren

Het scherm *Taalkeuze* wordt weergegeven wanneer u het pompscherm voor de eerste keer ontgrendelt of wanneer u het scherm ontgrendelt nadat de pomp is uitgeschakeld.

Uw taal selecteren:

1. Tik op de cirkel naast de taal die u wilt gebruiken. Tik op de **pijl-omlaag** om aanvullende taalselecties te zien.



2. Tik op  om de selectie op te slaan en door te gaan met het instellen van de pomp.

5.6 Het pompscherm uitschakelen

Om het pompscherm uit te schakelen, drukt u kort op de knop **Scherm aan/Snelle bolus**. Hierdoor wordt het scherm uitgeschakeld, maar niet de pomp.

OPMERKING

Schakel het pompscherm altijd uit voordat u de pomp terug in de houder of in uw zak/kleding doet. Plaats het pompscherm altijd weg van de huid.

De pomp blijft normaal functioneren wanneer het scherm niet aan is.

5.7 De pomp uitschakelen

Om de pomp volledig uit te schakelen, sluit u de pomp aan op een stroombron en houdt u de knop **Scherm aan/Snelle bolus** 30 seconden ingedrukt.

5.8 Het t:slim X2-pompscherm ontgrendelen

Het *vergrendelingsscherm* verschijnt altijd wanneer u het scherm aan zet en ook nadat een bolus of tijdelijke snelheid is aangevraagd. Het scherm ontgrendelen:

1. Druk op de knop **Scherm aan/Snelle bolus**.
 2. Tik op 1.
 3. Tik op 2.
 4. Tik op 3.
- ✓ Het pompscherm is nu ontgrendeld. Het laatste scherm dat werd bekeken wordt weergegeven.

Tik een voor een op **1–2–3** om de pomp te ontgrendelen. Als u **1–2–3** niet een voor een aantikt, laat de pomp u de ontgrendelingsreeks opnieuw vanaf het begin uitvoeren.

Als de beveiligingspinfunctie is ingeschakeld, moet u uw beveiligingspin invoeren nadat het scherm is ontgrendeld.

5.9 Tijd bewerken

Nadat u uw pomp voor de eerste keer hebt opgestart, moet u de actuele tijd en datum instellen. Raadpleeg deze paragraaf als u de tijd moet bewerken omdat u in een andere tijdzone reist of omdat u de tijd moet aanpassen aan winter- of zomertijd.

▲ VOORZORGSMATREGEEL

Zorg **ALTIJD** dat de juiste tijd en datum zijn ingesteld in uw pomp. Als de tijd en datum niet goed zijn ingesteld, kan dat een veilige toediening van insuline verhinderen. Controleer bij het bewerken van de tijd altijd of de AM/PM-instelling juist is, als u de 12-uursklok gebruikt. AM is voor het gebruik van middernacht tot 11:59 uur. PM moet van 12 uur 's middags tot 23:59 uur worden gebruikt.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op **Tijd en datum**.
5. Tik op **Tijd bewerken**.
6. Tik op **Tijd**.
7. Voer de uren en minuten in met het toetsenbord op het scherm. Controleer de invoer en tik op .
8. Tik op **Tijdstip** om AM of PM te wijzigen, of tik op **24-uursklok** om die instelling in te schakelen.

- Controleer of de juiste tijd is ingesteld en tik op .

Wijzigingen van de tijd of datum worden pas opgeslagen wanneer u op  tikt.

5.10 Datum bewerken

- Tik op het scherm *Tijd en datum* op **Datum bewerken**.
- Tik op **Dag**.
- Voer de dag van vandaag in met het toetsenbord op het scherm. Controleer de invoer en tik op .
- Tik op **Maand**.
- Zoek en tik op de actuele maand, die rechts wordt weergegeven. Gebruik de **Pijl omhoog/omlaag** om de maanden te zien die niet worden weergegeven.
- Tik op **Jaar**.
- Voer het actuele jaar in met het toetsenbord op het scherm. Controleer de invoer en tik op .

- Controleer of de juiste datum is ingesteld en tik op .

5.11 Basale grens

Met de instelling Basale grens kunt u een limiet instellen voor de basaalsnelheid die in de persoonlijke profielen is ingesteld, evenals de hoeveelheid insuline die wordt toegediend bij gebruik van een tijdelijke snelheid.

U kunt geen basaalsnelheden of tijdelijke basaalsnelheden instellen die de basale grens overschrijden. U kunt de basale grens instellen van 0,2 tot 15 eenheden per uur. Overleg met uw zorgverlener om de juiste basale grens in te stellen.

OPMERKING

Als u uw basale grens instelt nadat u uw persoonlijke profielen hebt ingesteld, kunt u uw basale grens niet lager instellen dan uw bestaande basaalsnelheden. Zie [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#).

- Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
- Tik op **Mijn pomp**.

- Tik op **Persoonlijke profielen**.
- Tik op **Pompinstellingen**.
- Tik op **Basale grens**.



- Gebruik het toetsenbord op het scherm om een basale grens in te voeren tussen 0,2 en 15 eenheden.
- Tik op .
- Controleer de nieuwe basale grenswaarde en tik op .
- Bevestig de instellingen en tik op .
- ✓ Het scherm *INSTELLING OPGESLAGEN* wordt tijdelijk weergegeven.

De standaard basale grens is 3 eenheden per uur. Als u uw pomp bijwerkt vanaf een versie die niet eerder de instelling Basale grens had, wordt de Basale grens ingesteld op een waarde die twee keer de hoogste basaalsnelheid van uw pomp is.

OPMERKING

Als de Control-IQ-technologie is ingeschakeld, kan de basale grens worden overschreden als de Control-IQ-technologie voorspelt dat u meer insuline nodig hebt om binnen uw streefbereik te blijven. Het instellen van de basale grens heeft geen invloed op uw Control-IQ-instellingen.

5.12 Weergave-instellingen

Bij de scherminstellingen voor uw t:slim X2-pomp vindt u ook een time-outscherf.

Via het scherm Time-out kunt u instellen hoelang het scherm aan blijft voordat het automatisch wordt uitgeschakeld. De standaardwaarde voor het scherm Time-out is 30 seconden. De opties zijn 15, 30, 60 en 120 seconden.

U kunt het scherm altijd uitschakelen voordat het automatisch wordt uitgeschakeld door op de knop **Scherf aan/Snelle bolus** te drukken.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op **Weergave-instellingen**.
5. Tik op **Time-outscherf**.
6. Selecteer de gewenste tijd en tik op .

5.13 Geluidsvolume

Het geluidsvolume is vooraf ingesteld op hoog. Geluidsvolume kan worden gepersonaliseerd voor alarfen, waarschuwingen, herinneringen, toetsenbord, bolus, snelle bolus en slang vullen. Opties voor geluidsvolume zijn onder meer hoog, gemiddeld, laag en trillen.

VOORZORGSMAATREGEL

Gebruik de trilfunctie voor waarschuwingen en alarfen **NIET** terwijl u slaapt, tenzij uw zorgverlener hiervoor toestemming geeft. Door het volume voor waarschuwingen en alarfen op hoog in te stellen, voorkomt u dat u een waarschuwing of alarm niet opmerkt.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op **Geluidsvolume**.
5. Tik op de gewenste optie. Gebruik de **Pijl omhoog/omlaag** om extra opties weer te geven.
6. Selecteer het gewenste volume.
7. Ga door met het aanbrengen van wijzigingen voor alle opties voor geluidsvolumedoor de stappen 5 en 6 te herhalen.
8. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

5.14 Beveiligingspin in- of uitschakelen

De beveiligingspin is vooraf ingesteld op uit. Als de beveiligingspin is ingeschakeld, kunt u de pomp alleen ontgrendelen en gebruiken als u de beveiligingspin invoert. Volg deze stappen om de beveiligingspin in te stellen.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op de **Pijl omlaag**.
5. Tik op **Beveiligingspin**.
6. Tik op **Beveiligingspin om de functie in te schakelen**.
7. Tik op  om uw beveiligingspin aan te maken.
8. Voer met het toetsenbord een getal van vier tot zes cijfers in. De beveiligingspin mag niet met het getal nul beginnen.

9. Tik op .

10. Tik op  om de beveiligingspin te verifiëren.

11. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe beveiligingspin te herhalen en te verifiëren.

12. Tik op .

✓ Het scherm *PIN AANGEMAAKT* wordt weergegeven.

13. Tik op  om de beveiligingspin in te schakelen.

14. Tik op .

De beveiligingspin kan worden gewijzigd en een oude beveiligingspin kan worden overschreven als u de beveiligingspin bent vergeten.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op de **Pijl omlaag**.
5. Tik op **Beveiligingspin**.

6. Tik op **Beveiligingspin wijzigen**.

7. Tik op .

8. Voer met het toetsenbord de huidige beveiligingspin in. Als u uw beveiligingspin bent vergeten, gebruikt u overschrijvingscode **314159**.

» U kunt de overschrijvingscode zo vaak als u wilt gebruiken; hij wordt nooit gereset of in een andere pin gewijzigd. U kunt hem gebruiken om de pomp te ontgrendelen als de beveiligingspin is ingeschakeld. U kunt ook deze code desgewenst als geldige beveiligingspin gebruiken.

9. Tik op .

10. Tik op  om een nieuwe beveiligingscode in te voeren.

11. Gebruik het toetsenbord om een nieuwe beveiligingspin in te voeren.

12. Tik op .

13. Tik op  om de nieuwe beveiligingspin te verifiëren.

14. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe beveiligingspin te herhalen en te verifiëren.

15. Tik op .

✓ Het scherm *PIN BIJGEWERKT* wordt weergegeven.

16. Tik op .

5.15 Mobiele verbinding

U kunt de pomp verbinden met één compatibele smartphone om pompinformatie te bekijken en een aantal pompfuncties uit te voeren op die smartphone met behulp van de Tandem t:slim-app. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor gedetailleerde instructies voor het koppelen of ontkoppelen van uw smartphone en uw pomp.

OPMERKING

Schakel de mobiele verbinding niet in als u de Tandem t:slim-app niet gebruikt of hier niet over kunt beschikken. Het inschakelen van de mobiele verbinding kan de levensduur van de pompbatterij negatief beïnvloeden.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 6

Instellingen insulinetoediening

6.1 Overzicht persoonlijke profielen

⚠ WAARSCHUWING

Start de pomp **NIET** voordat u met uw zorgverlener hebt besproken welke functies het meest geschikt zijn voor u. Alleen uw zorgverlener kan uw basaalsnelheid/-snelheden, koolhydratenverhouding(en), correctiefactor(en), doel-BG en duur van de insulinewerking bepalen en u helpen met het aanpassen daarvan. Bovendien kan alleen uw zorgverlener bepalen wat uw CGM-instellingen horen te zijn en hoe u de trendgegevens van uw sensor moet gebruiken bij de behandeling van uw diabetes. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

Een persoonlijk profiel is een groep instellingen waarmee de toediening van basale en bolusinsuline binnen specifieke tijdsegmenten over een periode van 24 uur wordt bepaald. Elk profiel kan worden gepersonaliseerd met een naam. Binnen een persoonlijk profiel kan het volgende worden ingesteld:

- **Getimedede instellingen:** basaalsnelheid, correctiefactor, koolhydratenratio en doel-BG.
- **Bolusinstellingen:** insulineduur en koolhydrateninstelling (aan/uit).

📌 OPMERKING

Om de Control-IQ™-technologie in te schakelen, moeten de tijdstellingen voor elk tijdsegment zijn ingevuld en moet de koolhydrateninstelling zijn ingeschakeld in de bolusinstellingen.

De t:slim X2-pomp gebruikt de instellingen in uw actieve profiel om de toediening van basale insuline, voedingsbolussen en correctiebolussen te berekenen op basis van uw doel-BG. Als u alleen een basaalsnelheid definieert in Getimedede instellingen, kan uw pomp alleen basale insuline en standaard en verlengde bolussen toedienen. Uw pomp berekent dan geen correctiebolussen.

Er kunnen maximaal zes verschillende persoonlijke profielen worden aangemaakt en in elk persoonlijk profiel kunnen maximaal 16 verschillende tijdsegmenten worden ingesteld. Met meerdere persoonlijke profielen hebt u meer flexibiliteit voor uw lichaam en

levensstijl. U kunt bijvoorbeeld profielen instellen voor doordeweekse dagen en voor het weekend als u op weekdays en in het weekend verschillende insulinebehoeften hebt, afhankelijk van uw dagindeling, voedselinname, activiteit enz.

📌 OPMERKING

Sommige instellingen in het persoonlijk profiel worden genegeerd wanneer de Control-IQ-technologie wordt ingeschakeld. Zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

Wanneer u een persoonlijk profiel aanmaakt, kunt u één of meer van de volgende getimedede instellingen instellen:

- **Basaalsnelheid** (uw basaalsnelheid in eenheden/uur)
- **Correctiefactor** (de hoeveelheid waarmee de BG wordt verlaagd door 1 eenheid insuline)
- **Koolhydratenratio** (aantal gram koolhydraten dat door 1 eenheid insuline wordt omgezet)
- **Doel-BG** (uw ideale bloedglucosegehalte, gemeten in mg/dl)

Hoewel u niet elke instelling hoeft te definiëren, vereisen sommige pompfuncties dat bepaalde instellingen worden gemaakt en geactiveerd. Wanneer u een nieuw profiel aanmaakt, vraagt uw pomp u om de vereiste instellingen te maken voordat u kunt doorgaan.

De bereiken die u kunt instellen voor Getimed instellingen zijn:

- Basaal (bereik: 0 en 0,1 tot 15 eenheden/uur)

OPMERKING

De basaalsnelheid mag de Basale grens die is ingesteld in Pompinstellingen ([Deel 5.11 Basale grens](#)) niet overschrijden. Als u uw basale grens instelt nadat u uw persoonlijke profielen hebt ingesteld, kunt u uw basale grens niet lager instellen dan uw bestaande basaalsnelheden.

OPMERKING

Als de Control-IQ-technologie is ingeschakeld en de pomp gedurende 20 minuten geen CGM-waarde heeft ontvangen, zal de pomp uw basaalsnelheid automatisch beperken tot maximaal 3 eenheden/uur. Voorbeelden van CGM-metingen die niet worden ontvangen, zijn onder meer wanneer de pomp en CGM

buiten bereik zijn, tijdens de opstartperiode van de sensor of wanneer een sensorsessie eindigt. Als u een waarde voor uw basaalsnelheid invoert die hoger is dan 3 eenheden/uur, krijgt u in dit scenario minder insuline dan verwacht.

WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur wanneer de pomp gedurende 20 minuten geen CGM-meting heeft ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer de pomp en CGM buiten bereik zijn, tijdens de opstartperiode van de sensor, wanneer een sensorsessie eindigt of wanneer er een zender- of sensorfout is. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens deze scenario's.

- Correctiefactor (bereik: 1 eenheid: 1 mg/dl tot 1 eenheid: 600 mg/dl)
- Koolhydratenratio (bereik: 1 eenheid:1 gram tot 1 eenheid: 300 gram)

Onder een koolhydratenratio van 1:10 kan de waarde worden gewijzigd in stappen van 0,1 gram. Zo kunt u bijvoorbeeld een

koolhydratenratio van 1:8,2 programmeren.

- Doel-BG (bereik: 70 mg/dl tot 250 mg/dl)

Bovendien kunt u een of meer van de volgende bolusinstellingen instellen:

- Insulineduur (geeft aan hoelang de insuline actief en beschikbaar is in het lichaam nadat een bolus is toegediend)
- Koolhydraten (AAN betekent invoeren aantal gram koolhydraten; UIT betekent invoeren aantal eenheden insuline)

OPMERKING

Door de koolhydrateninstelling op de pomp te wijzigen, worden de boluscalculatoren op de pomp en in de Tandem t:slim™-app gewijzigd

De standaardinstellingen en -bereiken voor bolusinstellingen zijn:

- Insulineduur (standaard: 5 uur; bereik: 2 tot 8 uur)

OPMERKING

Bij gebruik van Control-IQ-technologie is de insulineduur ingesteld op vijf uur en kan

niet worden gewijzigd. Deze duur wordt gebruikt voor alle bolustoedieningen en voor basale aanpassingen door de Control-IQ-technologie.

- Koolhydraten (standaard: afhankelijk van pompgeschiedenis)

OPMERKING

Als u een nieuwe pomp met Control-IQ-technologie hebt ontvangen, is de standaardinstelling: aan. Als u uw pomp heeft bijgewerkt, is de standaardinstelling hetzelfde als wat u eerder op uw pomp hebt ingesteld. Controleer of de koolhydrateninstelling is ingeschakeld om de Control-IQ-technologie te gebruiken.

Insulineduur en Actieve insuline (AI)

Uw pomp onthoudt hoeveel insuline u toegediend hebt gekregen bij eerdere bolussen. Hiervoor vertrouwt de pomp op de insulineduur. De insulineduur geeft aan hoelang de insuline uw BG actief verlaagt.

Terwijl de ingestelde insulineduur aangeeft hoelang de insuline van eerdere bolussen uw BG verlaagt, geeft de AI-functie aan hoeveel insuline van eerdere bolussen er nog in uw lichaam aanwezig is. AI wordt altijd

weergegeven op het *startscherm* en wordt waar van toepassing gebruikt in toedieningsberekeningen voor bolussen. Wanneer een bloedglucosewaarde wordt ingevoerd tijdens het programmeren van een bolus, houdt uw pomp rekening met een eventuele actieve insuline en past indien nodig de berekende bolus aan.

De insulineduurtijd wordt op het *startscherm* weergegeven wanneer de Control-IQ-technologie niet is ingeschakeld.

Raadpleeg uw zorgverlener om uw insulineduur nauwkeurig in te stellen.

Als u Control-IQ-technologie hebt ingeschakeld, omvat AI alle toegediende basaal boven en onder de geprogrammeerde basaalsnelheid, naast alle toegediende bolusinsuline. De insulineduurtijd wordt niet weergegeven op het *startscherm*.

Insulineduur is ingesteld op 5 uur wanneer Control-IQ-technologie is ingeschakeld en kan niet worden gewijzigd.

6.2 Een nieuw profiel aanmaken

U kunt maximaal zes Persoonlijke profielen aanmaken; er kan echter maar één profiel tegelijk actief zijn. Op het scherm *Persoonlijke profielen* staat het actieve profiel boven aan de lijst, gemarkeerd als AAN.

Raadpleeg uw zorgverlener om de instellingen voor het persoonlijke profiel nauwkeurig vast te leggen.

Een nieuw persoonlijk profiel aanmaken:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Persoonlijke profielen**.
4. Tik op  om een nieuw profiel aan te maken.
5. Voer via het toetsenbord op het scherm een profielnaam (max. 16 tekens) in en tik op .

Gebruik van het lettertoetsenbord: tik één keer voor de eerste letter, twee keer snel voor de middelste letter of drie keer snel voor de derde letter.

6. Tik op **Drukken om in te stellen** om te beginnen met het instellen van de instellingen voor de insulinetoediening.



6.3 Een nieuw persoonlijk profiel programmeren

Nadat het persoonlijk profiel is aangemaakt, moeten de instellingen worden geprogrammeerd. Het eerste tijdsegment begint om middernacht.

- U moet een basaalsnelheid programmeren om een persoonlijk profiel te hebben dat u kunt activeren.
- Om de Control-IQ-technologie in te kunnen schakelen moet Koolhydraten zijn ingeschakeld en moeten een basaalsnelheid,


correctiefactor, koolhydratenratio en doel-BG zijn ingesteld.

- Vergeet niet om op te tikken nadat u een waarde hebt ingevoerd of gewijzigd.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

Controleer **ALTIJD** of de decimale punt juist is geplaatst wanneer u informatie in uw persoonlijk profiel invoert. Een onjuiste plaatsing van de decimale punt kan ertoe leiden dat u niet de juiste hoeveelheid insuline krijgt toegediend die uw zorgverlener heeft voorgeschreven.

Getimede instellingen

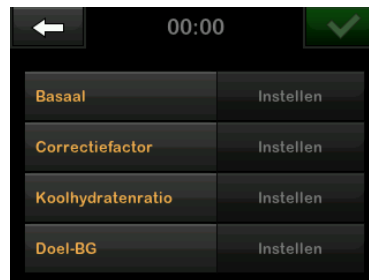

1. Tik op **Basaal** nadat het nieuwe profiel is aangemaakt.
2. Voer uw basaalsnelheid in met het toetsenbord op het scherm en tik op .

📘 OPMERKING

Als u eerder een basale grens hebt ingesteld in de pompinstellingen, moet de hier ingevoerde basaalsnelheid lager zijn dan de basale grens die is ingevoerd in de pompinstellingen.

3. Tik op **Correctiefactor**.
4. Voer met het toetsenbord op het scherm de correctiefactor in en tik op .
5. Tik op **Koolhydratenratio**.
6. Voer met het toetsenbord op het scherm uw koolhydratenratio in en tik op .
7. Tik op **Doel-BG**.
8. Voer met het toetsenbord op het scherm uw doel-BG in en tik op .

📘 OPMERKING

Zodra de Control-IQ-technologie is ingeschakeld, wordt de standaard BG-doelwaarde ingesteld op 110 mg/dl. Voor details over streefbereiken en hoe de Control-IQ-technologie werkt, zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

9. Controleer de ingevoerde waarden en tik op .

10. Bevestig de instellingen.

- Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
- Tik op  om wijzigingen aan te brengen.

11. Tik op  om de bolusinstellingen aan te passen, of tik op  om extra tijdsegmenten aan te maken.



Meer tijdsegmenten toevoegen

Wanneer u meer tijdsegmenten toevoegt, worden alle instellingen die u in het vorige tijdsegment hebt ingevoerd, gekopieerd en in het nieuwe

segment weergegeven. Hiermee kunt u eenvoudig alleen de specifieke instellingen aanpassen die u wilt, in plaats van ze allemaal opnieuw in te voeren.

1. Tik op het scherm *Segment toevoegen* op **Starttijd**.
2. Voer het tijdstip (uren en minuten) waarop u wilt dat een segment begint in met het toetsenbord op het scherm en tik op .
3. Tik op het scherm *Segment toevoegen* eventueel op **Tijdstip** om AM of PM te selecteren.
- ✓ Als een tijdsegment is ingesteld na 12:00 PM, wordt de standaardinstelling gewijzigd in PM.
4. Tik op .
5. Herhaal stap 1 tot en met 10 uit [Deel 6.2 Een nieuw profiel aanmaken](#) hierboven voor elk segment dat u wilt aanmaken (maximaal 16).

Tik op de **pijl omlaag** om tijdsegmenten in de lijst te zoeken

die niet op het eerste scherm worden weergegeven.

Bolusinstellingen

1. Tik op het paneel **Bolusinstellingen**.



2. Tik op **Insulineduur**.



3. Voer via het toetsenbord op het scherm de gewenste duur van de insulineruiming (2 tot 8 uur) in en tik op .
4. Controleer de ingevoerde waarden en tik op .
5. Bevestig de instellingen.
 - Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
 - Tik op  om wijzigingen aan te brengen.
6. Tik op het Tandem-logo om terug te keren naar het *startscherm*.

Meer persoonlijke profielen toevoegen

Als u een profiel wilt toevoegen dat instellingen deelt met een bestaand profiel, raadpleegt u [Deel 6.5 Een bestaand profiel kopiëren](#).

6.4 Een bestaand profiel bewerken of raadplegen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**, dan op **Mijn pomp** en vervolgens op **Pers. profielen**.
2. Tik op de naam van het persoonlijke profiel dat u wilt bewerken of raadplegen.
3. Tik op **Bewerken**.

 **OPMERKING**

Als u de instellingen alleen wilt raadplegen zonder ze te bewerken, kunt u de rest van de stappen in deze paragraaf overslaan. Tik op  om naar de lijst Persoonlijke profielen te navigeren of tik op het **Tandem**-logo om terug te gaan naar het *startscherm*.
4. Tik op het paneel **Getimede instellingen**.
5. Tik op het tijdsegment dat u wilt bewerken.
6. Tik op **Basaal**, **Correctiefactor**, **Koolhydratenratio** of **Doel-BG** om naar wens wijzigingen aan te brengen en gebruik het toetsenbord op het scherm om de wijzigingen in te voeren. Tik op .
7. Bekijk de recente wijzigingen en tik op .
8. Bevestig de instellingen.
 - Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
 - Tik op  om wijzigingen aan te brengen.
9. Herhaal de stappen 5 – 8 om andere tijdsegmenten te bewerken.
10. Tik op  nadat u alle tijdsegmenten hebt bewerkt.
11. Tik zo nodig op het paneel **Bolusinstellingen** om Insulineduur of Koolhydraten te wijzigen. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de gewenste wijzigingen in te voeren. Tik op .
12. Bevestig de instellingen.
 - Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
 - Tik op  en breng wijzigingen aan.

OPMERKING

Om een tijdsegment toe te voegen, tikt u op  en voert u de gewenste starttijd in.

OPMERKING

Om een tijdsegment te verwijderen, tikt u op de X links van het tijdsegment en tikt u op  om te bevestigen.

6.5 Een bestaand profiel kopiëren

1. Tik in het *start*scherm op **OPTIES**, dan op **Mijn pomp** en vervolgens op **Pers. profielen**.
 2. Tik op de naam van het persoonlijk profiel dat u wilt kopiëren.
 3. Tik op **Kopiëren**.
 4. Bevestig het te kopiëren profiel door op  te tikken.
 5. Voer via het toetsenbord op het scherm de naam (max. 16 tekens) in voor het nieuwe profiel en tik op .
- ✓ Het scherm *PROFIEL GEKOPIEERD* wordt weergegeven.

- ✓ Er wordt een nieuw persoonlijk profiel aangemaakt met dezelfde instellingen als het gekopieerde profiel.

6. Tik op het paneel **Getimede instellingen** of **Bolusinstellingen** om wijzigingen aan te brengen in het nieuwe profiel.

6.6 Een bestaand profiel activeren

1. Tik in het *start*scherm op **OPTIES**, dan op **Mijn pomp** en vervolgens op **Pers. profielen**.
2. Tik op de naam van het persoonlijk profiel dat u wilt activeren.
 - De opties **Activeren** en **Verwijderen** zijn uitgeschakeld voor het actieve profiel omdat het profiel al is geactiveerd. U kunt een profiel pas verwijderen nadat u een ander profiel hebt geactiveerd.
 - Als u slechts één profiel hebt gemaakt, wordt dat profiel automatisch geactiveerd.

3. Tik op **Activeren**.

- ✓ Er verschijnt een scherm om de activeringsaanvraag te bevestigen.

4. Tik op .

- ✓ Het scherm *PROFIEL GEACTIVEERD* wordt weergegeven.

6.7 Naam van een bestaand profiel wijzigen

1. Tik in het *start*scherm op **OPTIES**, dan op **Mijn pomp** en vervolgens op **Pers. profielen**.
2. Tik op de naam van het persoonlijk profiel dat u wilt hernoemen.
3. Tik op de **pijl omlaag** en dan op **Naam wijzigen**.
4. Wijzig via het toetsenbord op het scherm de profielnaam (max. 16 tekens) en tik op .

6.8 Een bestaand profiel verwijderen

1. Tik in het *startscherm* op **OPTIES**, dan op **Mijn pomp** en vervolgens op **Pers. profielen**.
2. Tik op de naam van het persoonlijke profiel dat u wilt verwijderen.

OPMERKING

Het actieve persoonlijke profiel kan niet worden verwijderd.

3. Tik op **Verwijderen**.
 4. Tik op .
- ✓ Het scherm *PROFIEL VERWIJDERD* wordt weergegeven.

6.9 Een tijdelijke basaalsnelheid starten

Een tijdelijke snelheid wordt gebruikt om de actuele basaalsnelheid gedurende een bepaalde periode te wijzigen met een percentage. Deze functie kan nuttig zijn in situaties zoals lichaamsbeweging of ziekte.

De standaardwaarden voor de tijdelijke snelheid zijn 100% (actuele basaalsnelheid) en een duur van 15 minuten. De tijdelijke snelheid kan worden ingesteld van minimaal 0% van de actuele basaalsnelheid tot maximaal 250% van de actuele basaalsnelheid, in stappen van 1%.

De duur kan worden ingesteld van minimaal 15 minuten tot maximaal 72 uur, in stappen van 1 minuut.

Als u een tijdelijke snelheid van meer dan 0% maar minder dan de minimaal toegestane basaalsnelheid van 0,1 eenheden/uur programmeert, krijgt u de melding dat de geselecteerde snelheid te laag is en dat deze wordt ingesteld op de minimaal toegestane snelheid voor toediening.

Als u een tijdelijke snelheid programmeert die hoger is dan de maximaal toegestane basaalsnelheid van 15 eenheden/uur of meer dan uw basale grens ingesteld in de Pompinstellingen, wordt u gewaarschuwd dat de geselecteerde snelheid te hoog is en dat deze wordt verlaagd zodat deze niet de maximaal toegestane snelheid voor toediening overschrijdt.

OPMERKING

Om tijdelijke snelheden te kunnen gebruiken, moet Control-IQ-technologie uitgeschakeld zijn.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Tijdelijke snelheid**.
4. Tik opnieuw op **Tijdelijke snelheid**.
5. Voer het gewenste percentage in met het toetsenbord op het scherm. De actuele snelheid is 100%. Een verhoging is groter dan 100% en een verlaging is minder dan 100%.
6. Tik op .
7. Tik op **Duur**. Voer met het toetsenbord op het scherm de gewenste tijdsduur in voor de tijdelijke snelheid. Tik op .

U kunt op elk moment op **Eenheden weergeven** tikken om de eenheden die daadwerkelijk zullen worden toegediend weer te geven.

8. Verifieer de instellingen en tik op .

✓ Het scherm *TIJDELIJKE SNELHEID GESTART* wordt tijdelijk weergegeven.

✓ Het *Vergrendelingsscherm* wordt weergegeven met een pictogram dat aangeeft dat er een tijdelijke snelheid actief is.

- Een T in een oranje vierkantje betekent dat er een tijdelijke snelheid actief is.
- Een T in een rood vierkantje betekent dat er een tijdelijke snelheid van 0 eenheden/uur actief is.

OPMERKING

Als een Tijdelijke snelheid actief is wanneer u insuline stopt, ook wanneer u een reservoir of infuusset vervangt, blijft de timer voor de tijdelijke snelheid actief. De tijdelijke snelheid wordt hervat wanneer de insulinetoediening wordt hervat als er nog tijd resteert op de timer voor de tijdelijke snelheid.

6.10 Een tijdelijke snelheid stoppen

Ga als volgt te werk om een actieve tijdelijke snelheid te stoppen:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.

2. Tik op **Activiteit**.

3. Tik op het scherm *Activiteit* op , rechts van de tijdelijke snelheid.

4. Tik op het bevestigingsscherm op .

✓ Het scherm *TIJDELIJKE SNELHEID STOPT* verschijnt voordat u terugkeert naar het scherm *Activiteit*.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 7

Verzorging infuusplaats en laden reservoir

7.1 Selectie en verzorging van een infuusplaats

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik **UITSLUITEND** reservoirs en infusiesets met passende connectors en volg de instructies voor gebruik. Als u dit niet doet, kan dit een te hoge of te lage toediening van insuline veroorzaken, met hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Volg **ALTIJD** nauwkeurig de gebruiksaanwijzing van de infuusset voor correcte plaatsing en verzorging van de infusieplaats, omdat er anders te veel of te weinig insuline kan worden toegediend, of infectie kan ontstaan.

⚠ WAARSCHUWING

Plaats uw infusieset **NIET** op littekens, knobbels, moedervlekken, zwangerschapsstriemen of tatoeages. Als u uw infuusset op deze plaatsen aanbrengt, kan dat leiden tot zwelling, irritatie of infectie. Dat kan de absorptie van insuline beïnvloeden en kan resulteren in voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

⚠ VOORZORGSMATREGEL

CONTROLEER uw infuusplaats dagelijks op goede plaatsing en lekkage. **VERVANG** uw

infuusset als u lekken rond de locatie opmerkt, of als u vermoedt dat de canule van uw infuusset is losgeraakt. Een slechte plaatsing of lekkage rond de infuusplaats kan leiden tot een te lage toediening van insuline.

⚠ VOORZORGSMATREGEL

Vervang uw infuusset **NIET** voordat u naar bed gaat, want u kunt uw BG dan pas weer 1 tot 2 uur nadat de infuusset is geplaatst testen. Het is belangrijk dat wordt gecontroleerd of de infuusset correct is ingebracht en insuline toedient. Het is ook belangrijk dat snel wordt gereageerd op eventuele problemen met het inbrengen, om ervoor te zorgen dat de toediening van insuline doorgaat.

Algemene richtlijnen

Keuze van locatie

- U kunt de infuusset overal op uw lichaam dragen waar u normaal gesproken insuline injecteert. De absorptie verschilt van locatie tot locatie. Bespreek de opties met uw zorgverlener.
- De meest gangbare locaties zijn de buik, het bovenste deel van de billen, de heupen, bovenarmen en bovenbenen.

- De buik wordt het meest gebruikt vanwege de toegang tot vetweefsel. Als u de buik gebruikt, **VERMIJD** dan:
 - Plaatsen die de locatie zouden afklemmen, zoals op riemhoogte, de taille of buigende lichaamsdelen.
 - Plaatsen 5 cm (2 inch) rondom uw navel.
- Vermijd plaatsen met littekens, moedervlekken, zwangerschapsstriemen of tatoeages.
- Vermijd plaatsen op een afstand van 7,6 cm (3 inch) van de CGM-sensorlocatie.

Afwisselen van locaties

⚠ VOORZORGSMATREGEL


VERVANG uw infusieset om de 48 uur bij gebruik van Humalog, Admelog/Insuline lispro Sanofi of Lyumjev-insuline en om de 72 uur bij gebruik van NovoLog/NovoRapid of Trurapi/Insuline aspart Sanofi-insuline. Was uw handen met antibacteriële zeep voordat u de infuusset hanteert, en maak de inbrenglocatie op uw lichaam goed schoon om infectie te voorkomen. Neem contact op met uw zorgverlener indien u symptomen van infectie waarneemt op uw infuusplaats voor insuline.

- Vervang uw infusieset om de 48 uur bij gebruik van Humalog, Admelog/Insuline lispro Sanofi of Lymjev-insuline en om de 72 uur bij gebruik van NovoLog/NovoRapid of Trurapi/Insuline aspart Sanofi-insuline of vaker indien nodig.
- Na verloop van tijd ontdekt u welke plaatsten niet alleen een betere absorptie bieden, maar ook comfortabeler zijn. Houd er rekening mee dat herhaald gebruik van dezelfde locatie littekenvorming of knobbels kan veroorzaken, die weer van invloed kunnen zijn op de absorptie van insuline.
- Stel in overleg met uw zorgverlener een afwisselingsschema op dat het beste aansluit bij uw behoeften.

Houd het schoon

- Gebruik schone technieken voor het vervangen van uw infuusset om infectie te voorkomen.
- Was uw handen, gebruik antiseptische doekjes of producten voor het voorbereiden van de infuusplaats en houd de omgeving van de infuusplaats schoon.

Plaatsen op het lichaam voor het inbrengen van de infuusset

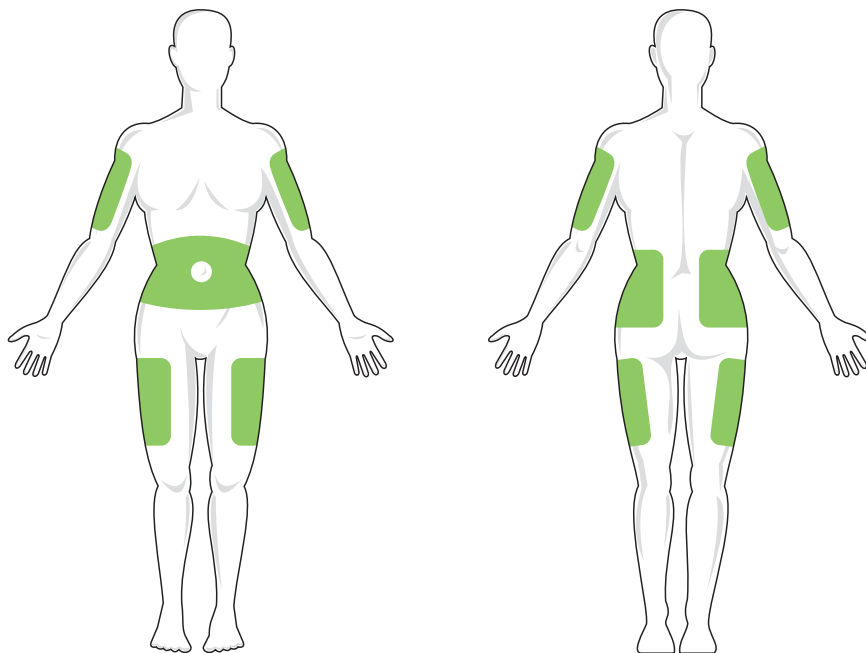

- Het wordt aanbevolen producten voor het voorbereiden van de infuusplaats te gebruiken die zowel een antiseptisch middel als een kleefmiddel bevatten.

7.2 Gebruiksaanwijzing voor reservoir

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het reservoir in de doos met het t:slim-X2™-reservoir voor volledige specificaties.

7.3 Vullen en laden van een t:slim X2-reservoir

In dit deel wordt beschreven hoe u het reservoir vult met insuline en hoe u het reservoir in uw t:slim X2™-pomp plaatst. Het reservoir voor eenmalig gebruik kan maximaal 300 eenheden (3,0 ml) insuline bevatten.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik **ALLEEN** U-100-insulineanaloga die zijn getest en compatibel zijn bevonden voor gebruik in combinatie met de in [Deel 1.7 Bruikbare insulines](#) genoemde pomp. Gebruik van insuline met een lagere of hogere concentratie kan

leiden tot toediening van te veel of te weinig insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** reservoirs die zijn vervaardigd door Tandem Diabetes Care. Gebruik van reservoirs van een ander merk kan leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik reservoirs **NIET** opnieuw. Hergebruik van reservoirs kan leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Dat kan resulteren in voorvallen vanwege hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

BEGIN MET HET VOORBEREIDEN VAN HET VOLGENDE:

- 1 ongeopend reservoir
- injectiespuit van 3,0 ml en vulnaald
- één injectieflacon met compatibele U-100-insuline, vermeld in [Deel 1.7 Bruikbare insulines](#)

- alcoholdoekje
- 1 nieuwe infuusset
- gebruiksaanwijzing van de infuusset

🚩 OPMERKING

De pomp piept of trilt (afhankelijk van de pompinstellingen) terwijl de slang met insuline wordt gevuld. Zie [Deel 5.13 Geluidsvolume](#) voor informatie over het wijzigen van de geluidsinstelling voor Slang vullen.


🚩 OPMERKING

Verwijder het gebruikte reservoir **NIET** uit de pomp tijdens het laadproces voordat op het pompscherm hierom wordt gevraagd.

🚩 OPMERKING

Control-IQ™-technologie blijft berekeningen uitvoeren op basis van CGM-waarden terwijl het reservoir wordt gevuld. Aangezien er tijdens het vullen van het reservoir geen insuline wordt toegediend, zullen er geen daadwerkelijke aanpassingen van de basaalsnelheid plaatsvinden totdat het reservoir is gevuld en weer op de pomp is geladen. De Control-IQ-technologie begint dan onmiddellijk normaal te werken.

De afbeelding toont de connector en vulpoort voor insuline die worden gebruikt voor het vullen van het reservoir.

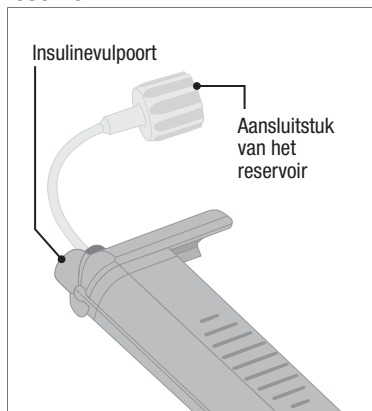

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERVANG uw reservoir om de 48 uur bij gebruik van Humalog, Admelog/Insuline lispro Sanofi of Lyumjev-insuline en om de 72 uur bij gebruik van NovoLog/NovoRapid of Trurapi/Insuline aspart Sanofi-insuline. Was uw handen met antibacteriële zeep voordat u de infusieset hanteert, en maak de inbrenglocatie op uw lichaam goed schoon om infectie te voorkomen. Neem contact op met uw zorgverlener indien u symptomen van infectie waarneemt op uw infuusplaats voor insuline.

Insuline uit de flacon in de spuit


▲ VOORZORGSMATREGEL

Verwijder **ALTIJD** alle luchtballen uit het reservoir voordat u begint met de toediening van insuline. Controleer of er geen luchtballen aanwezig zijn wanneer u insuline in de spuit zuigt, laat de witte vulpoort op de pomp omhoog wijzen wanneer u de slang vult en zorg ervoor dat de slang tijdens het vullen geen luchtballen bevat. Lucht in het reservoir en de slang neemt ruimte in waar insuline moet zijn, en kan de insulinetoevoering beïnvloeden.

De pomp vereist dat er minimaal 50 eenheden insuline in het reservoir zitten nadat het laadproces is voltooid. Om rekening te houden met de insuline die wordt gebruikt tijdens het vullen van de infuusslang, moet u ten minste 45 eenheden toevoegen aan de hoeveelheid insuline die u beschikbaar wilt hebben voor toediening. Wanneer insuline in de spuit wordt opgetrokken, raden we aan om ten minste 120 eenheden insuline toe te voegen.


1. Inspecteer de verpakking van de naald en spuit op tekenen van schade. Gooi beschadigde producten weg.

2. Was uw handen grondig.
3. Veeg het rubberen septum van de insulineflacon af met een alcoholdoekje.
4. Haal de naald en de spuit uit de verpakking. Draai de naald stevig vast op de spuit. Verwijder op een veilige manier het beschermende dopje van de naald door het naar buiten te trekken.
5. Zuig lucht in de spuit tot aan de gewenste hoeveelheid insuline.

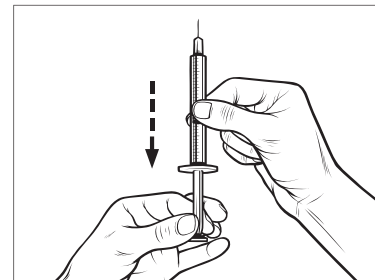


6. Steek de naald in de insulineflacon terwijl u de flacon rechtop houdt. Injecteer lucht vanuit de spuit in de

flacon. Houd druk op de plunjer van de spuit.

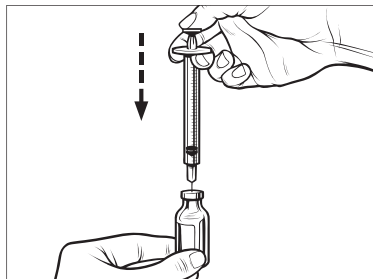


7. Draai de flacon met de naald er nog in ondersteboven. Laat de plunjer van de spuit los. Er stroomt nu insuline uit de flacon in de spuit.

8. Trek de plunjer langzaam terug tot aan de gewenste hoeveelheid insuline.

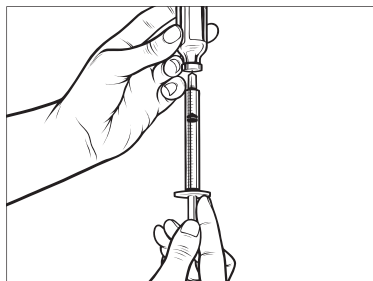

9. Tik terwijl de naald nog in de flacon zit en u de flacon nog ondersteboven vasthoudt tegen de spuit, zodat eventuele luchtbelletjes opstijgen. Duw de plunjer vervolgens langzaam naar boven, zodat de luchtbelletjes terug in de flacon worden geduwd.

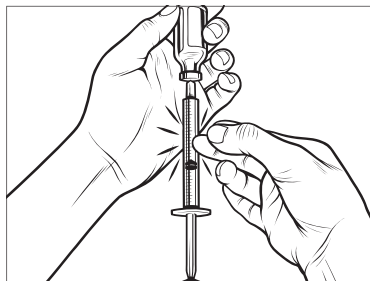


10. Inspecteer de spuit op luchtbelletjes en doe het volgende:

- Herhaal stap 9 als er nog luchtbelletjes aanwezig zijn.
- Verwijder de naald uit de flacon als er geen luchtbelletjes aanwezig zijn.


Het reservoir vullen

1. Controleer de reservoirverpakking op tekenen van schade. Gooi beschadigde producten weg.
2. Open de verpakking en verwijder het reservoir.
3. Houd het reservoir rechtop en steek voorzichtig de naald in de witte insulinevulpoort in het reservoir. Het is niet de bedoeling dat de naald helemaal naar binnen gaat, dus forceer de naald niet.

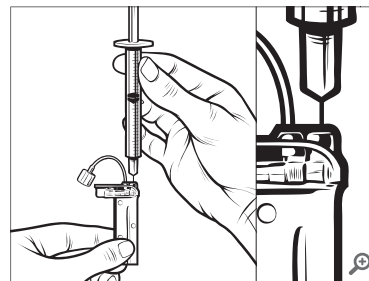


4. Houd de spuit in één lijn met het reservoir vast, met de naald in de vulpoort, en trek de plunjer helemaal terug. Hierdoor wordt eventuele achtergebleven lucht uit

het reservoir verwijderd. Luchtbellen stijgen op in de richting van de plunjer.

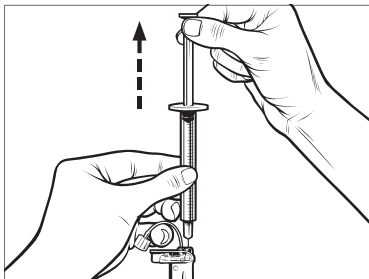


5. Zorg ervoor dat de naald nog steeds in de vulpoort zit en laat de plunjer los. Door druk wordt de plunjer in de neutrale positie getrokken, maar er wordt **GEEN** lucht terug in het reservoir geduwd.

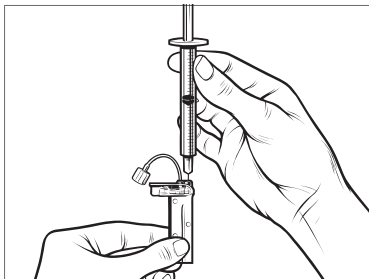


6. Trek de naald uit de vulpoort.

7. Draai de spuit rechtop en druk de plunjer in. Geef een tikje tegen de cilinder zodat eventuele luchtbellen opstijgen.

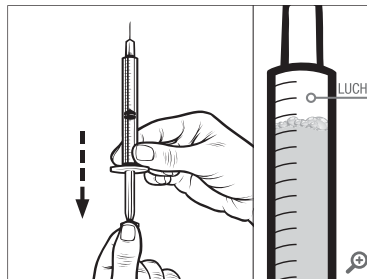


8. Druk voorzichtig op de plunjer om luchtbellen te verwijderen, totdat insuline het aanzetstuk van de naald

vult en u een druppel insuline op de punt van de naald ziet.

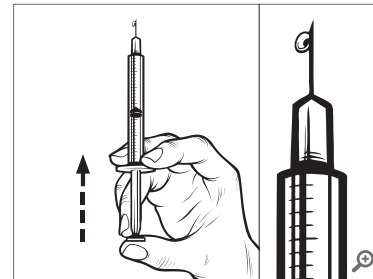

9. Steek de naald opnieuw in de vulpoort en vul het reservoir langzaam met insuline. Het is normaal om wat tegendruk te voelen terwijl u langzaam op de plunjer drukt.

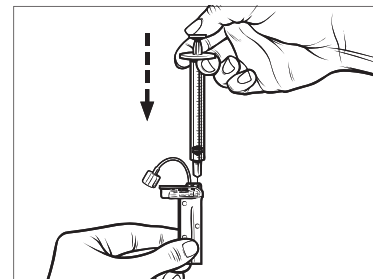

10. Houd druk op de plunjer terwijl u de naald uit het reservoir verwijderd. Inspecteer het reservoir op lekken. Als u vaststelt dat het reservoir lekt, gooi het reservoir dan weg en herhaal de hele procedure met een nieuw reservoir.
11. Zorg altijd voor een correcte afvoer van gebruikte naalden, spuiten, reservoirs en infuussets volgens de lokale regelgeving. Naalden moeten worden afgevoerd in een geschikte container voor scherpe voorwerpen. Probeer niet de dop terug te plaatsen op een naald. Was uw handen grondig na het hanteren van gebruikte componenten.

7.4 Een reservoir laden

Als dit de eerste keer is dat u een reservoir laadt, verwijder dan de transportcilinder van de achterkant van de pomp. Deze is niet bestemd voor voor menselijk gebruik.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Laden**.

- ✓ Tijdens het laadproces is het **Tandem-logo** uitgeschakeld. U kunt er niet op tikken om terug te gaan naar het *startscherm*.


3. Tik op **Reservoir vervangen**.
4. Er verschijnt een scherm dat aangeeft dat alle toedieningen van insuline worden gestopt. Tik op  om door te gaan.

OPMERKING


Dit scherm wordt niet weergegeven als dit de eerste keer is dat u een nieuw reservoir laadt en u nog niet bent begonnen met actief pompen.

5. Koppel de infuusset los van uw lichaam en tik op  om door te gaan.
- ✓ Het scherm **GEREEDMAKEN VOOR RESERVOIR** wordt weergegeven.
6. Verwijder het gebruikte reservoir. Plaats indien nodig het hulpmiddel voor verwijdering van het reservoir of de rand van een munt in de gleuf onder aan het reservoir en draai eraan om het verwijderen van het reservoir gemakkelijker te maken.

7. Plaats de onderkant van het reservoir aan het einde van de pomp. Zorg ervoor dat het reservoir aansluit op beide geleiders.

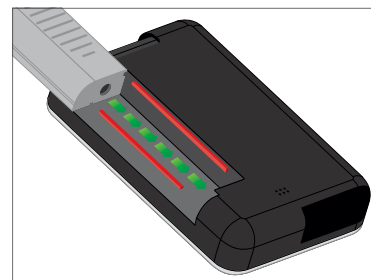

8. Duw op de ronde vulpoort naast de reservoirslang om het reservoir op de pomp te schuiven. Tik op het pictogram **ONTGRENDELEN** wanneer u klaar bent.

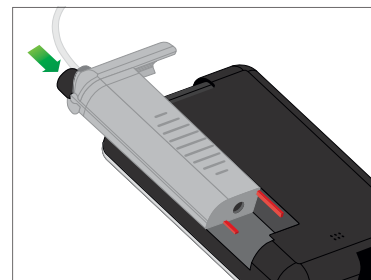

9. Tik op  om door te gaan.
- ✓ Het scherm *RESERVOIR DETECTEREN* wordt weergegeven.
- ✓ Nadat het vervangen van het reservoir is voltooid, roept de pomp u automatisch op om de slang te vullen.
10. Tik op  om de slang te vullen. Zie [Deel 7.5 Slang vullen](#).

▲ WAARSCHUWING

Verwijder **GEEN** insuline uit een gevuld reservoir en voeg er **GEEN** insuline aan toe nadat het reservoir in de pomp is geplaatst. Dit heeft een onnauwkeurige weergave van het insulineniveau op het *startscherm* tot gevolg en de insuline kan opraken voordat de pomp een leeg reservoir detecteert. Dit kan zeer hoge BG of diabetische ketoacidose (DKA) veroorzaken.

7.5 Slang vullen

▲ WAARSCHUWING

Vul uw slang **NOOIT** wanneer uw infusieset is verbonden met uw lichaam. Zorg altijd dat de infuusset is ontkoppeld van uw lichaam voordat u de slang vult. Als u uw infuusset niet losmaakt

van uw lichaam voordat u de slang vult, kan dit een te hoge toediening van insuline tot gevolg hebben. Dat kan resulteren in een hypoglykemie (lage BG).


■ OPMERKING

De pomp piept of trilt (afhankelijk van de pompinstellingen) terwijl de slang met insuline wordt gevuld. Zie [Deel 5.13 Geluidsvolume](#) voor informatie over het wijzigen van de geluidsinstelling voor Slang vullen.

De slang vullen:

1. Controleer of de infusieset niet op uw lichaam is aangesloten.
2. Controleer of de verpakking van de nieuwe infuusset niet is beschadigd, en haal de steriele slang uit de verpakking. Indien de verpakking beschadigd of geopend is, moet deze op correcte wijze worden weggegooid en andere slangset worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de slangconnector uit de buurt houdt van niet-schoongemaakte plaatsen.
3. Sluit de slang van de infuusset aan op de slangconnector op de

reservoirslang. Draai rechtsom tot het handvast zit.

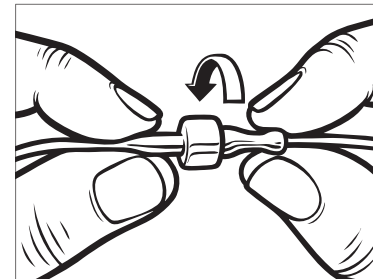


▲ WAARSCHUWING

Zorg er **ALTIJD** voor dat de slang van het reservoir en de infuusslang goed zijn aangesloten. Door een losse aansluiting kan insuline lekken, waardoor er te weinig insuline wordt toegediend. Dat kan resulteren in voorvallen van hyperglycemie (hoge BG).

4. Houd de pomp verticaal om ervoor te zorgen dat eventuele lucht in het reservoir eerst wordt verwijderd. Tik op **START**. De pomp zal regelmatig pieptonen laten horen en trillen terwijl de slang wordt gevuld,

afhankelijk van uw instellingen voor geluidsvolume.

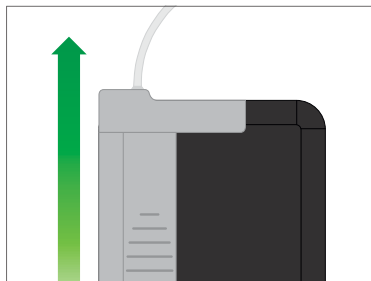

- ✓ Het scherm **VULLEN START** wordt weergegeven.

OPMERKING

Tijdens elke vulcyclus moet de slang met minimaal 10 eenheden insuline worden gevuld.

- 5. Tik op **STOP** wanneer u 3 druppels insuline hebt gezien aan het einde van de slang van de infusieset.
- ✓ Het scherm **VULLEN STOPT** wordt weergegeven.
- ✓ Het scherm **INSULINE DETECTEREN** wordt weergegeven.

- 6. Controleer of er druppels te zien zijn en tik op **GEREED**. Als u uw infusieset wilt inbrengen, zie [Deel 7.7 Canule vullen](#).

- Tik op **VULLEN** als u geen druppels ziet. Het scherm **SLANG VULLEN** verschijnt. Herhaal de stappen 4 en 5 totdat u 3 druppels insuline aan het einde van de slang ziet.

WAARSCHUWING

Vul uw slang **NOOIT** wanneer uw infusieset is verbonden met uw lichaam. Zorg altijd dat de infusieset is losgekoppeld van uw lichaam voordat u het reservoir vervangt of de slang vult. Als u uw infusieset niet losmaakt van uw lichaam voordat u het reservoir vervangt of de slang vult, kan er teveel insuline worden toegediend. Dat kan resulteren in een hypoglykemie (lage BG).

OPMERKING

Als u niet op **STOP** tikt, verschijnt er een meldingsscherm om u te laten weten dat de slang met de maximale hoeveelheid van 30 eenheden is gevuld. Doe het volgende:

- » als u klaar bent met het vullen van de slang, tik dan op **GEREED**. Het scherm **Slang vullen voltooid** wordt tijdelijk weergegeven.

- » Als u de slang met meer dan 30 eenheden wilt vullen, controleert u of de slang niet op uw lichaam is aangesloten en tikt u op **VULLEN** om terug te gaan naar het scherm *Slang vullen* en herhaalt u stap 4 en 5.

7.6 Slang vullen zonder het reservoir te vervangen

Ga als volgt te werk om de slang te vullen zonder het reservoir te vervangen:

1. Tik op het **startscherm** op **OPTIES**.
2. Tik op **Laden**.
3. Tik op **Slang vullen**.
4. Er verschijnt een scherm dat aangeeft dat alle toedieningen van insuline worden gestopt. Tik op .
5. Controleer of de slang is losgekoppeld van uw lichaam en tik op  om door te gaan.
6. Tik op **VULLEN** als u geen nieuw reservoir hebt geïnstalleerd en wilt doorgaan met het vullen van de slang.

7. Zie [Deel 7.5 Slang vullen](#) voor het vullen van de slang.

▲ VOORZORGSMAATREGEL

CONTROLEER de slang van uw infuusset dagelijks op lekkage, luchtbellens en knikken. Lucht in de slang, lekken in de slang of een geknikte slang kan de toediening van insuline belemmeren of geheel stoppen en tot een te lage toediening van insuline leiden.

7.7 Canule vullen

🚩 OPMERKING

Als u een infusieset met een stalen naald inbrengt, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzing bij uw infusieset en sla dit gedeelte over. Infusiesets met stalen naalden hebben geen canule.

In dit deel wordt beschreven hoe u de canule van de infuusset vult met insuline nadat u de slang hebt gevuld.

Om de canule te vullen zonder de slang te vullen, tikt u op het *startscherm* op **OPTIES**, op **Laden** en op **Canule vullen** en volgt u de instructies.

De canule vullen

1. Breng een nieuwe infusieset aan volgens de bij uw infusieset horende instructies.
 2. Sluit de gevulde slang aan op uw infusieplaats.
 3. Tik op **Canule vullen**.
 4. Tik op .
 5. Tik op **Vulhoeveelheid bewerken**.
- ✓ De weergegeven vulhoeveelheid voor de canule is gebaseerd op de vulhoeveelheid van uw laatste canule. Bij deze hoeveelheid stopt het vullen.
6. Selecteer de hoeveelheid die nodig is voor het vullen van de canule volgens de bij uw infusieset horende gebruiksaanwijzing. Als de benodigde hoeveelheid niet wordt vermeld op het pompscherm, tik dan op **Andere hoeveelheid** en voer met het toetsenbord op het scherm een waarde tussen 0,1 en 1,0 eenheden in.

7. Tik op **START**.

- ✓ Het scherm *VULLEN STARTEN* wordt weergegeven.
- ✓ Nadat het vullen is voltooid, wordt het scherm *VULLEN STOPPEN* weergegeven.

🚩 OPMERKING

U kunt op elk moment tijdens het vulproces op **STOP** tikken als u het vullen van de canule wilt stoppen.

- ✓ Het scherm keert terug naar het menu *Laden* als de Herinnering locatie is uitgeschakeld.
8. Als Herinnering locatie is uitgeschakeld, wordt het scherm *Laden* weergegeven. Tik op  om insuline te hervatten als u klaar bent of tik op **Herinnering locatie** om een herinnering in te stellen. Zie [Deel 7.8 Instelling Herinnering locatie](#). Ga anders naar stap 9.
 9. Als Herinnering locatie is ingeschakeld, geeft de pomp automatisch het scherm *Herinnering locatie* weer. Zie [Deel 7.8 Instelling Herinnering locatie](#).

OPMERKING

Nadat het vullen van de slang is voltooid en de pomp is teruggekeerd naar het *startscherm*, geeft het insulineniveau een schatting van de insuline in het reservoir weer (bijv. +60 u, wat betekent dat er meer dan 60 eenheden in het reservoir zijn gedetecteerd).

Nadat er 10 eenheden zijn toegediend, geeft het insulineniveau het werkelijke aantal eenheden in het reservoir weer en verdwijnt het plusteken.

OPMERKING

Het weergegeven insulineniveau daalt met 5 eenheden per keer tot er nog 40 eenheden over zijn. Wanneer er minder dan 40 eenheden over zijn, neemt de hoeveelheid af met 1 eenheid per keer, totdat er nog 1 eenheid over is.

7.8 Instelling Herinnering locatie

In dit deel wordt beschreven hoe u de Herinnering locatie moet instellen nadat u de canule hebt gevuld.

Om de Herinnering locatie in te stellen zonder de canule te vullen, tikt u op het *startscherm* op **OPTIES**, op **Laden**, op **Herinnering locatie**, en volgt u de onderstaande instructies.

1. Tik op  als de instellingen juist zijn en ga verder met stap 6. Tik op **Bewerken Herinnering** om instellingen te wijzigen.
2. Tik op **Herinner over** en selecteer het aantal dagen (1 tot 3).
 - ✓ Herinnering locatie is standaard ingesteld op 3 dagen
3. Tik op **Herinner om**. Voer de tijd in met het toetsenbord op het scherm en tik op .
4. Tik zo nodig op **Tijdstip om AM of PM** te wijzigen. Tik op .
5. Controleer of Herinnering locatie correct is ingesteld en tik op .
- ✓ Het scherm *INSTELLING OPGESLAGEN* wordt weergegeven.
- ✓ Het scherm *Laden* wordt weergegeven.
6. Tik op .

- ✓ Er wordt een herinnering weergegeven om uw BG over 1 of 2 uur te testen.

7. Tik op .

OPMERKING

Als dit de eerste keer is dat u uw pomp gebruikt en u nog geen persoonlijk profiel hebt opgegeven, krijgt u een scherm te zien met de mededeling dat er een profiel moet worden geactiveerd om de insulinetoediening voort te zetten. Tik op **SLUITEN**.

- ✓ Het scherm *INSULINE WORDT VOORTGEZET* wordt tijdelijk weergegeven.

OPMERKING

De Control-IQ-technologie blijft werken terwijl u een reservoir vervangt. Als u het reservoir hebt vervangen en de insuline hervat terwijl de Control-IQ-technologie de insulinetoediening aanpast, wordt de insuline hervat totdat de volgende CGM-waarde over vijf minuten is verkregen. De pomp hervat dan zijn normale werking.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 8

Handmatige bolus

8.1 Overzicht handmatige bolus

⚠ WAARSCHUWING

Dien **GEEN** bolus toe voordat u de berekende bolushoeveelheid hebt gecontroleerd. Als u te veel of te weinig insuline toedient, kan dat resulteren in voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG). U kunt de hoeveelheid insuline veranderen voordat u de bolus toedient.

⚠ WAARSCHUWING

Het toedienen van grote bolussen of het achter elkaar toedienen van meerdere bolussen kan voorvallen van hypoglycemie (lage BG) veroorzaken. Let op de hoeveelheid actieve insuline (AI) en de door de boluscalculator aanbevolen dosis voordat u één grote of meerdere bolussen toedient.

⚠ WAARSCHUWING

Als u na het starten van een bolus geen daling van de bloedglucosespiegel ziet, is het raadzaam om uw infuusset te controleren op verstopping, luchtbellen, of op lekkage of losraken van de canule. Als de toestand aanhoudt, bel dan de klantenservice in uw regio of zoek zo nodig medische hulp.

📌 OPMERKING

De informatie in dit hoofdstuk is NIET van toepassing op bolussen die automatisch worden toegediend door Control-IQ™-technologie. Voor informatie over automatische bolustoediening: zie [Automatische toediening van correctiebolussen in Deel 30.2 Hoe Control-IQ-technologie werkt](#).

Een bolus is een snelle dosis insuline, die meestal wordt toegediend als tegenwicht voor gegeten voedsel of om een hoge bloedglucosewaarde te corrigeren. Een bolus kan worden aangevraagd bij de t:slim X2-insuliepomp™ of bij de Tandem t:slim™ mobiele app.

De minimale bolusgrootte is 0,05 eenheden. De maximale bolusgrootte is 25 eenheden. Als u probeert een bolus toe te dienen die groter is dan de hoeveelheid insuline in het reservoir, wordt een bericht op het scherm weergegeven dat aangeeft dat er onvoldoende insuline aanwezig is om de bolus toe te dienen.

U kunt verschillende bolussen toedienen als compensatie voor de inname van koolhydraten (voedingsbolus) en om uw BG weer op het juiste niveau te brengen (correctiebolus). Voedings- en

correctiebolussen kunnen ook samen worden geprogrammeerd.

📌 OPMERKING

Als u een handmatige bolusaanvraag op de pomp start, moet u deze op de pomp voltooien. U kunt geen bolus aanvragen via de Tandem t:slim-app terwijl er een bolusaanvraag actief is op de pomp.

Indien Koolhydraten in uw actieve persoonlijk profiel is ingeschakeld, voert u het aantal gram koolhydraten in en wordt de bolus aan de hand van uw koolhydratenratio berekend.

Als u Control-IQ-technologie niet gebruikt en Koolhydraten in uw actieve persoonlijk profiel is uitgeschakeld, voert u het aantal eenheden insuline in om de bolus aan te vragen.

📌 OPMERKING

Als u een handmatige bolus toedient, kan de Control-IQ-technologie pas 60 minuten nadat de handmatige bolus is voltooid een automatische correctiebolus toedienen.

Zorg ervoor dat de beveiligingsfunctie van uw smartphone (bijv. schermvergrendeling, toegangscode, gezichtsherkenning) is ingeschakeld

voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt om een bolus toe te dienen. Deel nooit uw beveiligingspin/ wachtwoord en machtig niemand anders om toegang te krijgen tot uw smartphone via diens biometrische gegevens om onbedoelde wijzigingen in uw toediening van insuline te voorkomen.

OPMERKING

Als uw smartphone niet is aangesloten op de pomp, kunt u alleen een bolus bij de pomp aanvragen. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor meer informatie over het tot stand brengen van een verbinding tussen uw smartphone en de pomp.

VOORZORGSMAATREGEL

CONTROLEER de persoonlijke instellingen van uw pomp regelmatig om er zeker van te zijn dat ze juist zijn. Onjuiste instellingen kunnen leiden tot een te hoge of te lage toediening van insuline. Raadpleeg indien nodig uw zorgverlener.

8.2 Een bolus starten

Om een bolus aan te vragen, tikt u op **BOLUS** op het *start*scherm van uw pomp of op **Bolus** in de *navigatie*balk in de Tandem t:slim-app.

WAARSCHUWING

U hebt 10 seconden om een bolus na het aanvragen te annuleren om de toediening van insuline te voorkomen. Zowel de pomp als de Tandem t:slim-app zal gedurende deze tijd “bolus wordt aangevraagd” weergeven. Raadpleeg [Deel 8.10 Een bolus annuleren of afbreken met de pomp](#) of [Deel 8.15 Een bolus annuleren of afbreken met de Tandem t:slim-app](#) voor instructies om een bolus te annuleren.

U kunt een bolus aanvragen met de Tandem t:slim-app als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

- U hebt een compatibele smartphone (zie tandemdiabetes.com/mobilesupport)
- Uw smartphone is verbonden met uw pomp
- U hebt een systeemeigen beveiligingsfunctie van uw smartphone ingeschakeld.

Zie [Deel 8.11 Bolustoediening met behulp van de Tandem t:slim-app](#) voor verdere instructies om de Tandem t:slim-app te gebruiken voor het aanvragen van een bolus.

8.3 Berekening van een correctiebolus

Zodra de pomp uw bloedglucosewaarde kent, bepaalt de pomp of een correctiebolus moet worden toegevoegd aan een andere bolus die op het scherm *Bolus* wordt aangevraagd. De pomp kan uw bloedglucosewaarde ontvangen door handmatige invoer in de pomp of via de CGM.

Wanneer uw bloedglucosewaarde...

- hoger is dan de doel-BG: de insuline voor de voedingsbolus en de correctiebolus worden bij elkaar opgeteld. Als er actieve insuline (AI) aanwezig is, wordt deze alleen afgetrokken van het correctiegedeelte van de bolus.
- Tussen 70 mg/dl en doel-BG: u krijgt de optie om de voedingsbolus te verminderen om de lagere bloedglucosespiegel te corrigeren. Als er actieve insuline (AI) aanwezig is, wordt deze ook gebruikt om de berekende bolus te verminderen.

- Lager dan 70 mg/dl: de voedingsbolus wordt vermindert met de lage bloedglucosewaarde. Als er actieve insuline (AI) aanwezig is, wordt deze ook gebruikt om de berekende bolus te verminderen.

Behandel hypoglycemie (lage BG) altijd met snelwerkende koolhydraten volgens de instructies van de zorgverlener en test uw BG om te controleren of de behandeling succesvol was.

Automatisch invullen van de bloedglucosewaarde met CGM

⚠ VOORZORGSMAATREGEL

LET OP de trendinformatie op het *CGM-startscherm* en uw symptomen voordat u CGM-waarden gebruikt om een correctiebolus te berekenen en toe te dienen. Individuele CGM-waarden zijn mogelijk niet zo nauwkeurig als BG-meterwaarden.

Als u een compatibele CGM gebruikt, hoeft u geen vingerprik uit te voeren om een behandelbeslissing te nemen, zolang uw symptomen met de CGM-metingen overeenkomen. De pomp kan automatisch CGM-metingen in de boluscalculator gebruiken wanneer Control-IQ-technologie is ingeschakeld

en er vanuit de CGM een geldige waarde en trendpijl beschikbaar zijn. Als uw CGM-metingen niet overeenkomen met uw symptomen, is het raadzaam uw handen grondig te wassen en uw BG-meter te gebruiken om de CGM-meting in de boluscalculator te vervangen als de BG-meterwaarde overeenkomt met uw symptomen. Als u uw CGM wilt uitlijnen met uw BG-meter, volgt u de instructies om uw CGM te kalibreren. Neem geen insulinedoses te dicht bij elkaar. Dit wordt vaak het opstapelen van insuline genoemd. Als u onlangs een bolus hebt gekregen, wacht u zo'n 60 minuten om te zien of uw metingen op de bolus reageren.

📌 OPMERKING

Uit retrospectieve analyse van de belangrijkste onderzoeksresultaten bleek dat CGM-waarden <70 mg/dl vijf uur nadat een bolus was toegediend vaker voorkwamen wanneer de bloedglucosewaarden automatisch werden ingevuld. Raadpleeg [Deel 33.9 Aanvullende analyse van het automatisch invullen van de sensorglucosewaarde met CGM](#) voor meer informatie.

Uw bloedglucosewaarde wordt automatisch ingevoerd in het BLOEDGLUCOSE-veld op het scherm

Bolus wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Control-IQ-technologie is ingeschakeld en beschikbaar
- Er is een CGM-sessie actief
- Er is een CGM-waarde aanwezig
- Er is een CGM-trendpijl beschikbaar op het CGM-startscherm

📌 OPMERKING

Raadpleeg de productinstructies van de fabrikant van de CGM voor meer informatie over CGM-trendpijlen en hoe u deze kunt gebruiken voor behandelbeslissingen. U kunt ook kijken in [Deel 25.3 Pijlen voor veranderingssnelheid](#).

Als de CGM-waarde automatisch in de boluscalculator wordt ingevuld, wordt alleen de huidige CGM-waarde gebruikt om de correctiebolus te berekenen. De trendpijl wordt niet voor de bolusberekening gebruikt. Overleg met uw zorgverlener voor aanbevelingen over het best mogelijke gebruik van de pijlen voor de dosering van uw correctiebolus.

Als uw zorgverlener heeft aangeraden om de trendpijl te gebruiken voor

aanpassing van de correctiedosis, of als u de bloedglucosewaarde wilt wijzigen die wordt gebruikt voor berekening van uw correctiedosis, kunt u de automatisch door uw CGM ingevulde bloedglucosewaarde handmatig overschrijven.

Om de door de CGM automatisch ingevulde glucosewaarde te overschrijven, tikt u op de glucosewaarde op het scherm *Bolus*. In het volgende voorbeeld ziet u het scherm *Bolus* van de pomp:



OPMERKING

Als de automatisch ingevulde bloedglucosewaarde van uw CGM hoger of lager was dan uw doel-BG, zal er op het bevestigingsscherm voor de *correctiebolus* van uw pomp *Onder het doel* of *Boven het doel* verschijnen.

Het bevestigingsscherm voor de correctiebolus

Om het bevestigingsscherm *Correctiebolus* op de pomp te openen, tikt u in het *CGM-startscherm* op **BOLUS**.

- Als uw CGM-waarde of trendpijl niet beschikbaar is in het *startscherm*, verschijnt het scherm *Bolus*.
- Als u een CGM-waarde en trendpijl hebt, verschijnt het bevestigingsscherm *Correctiebolus* (indien van toepassing).

Op het bevestigingsscherm voor de *correctiebolus* kunt u niet op de waarde **Actuele BG** tikken om de door uw CGM automatisch ingevulde bloedglucosewaarde te wijzigen.

Tik op  of  en ga vervolgens naar het *bolusscherm* om de bloedglucosewaarde te wijzigen zoals hierboven beschreven. Als de handmatig ingevoerde waarde na wijziging van het doel hoger of lager is dan de doel-BG, toont de pomp opnieuw het bevestigingsscherm *Boven het doel* of *Onder het doel*, zodat u de correctiebolus kunt aanvaarden of afwijzen.

Boven het doel

Als uw bloedglucosewaarde hoger is dan uw doel-BG, biedt de pomp u de optie om de pomp een correctiebolus te laten berekenen en toe te voegen aan een andere door u aan te vragen bolus.



Berekenen en toevoegen van een correctiebolus kunt u via de pomp als volgt doen:

- Tik om  om de correctiebolus te bevestigen. Er wordt een correctiebolus berekend die wordt toegevoegd aan de voedingsbolus die u aanvraagt op het scherm *Bolus*.
- Tik op  om de correctiebolus af te wijzen. Er wordt geen

correctiebolus toegevoegd aan de voedingsbolus die u aanvraagt op het scherm *Bolus*.

- ✓ Het scherm *Bolus* verschijnt, ongeacht of u op  of  tikt.

Onder het doel

Als uw bloedglucosewaarde lager is dan uw doel-BG, biedt de pomp u de optie om de pomp een correctiebolus te laten berekenen en deze af te trekken van een andere door u aan te vragen bolus.



Berekenen en toevoegen van een correctiebolus kunt u via de pomp als volgt doen:

- Tik om  om de correctiebolus te bevestigen. Er wordt een

correctiebolus berekend die wordt afgetrokken van de voedingsbolus die u op het scherm *Bolus* aanvraagt.

- Tik op  om de correctiebolus af te wijzen. Er wordt geen correctiebolus afgetrokken van de voedingsbolus die u op het scherm *Bolus* aanvraagt.

- ✓ Het scherm *Bolus* verschijnt, ongeacht of u op  of  tikt.

Binnen het doel

Als uw bloedglucosewaarde gelijk is aan uw doel-BG, wordt het scherm *Correctiebolus* niet weergegeven.

Handmatige invoer van de BG-waarde

Als uw bloedglucosewaarde niet automatisch is ingevuld op het scherm *Bolus* op basis van de condities die nodig zijn voor die functie, moet u uw BG-waarde handmatig in de pomp invoeren voordat u naar de bevestigingsschermen *Correctiebolus* gaat. De condities die nodig zijn voor de functie voor automatisch invullen zijn:

- Control-IQ-technologie is ingeschakeld en beschikbaar
- Er is een CGM-sessie actief
- Er is een CGM-waarde aanwezig
- Er is een CGM-trendpijl beschikbaar op het CGM-startscherm

OPMERKING

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de CGM-fabrikant voor meer informatie over CGM-trendpijlen en hoe u deze kunt gebruiken voor behandelbeslissingen. U kunt ook kijken in [Deel 25.3 Pijlen voor veranderingssnelheid](#).

De bevestigingsschermen *Correctiebolus* worden, indien van toepassing, weergegeven nadat u uw BG-waarde handmatig op het scherm *Bolus* hebt ingevoerd. Voer uw BG-waarde als volgt handmatig in de pomp in:

1. Tik in het *startscherm* op **BOLUS**.

2. Tik op BG toe.



3. Voer met het toetsenbord op het scherm de BG-waarde in en tik op . Hierdoor wordt de BG-waarde opgeslagen in uw pompgeschiedenis, of er nu een bolus is toegediend of niet.
4. Afhankelijk van de resultaten van uw BG-waarde volgt u de stappen in het desbetreffende bovenste Doel-gedeelte.

8.4 Bolus negeren

U kunt de berekende bolus negeren door op de waarde van de berekende eenheid te tikken en de insuline-eenheden in te voeren die u wilt

toedienen. De optie bolus negeren is altijd beschikbaar. Het volgende voorbeeld toont het overschrijven van een bolus op het pomscherm:



8.5 Voedingsbolus met eenheden

Als u Control-IQ-technologie gebruikt, gaat u naar [Deel 8.6 Voedingsbolus met grammen](#). Een voedingsbolus toedienen met behulp van de pomp:

1. Tik op het *startscherm* op **BOLUS**.
2. Tik op **0 eenheden** aan de linkerkant van het scherm.
3. Voer het aantal toe te dienen eenheden insuline in met behulp van het toetsenbord op het scherm en tik op .

⚠ WAARSCHUWING

Controleer **ALTIJD** of de decimale punt juist is geplaatst wanneer u informatie voor een bolus invoert. Een onjuist geplaatste decimale punt kan ertoe leiden dat u niet de juiste, door uw zorgverlener voorgeschreven hoeveelheid insuline krijgt toegediend.

4. Tik op om het aantal toe te dienen eenheden insuline te bevestigen.
 5. Bevestig de aanvraag.
 - Tik op als de ingevoerde gegevens juist zijn.
 - Tik op om terug te keren om wijzigingen aan te brengen of berekeningen weer te geven.
 6. Tik op .
- ✓ Het scherm *BOLUS GESTART* wordt tijdelijk weergegeven.

8.6 Voedingsbolus met grammen

1. Tik op het *startscherm* op **BOLUS**.

2. Tik op **0 grammen**.
3. Voer met het toetsenbord op het scherm het aantal gram koolhydraten in en tik op .
 - Om meerdere koolhydratenwaarden in te voeren: voer de eerste waarde in en tik op  , voer de tweede waarde in, tik op  . Ga door tot u gereed bent.
 - Tik op de  pijl terug om de ingevoerde waarde te wissen en opnieuw te beginnen.
4. Controleer of het aantal gram koolhydraten in het juiste gedeelte op het scherm is ingevoerd.
5. Tik op  om het aantal toe te dienen eenheden insuline te bevestigen.

U kunt altijd op **Berekening weergeven** tikken om het scherm *Bolus berekening* weer te geven.
6. Bevestig de aanvraag.
 - Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.

- Tik op  om terug te keren om wijzigingen aan te brengen of berekeningen weer te geven.

7. Tik op .
 - ✓ Het scherm *BOLUS GESTART* wordt tijdelijk weergegeven.
 - ✓ Nadat de bolustoediening is voltooid, verschijnt er een pictogram onder de CGM-grafiek.



OPMERKING

Elk boluspictogram staat voor één bolustoediening. Verticale lijnen op de bolusbalk geven tijdsintervallen aan op basis van uw grafiekinstellingen; deze lijnen kunnen tijdelijk een boluspictogram blokkeren als de grafiek na verloop van tijd verandert.

8.7 Verlengde bolus

Met de functie Verlengde bolus kunt u een deel van de bolus nu en een deel van de bolus langzaam over een periode van maximaal 8 uur toedienen, of de hele bolus toedienen over een langere periode. Dit kan handig zijn voor maaltijden met een hoog vetgehalte, zoals pizza, of als u lijdt aan gastroparese (vertraagd legen van de maag).

OPMERKING

Als Control-IQ-technologie is ingeschakeld, is de standaardinstelling en de maximale tijdslimiet twee uur voor verlengde bolus.

Wanneer u een bolus verlengt, wordt een eventuele correctiebolus altijd toegediend in het **NU TOEDIENEN**-gedeelte. Bespreek met uw zorgverlener of deze functie geschikt is voor u en vraag om advies over de verdeling tussen nu en later en over de toedieningsduur van het latere deel.

1. Tik op het *startscherm* op **BOLUS**.
2. Tik op **0 grammen** (of **0 eenheden**).

3. Voer het aantal gram koolhydraten (of eenheden insuline) in. Tik op .

4. Tik indien gewenst op **BG toevoegen** en voer met het toetsenbord op het scherm een bloedglucosewaarde in. Tik op .

5. Tik op  om het aantal toe te dienen eenheden insuline te bevestigen.

U kunt altijd op **Berekening weergeven** tikken om het scherm *Bolus berekening* weer te geven.

6. Bevestig de aanvraag.

- Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
- Tik op  om terug te keren om wijzigingen aan te brengen of berekeningen weer te geven.

7. Tik op de wisselknop naast **VERLENGD** en tik vervolgens op .

8. Tik onder NU TOEDIENEN op **50%** om aan te passen welk percentage van de voedingsbolus onmiddellijk wordt toegediend.

Het percentage voor LATER TOEDIENEN wordt automatisch berekend door de pomp. De standaardwaarde is 50% NU en 50% LATER. De standaard DUUR is 2 uur.

9. Voer met het toetsenbord op het scherm het percentage van de bolus voor NU TOEDIENEN in en tik op .

De minimale hoeveelheid die de pomp kan toedienen voor het NU TOEDIENEN-deel is 0,05 eenheden. U kunt deze hoeveelheid instellen op 0 eenheden als u wilt dat de hele bolus in het LATER TOEDIENEN-deel wordt toegediend. Elke hoeveelheid die tussen 0,00 en 0,05 eenheden wordt ingevoerd, wordt automatisch afgerond naar 0,05 eenheden.

Het LATER TOEDIENEN-deel van de verlengde bolus heeft eveneens een minimale en maximale waarde. Als u een waarde voor LATER TOEDIENEN buiten deze grenzen instelt, krijgt u een melding en wordt de duur van het LATER TOEDIENEN-deel aangepast.

10. Tik onder DUUR op **2 uur**.

De standaard maximale duur voor verlengde bolustoediening is 8 uur. Wanneer Control-IQ-technologie is ingeschakeld, verandert de standaard maximale duur voor verlengde bolustoediening in 2 uur.

11. Pas de tijdsduur van de toe te dienen bolus aan met het toetsenbord op het scherm en tik op .

12. Tik op .

U kunt te allen tijde op **Eenh. weerg.** (eenheden weergeven) tikken om precies te zien hoeveel eenheden nu en later worden toegediend.

13. Bevestig de aanvraag.

- Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
- Tik op  om terug te keren om wijzigingen aan te brengen of berekeningen weer te geven.

14. Tik op .

- ✓ Het scherm *BOLUS GESTART* wordt tijdelijk weergegeven.
- ✓ Nadat de toediening van de verlengde bolus is voltooid, verschijnt er een pictogram onder de CGM-grafiek.



Er kan nooit meer dan één verlengde bolus tegelijk actief zijn. Als het LATER TOEDIENEN-deel van een verlengde bolus actief is, kunt u echter wel een nieuwe standaardbolus aanvragen.

8.8 Max. bolus

Met de instelling Max. bolus kunt u een limiet instellen voor de maximale insulinetoediening voor een enkele bolus.

De standaardinstelling voor Max. bolus is 10 eenheden, maar kan worden ingesteld op elke waarde tussen 1 en 25 eenheden. De Max. bolus-instelling kan als volgt worden aangepast:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Persoonlijke profielen**.
4. Tik op **Pompinstellingen**.
5. Tik op **Max. bolus**.



6. Voer via het toetsenbord op het scherm de gewenste hoeveelheid in voor de maximale bolus en tik op

OPMERKING

Als u de maximale bolus instelt op 25 eenheden en er een bolus van meer dan 25 eenheden wordt berekend aan de hand van uw koolhydratenratio of correctiefactor, verschijnt er een herinneringsscherm nadat de bolus is toegediend. U kunt de resterende hoeveelheid van de bolus tot max. 25 extra eenheden nog steeds toedienen. Zie [Deel 13.9 Waarschuwingen Max. bolus](#). U moet de toediening van deze extra hoeveelheid via uw pomp bevestigen.

8.9 Snelle bolus

Met de functie Snelle bolus kunt u een bolus toedienen door eenvoudigweg op een knop te drukken, indien de functie is ingeschakeld. Dit is een manier om een bolus toe te dienen door opdrachten in de vorm van pieptonen/trillingen uit te voeren, zonder dat u door het pompscherm hoeft te navigeren of erop hoeft te kijken.

Snelle bolus kan zo worden ingesteld dat deze overeenkomt met de eenheden insuline of het aantal gram koolhydraten. Als de Control-IQ- technologie is ingeschakeld, zal deze de snelle bolus als correctiebolus gebruiken indien

geconfigureerd als eenheden insuline, of als voedingsbolus indien geconfigureerd als gram koolhydraten. De Control-IQ-technologie gebruikt de informatie over de inname van koolhydraten om de insulinetoediening na het eten te optimaliseren.

Snelle bolus configureren

De standaardinstelling voor de functie Snelle bolus is uit. Snelle bolus kan worden ingesteld op eenheden insuline of gram koolhydraten. De mogelijke stappen zijn 0,5, 1,0, 2,0 en 5,0 eenheden; of 2, 5, 10 en 15 gram.

OPMERKING

Het wordt aanbevolen om gram koolhydraten te gebruiken bij bolustoediening bij gebruik van Control-IQ-technologie.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Persoonlijke profielen**.
4. Tik op **Pompinstellingen**.
5. Tik op **Snelle bolus**.
6. Tik op **Type stap**.

7. Tik voor een selectie op **eenheden insuline of gram koolhydraten**.
Tik op .
8. Tik op **Stapgrootte**.
9. Selecteer de gewenste stapgrootte.

OPMERKING

Tijdens de toediening van een snelle bolus wordt bij elke druk op de knop **Schermbaan/Snelle bolus** de stapgrootte toegevoegd.

10. Controleer de ingevoerde waarden en tik op .
11. Bevestig de instellingen.
 - Tik op  als de ingevoerde gegevens juist zijn.
 - Tik op  om terug te keren en wijzigingen aan te brengen.

Een snelle bolus toedienen

Als de functie Snelle bolus is ingeschakeld, kunt u een bolus toedienen door op de knop **Schermbaan/Snelle bolus** te drukken om uw bolus toe te dienen zonder door het pompscherm te navigeren of dit te bekijken.

VOORZORGSMAATREGEL

Wanneer u de functie Snelle bolus nog maar net gebruikt, klikt u **ALTIJD** op het scherm om de juiste programmering van de bolushoeveelheid te bevestigen. Door het scherm te controleren weet u zeker dat u de piep-/trilcommando's correct gebruikt om de beoogde bolushoeveelheid te programmeren.

1. Druk op de knop **Schermbaan/Snelle bolus** en houd hem ingedrukt. Het scherm *Snelle bolus* wordt weergegeven. U hoort twee pieptonen (als het geluidsvolume is ingesteld op pieptonen) of voelt trillingen (als het geluidsvolume is ingesteld op trillen).
2. Druk voor iedere stap op de knop **Schermbaan/Snelle bolus** totdat de gewenste hoeveelheid is bereikt. De pomp piept/trilt bij elke druk op de knop.
3. Wacht tot de pomp voor iedere ingedrukte stap een keer piept/trilt om de gewenste hoeveelheid te bevestigen.

- Na de pieptonen/trillingen van de pomp houdt u de knop **Schermbaan/Snelle bolus** enige seconden ingedrukt om de nieuwe bolus toe te dienen.

OPMERKING

Om de bolus te annuleren en terug te gaan naar het *startscherm*, tikt u op  op het scherm *Snelle bolus*.

Als er meer dan 10 seconden zijn verstreken zonder invoer, wordt de bolus geannuleerd en nooit toegediend. In dit geval wordt de waarschuwing Bolus onvolledig weergegeven op uw pomp en, indien van toepassing, op uw smartphone via de Tandem t:slim-app.

U kunt de instelling voor Max. bolus in uw pompinstellingen niet overschrijden wanneer u de functie Snelle bolus gebruikt. Zodra de hoeveelheid van de Max. bolus is bereikt, klinkt er een andere toon om u hiervan op de hoogte te stellen. Indien Snelle bolus is ingesteld op trillen, stopt de pomp met trillen als reactie op verdere

drukken op de knop om u op de hoogte te stellen. Kijk op het scherm om de bolushoeveelheid te bevestigen.

U kunt niet meer dan 20 keer achtereenvolgens op de knop drukken wanneer u de functie Snelle bolus gebruikt. Als u 20 keer op de knop hebt gedrukt, klinkt er een andere toon om u op de hoogte te stellen. Indien Snelle bolus is ingesteld op trillen, stopt de pomp met trillen als reactie op verdere drukken op de knop om u op de hoogte te stellen. Kijk op het scherm om de bolushoeveelheid te bevestigen.

Als u op enig moment tijdens het programmeren een andere toon hoort of als de pomp stopt met trillen als gevolg van het indrukken van een knop, kijk dan op het scherm om de bolushoeveelheid te controleren. Als het scherm *Snelle bolus* niet de juiste bolushoeveelheid weergeeft, gebruikt u het aanraakscherm om bolusinformatie in te voeren.

- ✓ Het scherm *BOLUS GESTART* wordt tijdelijk weergegeven.

OPMERKING

Als Control-IQ-technologie is ingeschakeld en de insulinetoediening tijdens een snelle bolus heeft aangepast, wordt de resterende insuline van de snelle bolus toegediend.

8.10 Een bolus annuleren of afbreken met de pomp

U hebt 10 seconden om een bolus na het aanvragen te annuleren om de toediening van insuline te voorkomen. Zowel de pomp als de Tandem t:slim-app zal gedurende deze tijd zowel “bolus wordt aangevraagd” zeggen.

Een bolusaanvraag van de pomp annuleren:

1. Tik op **1–2–3** om naar het *startscherm* te gaan.

2. Tik op  om de bolus te annuleren.



- ✓ **BOLUS** blijft inactief terwijl de bolus wordt geannuleerd.
- ✓ Nadat de bolus is geannuleerd, wordt **BOLUS** weer actief op het startscherm.

Een bolus stoppen nadat de toediening is begonnen:

1. Tik op **1–2–3** om naar het startscherm te gaan.
2. Tik op  om de toediening te stoppen.
3. Tik op .

- ✓ Het scherm *BOLUS GESTOPT* wordt weergegeven en de toegediende eenheden worden berekend.
- ✓ De aantallen aangevraagde en toegediende eenheden worden weergegeven.

4. Tik op .

8.11 Bolustoediening met behulp van de Tandem t:slim-app

Zorg ervoor dat de beveiligingsfunctie van uw smartphone (bijv. schermvergrendeling, toegangscode, gezichtsherkenning) is ingeschakeld voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt om een bolus toe te dienen. Deel nooit uw beveiligingspin/wachtwoord en machting niemand anders om toegang te krijgen tot uw smartphone via diens biometrische gegevens om onbedoelde toediening van insuline te voorkomen.

OPMERKING

Als uw smartphone niet compatibel is met de bolustoedieningsfunctieset van de Tandem

t:slim-app, kunt u de Tandem t:slim-app niet gebruiken om een bolus aan te vragen, te annuleren of af te breken. Ga voor een actuele lijst met ondersteunde smartphones naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app.

U kunt de Tandem t:slim-app gebruiken om de volgende bolussen toe te dienen:


- Correctiebolus (zie [Deel 8.12 Correctiebolus met de Tandem t:slim-app](#))
- Bolus overschrijven (zie [Deel 8.13 Bolus overschrijven met behulp van de Tandem t:slim-app](#))
- Voedingsbolus met gebruik van eenheden insuline dan wel gram koolhydraten (zie [Deel 8.14 Voedingsbolus met de Tandem t:slim-app](#))

U moet uw pomp gebruiken voor de volgende functies:

- Verlengde bolus (zie [Deel 8.7 Verlengde bolus](#))

- Instelling Max. bolus (zie [Deel 8.8 Max. bolus](#))
- Snelle bolus (zie [Deel 8.9 Snelle bolus](#))

Als u een handmatige bolus aanvraagt op de pomp, moet u deze op de pomp voltooien. Als u probeert een bolus aan te vragen via de Tandem t:slim-app terwijl een bolusverzoek actief is op de pomp, genereert de Tandem t:slim-app de melding *Bolus in uitvoering op de pomp* om te voorkomen dat u een bolus start.

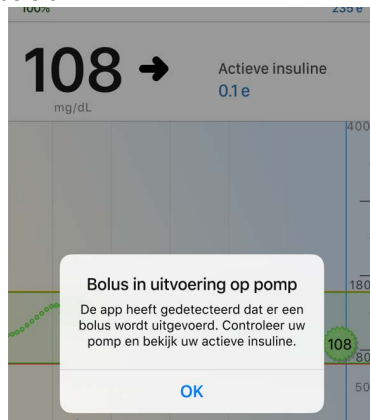

8.12 Correctiebolus met de Tandem t:slim-app

Zodra de Tandem t:slim-app uw bloedglucosewaarde kent, bepaalt de app of een correctiebolus moet worden toegevoegd aan een andere bolus die op het scherm *Bolus* wordt aangevraagd. De Tandem t:slim-app kan uw bloedglucosewaarde ontvangen door handmatige invoer in de Tandem t:slim-app of automatisch invullen via de CGM. Zie [Automatisch invullen van de bloedglucosewaarde met CGM](#) voor meer informatie over automatisch ingevulde bloedglucosewaarden.

Om de door de CGM automatisch ingevulde glucosewaarde te overschrijven, tikt u **Glucose** op het scherm *Bolus*. In het volgende

voorbeeld ziet u het scherm *Bolus* in de Tandem t:slim-app:

The screenshot shows the 'Bolus' screen in the Tandem t:slim app. At the top are three buttons: 'Annuleren' (blue), 'Bolus' (black), and 'Volgende' (blue). Below these is a large '0' with 'eenheden' underneath. At the bottom are two boxes: 'Koolhydraten 0 Gram' and 'Glucose + mg/dL'. The 'Glucose' box is highlighted with a green border.

Het bevestigingsscherm voor de correctiebolus

Om toegang te krijgen tot het bevestigingsscherm *Correctiebolus* in de Tandem t:slim-app, schakelt u de wisselschakelaar **Correctiebolus** in en tikt u op **Bolus** in de *navigatiebalk*.

- Als uw CGM-waarde of trendpijl niet beschikbaar is op het *Dashboard*-scherm, verschijnt het bevestigingsscherm *Correctiebolus* nadat u uw bloedglucosewaarde hebt ingevoerd in de Tandem t:slim-app, zoals hierboven beschreven.

- Als u een CGM-waarde en een trendpijl hebt, verschijnt het bevestigingsscherm *Correctiebolus* als u op **Bolus** tikt, (indien van toepassing).

Boven het doel

Als de BG-waarde van uw sensor hoger is dan u doel-BG, kunt u een correctiebolus berekenen en toevoegen aan een andere bolus die u aanvraagt.

Ga als volgt te werk om een correctiebolus te berekenen en toe te voegen in de Tandem t:slim-app:

- Tik op **Ja** op het bevestigingsscherm *Correctiebolus* om de correctiebolus te accepteren.



- Tik op **Nee** op het bevestigingsscherm *Correctiebolus* om de correctiebolus af te wijzen.

Als u op **Ja** tikt, wordt de wisselschakelaar **Correctiebolus** aangezet. U kunt de correctiebolus later afwijzen door de wisselschakelaar **Correctiebolus** in de uit-stand te zetten.




Onder het doel

Als uw BG- of sensorglucosewaarde lager is dan uw doel-BG, biedt de Tandem t:slim-app u de optie om een correctiebolus af te trekken van een andere bolus die u hebt aangevraagd; alle waarden die de toedieningsberekening van de Tandem t:slim-app in het rood weergeeft, worden afgetrokken van de berekende bolushoeveelheid.

Ga als volgt te werk om een correctiebolus te berekenen en toe te voegen in de Tandem t:slim-app:

- Tik op **Ja** op het bevestigingsscherm *Correctiebolus* om de correctiebolus te accepteren.

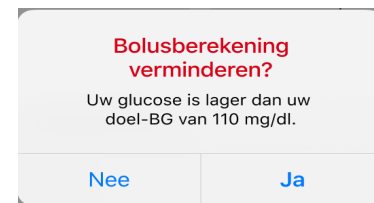

- Tik op **Nee** op het bevestigingsscherm *Correctiebolus* om de correctiebolus af te wijzen.

Als u op **Ja** tikt, wordt de wisselschakelaar **Correctiebolus** aangezet. U kunt de correctiebolus later afwijzen door de wisselschakelaar **Correctiebolus** in de uit-stand te zetten.

OPMERKING

Als uw bloedglucose lager is dan 70 mg/dL, wordt de voedingsbolus verminderd om de lage bloedglucosewaarde automatisch te corrigeren. In dit geval is de wisselschakelaar **Correctiebolus** niet beschikbaar en de

Tandem t:slim-p geeft in plaats daarvan de waarschuwing voor een lage BG weer.

The screenshot shows the 'Bolus' screen with three buttons at the top: 'Annuleren' (blue), 'Bolus' (black), and 'Volgende' (grey). Below these are three input fields: 'Koolhydraten' (0 Gram), 'Glucose' (68 mg/dL), and a large '0' in the center labeled 'eenheden'. At the bottom, a green-bordered box contains a blue information icon and the text: 'Uw BG is laag. Eet koolhydraten en test uw BG opnieuw.'

Binnen het doel

Als uw BG- of sensorglucosewaarde dezelfde waarde is als uw doel-BG, wordt er geen correctiebolus meegenomen in de bolusberekening.

Handmatige invoer van de BG-waarde met behulp van de Tandem t:slim-app

Ga als volgt te werk om uw BG-waarde als volgt in te voeren in de Tandem t:slim-app:

1. Tik in de *navigatiebalk* op **Bolus**.

2. Tik op **Glucose**.

The screenshot shows the 'Bolus' screen with the same top buttons. The 'Glucose' input field (68 mg/dL) is highlighted with a green border. The 'Koolhydraten' field (0 Gram) is also visible.

3. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw BG-waarde in te voeren.

4. Tik op **Gereed** (iOS) of ✓ (Android) op het cijfertoetsenblok om uw BG-waarde op te slaan in uw pompgeschiedenis en het cijfertoetsenblok te sluiten

OPMERKING

Hierdoor wordt de BG-waarde opgeslagen in uw pompgeschiedenis, of er nu een bolus is toegediend of niet.

5. Afhankelijk van de resultaten van uw BG-waarde volgt u de stappen in het desbetreffende bovenste Doel-gedeelte.

8.13 Bolus overschrijven met behulp van de Tandem t:slim-app

U kunt de berekende bolus negeren door op de waarde van de berekende eenheid te tikken en de insuline- eenheden in te voeren die u wilt toedienen. De optie bolus negeren is altijd beschikbaar. Het volgende voorbeeld toont het overschrijven van een bolus in de Tandem t:slim-app:

The screenshot shows the 'Bolus' screen with the same top buttons. The central '0' in 'eenheden' is highlighted with a green border and replaced with the number '4'.

Als u de mobiele Tandem t:slim-app gebruikt om de waarde van de te overschrijven bolus in te stellen, wordt de waarschuwing Bolus overschrijven

weergegeven als informatief bericht op het scherm *Bolus*.



8.14 Voedingsbolus met de Tandem t:slim-app

Ga als volgt te werk om een voedingsbolus toe te dienen met behulp van de Tandem t:slim-app:

1. Tik op het **Bolus**-pictogram in de *navigatiebalk*.
2. Tik op **0 gram** of **0 eenheden** aan de linkerkant van het scherm, afhankelijk van de instellingen in uw actieve persoonlijk profiel.

3. Gebruik het cijfertoetsenblok om het aantal eenheden insuline of gram koolhydraten in te voeren dat moet worden toegediend.
4. Tik op **Gereed** (iOS) of ✓ (Android) op het cijfertoetsenblok om het cijfertoetsenblok te sluiten.
 - ✓ De totale bolushoeveelheid bovenaan het scherm wordt bijgewerkt (indien van toepassing).
5. Tik op **Volgende** (iOS) of → (Android) om het aantal toe te dienen eenheden insuline te bevestigen.
 - ✓ Het scherm *Bolus bevestigen* wordt tijdelijk weergegeven.
6. Aanvraag bevestigen:
 - Tik op **Volgende** (iOS) of ✓ (Android) indien de ingevoerde gegevens correct zijn.
 - Tik op **Terug** (iOS) of X (Android) om terug te keren en wijzigingen aan te brengen of berekeningen te bekijken.

7. Tik op het pictogram **Bolus toedienen**.
8. De Tandem t:slim-app genereert een bevestigingsprompt. Gebruik de beveiligingsfunctie van uw smartphone om de bolusaanvraag te bevestigen of tik op **Annuleren** om terug te keren naar het scherm *Bolus*.
 - ✓ De Tandem t:slim-app keert terug naar het *Dashboard*-scherm
9. Er verschijnt een bolusbalk boven de *navigatiebalk* totdat de gehele bolus is toegediend, inclusief een knop annuleren/stoppen, evenals het type bolus en de aangevraagde hoeveelheid.

8.15 Een bolus annuleren of afbreken met de Tandem t:slim-app

⚠ WAARSCHUWING


Telkens wanneer u een bolus aanvraagt, hebt u na het aanvragen 10 seconden de tijd om de bolus te annuleren om helemaal te voorkomen dat er insuline wordt toegediend. Zowel op de

pomp als in de Tandem t:slim-app is gedurende deze tijd de melding “bolus wordt aangevraagd” te zien zolang uw pomp en de Tandem t:slim-app verbonden zijn. U kunt de bolus annuleren via pomp of de app, ongeacht de wijze waarop u de bolus hebt aangevraagd.

U kunt een bolus annuleren of afbreken via de Tandem t:slim-app, zolang de Tandem t:slim-app een Bluetooth™ verbinding heeft met de pomp, ongeacht of u de bolus hebt geïnitieerd vanuit de pomp of vanuit de Tandem t:slim-app.

Een bolusaanvraag annuleren vanuit de de Tandem t:slim-app:

1. Tik op  om de levering te annuleren.

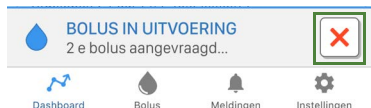

OPMERKING

De  is altijd beschikbaar in de Tandem t:slim-app als onderdeel van de bolusbalk tijdens bolustoediening. U hoeft niet naar het scherm *Bolus* te gaan om een bolus te annuleren.

2. Tik op **Ja** in de bevestigingsprompt om de bolus te annuleren.



- ✓ De waarschuwing Bolus gestopt wordt weergegeven en geeft de toegediende eenheden weer als 0.

Een bolus stoppen nadat de toediening is begonnen:

1. Tik op  in de bolusbalk van de Tandem t:slim-app om toediening te stoppen.
2. Tik op **Ja** in de bevestigingsprompt van de Tandem t:slim-app.

- ✓ Het scherm *BOLUS GESTOPT* wordt weergegeven en de toegediende eenheden worden berekend.

- ✓ De aantallen aangevraagde en toegediende eenheden worden weergegeven.
3. Tik op **OK** in het informatie bericht van de Tandem t:slim-app.

8.16 Pompverbinding verbroken

Verbinding verbroken tijdens bolusaanvraag

Als de verbinding tussen uw smartphone en de pomp wordt verbroken terwijl u een bolus aanvraagt voordat u de toediening van een bolus bevestigt, genereert de Tandem t:slim-app een waarschuwing *Pompverbinding verbroken*. Tik op **OK** als u deze melding ontvangt, om terug te keren naar het *Dashboard*-scherm.

- Er wordt geen bolus toegediend. Gebruik de pomp om deze bolus toe te dienen.
- Controleer de Bluetooth-verbinding en Bluetooth-instellingen van uw smartphone.
- U kunt de Tandem t:slim-app niet gebruiken om een nieuwe bolus aan

te vragen totdat u de verbinding van uw smartphone met de pomp hebt hersteld.

Verbinding verbroken tijdens bolustoediening

Als de verbinding tussen uw smartphone en de pomp wordt verbroken terwijl de pomp een bolus toedient, genereert de Tandem t:slim-app een waarschuwing *Pompverbinding verbroken*. Als u deze melding ontvangt, leidt de Tandem t:slim-app u terug naar het *Dashboard-scherm*.

- De pomp zal de rest van de bolus alsnog toedienen, tenzij u de pomp gebruikt om de bolus af te breken.
- U moet de verbinding tussen uw smartphone en de pomp herstellen voordat u de Tandem t:slim-app gebruikt om een nieuwe bolus toe te dienen. Ondanks de verbroken verbinding wordt de AI van uw pomp bijgewerkt, zodat de toegediende bolus wordt weergegeven. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#).

⚠️ VOORZORGSMAATREGEEL

Negeer **GEEN** symptomen van een te hoge of te lage bloedglucose. Als de meetwaarden in uw Tandem t:slim-app niet overeenkomen met uw symptomen, controleert u het scherm van uw pomp en controleert u of uw pomp een Bluetooth-verbinding heeft met uw smartphone.

🚩 OPMERKING

Deze instelling voor de mobiele verbinding houdt geen verband met de Bluetooth-verbinding van uw CGM. Raadpleeg voor informatie over de Bluetooth-verbinding van de CGM. [Deel 21.1 Over Bluetooth-technologie](#).

Zelfs als de Tandem t:slim-app verbinding met de pomp heeft gemaakt, kunt u de Tandem t:slim-app niet gebruiken om een bolus aan te vragen totdat de app uw bolusinstellingen van de pomp heeft ontvangen. Als u gedurende deze periode op **Bolus** tikt om een bolus aan te vragen, genereert de Tandem t:slim-app de waarschuwing *Bolus niet beschikbaar*, zoals getoond in het volgende voorbeeld. Tik op **OK** om

terug te gaan naar het *Dashboard-scherm*.



Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 9

Insuline starten, stoppen of hervatten

9.1 Toediening van insuline starten


De insulinetoediening begint zodra u een persoonlijk profiel hebt geconfigureerd en geactiveerd. Zie [Hoofdstuk 6 Instellingen insulinetoediening](#) voor instructies over het aanmaken, configureren en activeren van een persoonlijk profiel.

9.2 Toediening van insuline stoppen

U kunt alle toedieningen van insuline op elk moment stoppen. Wanneer u alle insulinetoediening stopt, wordt elke actieve bolus en elke actieve tijdelijke snelheid onmiddellijk gestopt. Er kan geen toediening van insuline plaatsvinden terwijl uw pomp is gestopt. De pomp geeft een Alarm hervatten pomp om u eraan te herinneren dat u na een bepaalde periode handmatig de insuline moet voortzetten. De standaardinstelling voor dit alarm is 15 minuten.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **INSULINE STOPPEN**.

- ✓ Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
- 3. Ga naar stap 4 om de instelling voor het alarm Hervatten pomp te wijzigen. Tik anders op  om de standaardinstelling te accepteren.
- ✓ Het scherm *Alle toedieningen gestopt* wordt weergegeven voordat u terugkeert naar het *startscherm* met daarop de status **ALLE TOEDIENINGEN GESTOPT**. Er verschijnt ook een rood uitroepteken rechts van de tijd en de datum.
- 4. Om de instelling van het Alarm hervatten pomp te wijzigen, tikt u op het paneel midden op het scherm.

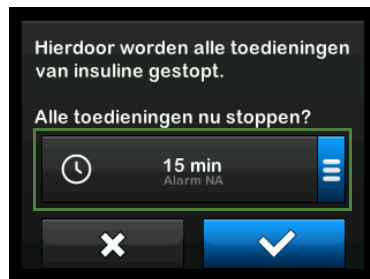

5. Selecteer het keuzerondje bij de tijd dat u het Alarm hervatten pomp wilt laten weergeven.
- ✓ De pomp keert terug naar het bevestigingsscherm.
- ✓ De pomp slaat de nieuwe alarmtijd op en gebruikt deze instelling de volgende keer dat de insuline handmatig wordt onderbroken, tenzij de pomp in de tussentijd is gereset. In dat geval wordt de standaardinstelling gebruikt.
6. Tik op .
- ✓ Het scherm *Alle toedieningen gestopt* wordt weergegeven voordat u terugkeert naar het *startscherm* met daarop de status **ALLE TOEDIENINGEN GESTOPT**. Er verschijnt ook een rood uitroepteken rechts van de tijd en de datum.

OPMERKING

Als u de insulinetoediening handmatig stopt, moet u de insulinetoediening ook handmatig hervatten. De Control-IQ™-technologie hervat de insuline niet automatisch als u deze handmatig stopt.

9.3 Insulinetoediening hervatten

Druk als het pompscherm niet is ingeschakeld één keer op de knop **Scherm aan/Snelle bolus** om het scherm van uw t:slim X2-pomp in te schakelen.

1. Tik op 1–2–3.
2. Tik op .
- ✓ Het scherm *INSULINE WORDT HERVAT* wordt tijdelijk weergegeven.

– OF –

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **INSULINE VOORTZETTEN**.
3. Tik op .

Het scherm *INSULINE WORDT HERVAT* wordt tijdelijk weergegeven.

9.4 Loskoppelen bij gebruik van Control-IQ-technologie

Stop de insulinetoediening wanneer u uw pomp van uw lichaam moet loskoppelen. Het stoppen van de insulinetoediening vertelt de pomp dat u niet actief insuline toedient, wat ook de Control-IQ-technologie stopt, waardoor het berekenen van de aanpassing van de insulinetoediening wordt gestopt.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 10

Informatie en geschiedenis voor de t:slim X2-insulinepomp

10.1 t:slim X2 Pompinfo

De t:slim X2™-pomp geeft u toegang tot informatie over uw pomp. Via het scherm *Pompinfo* hebt u toegang tot informatie zoals het serienummer van uw pomp, de contactgegevens voor de klantenservice in uw regio, de website en de software- en hardwareversie.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Pompinfo**.
4. Blader door de *Pompinfo* met de pijlen omhoog/omlaag.

10.2 t:slim X2 Pompgeschiedenis

Pompgeschiedenis geeft een historisch logboek van pompgebeurtenissen weer. Er kunnen ten minste 90 dagen aan gegevens worden weergegeven in Geschiedenis. Wanneer het maximale aantal gebeurtenissen is bereikt, worden de oudste gebeurtenissen uit het geschiedenislogboek verwijderd en vervangen door de meest recente

gebeurtenissen. De volgende informatie kan worden opgezocht in Pompgeschiedenis:

Samenvatting toediening, Totale dagelijkse dosis, Bolus, Basaal, Laden, BG, waarschuwingen en alarmen, Control-IQ, en Volttooid.

De samenvatting van de toediening geeft een uitsplitsing van de totaal toegediende insuline in basale toediening en bolustoediening, in eenheden en percentages. De samenvatting kan worden weergegeven per geselecteerde periode van: vandaag, 7 dagen, 14 dagen en gemiddelde over 30 dagen.

Voor de totale dagelijkse dosis worden de basale en bolustoediening voor elke afzonderlijke dag uitgesplitst in eenheden en percentages. U kunt door elke afzonderlijke dag bladeren om uw totale insulinetoeediening te bekijken.

Bolus, Basaal, Laden, BG, en Waarschuwingen en alarmen zijn op datum gegroepeerd. De details van de gebeurtenissen in elk rapport worden in chronologische volgorde weergegeven.

Het gedeelte Volttooid bevat alle informatie uit elk deel, evenals eventuele wijzigingen in instellingen.

De letter “D” (D: waarschuwing) bij een waarschuwing of alarm geeft het bijbehorende tijdstip aan. De letter “C” (C: waarschuwing) geeft het tijdstip van wissen aan.

Bolusgeschiedenis toont de bolusaanvraag, de bolusstarttijd en het tijdstip van voltooiing van de bolus.

- De letters “PB” duiden aan dat er een bolus via de pomp is aangevraagd, geannuleerd of afgebroken.
- De letters “RB” duiden aan dat er een bolus via de Tandem t:slim-app is aangevraagd, geannuleerd of afgebroken.

De Control-IQ-geschiedenis toont het historische logboek van de status van de Control-IQ™-technologie, inclusief wanneer de functie is in- of uitgeschakeld, wanneer wijzigingen in de basaalsnelheid zijn aangebracht en wanneer Control-IQ-technologie-bolussen zijn toegediend. De snelheid van insulinetoeediening kan iedere vijf minuten veranderen.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **pijl-omlaag**.
3. Tik op **Geschiedenis**
4. Tik op **Pompgeschiedenis**.
5. Tik op de gewenste optie.

OPMERKING

U moet deze logbestanden op de pomp openen; de Tandem t:slim™-app geeft de pompgeschiedenislogboeken niet weer.

10.3 Info over de Tandem t:slim-app

De Tandem t:slim-app geeft toegang tot informatie over de Tandem t:slim-app.

- Het scherm *Help* geeft u toegang tot items zoals een in-app-handleiding voor de configuratie en het gebruik van Tandem t:slim-app, een lijst met veelgestelde vragen en contactgegevens van de Klantenservice technische ondersteuning.

- Het scherm *Over* geeft u toegang tot items zoals de gebruiksaanwijzing van de Tandem t:slim-app, juridische informatie en de softwareversie van de Tandem t:slim-app.

Om de schermen *Help* en *Over* te vinden, tikt u in uw Tandem t:slim-app op **Instellingen**.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 11

Herinneringen op de t:slim X2-insulinepomp

Uw pomp geeft u belangrijke informatie over de pomp in de vorm van herinneringen, waarschuwingen en alarmen. Herinneringen worden weergegeven om u op de hoogte te stellen van een optie die u hebt ingesteld (bijvoorbeeld een herinnering om na een bolus uw BG te controleren). Waarschuwingen worden automatisch weergegeven om veiligheidsomstandigheden mee te delen waarvan u op de hoogte moet zijn (bijvoorbeeld een waarschuwing dat uw insulinespiegel laag is). Alarmen worden automatisch weergegeven om u op de hoogte te stellen van een daadwerkelijke of potentiële onderbreking van de insulinetoediening (bijvoorbeeld een alarm bij een leeg insulinereservoir). Alarmen verdienen bijzondere aandacht.

Als er meerdere herinneringen, waarschuwingen en alarmen tegelijkertijd plaatsvinden, worden eerst de alarmen weergegeven, als tweede waarschuwingen en als derde herinneringen. Ze moeten allemaal afzonderlijk worden bevestigd, totdat ze allemaal zijn bevestigd.

De informatie in dit gedeelte helpt verduidelijken hoe u op herinneringen moet reageren.

Herinneringen worden gegeven in de vorm een enkele reeks van twee tonen of een enkele trilling, afhankelijk van de instelling voor volume/trilling in Geluidsvolume. Ze worden om de 10 minuten herhaald, tot ze worden bevestigd. Herinneringen worden niet geëscaleerd.

11.1 Herinnering lage BG

De herinnering bij lage BG vraagt u om uw BG opnieuw te testen nadat een lage bloedglucosewaarde is gelezen. Als u deze herinnering inschakelt, moet u een lage glucosewaarde instellen waarbij de herinnering wordt geactiveerd, en hoeveel tijd er dient te verstrijken voordat de herinnering plaatsvindt.

Deze herinnering is standaard ingesteld op uit. Als deze instelling aan staat, is de standaard Herinner bij waarde onder 70 mg/dl en Herinner na 15 min., maar u kunt deze waarden instellen vanaf 70 tot 120 mg/dl en tussen 10 en 20 minuten.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.

3. Tik op **Waarschuwingen en herinneringen**.

4. Tik op **Pompherinneringen**.

5. Tik op **Lage BG**.

6. Lage BG is ingesteld op aan; tik op **Lage BG** om uit te schakelen.

- a. Tik op **Herinner bij waarde onder** en voer met het toetsenbord op het scherm een lage BG-waarde in (van 70 tot 120 mg/dl) waarbij u de herinnering wilt activeren en tik vervolgens op .
- b. Tik op **Herinner na**, voer met het toetsenbord op het scherm de tijd in (van 10 tot 20 minuten) en tik vervolgens op .
- c. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

Om te reageren op de herinnering bij lage BG

Tik op  om de herinnering te wissen en controleer uw bloedglucose.

11.2 Herinnering hoge BG

De herinnering bij hoge BG vraagt u om uw BG opnieuw te testen nadat een hoge bloedglucosewaarde is gelezen. Wanneer u deze herinnering inschakelt, moet u een hoge glucosewaarde instellen waarbij de herinnering wordt geactiveerd, en hoeveel tijd er dient te verstrijken voordat de herinnering plaatsvindt.

Deze herinnering is standaard ingesteld op uit. Als deze instelling aan is, is de standaard Herinner bij waarde boven 200 mg/dl en Herinner na 120 minuten, maar u kunt deze waarden instellen van 150 tot 300 mg/dl en 1 tot 3 uur.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Waarschuwingen en herinneringen**.
4. Tik op **Pompherinneringen**.
5. Tik op **Hoge BG**.
6. Hoge BG is ingesteld op aan; tik op **Hoge BG** om uit te schakelen.

- a. Tik op **Herinner bij waarde boven** en voer met het toetsenbord op het scherm een hoge BG-waarde in (van 150 tot 300 mg/dl) waarbij u de herinnering wilt activeren, en tik vervolgens op .
- b. Tik op **Herinner me na**, voer met het toetsenbord op het scherm de tijd in (van 1 tot 3 uur) en tik vervolgens op .
- c. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

Om te reageren op de herinnering bij hoge BG

Tik op  om de herinnering te wissen en controleer uw bloedglucose.

11.3 Herinnering BG na bolus

De herinnering BG na bolus vraagt u om op een bepaald tijdstip na de bolustoediening uw BG te testen. Wanneer u deze herinnering inschakelt, moet u instellen hoeveel tijd er dient te verstrijken voordat de herinnering plaatsvindt. De standaardperiode is

1 uur en 30 minuten. Deze kan worden ingesteld tussen 1 en 3 uur.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Waarschuwingen en herinneringen**.
4. Tik op **Pompherinneringen**.
5. Tik op **BG na bolus**.
6. BG na bolus is ingesteld op aan; tik op **BG na bolus** om uit te schakelen.
7. Tik op **Herinner na**, voer met het toetsenbord op het scherm de tijd in (van 1 tot 3 uur) waarbij u de herinnering wilt activeren, en tik vervolgens op .
8. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

Om te reageren op de herinnering BG na bolus

Tik op  om de herinnering te wissen en controleer uw BG met uw bloedglucosemeter.

11.4 Herinnering gemiste-maaltijdbolus

De herinnering gemiste-maaltijdbolus laat het u weten als tijdens een bepaalde periode geen bolus is toegediend. Er zijn vier afzonderlijke herinneringen beschikbaar. Bij het programmeren van deze herinnering moet u voor elke herinnering de dag, de starttijd en de eindtijd selecteren.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Waarschuwingen en herinneringen**.
4. Tik op **Pompherinneringen**.
5. Tik op **Gemiste-maaltijdbolus**.
6. Tik op de herinnering die u wilt instellen (herinnering 1 tot 4) op het scherm **Gemiste-maaltijdbolus** en doe het volgende:
 - a. Tik op **Herinnering 1** (of 2, 3, 4).

- b. Herinnering 1 is ingeschakeld; tik op **Herinnering 1** om uit te schakelen.
- c. Tik op **Geselecteerde dagen**, tik op de dag(en) waarop u wilt dat de herinnering ingeschakeld is en tik vervolgens op .
- d. Tik op **Starttijd**, op **Tijd**, voer met het toetsenbord op het scherm de starttijd in en tik vervolgens op .
- e. Tik op **Tijdstip** om AM of PM te selecteren en tik vervolgens op .
- f. Tik op **Eindtijd**, op **Tijd**, voer met het toetsenbord op het scherm de eindtijd in en tik vervolgens op .
- g. Tik op **Tijdstip** om AM of PM te selecteren en tik vervolgens op .
- h. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

Reageren op de herinnering bij gemiste-maaltijdbolus

Tik op  om de herinnering te wissen en dien indien nodig een bolus toe.

11.5 Herinnering locatie

De Herinnering locatie vraagt u om uw infuusset te vervangen. Deze herinnering is standaard ingesteld op uit. Als deze instelling aan is, kan de herinnering worden ingesteld op 1 tot 3 dagen en op een door u geselecteerd tijdstip.

Voor gedetailleerde informatie over de functie Herinnering locatie: zie [Deel 7.8 Instelling Herinnering locatie](#).

Reageren op de Herinnering locatie

Tik op  om de herinnering te wissen en vervang uw infuusset.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 12

Door gebruiker instelbare
waarschuwingen en
alarmen

12.1 Waarschuwing bij lage insuline


Uw t:slim X2™-pomp registreert hoeveel insuline resteert in het reservoir en waarschuwt u wanneer het bijna leeg is. De standaard voor deze waarschuwing is vooraf ingesteld op 20 eenheden. U kunt deze waarschuwinginstelling instellen tussen 10 en 40 eenheden. Wanneer de hoeveelheid insuline onder de ingestelde waarde daalt, zal de waarschuwing bij lage insuline piepen/trillen en op het scherm verschijnen. Nadat de waarschuwing is gewist, verschijnt de indicator voor lage insuline (een enkele rode balk op de weergave van het insulineniveau op het *startscherm*).

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Waarschuwingen herinneringen**.
4. Tik op **Pompwaarschuwingen**.
5. Tik op **Lage insuline**.

6. Voer via het toetsenbord op het scherm het gewenste aantal eenheden in (van 10 tot 40 eenheden) voor de waarschuwing bij lage insuline en tik op .
7. Tik op  wanneer alle wijzigingen zijn voltooid.

Om te reageren op de waarsch. bij lage insuline

Tik op  om de waarschuwing te wissen. Vervang uw insulinereservoir volgens de instructies in [Deel 7.3 Vullen en laden van een t:slim X2-reservoir](#).

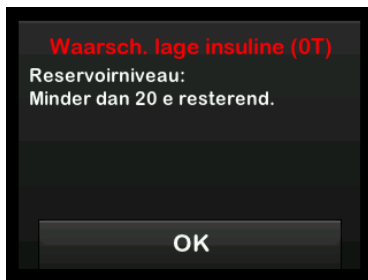

12.2 Alarm Autom. uitschakelen

Uw pomp kan de insulinetoeidingen stoppen en u of degene die bij u is

waarschuwen als er binnen een bepaalde periode geen interactie is geweest met de pomp, met name als u geen CGM draagt of Control-IQ™-technologie gebruikt.

Dit alarm is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie inschakelt, is de tijd standaard ingesteld op 12 uur. U kunt de periode instellen tussen 5 en 24 uur. Dit alarm waarschuwt u dat er gedurende het opgegeven aantal uur geen interactie is geweest met de pomp en dat de pomp over 30 seconden wordt uitgeschakeld.

Het alarm Autom. uitschakelen piept en verschijnt op het scherm en de insulinetoeiding stopt zodra u het ingestelde aantal uren overschrijdt zonder een van de volgende maatregelen te nemen:

- Een snelle bolus toedienen.
- Druk op de knop **Scherm aan/Snelle bolus** en tik vervolgens op **1-2-3** om de pomp te ontgrendelen.
- Voer bepaalde acties uit in de Tandem t:slim™-app.

Schakel het alarm Autom. uitschakelen in en configureer het als volgt:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Waarschuwingen en Herinneringen**.
4. Tik op **Pompwaarschuwingen**.
5. Tik op **Autom. uitschakelen**. Er verschijnt een bevestigingsscherm.
 - Tik op  om door te gaan.
 - Tik op  om terug te gaan.
6. Verifieer of Autom. uitschakelen is ingesteld op aan en tik vervolgens op **Tijd**.
7. Voer via het toetsenbord op het scherm in voor hoeveel uur (van 5 tot 24 uur) u het alarm Autom. uitschakelen wilt activeren en tik op .
8. Tik op  en vervolgens op  als alle wijzigingen zijn voltooid.

9. Tik op het **Tandem-logo** om terug te keren naar het *startscherm*.

Om te reageren op de waarschuwing Autom. uitschakelen

Tik op **NIET UITZETTEN**.



- ✓ De waarschuwing verdwijnt en de pomp hervat de normale werking.

Als u de waarschuwing niet wist binnen de aftelperiode van 30 seconden, verschijnt het alarm Autom. uitschakelen, vergezeld van een hoorbaar alarm. Dit alarm waarschuwt u dat uw pomp is gestopt met het toedienen van insuline.

Scherm Alarm Autom. uitschakelen

Tik op .



- ✓ Het *startscherm* verschijnt met de status Alle toedieningen gestopt.

U moet de toediening hervatten om de behandeling voort te zetten; zie [Deel 9.3 Insulinetoediening hervatten](#).

12.3 Waarsch. Max. basaal

Met uw pomp kunt u een grens instellen voor de basaalsnelheid die de pomp u niet zal laten overschrijden tijdens een Tijdelijke snelheid.

Zodra de Basale grens in de pompinstellingen is ingesteld (zie [Deel 5.11 Basale grens](#)), ontvangt u een waarschuwing als de volgende scenario's zich voordoen.

1. Er werd verzocht om een tijdelijke snelheid die boven de basale grens ligt.
2. Er is een tijdelijke snelheid aan de gang en er is een nieuw tijdsegment uit een Persoonlijk profiel begonnen, waardoor de tijdelijke snelheid boven de basale grens ligt.

Reageren op een waarschuwing Max. basaal

Tik op  om de verlaagde tijdelijke snelheid te accepteren. De verlaagde waarde voor tijdelijke snelheid is

dezelfde waarde voor basale grens die in Persoonlijke profielen is ingesteld.



2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 13

Waarschuwingen van de t:slim X2-insulinepomp

Uw pomp geeft u belangrijke informatie over de werking ervan door middel van herinneringen, waarschuwingen en alarmeren. Herinneringen worden weergegeven om u op de hoogte te stellen van een optie die u hebt ingesteld (bijvoorbeeld een herinnering om na een bolus uw BG te controleren). Waarschuwingen worden automatisch weergegeven om veiligheidsomstandigheden mee te delen waarvan u op de hoogte moet zijn (bijvoorbeeld een waarschuwing dat uw insulinespiegel laag is). Alarmeren worden automatisch weergegeven om u op de hoogte te stellen van een daadwerkelijke of potentiële onderbreking van de insulinetoeediening (bijvoorbeeld een alarm bij een leeg insulinereservoir). Alarmeren verdienen bijzondere aandacht.

Als er meerdere herinneringen, waarschuwingen en alarmeren tegelijkertijd optreden, worden eerst de alarmeren weergegeven, als tweede waarschuwingen en als derde herinneringen. Elk moet afzonderlijk worden bevestigd, totdat ze allemaal zijn bevestigd.

De informatie in dit gedeelte helpt verduidelijken hoe u op waarschuwingen moet reageren.

Waarschuwingen worden gegeven in de vorm van 1 of 2 reeksen van 3 piepen of 1 of 2 trillingen, afhankelijk van de prioriteit van de waarschuwing en de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling. Ze worden regelmatig herhaald totdat ze worden bevestigd. Waarschuwingen worden niet geëscaleerd.

De Tandem t:slim™-app kan ook berichten, waarschuwingen en alarmeren van uw t:slim X2™-pomp weergeven als pushmeldingen op uw smartphone. Deze pushmeldingen zijn identiek aan het scherm van uw pomp, tenzij anders aangegeven in dit hoofdstuk.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmeren en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor meer informatie over het

aansluiten van uw pomp en smartphone of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.

📌 OPMERKING

[Hoofdstuk 26 CGM-waarschuwingen en -fouten](#) bevat een extra lijst met waarschuwingen en fouten met betrekking tot CGM-gebruik.

📌 OPMERKING

[Hoofdstuk 32 Waarschuwingen Control-IQ-technologie](#) bevat een aanvullende lijst met waarschuwingen met betrekking tot Control-IQ™-technologie.

13.1 Waarschuwing bij lage insuline

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Er zijn 5 eenheden of minder over in het reservoir.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	1 reeks van 3 tonen of 1 trilling, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Vervang uw reservoir zo snel mogelijk om het Alarm leeg reservoir en het opraken van insuline te voorkomen.

13.2 Waarschuwingen zwakke voeding

Waarschuwing zwakke voeding 1

Scherf	Uitleg	
	Wat betekent het?	Minder dan 25% batterijcapaciteit resterend.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	1 reeks van 3 tonen of 1 trilling, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Laad uw pomp zo snel mogelijk op om de tweede Waarsch. zwakke voeding te voorkomen.

OPMERKING

Na een Waarsch. zwakke voeding verschijnt de indicator voor zwakke voeding (een rode balk op de batterijniveauweergave op het *startscherm* en het *vergrendelingsscherm*).

Waarschuwing zwakke voeding 2

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Minder dan 5% batterijcapaciteit resterend. De insulinetoediening duurt nog 30 minuten, waarna de pomp wordt uitgeschakeld en de toediening van insuline stopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	1 reeks van 3 tonen of 1 trilling, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK . Laad uw pomp onmiddellijk op om het Alarm zwakke voeding en uitschakeling van de pomp te voorkomen.

 OPMERKING

Na een Waarsch. zwakke voeding verschijnt de indicator voor zwakke voeding (een rode balk op de batterijniveauweergave op het *startscherm* en het *vergrendelingsscherm*).

13.3 Waarschuwing bolus onvolledig

Waarschuwing bolus onvolledig - pompscherm

Scherm	Uitleg	
	Wat betekent het?	U bent begonnen aan een bolusaanvraag, maar u hebt de aanvraag niet binnen 90 seconden voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Het scherm <i>Bolus</i> wordt weergegeven. Ga door met uw bolusaanvraag.

Waarschuwing bolus onvolledig - scherm Tandem t:slim-app

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik in de Tandem t:slim-app? 	Wat betekent het?	U bent begonnen aan een bolusaanvraag, maar u hebt de aanvraag niet binnen 90 seconden voltooid.
	Hoe stelt de Tandem t:slim-app mij op de hoogte?	- Als de Tandem t:slim-app is geopend en het scherm <i>Bolus</i> te zien is, verschijnt er een informatiebericht. - Als u de waarschuwing Onvolledige bolus ontvangt als gevolg van interactie met andere functies van de smartphone (bijv. tijdens het beantwoorden van een gesprek, het gebruik van een andere app) of andere schermen in de Tandem t:slim-app, ontvangt u de waarschuwing als een banner met een melding.
	Word ik nog een keer op de hoogte gesteld door de Tandem t:slim-app?	Nee, de waarschuwing blijft op het scherm van de Tandem t:slim-app staan totdat u op OK tikt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK in het informatiebericht van de Tandem t:slim-app. Het scherm <i>Bolus</i> verschijnt. Ga door met uw bolusaanvraag.

OPMERKING


De waarschuwing Bolus onvolledig is de enige waarschuwing in dit hoofdstuk die er op de pomp anders uit ziet. Alle overige waarschuwingen van de pomp zijn in de Tandem t:slim-app identiek.

13.4 Waarschuwing tijdelijke snelheid niet voltooid

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U bent begonnen met het instellen van een tijdelijke snelheid, maar u hebt de aanvraag niet binnen 90 seconden voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	1. Tik op . Het scherm <i>Tijdelijke snelheid</i> wordt weergegeven. Ga door met het instellen van uw tijdelijke snelheid. 2. Tik op  als u niet wilt doorgaan met het instellen van de tijdelijke snelheid.

13.5 Waarschuwingen onvoltooide laadprocedure

Waarschuwing reservoir vervangen niet voltooid

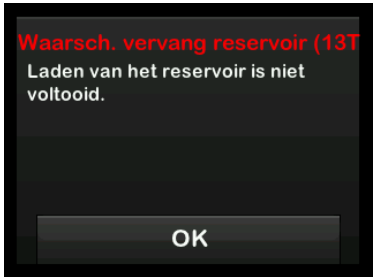Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt Reservoir vervangen geselecteerd in het menu <i>Laden</i> , maar hebt het proces niet binnen 3 minuten voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Voltooi het vervangen van het reservoir.

Waarschuwing slang vullen niet voltooid

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt Slang vullen geselecteerd in het menu <i>Laden</i> , maar hebt het proces niet binnen 3 minuten voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Voltooi het vullen van de slang.

Waarschuwing canule vullen niet voltooid

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt Canule vullen geselecteerd in het menu <i>Laden</i> , maar hebt het proces niet binnen 3 minuten voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Voltooi het vullen van de canule.


13.6 Waarschuwing instelling niet voltooid

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U bent begonnen met het instellen van een nieuw persoonlijk profiel of de Control-IQ-technologie, maar u hebt de programmering niet binnen 5 minuten opgeslagen of voltooid.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Voltooi het programmeren van de instelling voor het persoonlijke profiel of de Control-IQ-technologie.

13.7 Waarschuwing basaalsnelheid vereist

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt geen basaalsnelheid ingevoerd in een tijdsegment in Pers. profielen. In ieder tijdsegment moet een basaalsnelheid worden ingevoerd (de snelheid kan 0 e/uur zijn).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen op het scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee, er moet een basaalsnelheid worden ingevoerd om het tijdsegment op te slaan.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Voer een basaalsnelheid in het tijdsegment in.

13.8 Waarschuwing max. bolus per uur

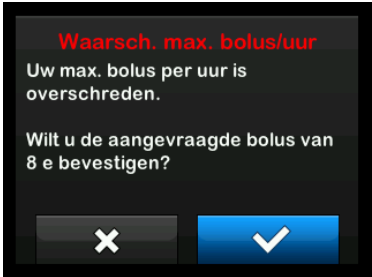Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	In de voorgaande 60 minuten hebt u een totale bolustoediening aangevraagd die meer dan 1,5 keer zo groot is als uw ingestelde maximale bolus.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen op het scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. U moet op  of  tikken om de bolus toe te dienen.
	Hoe moet ik reageren?	• Tik op  om terug te keren naar het scherm <i>Bolus</i> en de bolushoeveelheid aan te passen. • Tik op  om de bolus te bevestigen.


13.9 Waarschuwingen Max. bolus

Waarschuwing Max. bolus 1


Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt een bolus aangevraagd die groter is dan de maximale bolus die is ingesteld in uw actieve persoonlijk profiel.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. U moet op  of  tikken om de bolus toe te dienen.
	Hoe moet ik reageren?	• Tik op  om terug te keren naar het scherm <i>Bolus</i> en de bolushoeveelheid aan te passen. • Tik op  om de ingestelde maximale bolus toe te dienen.

Waarschuwing Max. bolus 2

Het volgende is alleen van toepassing als u koolhydraten hebt ingeschakeld in uw actieve persoonlijke profiel en uw maximale bolus is ingesteld op 25 eenheden.

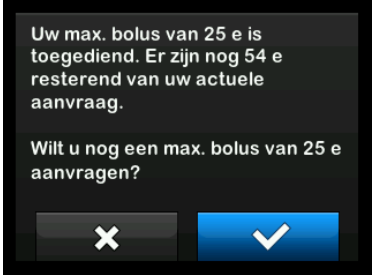Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw maximale bolus is ingesteld op 25 eenheden en u hebt een bolus van meer dan 25 eenheden aangevraagd.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. U moet op  of  tikken om de resterende hoeveelheid van de bolusaanvraag toe te dienen.
	Hoe moet ik reageren?	Voordat u op deze waarschuwing reageert, dient u altijd in overweging te nemen of uw bolusinsulinebehoefte is veranderd sinds u de oorspronkelijke bolus aanvraag. • Tik op  om de resterende hoeveelheid van de bolusaanvraag toe te dienen. Er verschijnt een bevestigingsscherf. • Tik op  als u de resterende hoeveelheid van de bolusaanvraag niet wilt toedienen.

13.10 Waarsch. Max. basaal

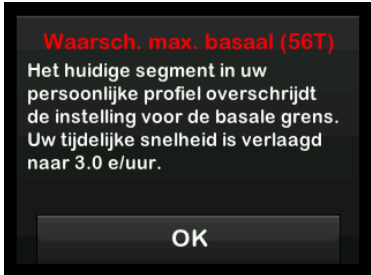Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Een actieve Tijdelijke snelheid overschrijdt uw instelling voor Basale grens als gevolg van een activering van een nieuw tijdsegment in Persoonlijke profielen. Deze waarschuwing wordt alleen weergegeven als uw tijdsegment verandert.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. U moet op  tikken om door te gaan.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om de verlaagde tijdelijke snelheid te accepteren. De verlaagde waarde voor tijdelijke snelheid is dezelfde waarde voor basale grens die in Persoonlijke profielen is ingesteld.

13.11 Waarschuwingen Min. basaal

Waarschuwing Min. basaal 1

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Bij het invoeren van een basaalsnelheid of het aanvragen van een tijdelijke snelheid hebt u een basaalsnelheid aangevraagd die minder is dan de helft van de laagste basaalsnelheid die in uw persoonlijke profiel is gedefinieerd.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. U moet op  of  tikken om door te gaan.
	Hoe moet ik reageren?	• Tik op  om terug te keren naar het vorige scherm om de hoeveelheid aan te passen. • Tik op  om de waarschuwing te negeren en door te gaan met de aanvraag.

Waarschuwing Min. basaal 2

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Een actieve tijdelijke snelheid is gedaald tot onder de helft van de laagste basaalinstelling die is gedefinieerd in uw persoonlijk profiel.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	1 reeks van 3 tonen of 1 trilling, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK en controleer uw actuele tijdelijke snelheid in het menu <i>Activiteit</i> .


13.12 Waarschuwing aansluitingsfout

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt de pomp via een USB-kabel aangesloten op een computer om de pomp op te laden of om gegevens te uploaden naar het Tandem Source-platform, indien beschikbaar in uw regio, maar er kon geen verbinding tot stand worden gebracht.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Ontkoppel en sluit de USB-kabel weer aan om het opnieuw te proberen.

13.13 Time-out koppelingscode

Scherm	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt geprobeerd om een smartphone aan te sluiten op de pomp, maar het koppelingsproces heeft te lang (langer dan 5 minuten) geduurd en is mislukt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen op het scherm, de pomp piept of trilt niet.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op : Probeer de smartphone opnieuw te koppelen.


13.14 Waarschuwing energiebron

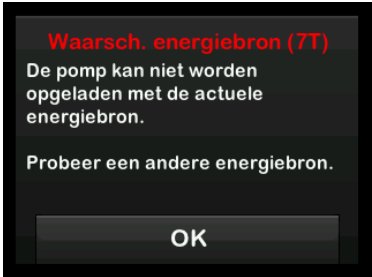Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt uw pomp aangesloten op een energiebron die niet krachtig genoeg is om de pomp op te laden.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	1 reeks van 3 tonen of 1 trilling, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Sluit de pomp aan op een andere energiebron om op te laden.

13.15 Waarschuwing datafout

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft een probleem gedetecteerd dat tot gegevensverlies zou kunnen leiden.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 reeksen van 3 tonen of 2 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Controleer uw persoonlijke profielen en pompinstellingen om te controleren of ze juist zijn. Zie Deel 6.4 Een bestaand profiel bewerken of raadplegen .

13.16 Waarschuwing Pompverbinding verbroken - Tandem t:slim-app

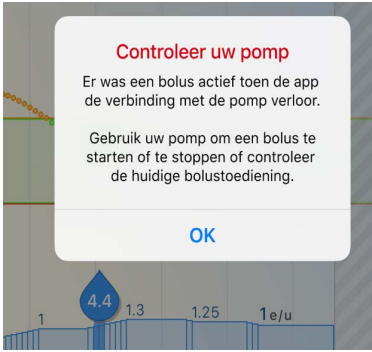Scherf	Uitleg	
Wat zie ik in de Tandem t:slim-app? 	Wat betekent het?	U hebt een bolusaanvraag gestart in de Tandem t:slim-app, maar uw smartphone is losgeraakt van uw pomp voor of tijdens de toediening van een bolus.
	Hoe stelt de Tandem t:slim-app mij op de hoogte?	- Als de Tandem t:slim-app is geopend en het scherm Bolus te zien is, verschijnt er een informatiebericht. - Als de bolustoediening aan de gang is, ontvangt u de waarschuwing in de vorm van een banner met een melding.
	Word ik nog een keer op de hoogte gesteld door de Tandem t:slim-app?	Nee, de waarschuwing blijft op het scherm van de Tandem t:slim-app staan totdat u op OK tikt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK om terug te gaan naar het Dashboard. - Als de bolustoediening aan de gang is, dient uw pomp nog steeds de rest van de bolus toe, tenzij u uw pomp gebruikt om de bolus te stoppen. - U kunt de Tandem t:slim-app niet gebruiken om een nieuwe bolus aan te vragen voordat u de verbinding van uw smartphone met de pomp hebt hersteld.

OPMERKING

De waarschuwing Pompverbinding verbroken is de enige waarschuwing in dit hoofdstuk die wordt weergegeven in de Tandem t:slim-app, maar niet op de pomp.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 14

Alarmen van de t:slim X2-insulinepomp

▲ VOORZORGSMAAATREGEL

CONTROLEER uw pomp regelmatig op alarmtoestanden die kunnen worden weergegeven. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de toediening van insuline en uw aandacht vereisen, zodat u zo snel mogelijk kunt reageren.

Uw t:slim X2™-pomp geeft u belangrijke informatie over de werking ervan door middel van herinneringen, waarschuwingen en alarmen. Herinneringen worden weergegeven om u op de hoogte te stellen van een optie die u hebt ingesteld (bijvoorbeeld een herinnering om na een bolus uw BG te controleren). Waarschuwingen worden automatisch weergegeven om veiligheidsomstandigheden mee te delen waarvan u op de hoogte moet zijn (bijvoorbeeld een waarschuwing dat uw insulinespiegel laag is). Alarmen worden automatisch weergegeven om u op de hoogte te stellen van een daadwerkelijke of potentiële onderbreking van de insulinetoediening (bijvoorbeeld een alarm bij een leeg insulinereservoir). Alarmen verdienen bijzondere aandacht.

Als er meerdere herinneringen, waarschuwingen en alarmen tegelijkertijd optreden, worden eerst de alarmen weergegeven, als tweede waarschuwingen en als derde herinneringen. Elk moet afzonderlijk worden bevestigd, totdat ze allemaal zijn bevestigd.

De informatie in dit deel helpt verduidelijken hoe u op alarmen moet reageren.

Alarmen worden gegeven in de vorm van 3 reeksen van 3 piepen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling. Als alarmen niet worden bevestigd, escaleren ze naar het hoogste geluids- en trillingsniveau. Alarmen worden regelmatig herhaald, totdat de toestand die het alarm heeft veroorzaakt, wordt gecorrigeerd.

De Tandem t:slim™-app kan ook berichten, waarschuwingen en alarmen van uw t:slim X2™-pomp weergeven als pushmeldingen op uw smartphone. Deze pushmeldingen zijn identiek aan het scherm van uw pomp, tenzij anders aangegeven in dit hoofdstuk.

▲ VOORZORGSMAAATREGEL

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmen en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor meer informatie over het aansluiten van uw pomp en smartphone of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.


📌 OPMERKING

Een lijst met waarschuwingen en foutmeldingen in verband met het gebruik van CGM vindt u in [Hoofdstuk 26 CGM-waarschuwingen en -fouten](#).

📌 OPMERKING

Een lijst met waarschuwingen in verband met het gebruik van Control-IQ-technologie™ vindt u in [Hoofdstuk 32 Waarschuwingen Control-IQ-technologie](#).

14.1 Alarm hervatten pomp

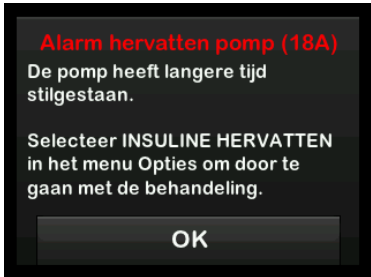Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	U hebt INSULINE STOPPEN geselecteerd in het menu <i>Opties</i> en de insulinetoeiening is voor meer dan 15 minuten gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja. - Als niet wordt bevestigd door op OK te tikken, waarschuwt de pomp u elke 3 minuten opnieuw op het hoogste geluids- en trillingsniveau. - Als wel wordt bevestigd door op OK te tikken, waarschuwt de pomp u elke 15 minuten opnieuw.
	Hoe moet ik reageren?	Om insuline voort te zetten, tikt u in het menu <i>Opties</i> op INSULINE VOORTZETTEN en vervolgens op  om te bevestigen.

14.2 Alarm zwakke voeding

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft een voedingssterkte van 1% of minder gedetecteerd en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat er geen voeding meer is en de pomp wordt uitgeschakeld.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Laad uw pomp onmiddellijk op om de toediening van insuline te hervatten.

14.3 Alarm leeg reservoir

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft gedetecteerd dat het reservoir leeg is en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u het reservoir vervangt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK . Vervang het reservoir onmiddellijk door te tikken op OPTIES op het startscherm en vervolgens op Laden . Volg daarna de instructies in Deel 7.3 Vullen en laden van een t:slim X2-reservoir .

14.4 Alarm reservoirfout

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft gedetecteerd dat het reservoir niet kon worden gebruikt en alle toedieningen zijn gestopt. Dit kan worden veroorzaakt door een defect van het reservoir, het niet volgen van de juiste procedure om het reservoir te laden of overmatig vullen van het reservoir (met meer dan 300 eenheden insuline).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u het reservoir vervangt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Vervang het reservoir onmiddellijk door te tikken op OPTIES op het <i>startscherm</i> en vervolgens op Laden . Volg daarna de instructies in Deel 7.3 Vullen en laden van een t:slim X2-reservoir .

14.5 Alarm verwijdering reservoir

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft gedetecteerd dat het reservoir is verwijderd en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u het actuele reservoir opnieuw aansluit of vervangt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op VERBIND om het actuele reservoir opnieuw aan te sluiten. Tik op INSTALLEREN om een nieuw reservoir te laden.

14.6 Temperatuuralarm

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft een interne temperatuur onder 2 °C (35 °F) of boven 45 °C (113 °F) of een batterijtemperatuur onder 2 °C (35 °F) of boven 52 °C (125 °F) gedetecteerd, en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat er een temperatuur binnen het bereik wordt gedetecteerd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Verwijder de pomp uit de extreme temperatuur en hervat de toediening van insuline.

14.7 Verstoppingalarmen


Verstoppingalarm 1

Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft gedetecteerd dat de toediening van insuline is geblokkeerd en dat alle toedieningen zijn gestopt. Zie Deel 34.4 t:slim X2 Prestatiekenmerken pomp voor meer informatie over hoelang het kan duren tot een pomp een verstopping detecteert.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u de toediening van insuline hervat.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Controleer het reservoir, de slang en de infuusplaats op tekenen van beschadiging of blokkering en corrigeer de situatie. Om insuline voort te zetten, tikt u in het menu <i>Opties</i> op INSULINE VOORTZETTEN en vervolgens op  om te bevestigen.

OPMERKING

Als het verstoppingalarm optreedt tijdens de toediening van een bolus, verschijnt na het tikken op  een scherm dat u laat weten hoeveel van de aangevraagde bolus is toegediend vóór het verstoppingalarm. Wanneer de verstopping is verwijderd, kan een deel of het geheel van het eerder aangevraagde insulinevolume worden toegediend. Test uw BG op het moment van het alarm en volg de instructies van uw zorgverlener voor het omgaan met potentiële of bevestigde verstoppingen.


Verstoppingalarm 2

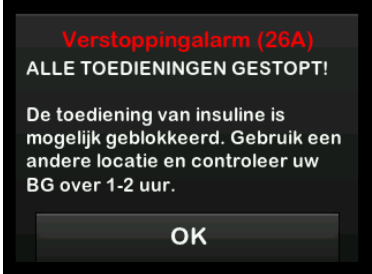Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft kort na het eerste verstoppingalarm een tweede verstoppingalarm gedetecteerd en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u de toediening van insuline hervat.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Vervang het reservoir en de slang en verander de infuusplaats om voor een correcte toediening van insuline te zorgen. Ga door met de toediening van insuline na het vervangen van het reservoir en de slang en het wijzigen van de infuusplaats.

 OPMERKING

Als het tweede verstoppingalarm optreedt tijdens het toedienen van de bolus, verschijnt na het tikken op  een scherm dat u laat weten dat de hoeveelheid toegediende bolus niet kon worden vastgesteld en niet aan uw AI is toegevoegd.

14.8 Knopalarm Scherm aan/Snelle bolus

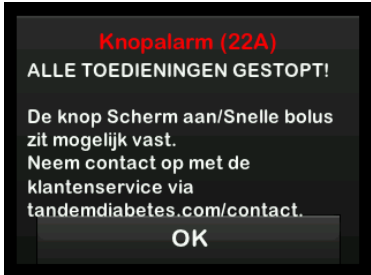Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De knop Scherf Aan/Snelle bolus op de bovenkant van uw pomp zit vast of werkt niet naar behoren, en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat het probleem is verholpen.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Neem contact op met de klantenservice in uw regio.

14.9 Alarm hoogte

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft een drukverschil gedetecteerd tussen de binnenkant van het reservoir en de omgevingslucht binnen het gevalideerde bereik van -396 meter tot 3.048 meter (-1.300 voet tot 10.000 voet) en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat het probleem is verholpen.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  . Verwijder het reservoir uit de pomp (hierdoor kan het reservoir volledig ontluchten) en sluit vervolgens het reservoir opnieuw aan.

14.10 Alarm resetten

Scherf	Uitleg	
	Wat betekent het?	Uw pomp is gereset en alle toedieningen zijn gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 tonen of 3 trillingen, afhankelijk van de in Geluidsvolume gekozen instelling voor volume/trilling.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u op OK tikt.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK . Neem contact op met de klantenservice in uw regio.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 15

Storing van de t:slim X2-insulinepomp

15.1 Storing

Als uw pomp een kritieke fout detecteert, verschijnt het scherm *STORING* en worden alle toedieningen gestopt. Neem contact op met de klantenservice in uw regio.

U wordt op de hoogte gebracht van storingen door 3 reeksen van 3 tonen op het hoogste volume en 3 trillingen. Deze worden op gezette tijden herhaald totdat ze worden bevestigd door op **ALARM STILZETTEN** te tikken.

VOORZORGSMAATREGEL

Vraag uw zorgverlener **ALTIJD** of er specifieke richtlijnen zijn wanneer u de pomp om welke reden dan ook moet of wilt losmaken. Afhankelijk van de duur en de reden waarom u ontkoppelt, kan het nodig zijn dat u de gemiste basaalinsuline en/of bolusinsuline inhaalt. Controleer uw BG voordat u de pomp ontkoppelt en opnieuw wanneer u die aansluit, en behandel hoge en lage BG zoals aanbevolen door uw zorgverlener.

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw pomp heeft een kritieke fout gedetecteerd en alle toedieningen zijn gestopt. Gebruik uw back-upmethode voor insulinetoediening of neem contact op met uw zorgverlener voor een alternatief insulinetoedieningsschema.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	3 reeksen van 3 piepen op het hoogste volume en 3 trillingen.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 3 minuten, totdat u de storing bevestigt door op ALARM STILZETTEN te tikken.
	Hoe moet ik reageren?	• Noteer de storingscode die op het scherm verschijnt. • Tik op ALARM STILZETTEN. Het scherm <i>STORING</i> blijft zichtbaar op de pomp, ook al wordt het alarm onderdrukt. • Neem contact op met de klantenservice in uw regio en vermeld de storingscode die u hebt genoteerd.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 16

Onderhoud van uw pomp

16.1 Overzicht

Dit deel biedt informatie over de verzorging en het onderhoud van uw pomp.

Reiniging van de pomp

Gebruik een vochtige, pluisvrije doek om uw pomp te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke of industriële schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, bleekmiddel, schuursponsjes, chemicaliën of scherpe instrumenten. U mag de pomp nooit in water onderdompelen of een andere vloeistof gebruiken om de pomp schoon te maken. Plaats de pomp niet in de vaatwasser en gebruik geen warm water om hem te reinigen. Gebruik zo nodig alleen een zeer mild reinigingsmiddel, zoals een kleine hoeveelheid vloeibare zeep met warm water. Gebruik een zachte handdoek om uw pomp te drogen; plaats de pomp nooit in een magnetron of bakoven om te drogen.

Uw pomp onderhouden

De pomp heeft geen preventief onderhoud nodig.

Uw pomp inspecteren op schade

▲ VOORZORGSMATREGEL

Gebruik uw pomp **NIET** als u vermoedt dat deze is beschadigd door een val op of stoten tegen een hard oppervlak. Controleer of de pomp goed werkt door een energiebron in de USB-poort te steken en te controleren of het scherm inschakelt, u pieptonen hoort, de pomp voelt trillen en een groene LED ziet die knippert rond de rand van de knop **Scherm aan/Snelle bolus**. Staak het gebruik van de pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als u vermoedt dat de pomp beschadigd zou kunnen zijn.

Als u uw pomp laat vallen of als hij tegen iets hards is gestoten, controleer dan of hij nog steeds goed werkt. Controleer of het aanraakscherm werkt en leeg is en of het reservoir en de infuusset goed op hun plaats zitten. Controleer op lekken rond het reservoir en bij de slangconnector naar de infuusset. Neem direct contact op met de klantenservice in uw regio als u barsten, afgebroken stukjes of andere beschadigingen ziet.

Opslag van de pomp

Als u uw pomp langere tijd niet zult gebruiken, kunt u de pomp in de opslagmodus zetten. Om de pomp in

de opslagmodus te zetten, sluit u deze aan op een energiebron en houdt u de knop **Scherm aan/Snelle bolus** 30 seconden lang ingedrukt. De pomp piept 3 keer voordat hij in de opslagmodus schakelt. Koppel de pomp los van de elektrische voeding.

Bescherm de pomp wanneer deze niet in gebruik is. Bewaren bij een temperatuur tussen -20 °C (-4 °F) en 60 °C (140 °F) en bij relatieve vochtigheidsniveaus tussen 20% en 90%.

Sluit de pomp aan op een energiebron om deze uit de opslagmodus te halen.

Afvoeren van systeemcomponenten

Raadpleeg de klantenservice in uw regio voor instructies voor het afvoeren van apparaten die elektronisch afval bevatten, zoals uw pomp. Volg de lokale regelgeving voor het afvoeren van mogelijk biologisch gevaarlijk materiaal, zoals gebruikte reservoirs, naalden, spuitens, infuussets en sensoren. Naalden moeten worden afgevoerd in een geschikte container voor scherpe voorwerpen. Probeer niet de dop terug te plaatsen op een naald. Was uw handen grondig na het hanteren van gebruikte componenten.

2 Functies van de t:slim X2-insulinepomp

HOOFDSTUK 17

Problemen in verband met levensstijl en reizen

17.1 Overzicht

Hoewel het gemak en de flexibiliteit van de pomp het voor de meeste gebruikers mogelijk maken om aan vele verschillende activiteiten deel te nemen, kunnen bepaalde wijzigingen in levensstijl nodig zijn. Daarnaast kan uw insulinebehoefte veranderen door wijzigingen in uw levensstijl.

▲ VOORZORGSMATREGEL

RAADPLEEG uw zorgverlener over veranderingen van levensstijl zoals gewichtstoename of -verlies en het beginnen of stoppen van lichaamsbeweging. Uw insulinebehoefte kan veranderen door wijzigingen in uw levensstijl. Uw basaalsnelheid/-snelheden en andere instellingen moeten mogelijk worden aangepast.

Lichamelijke activiteit

De pomp kan worden gedragen tijdens de meeste vormen van lichaamsbeweging, zoals hardlopen, fietsen, wandelen en krachttraining. Tijdens lichaamsbeweging kan de pomp worden gedragen in de meegeleverde pomphouder, in uw zak of in "sporthoezen" van andere merken.

Bij het kiezen van pomphoezen of stickers moet u er rekening mee houden dat de zes ventilatieopeningen aan de achterkant van de pomp niet mogen worden bedekt.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Als u ervoor kiest om een pomphoesje te gebruiken of andere accessoires die niet door Tandem worden geleverd, zorg er dan voor dat u de zes ventilatieopeningen aan de achterkant van de pomp **NIET** afdekt. Het afdekken van de ventilatieopeningen kan de insulinetoeiening beïnvloeden.

Bij activiteiten waarbij contact een probleem kan zijn, zoals honkbal, ijshockey, gevechtssporten of basketbal, kunt u de pomp voor korte perioden ontkoppelen. Als u van plan bent om uw pomp te ontkoppelen, stel dan samen met uw zorgverlener een plan op voor het compenseren van de toediening van basale insuline die u mist wanneer u niet bent aangesloten en zorg ervoor dat u uw BG-spiegel blijft controleren. Zelfs als u uw slang loskoppelt van de infuusplaats blijft de pomp gegevens ontvangen van de CGM zolang deze zich binnen 6 meter (20 voet) bevindt en er geen obstakels zijn.

Wateractiviteiten

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERMIJD onderdompeling van uw pomp in een vloeistof met een diepte van meer dan 0,91 meter (3 voet) of langer dan 30 minuten (IP27-classificatie). Als uw pomp is blootgesteld aan vloeistof voorbij deze limieten, controleer dan op tekenen van het binnendringen van vloeistof. Staak het gebruik van de pomp en neem contact op met de klantenservice in uw regio als u tekenen van het binnendringen van vloeistof ziet.

Uw pomp is gedurende maximaal 30 minuten waterdicht tot een diepte van 0,91 meter (3 voet) (IP27-classificatie), maar niet waterbestendig. Draag uw pomp niet tijdens het zwemmen, duiken met ademapparaat, surfen of andere activiteiten waarbij de pomp voor langere tijd ondergedompeld kan zijn. Draag uw pomp niet in hottubs, bubbelbaden of sauna's.

Extreme hoogtes

Bij sommige activiteiten, zoals wandelen, skiën of snowboarden, kan uw pomp worden blootgesteld aan extreme hoogten. De pomp is bij standaard bedrijfstemperaturen getest op hoogten tot 3.048 meter (10.000 voet).

Extreme temperaturen

Vermijd activiteiten waarbij uw pomp kan worden blootgesteld aan temperaturen onder 5 °C (41 °F) of boven 37 °C (99 °F), omdat insuline bij lage temperaturen kan bevriezen en bij hoge temperaturen kan degraderen.

Andere activiteiten waarbij u uw pomp moet verwijderen

▲ VOORZORGSMAATREGEL

Als u uw pomp gedurende 30 minuten of langer verwijdert, wordt aanbevolen de insulinetoediening op te schorten. Als de insuline niet wordt opgeschort, blijft de Control-IQ™-technologie werken en insuline doseren terwijl de pomp is verwijderd.

Ook bij andere activiteiten, zoals baden en intimiteit, kan het handiger zijn om uw pomp te verwijderen. Voor korte perioden kunt u dit veilig doen. Als u van plan bent om uw pomp te ontkoppelen, stel dan samen met uw zorgverlener een plan op voor het compenseren van de toediening van basale insuline die u mist wanneer u niet bent aangesloten en zorg dat u uw BG-spiegel regelmatig controleert. Het

missen van een toediening van basale insuline kan leiden tot een stijging van uw BG.

Reizen

De flexibiliteit van een insuliepomp maakt sommige aspecten van het reizen eenvoudiger, maar goed plannen is nog steeds noodzakelijk. Bestel de pompbenodigdheden voordat u op reis gaat, zodat u onderweg voldoende benodigdheden bij u hebt. Naast de benodigdheden voor de pomp moet u ook altijd de volgende artikelen meenemen:

- De artikelen die worden vermeld in het noodpakket in [Deel 1.11 Noodpakket](#).
- Een recept voor zowel snelwerkende als langwerkende insuline van het door uw zorgverlener aanbevolen type voor het geval dat u een injectie met insuline nodig hebt.
- Een brief van uw zorgverlener met een uitleg van de medische noodzaak voor uw insuliepomp en andere benodigdheden.

Reizen per vliegtuig

▲ VOORZORGSMAATREGEL

Stel uw pomp **NIE**t bloot aan de röntgenstraling die wordt gebruikt bij het controleren van hand- en ruimbagage. De nieuwere lichaamsscanners die worden gebruikt bij de veiligheidscontrole op de luchthavens werken ook met een vorm van röntgenstraling en uw pomp mag hier niet aan worden blootgesteld. Laat een medewerker van de luchthavenbeveiliging weten dat uw pomp niet mag worden blootgesteld aan röntgentoestellen en vraag om een alternatieve controle.

Uw pomp is ontworpen om normale elektromagnetische interferentie te weerstaan, inclusief die van metaaldetectoren op luchthavens.

De pomp is veilig voor gebruik in commerciële vliegtuigen. De pomp is geclassificeerd als een medisch draagbaar elektronisch apparaat (Medical Portable Electronic Device, of M-PED). De pomp voldoet aan de vereisten voor uitgestraalde emissies zoals gedefinieerd in RTCA/DO-160G, paragraaf 21, Categorie M. Elk M-PED dat voldoet aan de vereisten van deze norm in alle bedrijfsmodi mag aan boord van vliegtuigen worden gebruikt.

zonder dat de exploitant verdere tests hoeft uit te voeren.

Stop uw pompbenodigdheden in uw handbagage. Stop uw benodigdheden NIET in de bagage die u incheckt, omdat deze vertraging kan oplopen of zoek kan raken.

Als u van plan bent om buiten uw land te reizen, neem dan voorafgaand aan uw reis contact op met de klantenservice in uw regio om strategieën te bespreken in het geval van een pompstoring.

Als u de vliegtuigmodus inschakelt op uw smartphone, moet u een actieve Bluetooth-verbinding tussen uw smartphone en uw pomp in stand houden om de Tandem t:slim™-app te kunnen gebruiken. U kunt uw pomp altijd gebruiken voor het toedienen van een bolus als u uw smartphone en pomp niet kunt verbinden. Raadpleeg voordat u gaat reizen de instructies van de luchtvaartmaatschappij en de fabrikant van uw smartphone om de voorwaarden voor het gebruik van Bluetooth te bepalen.

WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** uw t:slim X2-insulinepomp™ voor therapiebeslissingen als de Bluetooth-verbinding tussen uw smartphone en de pomp is uitgeschakeld.

OPMERKING

Voor de Tandem t:slim-app is een actieve Bluetooth-verbinding vereist om verbinding te maken met uw pomp. Als u de vliegtuigmodus inschakelt, zorg er dan voor dat Bluetooth ingeschakeld blijft om verbinding te maken met uw pomp.

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 18

Belangrijke
veiligheidsinformatie
bij gebruik van de
t:slim X2-insulinepomp met
een compatibele CGM

Hieronder volgt belangrijke veiligheidsinformatie over uw CGM en de bijbehorende componenten. De informatie in dit hoofdstuk omvat niet alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in verband met CGM. Ga naar de website van de fabrikant van de CGM voor toepasselijke productinstructies die ook waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bevatten.

18.1 CGM-waarschuwingen

▲ WAARSCHUWING

Negeer **GEEN** symptomen van een te hoge of te lage bloedglucose. Als de bloedglucosewaarschuwingen en -waarden van de sensor niet overeenkomen met uw symptomen, moet u uw BG meten met een bloedglucosemeter, zelfs als uw sensor waarden weergeeft die niet binnen het hoge of lage bereik vallen.

▲ WAARSCHUWING

Verwacht **GEEN** CGM-waarschuwingen binnen de 2 uur na het opstarten. U krijgt **GEEN** bloedglucosemetingen of waarschuwingen van de sensor tot na de 2 uur durende opstartperiode. Tijdens deze periode kan het gebeuren dat u ernstige hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) niet opmerkt.

▲ WAARSCHUWING

Als een sensorsessie automatisch of handmatig wordt beëindigd, ontvangt u geen CGM-waarschuwingen. Om CGM-waarschuwingen te ontvangen, moet een sensorsessie worden gestart en moeten sensorwaarden naar de pomp worden verzonden.

18.2 Voorzorgsmaatregelen voor CGM

▲ VOORZORGSMATREGEL

VERMIJD het injecteren van insuline of het plaatsen van een infuusset binnen 7,6 cm (3 inch) van de sensor. De insuline kan de nauwkeurigheid van de sensor beïnvloeden, waardoor u ernstige hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) mogelijk niet opmerkt.

▲ VOORZORGSMATREGEL

LET OP de trendinformatie op uw *CGM-startscherm* en uw symptomen voordat u CGM-waarden gebruikt om een correctiebolus te berekenen en toe te dienen. Individuele CGM-waarden zijn mogelijk niet zo nauwkeurig als BG-meterwaarden.

▲ VOORZORGSMATREGEL

VOORKOM dat de afstand tussen de CGM en de pomp groter wordt dan 6 meter (20 voet). Het zendbereik van de CGM naar de pomp bedraagt

maximaal 6 meter (20 voet), zonder obstakels. Draadloze communicatie door water werkt niet goed, waardoor het zendbereik kleiner is in een zwembad of bad of op een waterbed enz. Voor een goede communicatie wordt aangeraden om het pompscherm van uw lichaam vandaan te richten en om de pomp aan dezelfde zijte te dragen als de CGM. Er bestaan verschillende soorten obstakels die niet zijn getest. Als uw CGM en ontvanger meer dan 6 meter (20 voet) van elkaar verwijderd zijn of worden gescheiden door een obstakel, communiceren de onderdelen mogelijk niet met elkaar of is de communicatieafstand kleiner, wat kan leiden tot het niet opmerken van voorvallen van ernstige hypoglykemie (lage BG) of hyperglykemie (hoge BG).

▲ VOORZORGSMATREGEL

De CGM-waarschuwingen op de t:slim X2-pomp en in de Dexcom CGM-apps moeten afzonderlijk worden ingesteld. De waarschuwinginstellingen gelden afzonderlijk voor de telefoon en de pomp.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Hydroxyurea is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van ziekten zoals kanker en sikkelcelanemie. Het is bekend dat het de bloedglucosemetingen van de Dexcom-sensor verstoort. Het gebruik van hydroxyurea zal resulteren in sensorglucosewaarden die hoger zijn dan de werkelijke bloedglucosewaarden. De mate van onnauwkeurigheid in

sensorglucosemetingen is gebaseerd op de hoeveelheid hydroxyurea in het lichaam. Uitgaan van sensorbloedglucoseresultaten tijdens het gebruik van hydroxyurea kan leiden tot gemiste hypoglycemie waarschuwingen of -foutmeldingen in diabetesbehandeling, zoals het geven van een hogere dosis insuline dan nodig is om vals hoge sensorbloedglucosewaarden te corrigeren. Het kan ook leiden tot fouten bij het beoordelen, analyseren en interpreteren van historische patronen voor het beoordelen van bloedglucosecontrole. Gebruik, wanneer u hydroxyurea gebruikt, de Dexcom CGM-metingen **NIET** om behandelingsbeslissingen over diabetes te nemen of de bloedglucosecontrole te beoordelen. Gebruik uw BG-meter en overleg met uw zorgverlener over alternatieve benaderingen voor bloedglucosebewaking.

18.3 Mogelijke voordelen van het gebruik van de t:slim X2-insulinepomp met CGM

Wanneer uw pomp is gekoppeld met een compatibele CGM, kan uw pomp om de 5 minuten CGM-waarden ontvangen, die als een trendgrafiek worden weergegeven op het *CGM-startschem*. U kunt uw pomp ook programmeren om u te

waarschuwen wanneer uw CGM-waarden boven of onder een bepaald niveau komen, of snel stijgen of dalen. Anders dan bij de waarden van een standaard bloedglucosemeter kunt u met CGM-waarden onmiddellijk trends zien. Ook kunt u waarden registreren op momenten waarop u niet in staat bent om uw bloedglucose te controleren, bijvoorbeeld wanneer u slaapt. Deze informatie kan nuttig zijn voor u en uw zorgverlener wanneer u overweegt om wijzigingen aan te brengen in uw behandeling. Bovendien helpen de programmeerbare waarschuwingen u om mogelijk lage of hoge bloedglucose eerder op te merken dan wanneer u alleen een bloedglucosemeter gebruikt.

18.4 Mogelijke risico's van het gebruik van de t:slim X2-insulinepomp met CGM

Er bestaat een kleine kans dat een stukje van een sensordraad onder uw huid achterblijft als de sensordraad breekt terwijl u deze draagt. Als u denkt dat er een sensordraad onder uw huid is gebroken, neem dan contact op met

uw zorgverlener en bel de klantenservice in uw regio.

Andere risico's in verband met het gebruik van CGM zijn:

- U ontvangt geen glucosewaarschuwingen van uw sensor wanneer de waarschuwingfunctie is uitgeschakeld, uw CGM en pomp buiten bereik zijn of wanneer uw pomp geen sensorglucosemetingen weergeeft. Het is mogelijk dat u waarschuwingen niet opmerkt als u ze niet kunt horen of de trilling niet voelt.
- Er zijn een aantal risico's in verband met het feit dat de Dexcom CGM metingen uitvoert op de vloeistof onder de huid (interstitiële vloeistof) in plaats van bloed. Er zijn verschillen tussen de manier waarop glucose wordt gemeten in bloed en hoe deze wordt gemeten in interstitiële vloeistof. Bloedglucose wordt langzamer opgenomen in de interstitiële vloeistof dan in het bloed, waardoor CGM-waarden kunnen achterlopen op de waarden van een BG-meter.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 19

Vertrouwd raken met uw CGM-systeem

19.1 CGM-terminologie

Applicator

De applicator is een wegwerponderdeel waarin de sensor met een inbrengnaald is geplaatst. De gehele applicator wordt afgevoerd nadat de sensor is ingebracht.

CGM

Continue glucosemonitoring.

CGM-waarde

Een CGM-meting is een sensorglucosemeting die op uw pomp wordt weergegeven. Deze waarde wordt uitgedrukt in eenheden van mg/dl en wordt iedere 5 minuten bijgewerkt.

Een bloedglucosemeting op een andere plaats

Er is sprake van een bloedglucosemeting op een andere plaats als u een BG-waarde meet met behulp van een bloedmonster dat op een andere plaats op uw lichaam dan uw vingertop is afgenomen. Kalibreer uw sensor niet met waarden van een andere testplaats.

HypoHerhaling

HypoHerhaling is een optionele instelling voor geluids- en vibratiewaarschuwing voor de CGM die de vaste waarschuwing bij lage glucose elke 5 seconden blijft herhalen tot uw sensorglucosewaarde stijgt tot boven 55 mg/dl of u de waarde bevestigt. Deze waarschuwing kan handig zijn als u extra waarschuwingen wilt voor zeer lage sensorglucosewaarden.

Kalibratie

Kalibratie is wanneer u BG-waarden van een BG-meter in de pomp invoert. Kalibraties kunnen nodig zijn om te zorgen dat uw pomp continue glucosemetingen en trendinformatie kan weergeven.

Koppelingscode – alleen Dexcom G7

Een unieke code die bij elke individuele CGM-sensor wordt geleverd, om de t:slim X2™-pomp aan de betreffende sensor te koppelen.

mg/dl

Milligram per deciliter. De standaardeenheid voor sensorglucosemetingen.

Ontbrekende sensorglucosegegevens

Er ontstaan ontbrekingen van de glucosegegevens wanneer uw pomp geen sensorglucosemeting kan geven.

Ontvanger

Als de Dexcom CGM met de pomp wordt gebruikt voor weergave van CGM-waarden, vervangt de insulinepomp de ontvanger voor de therapeutische CGM. Naast de pomp kan ook een smartphone met de Dexcom-applicatie worden gebruikt om de sensorwaarden te lezen.

Opstartperiode

Zodra een nieuwe sensor sessie is gestart op de pomp, is de opstartperiode een interval gedurende welke de nieuwe sensor verbinding maakt met de pomp. Tijdens deze periode zijn er geen sensorglucosemetingen beschikbaar.

RF

RF is een afkorting voor radiofrequentie. Er wordt gebruik gemaakt van RF-transmissie om glucose-informatie van de CGM naar de pomp te sturen.

Sensor

De sensor is het onderdeel van de CGM dat onder de huid wordt ingebracht, waardoor het uw glucosespiegels kan meten.

Sensorcode – alleen Dexcom G6

Een code die bij elke afzonderlijke Dexcom G6-sensor wordt meegeleverd. Als de sensorcode wordt gebruikt, kan de Dexcom G6 zonder vingerprikken of kalibraties worden gebruikt.

Sensorglucosetrends

Glucosetrends weerspiegelen het patroon van uw bloedglucosegehalte. De trendgrafiek laat zien hoe uw bloedglucosegehalte zich heeft ontwikkeld tijdens de periode die op het scherm wordt weergegeven en wat uw bloedglucosegehalte op dat moment is.

Trendpijlen (veranderingssnelheid)

De trendpijlen vertellen u hoe snel uw glucosespiegel verandert. Er zijn zeven verschillende pijlen die aangeven wanneer de richting en snelheid van uw bloedglucose veranderen.

Waarschuwingen bij stijging en daling (veranderingssnelheid)

Waarschuwingen bij stijging en daling treden op afhankelijk van hoe ver en hoe snel uw bloedglucosegehalte stijgt of daalt.

Zender

De Dexcom G6-zender is het deel van de CGM dat in de sensorpod wordt geklikt en dat draadloos bloedglucose-informatie naar uw pomp stuurt.

De Dexcom G7 heeft een gestroomlijnde alles-in-één sensor met een ingebouwde wegwerpzender.

Zender-ID – Alleen Dexcom G6

De zender-ID is een reeks van cijfers en/of letters die u invoert in de pomp, zodat de pomp verbinding kan maken en kan communiceren met de zender.

19.2 Uitleg van CGM-pictogrammen op de pomp

Op het pompscherm kunnen de volgende CGM-pictogrammen verschijnen:

Definities van CGM-pictogrammen

Symbool	Betekenis
	Onbekende sensorwaarde.
	CGM-sensorsessie is actief, maar de zender en pomp zijn buiten bereik.
	De CGM-sensor is defect.
	De CGM-sensorsessie is beëindigd.
	Kalibratiefout, wacht 15 minuten.
	Opstartkalibratie is vereist (2 BG-waarden; alleen Dexcom G6).
	Aanvullende opstartkalibratie is vereist (alleen Dexcom G6).
	CGM-kalibratie is vereist.


Symbool	Betekenis
	Zenderfout (alleen Dexcom G6).
	CGM-sensorsessie is actief en de zender communiceert met de pomp.
	CGM-sensorsessie is actief, maar de zender communiceert niet met de pomp.
	Opstarten sensor eerste segment.
	Opstarten sensor tweede segment.
	Opstarten sensor derde segment.
	Opstarten sensor vierde segment.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

19.3 CGM-vergrendelingsscherm

Het *CGM-vergrendelingsscherm* verschijnt altijd als u het scherm aanzet wanneer u uw pomp met een CGM gebruikt.

1. **Weergave van tijd en datum:** geeft de actuele tijd en datum weer.
2. **Antenne:** geeft de communicatiestatus tussen de pomp en de CGM weer.
3. **Batterijniveau:** geeft de resterende batterijcapaciteit weer. Wanneer de batterij wordt opgeladen, wordt het laadpictogram (bliksemschicht) weergegeven.
4. **Instelling voor waarschuwing bij hoge bloedglucose.**
5. **Glucosestreefbereik van de sensor.**
6. **Instelling voor waarschuwing bij lage bloedglucose.**
7. **Grafiek van de meest recente sensorglucosemetingen.**
8. **1–2–3:** ontgrendelt het pompscherm.
9. **Pictogram Actieve bolus:** geeft aan dat er een bolus wordt toegediend.
10. **Status:** geeft de huidige pompinstellingen en de status van de insulinetoediening weer.
11. **Insulineniveau:** geeft de actuele hoeveelheid insuline in het reservoir weer.
12. **Meest recente sensorglucosemeting over 5 minuten.**
13. **Trendpijl:** geeft richting en snelheid van de verandering aan.
14. **Trendgrafiek Tijd (UUR):** schermen voor 1, 3, 6, 12 en 24 uur beschikbaar.
15. **Actieve insuline (AI):** resterende hoeveelheid en tijd van de actieve insuline.

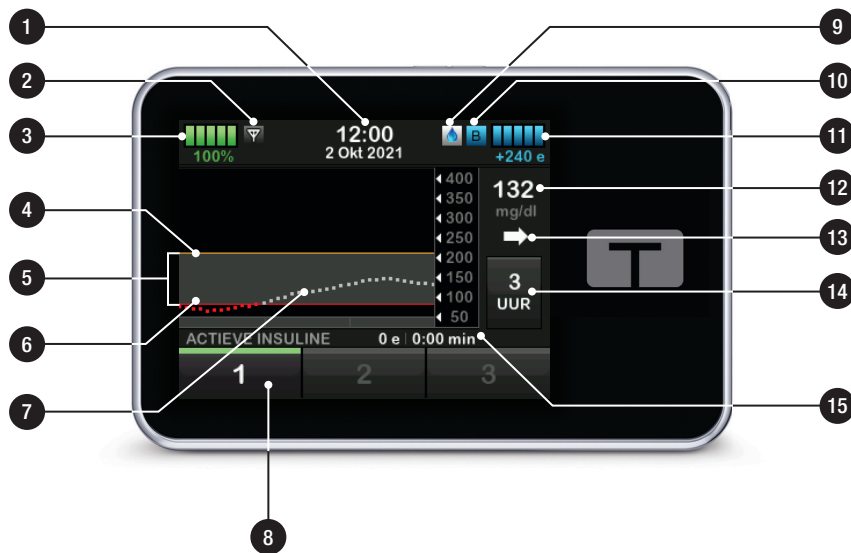

19.4 CGM-startscherm

1. **Weergave van tijd en datum:** geeft de actuele tijd en datum weer.
2. **Antenne:** geeft de communicatiestatus tussen de pomp en de CGM weer.
3. **Batterijniveau:** geeft de resterende batterijcapaciteit weer. Wanneer de batterij wordt opgeladen, wordt het laadpictogram (bliksemschicht) weergegeven.
4. **Instelling voor waarschuwing bij hoge bloedglucose.**
5. **Glucosestreefbereik van de sensor.**
6. **Instelling voor waarschuwing bij lage bloedglucose.**
7. **Grafiek van de meest recente sensorglucosemetingen.**
8. **Opties:** insulinetoediening stoppen/hervatten, pomp- en CGM-instellingen beheren,
9. **Boluspictogram:** staat voor een bolustoediening. Elk boluspictogram staat voor één bolustoediening, zelfs als het pictogram tijdelijk wordt geblokkeerd door de hekjes-markeringen op de bolusbalk als de grafiek na verloop van tijd verandert.
10. **Bolus:** een bolus programmeren en toedienen.
11. **Status:** geeft de huidige pompinstellingen en de status van de insulinetoediening weer.
12. **Insulineniveau:** geeft de actuele hoeveelheid insuline in het reservoir weer.
13. **Meest recente sensorglucosemeting over 5 minuten.**
14. **Trendpijl:** geeft richting en snelheid van de verandering aan.


15. **Trendgrafiek Tijd (UUR):** schermen voor 1, 3, 6, 12 en 24 uur beschikbaar.


16. **Actieve insuline (AI):** resterende hoeveelheid en tijd van de actieve insuline.

Om CGM-informatie op het volledige scherm weer te geven:

Tik op het *CGM-startscherm* op een willekeurige plek in de CGM-trendgrafiek.

Tik op het pictogram “minimaliseren” om terug te keren naar het *CGM-startscherm*.

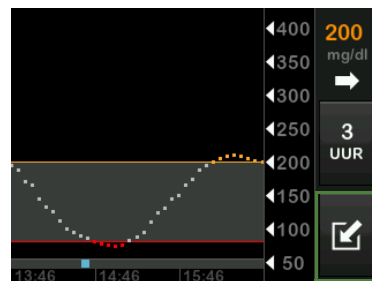


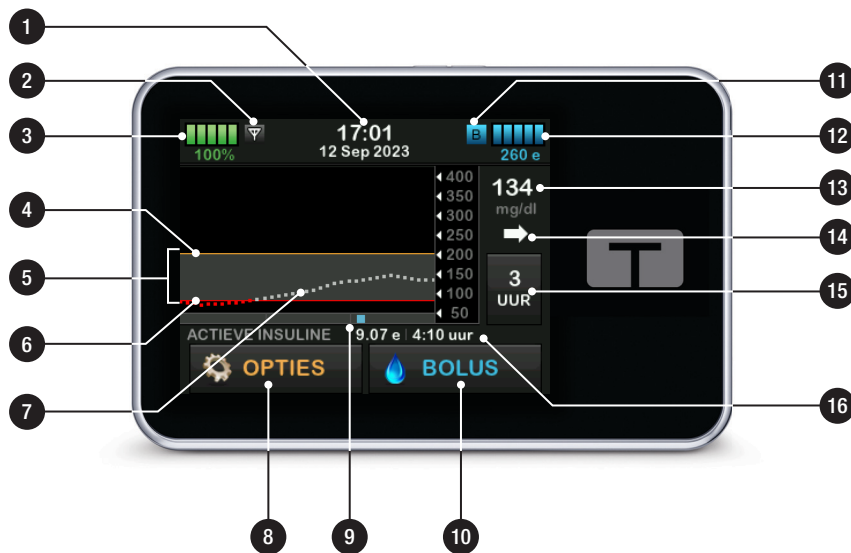

19.5 Scherm Dexcom G6

Het *Dexcom G6*-scherm kan worden geopend vanuit het scherm *Mijn CGM* door te tikken op *Sensortype wijzigen*. Zie [Deel 23.1 Uw sensortype kiezen](#).


1. **G6-SENSOR STARTEN:** Start een CGM-sessie. Wanneer de sensor actief is, wordt **G6-SENSOR STOPPEN** weergegeven.
2. **CGM kalibreren:** Voer een BG-waarde voor kalibratie in. Alleen actief wanneer er een sensorsessie actief is.
3. **CGM-waarschuwingen:**
Aanpassen van
CGM-waarschuwingen.
4. **Zender-ID:** voer de zender-ID in.
5. **CGM-info:** Weergave van de CGM-informatie.
6. **Sensor vervangen:** Ga terug naar het scherm *Sensor selecteren* om een nieuwe sensorsessie te starten met een ander sensortype.

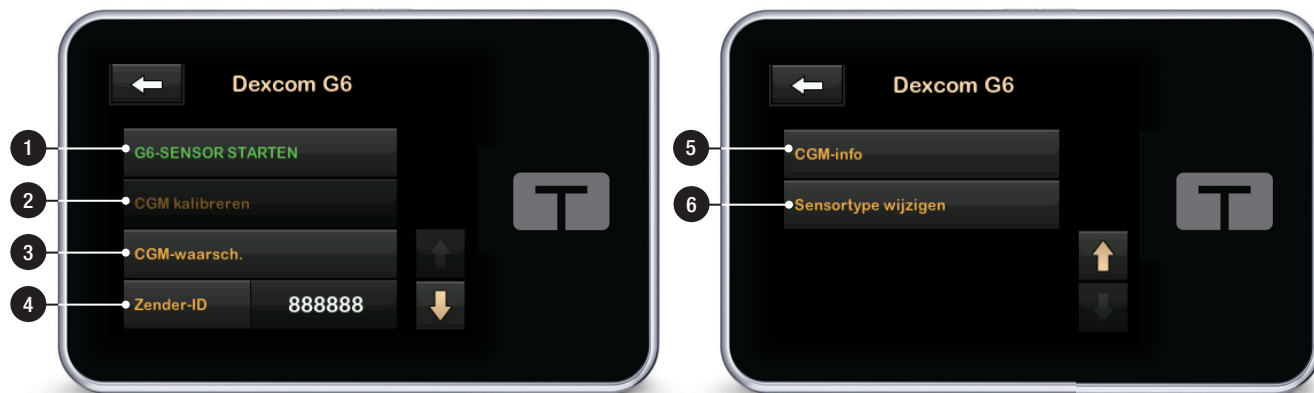

19.6 Scherm Dexcom G7

Het *Dexcom G7*-scherm kan worden geopend vanuit het scherm *Mijn CGM* door te tikken op *Sensortype wijzigen*. Zie [Deel 23.1 Uw sensortype kiezen](#).

1. **G7-SENSOR STARTEN:** Start een CGM-sessie. Wanneer de sensor actief is, wordt **G7-SENSOR STOPPEN** weergegeven.
2. **CGM kalibreren:** Voer een BG-waarde voor kalibratie in. Alleen actief wanneer er een sensorsessie actief is. Kalibratie is optioneel.
3. **CGM-waarschuwingen:**
Aanpassen van
CGM-waarschuwingen.
4. **Sensortype wijzigen:** Ga terug naar het scherm *Sensor selecteren* om een nieuwe sensorsessie te starten met een ander sensortype.
5. **CGM-info:** Weergave van de CGM-informatie.

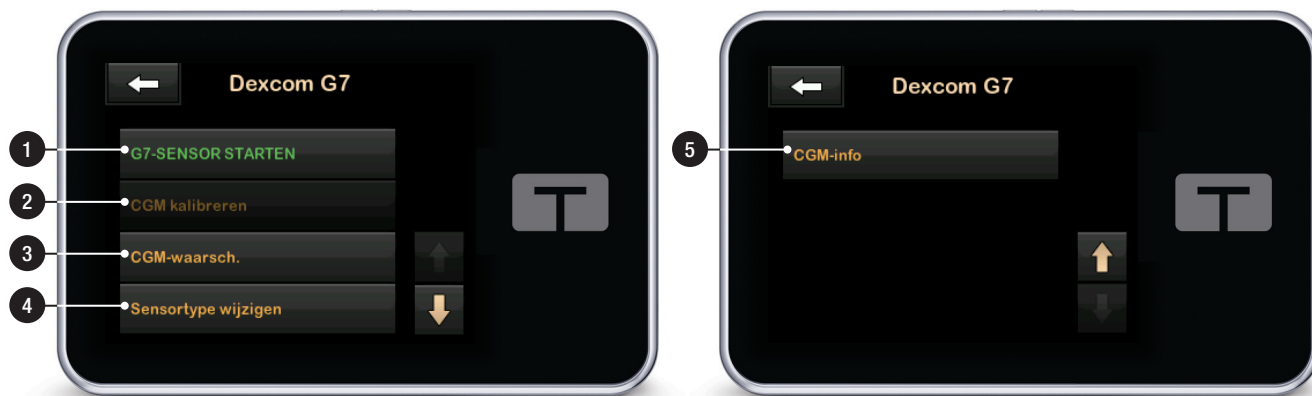

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 20

Overzicht van CGM

20.1 CGM-systeemoverzicht

Dit deel van de gebruikershandleiding bevat instructies voor het gebruik van een CGM met uw pomp. Het gebruik van een CGM is optioneel, maar om Control-IQ™-technologie te kunnen gebruiken is CGM vereist. Bij gebruik van een CGM kunnen de waarden van uw sensor op het pompscherm worden weergegeven. Om behandelbeslissingen te nemen tijdens de opstartperiode van een nieuwe sensor hebt u een normale, in de handel verkrijgbare BG-meter nodig voor gebruik met uw pomp.

Compatibele CGM's zijn de Dexcom G6 CGM, die bestaat uit een sensor en zender, en de Dexcom G7 CGM, die bestaat uit een sensor met een ingebouwde zender. De Dexcom-ontvanger wordt apart verkocht.

Beide CGM-systemen zijn hulpmiddelen die onder de huid worden ingebracht om de glucosespiegel continu te meten. De CGM gebruikt Bluetooth draadloze technologie-communicatie en stuurt elke 5 minuten waarden naar het scherm van de pomp. Het pompscherm toont sensorglucosewaarden, een

trendgrafiek en pijlen voor de veranderingsrichting en -snelheid. Ga voor informatie over het plaatsen een Dexcom CGM-sensor, het aansluiten en koppelen aan een CGM en de productspecificaties voor Dexcom naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies en trainingsinformatie.

U kunt uw pomp ook programmeren om u te waarschuwen wanneer uw CGM-waarden boven of onder een bepaald niveau komen, of snel stijgen of dalen. Als de CGM-waarden tot 55 mg/dl of lager dalen, klinkt de vaste waarschuwing bij lage bloedglucose. Deze waarschuwing kan niet aangepast worden.

▲ VOORZORGSMAAATREGEL

VOORKOM dat de afstand tussen de CGM en de pomp groter wordt dan 6 meter (20 voet). Het zendbereik van de CGM naar de pomp bedraagt maximaal 6 meter (20 voet), zonder obstakels. Draadloze communicatie door water werkt niet goed, waardoor het zendbereik kleiner is in een zwembad of bad of op een waterbed enz. Voor een goede communicatie wordt aangeraden om het pompscherm van uw lichaam vandaan te richten en om de pomp aan dezelfde zij te dragen als de CGM. Er bestaan verschillende

soorten obstakels die niet zijn getest. Als uw CGM en ontvanger meer dan 6 meter (20 voet) van elkaar verwijderd zijn of worden gescheiden door een obstakel, communiceren de onderdelen mogelijk niet met elkaar of is de communicatieafstand kleiner, wat kan leiden tot het niet opmerken van voorvallen van ernstige hypoglykemie (lage BG) of hyperglykemie (hoge BG).

20.2 Overzicht van aansluitingen op het apparaat

De Dexcom CGM kan slechts met één medisch hulpmiddel tegelijk worden gekoppeld (de t:slim X2-pomp of de Dexcom-ontvanger), maar u kunt de Dexcom G6 CGM-app of de Dexcom G7 CGM-app en uw pomp wel nog steeds tegelijkertijd gebruiken.

De Dexcom G6 CGM-app noch de Dexcom G7 CGM-app maakt rechtstreeks verbinding met de Tandem t:slim™-app. CGM-metingen in de Tandem t:slim-app worden uitgevoerd via de aansluiting van de insulinepomp.

U kunt ook zowel de mobiele Dexcom G6- als Dexcom G7-app en de Tandem t:slim-app tegelijkertijd

gebruiken. De Dexcom G6- en Dexcom G7-app kunnen worden gebruikt om sensorsessies te starten en te stoppen en om verbinding te maken met andere services die compatibel zijn met Dexcom.

20.3 Overzicht ontvanger (t:slim X2-insulinepomp)

Voor informatie over de pictogrammen en bedieningselementen die op het *startscherm* worden weergegeven als CGM is ingeschakeld: zie [Deel 19.4 CGM-startscherm](#).

20.4 Overzicht Dexcom G6-zender

Deze paragraaf bevat informatie over CGM-apparaten met een afzonderlijke zender. De informatie in deze paragraaf geldt specifiek voor de Dexcom G6 CGM en dient als voorbeeld. Ga voor informatie over de Dexcom G6-zender naar de website van de fabrikant voor de betreffende gebruikershandleidingen.

⚠ VOORZORGSMATREGEEL

Houd de zender en pomp op een afstand van **TEN HOOGSTE 6 meter (20 voet)** zonder

obstakels (zoals wanden of metaal) ertussen. Anders is communicatie misschien niet mogelijk. Als er water aanwezig is tussen uw zender en de pomp (bijv. als u doucht of zwemt), moeten ze dicht bij elkaar worden gehouden. Het bereik is kleiner doordat Bluetooth-technologie minder goed werkt in het water. Voor een goede communicatie wordt aangeraden om het pompscherm van uw lichaam vandaan te richten en om de pomp aan dezelfde zij te dragen als de CGM.

De zenderbatterij gaat ongeveer drie maanden mee. Vervang de zender zo snel mogelijk wanneer u de waarschuwing *Batterij zender zwak* ziet. De batterij van uw zender kan 7 dagen na deze waarschuwing al leeg zijn.



20.5 Sensoroverzicht

Ga voor informatie over Dexcom CGM-sensors naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 21

CGM-instellingen

21.1 Over Bluetooth-technologie

Bluetooth Low Energy-technologie is een type draadloze communicatie dat wordt gebruikt in mobiele telefoons en tal van andere apparaten. Uw pomp maakt gebruik van draadloze Bluetooth-communicatietechnologie voor het tot stand brengen van een draadloze koppeling met andere apparaten, zoals een CGM. Hierdoor kan de pomp veilig en alleen met gekoppelde apparaten draadloos communiceren.

21.2 De koppeling met de Dexcom-ontvanger verbreken

Dexcom CGM's kunnen slechts met één medisch hulpmiddel tegelijk worden gekoppeld. Zorg dat uw CGM niet is gekoppeld met de ontvanger voordat u hem met de pomp koppelt:

Zet de Dexcom-zender uit en wacht 15 minuten voordat u uw CGM aan de pomp koppelt. De CGM vergeet dan de verbinding die met de Dexcom-ontvanger was gemaakt.

OPMERKING

Om met de pomp te koppelen is het niet voldoende om de sensor sessie op uw Dexcom-ontvanger te stoppen. De ontvanger moet helemaal uitgeschakeld zijn om verbindingsproblemen te voorkomen.

U kunt nog steeds een smartphone tegelijkertijd met de Dexcom G6- of Dexcom G7 CGM-app en uw pomp blijven gebruiken.

21.3 CGM-volume instellen

U kunt het geluidspatroon en het volume voor uw CGM-waarschuwingen en oproepen instellen aan de hand van uw persoonlijke behoeften. De herinneringen, waarschuwingen en alarmen voor de pompfuncties verschillen van de waarschuwingen en fouten voor CGM-functies en volgen niet hetzelfde patroon en volume.

Voor het instellen van het geluidsvolume: zie [Deel 5.13 Geluidsvolume](#).

Opties CGM-volume:

Trillen

U kunt uw CGM zo instellen dat er voor waarschuwingen geen geluid maar trilling wordt gebruikt. De enige uitzondering hierop is de vaste waarschuwing bij lage glucose bij 55 mg/dl. Deze waarschuwt u eerst met een trilling, na 5 minuten gevolgd door pieptonen als de waarschuwing niet wordt bevestigd.

Zacht

Als u wilt dat de waarschuwing discreet is. Hierbij worden de pieptonen voor alle waarschuwingen en alarmen op een lager volume ingesteld.

Normaal

Het standaardprofiel bij ontvangst van uw pomp. Hierbij worden de pieptonen voor alle waarschuwingen en alarmen op een hoger volume ingesteld.

HypoHerhaling

Lijkt op het normale profiel, maar blijft de vaste waarschuwing bij lage bloedglucose iedere 5 seconden herhalen totdat de door de sensor gemeten bloedglucosewaarde weer tot boven 55 mg/dl is gestegen of totdat

de waarschuwing wordt bevestigd. Dit kan handig zijn als u extra waarschuwingen wilt ontvangen voor zeer lage sensorglucosewaarden.

De CGM-volume-instelling die u kiest, geldt voor alle CGM-waarschuwingen, -fouten en -oproepen, die alle hun eigen unieke geluidspatroon, toon en volume hebben. Zo kunt u elke waarschuwing en fout en de betekenis ervan herkennen.

De vaste waarschuwing bij lage bloedglucose bij 55 mg/dl kan niet worden uitgeschakeld of gewijzigd.

De opties Zacht, Normaal en HypoHerhaling hebben deze volgorde:

- De eerste waarschuwing is alleen een trilling.
- Als de waarschuwing niet binnen 5 minuten wordt bevestigd, trilt en piept de pomp.
- Indien de waarschuwing na nog eens 5 minuten niet wordt bevestigd, trilt en piept het systeem luider. Dit gaat om de 5 minuten door met hetzelfde volume, totdat wordt bevestigd.

- Als de waarschuwing wordt bevestigd en de glucosemetingen van uw sensor op of onder 55 mg/dl blijven, herhaalt uw pomp de bovenstaande waarschuwingsreeks na 30 minuten (alleen voor de optie HypoHerhaling).

Ga als volgt te werk om uw CGM-volume te selecteren:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Apparaatinstellingen**.
4. Tik op **Geluidsvolume**.
5. Tik op de **Pijl omlaag**.
6. Tik op **CGM-waarschuwingen**.
7. Tik op **Trillen, Zacht, Normaal of HypoHerhaling** om te selecteren.
- ✓ Nadat een waarde is geselecteerd, keert de pomp terug naar het vorige scherm.
8. Tik op .

Beschrijvingen van geluidsopties

CGM-volume	Trillen	Zacht	Normaal	HypoHerhaling
Waarsch. hoog	2 lange trillingen	2 lange trillingen + 2 lage pieptonen	2 lange trillingen + 2 middelhoge pieptonen	2 lange trillingen + 2 middelhoge pieptonen
Waarsch. laag	3 korte trillingen	3 korte trillingen + 3 lage pieptonen	3 korte trillingen + 3 middelhoge pieptonen	3 korte trillingen + 3 middelhoge pieptonen
Waarsch. stijging	2 lange trillingen	2 lange trillingen + 2 lage pieptonen	2 lange trillingen + 2 middelhoge pieptonen	2 lange trillingen + 2 middelhoge pieptonen
Waarsch. daling	3 korte trillingen	3 korte trillingen + 3 lage pieptonen	3 korte trillingen + 3 middelhoge pieptonen	3 korte trillingen + 3 middelhoge pieptonen
Waarschuwing Buiten bereik	1 lange trilling	1 lange trilling + 1 lage pieptoon	1 lange trilling + 1 middelhoge pieptoon	1 lange trilling + 1 middelhoge pieptoon
Vaste waarschuwing bij lage glucose	4 korte trillingen + 4 middelhoge pieptonen	4 korte trillingen + 4 middelhoge pieptonen	4 korte trillingen + 4 middelhoge pieptonen	4 korte trillingen + 4 middelhoge pieptonen + pauze + herhaling van de reeks
Alle overige waarschuwingen	1 lange trilling	1 lange trilling + 1 lage pieptoon	1 lange trilling + 1 middelhoge pieptoon	1 lange trilling + 1 middelhoge pieptoon

21.4 CGM-info

CGM-info bevat belangrijke informatie over uw apparaat. In de CGM-info vindt u:

- Firmwarerevisie
- Hardwarerevisie
- BLE-hardware-ID
- Softwarenummer

U kunt deze informatie op elk moment raadplegen.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op de **Pijl omlaag**.
5. Tik op **CGM-info**.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 22

CGM-waarschuwingen instellen

Uw CGM-waarschuwingen instellen

U kunt persoonlijke instellingen aanmaken voor hoe en wanneer u wilt dat de pomp u informeert over wat er gebeurt.

OPMERKING

Het volgende is van toepassing op het instellen van CGM-waarschuwingen op de pomp. Als u een CGM-app gebruikt, worden waarschuwingen die in de app zijn ingesteld niet automatisch naar de pomp overgebracht en moeten ze afzonderlijk worden ingesteld.

De waarschuwingen voor hoge en lage glucosewaarden vertellen u dat de sensorglucosewaarde buiten uw streefbereik ligt.

Waarschuwingen voor stijging en daling (veranderingssnelheid) laten u weten wanneer uw bloedglucosewaarde snel verandert.

De pomp heeft ook een vaste waarschuwing bij lage bloedglucose bij 55 mg/dl die niet kan worden gewijzigd of uitgeschakeld. Dit is een veiligheidsfunctie die u laat weten dat uw sensorglucosespiegel mogelijk gevaarlijk laag is.

De waarschuwing Buiten bereik laat u weten dat de CGM en pomp niet met elkaar communiceren. Zorg dat de CGM en de pomp niet verder dan 6 meter (20 voet) van elkaar zijn verwijderd, zonder obstakels. Wanneer de CGM en pomp te ver van elkaar verwijderd zijn, ontvangt u geen glucosemetingen of waarschuwingen van uw sensor.

Waarschuwingen hoge en lage bloedglucose

U kunt de Hoog- en Laag-waarschuwingen, die u vertellen dat de sensorglucosewaarden buiten uw streefbereik liggen, personaliseren. Wanneer zowel uw waarschuwingen bij hoge als bij lage bloedglucose zijn ingeschakeld, geeft een grijze zone in uw trendgrafiek uw streefbereik weer. De standaardinstelling voor de waarschuwing bij hoge bloedglucose is ingeschakeld, 200 mg/dl. De standaardinstelling voor de waarschuwing bij lage bloedglucose is ingeschakeld, 80 mg/dl. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u de waarschuwingen bij hoge en lage glucose instelt.

22.1 Uw waarschuwing bij hoge glucose en de functie Herhalen instellen

1. Tik op het **startscherm** op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **CGM-waarschuwingen**.
5. Tik op **Hoog en laag**.
6. Tik op **Waarsch. hoog** om de waarschuwing bij hoge bloedglucose in te stellen.
7. Tik op **Waarschuw bij waarde boven**.

De standaardinstelling voor de waarschuwing bij hoge bloedglucose is 200 mg/dl.

OPMERKING

Tik op de schakeltoets aan/uit om de waarschuwing bij hoge glucose uit te schakelen.

8. Voer met het toetsenbord op het scherm de waarde in waarboven u een melding wilt ontvangen. Het kan worden ingesteld van 120 tot 400 mg/dl in stappen van 1 mg/dl.

9. Tik op .

Met de herhaalfunctie kunt u de tijd instellen waarna de waarschuwing bij hoge glucose opnieuw klinkt en opnieuw op uw pomp wordt weergegeven, zolang uw sensorglucosewaarde hoger is dan de waarde voor waarschuwing bij hoge glucose. De standaardwaarde is: Nooit (de waarschuwing wordt niet opnieuw gegeven). U kunt de herhaalfunctie zo instellen dat elke 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur of 5 uur een geluidssignaal klinkt wanneer de glucosewaarde van uw sensor nog steeds hoger is dan de waarde voor waarschuwing bij hoge glucose.

Om de functie Herhalen in te stellen:

10. Tik op Herhalen.

11. Tik op de tijd waarop u wilt dat de waarschuwing wordt herhaald om de herhalingstijd te selecteren. Als u bijvoorbeeld 1 uur selecteert, klinkt het alarm elk uur zolang uw sensorglucosewaarde hoger is dan de waarde voor waarschuwing bij hoge bloedglucose.

Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om alle Herhalen-opties weer te geven.

- ✓ Nadat een waarde is geselecteerd, keert de pomp terug naar het vorige scherm.

12. Tik op .

22.2 Uw waarschuwing bij lage glucose en de functie Herhalen instellen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **CGM-waarschuwingen**.

5. Tik op **Hoog en laag**.

6. Tik op **Waarsch. laag** om de waarschuwing bij lage bloedglucose in te stellen.

7. Tik op **Waarschuwbijwaarde onder**.

De standaardinstelling voor de waarschuwing bij lage bloedglucose is 80 mg/dl.

OPMERKING

Tik op de schakeltoets aan/uit om de waarschuwing bij lage glucose uit te schakelen.

8. Voer met het toetsenbord op het scherm de waarde in waaronder u een melding wilt ontvangen. Het kan worden ingesteld van 60 tot 100 mg/dl in stappen van 1 mg/dl.

9. Tik op .

Met de herhaalfunctie kunt u de tijd instellen waarna de waarschuwing bij lage glucose opnieuw klinkt en opnieuw op uw pomp wordt weergegeven, zolang uw sensorglucosewaarde lager is dan

de waarde voor waarschuwing bij lage glucose. De standaardwaarde is: Nooit (de waarschuwing wordt niet opnieuw gegeven). U kunt de herhaalfunctie zo instellen dat elke 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur of 5 uur een geluidssignaal klinkt wanneer de glucosewaarde van uw sensor nog steeds lager is dan de waarde voor waarschuwing bij lage glucose.

Om de functie Herhalen in te stellen:

10. Tik op **Herhalen**.

11. Tik op de tijd waarop u wilt dat de waarschuwing wordt herhaald om de herhalingstijd te selecteren. Als u bijvoorbeeld **1 uur** selecteert, klinkt het alarm elk uur zolang uw sensorglucosewaarde lager is dan de waarde voor waarschuwing bij lage bloedglucose.

Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om alle Herhalen-opties weer te geven.

✓ Nadat een waarde is geselecteerd, keert de pomp terug naar het vorige scherm.

12. Tik op .

22.3 Snelheidswaarschuwingen

Snelheidswaarschuwingen vertellen u wanneer uw glucosewaarde stijgt (waarschuwing bij stijging) of daalt (waarschuwing bij daling) en hoe snel. U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden wanneer de sensorbloedglucosewaarde stijgt of daalt met 2 mg/dl of meer per minuut of met 3 mg/dl of meer per minuut. De standaardwaarde voor zowel de waarschuwing bij daling als de waarschuwing bij stijging is uit. Wanneer de waarschuwing is ingeschakeld, is de standaardwaarde 3 mg/dl. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u de waarschuwingen bij stijging en daling instelt.

Voorbeelden

Als u uw waarschuwing bij daling instelt op 2 mg/dl per minuut en uw sensorglucosewaarde met deze

snelheid of sneller daalt, wordt de CGM-waarschuwing bij daling weergegeven met één pijl omlaag. De pomp trilt of piept, afhankelijk van het geselecteerde CGM-volume.



Als u uw waarschuwing bij stijging instelt op 3 mg/dl per minuut en uw sensorglucosewaarde met deze snelheid of sneller stijgt, wordt de CGM-waarschuwing bij stijging weergegeven met één pijl omhoog.

De pomp trilt of piept, afhankelijk van het geselecteerde CGM-volume.



22.4 Uw waarschuwing bij stijging instellen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **CGM-waarschuwingen**.
5. Tik op **Stijging en daling**.
6. Tik op **Waarschuwing bij stijging**.
7. Tik om de standaardwaarde van 3 mg/dl/min. te selecteren op

Tik op **Snelheid** om uw selectie te wijzigen.

OPMERKING

Tik op de schakeltoets aan/uit om de waarschuwing bij stijging uit te schakelen.

8. Tik op **2 mg/dl/min** om te selecteren.
- ✓ Nadat een waarde is geselecteerd, keert de pomp terug naar het vorige scherm.
9. Tik op .

22.5 Uw waarschuwing bij daling instellen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **CGM-waarschuwingen**.
5. Tik op **Stijging en daling**.
6. Tik op **Waarschuwing bij daling**.

7. Tik om de standaardwaarde van 3 mg/dl/min. te selecteren op .

Tik op **Snelheid** om uw selectie te wijzigen.

OPMERKING

Tik op de schakeltoets aan/uit om de waarschuwing bij daling uit te schakelen.

8. Tik op **2 mg/dl/min** om te selecteren.
- ✓ Nadat een waarde is geselecteerd, keert de pomp terug naar het vorige scherm.
9. Tik op .

22.6 Uw waarschuwing buiten bereik instellen

Het bereik van de CGM naar de pomp bedraagt maximaal 6 meter (20 voet), zonder obstakels.

De waarschuwing buiten bereik waarschuwt u als uw CGM en pomp niet met elkaar communiceren. Deze waarschuwing is standaard ingeschakeld.

▲ VOORZORGSMAATREGEL

Het wordt aanbevolen om de waarschuwing Buiten bereik van de CGM ingeschakeld te houden zodat u wordt gewaarschuwd als de CGM van de pomp is losgekoppeld wanneer u de pompstatus niet actief monitort.

Uw CGM levert de gegevens die Control-IQ™-technologie nodig heeft om voorspellingen te doen om de insulinedosering te automatiseren.

Zorg dat de CGM en de pomp niet verder dan 6 meter (20 voet) van elkaar zijn verwijderd, zonder obstakels.

Voor een goede communicatie wordt aangeraden om het pompscherm van uw lichaam vandaan te richten en om de pomp aan dezelfde zij te dragen als de CGM. Wanneer de CGM en pomp niet met elkaar communiceren, ontvangt u geen bloedglucosewaarden of waarschuwingen van uw sensor. De standaardwaarde is Aan, met een waarschuwing na 20 minuten.

Het symbool Buiten bereik verschijnt op het CGM-startscherm van de pomp en op het scherm *Waarsch. buiten bereik* (indien ingeschakeld) wanneer de CGM en pomp niet met elkaar communiceren. De tijd buiten bereik

wordt ook weergegeven op het waarschuwingsscherm. Er worden waarschuwingen gegeven totdat de CGM en pomp weer binnen het bereik zijn.

🚩 OPMERKING

De Control-IQ-technologie blijft de eerste 15 minuten dat de CGM en pomp buiten bereik zijn, werken. Zodra de buiten bereik-conditie gedurende 20 minuten aanwezig is, stopt de Control-IQ-technologie met werken tot de twee apparaten binnen bereik zijn.

Instellen van de Waarschuwing buiten bereik:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **CGM-waarschuwingen**.
5. Tik op **Buiten bereik**.

De standaardinstelling is Aan en de tijd is ingesteld op 20 minuten.

6. Tik op **Waarschuwing na** om de tijd te wijzigen.

7. Voer met het toetsenbord op het scherm de tijd in waarna u wilt worden gewaarschuwd (tussen 20 minuten en 3 uur en 20 minuten) en tik daarna op .

8. Tik op .

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 23

Een CGM-sensorsessie starten of stoppen

23.1 Uw sensortype kiezen

Als dit de eerste keer is dat u uw pomp gebruikt of als u de pompsoftware hebt bijgewerkt sinds u de laatste sensorsessie bent begonnen, wordt u gevraagd uw CGM-type te kiezen. Na uw initiële selectie zal de pomp deze selectie standaard gebruiken.

Als u van CGM-type moet wisselen, kunt u dat als volgt doen via het menu **OPTIES** op uw pomp:

1. Tik op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **Sensortype wijzigen**.

5. Selecteer uw sensortype.



6. Start het juiste sensorkoppelingsproces zoals beschreven in [Deel 23.2 Uw Dexcom G6 zender-ID invoeren](#) of [Deel 23.8 De Dexcom G7-sensor starten](#).

23.2 Uw Dexcom G6 zender-ID invoeren

Om de communicatie via draadloze Bluetooth-technologie tussen uw pomp en een Dexcom G6-CGM te activeren, moet u de unieke zender-ID in uw pomp invoeren. Nadat de zender-ID in uw pomp is ingevoerd, kunnen de twee apparaten worden gekoppeld, waardoor uw sensorglucosemetingen

op uw pomp kunnen worden weergegeven.

Als u uw zender moet vervangen, moet u de nieuwe zender-ID in uw pomp invoeren. Als u uw pomp moet vervangen, moet u de zender-ID opnieuw in uw pomp invoeren.

1. Haal de zender uit de verpakking.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik uw zender **NIET** als deze is beschadigd/gebarsten. Dit kan een gevaarlijke elektrische toestand of storing veroorzaken, die kan leiden tot elektrische schokken.

2. Tik op het **startscherm** op **OPTIES**.
3. Tik op de **Pijl omlaag**.
4. Tik op **Mijn CGM**.
5. Tik op **Zender-ID**.
6. Voer de unieke zender-ID in met het toetsenbord op het scherm.

De zender-ID bevindt zich op de achterkant van uw zender of op de doos van de zender.

De letters I, O, V en Z worden niet gebruikt in zender-ID's en mogen niet worden ingevoerd. Als een van deze letters toch wordt ingevoerd, krijgt u de melding dat een ongeldige ID is ingevoerd en de oproep om een geldige ID in te voeren.

7. Tik op .
8. Om zeker te zijn dat u een correcte zender-ID hebt ingevoerd, wordt u gevraagd om deze nogmaals in te voeren.
9. Herhaal stap 6 hierboven en tik vervolgens op .

Als de zender-ID's die u hebt ingevoerd niet overeenkomen, krijgt u de oproep om het proces opnieuw uit te voeren.

- ✓ Nadat overeenkomende waarden zijn ingevoerd, keert u terug naar het scherm *Mijn CGM* en is de zender-ID die u hebt ingevoerd oranje gemarkeerd.

23.3 De Dexcom G6-sensor starten

Volg de onderstaande stappen om een Dexcom G6-CGM-sessie te starten.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
 2. Tik op de **Pijl omlaag**.
 3. Tik op **Mijn CGM**.
 4. Tik op **G6-SENSOR STARTEN**.
- ✓ Nadat u een sensorsessie hebt gestart, wordt de optie **G6-SENSOR STARTEN** vervangen door **G6-SENSOR STOPPEN**.

Het volgende scherm verschijnt dat u vraagt om de sensorcode in te voeren of deze stap over te slaan. Als u besluit om de sensorcode in te voeren, wordt u voor de duur van de sensorsessie niet gevraagd om een kalibratie uit te voeren. Ga voor informatie over de codes voor de Dexcom G6 CGM-sensor naar de website van de fabrikant voor de

betreffende gebruikershandleidingen.



Tik op **CODE** om de sensorcode van 4 cijfers in te voeren. Als u geen code hebt of al bent begonnen met een sensorsessie met de Dexcom G6 CGM-app, kunt tikken op **OVERSL**.

Als u geen code invoert in de t:slim X2-pomp, moet u de sensor elke 24 uur kalibreren. Er verschijnt een oproep voor kalibratie op de pomp.

5. Tik op  om te bevestigen.
- ✓ Het scherm *SENSOR GESTART* verschijnt om u te laten weten dat de opstartperiode is begonnen.

- ✓ Uw pomp keert terug naar het *CGM-startscherm* met daarop de trendgrafiek van 3 uur en het aftelsymbool voor het opstarten van de sensor.
- 6. Kijk 10 minuten na het begin van de sensorsessie op het *CGM-startscherm* van uw pomp om te controleren of de pomp en de CGM met elkaar communiceren. Het antennesymbool hoort rechts van de batterij-indicator te worden weergegeven en hoort wit te zijn.
- 7. Als u het symbool Buiten bereik onder de indicator voor het insulineniveau ziet en het antennesymbool grijs is, volg dan de volgende tips voor het oplossen van problemen:
 - Zorg dat de pomp en CGM niet verder dan 6 meter (20 voet) van elkaar zijn verwijderd, zonder obstakels. Controleer na 10 minuten opnieuw of het symbool voor Buiten bereik nog steeds actief is.
 - Als de pomp en de CGM nog steeds niet met elkaar communiceren, controleer dan het scherm *Mijn*

CGM om te controleren of de juiste zender-ID is ingevoerd.

- Als de juiste zender-ID is ingevoerd en de pomp en CGM nog steeds niet met elkaar communiceren, neem dan contact op met de klantenservice in uw regio.

23.4 Opstartperiode Dexcom G6-sensor


De Dexcom G6-sensor heeft een opstartperiode van 2 uur nodig om zich aan te passen onder uw huid. U krijgt geen bloedglucosemetingen of waarschuwingen van de sensor tot de 2 uur durende opstartperiode voorbij is. Ga voor informatie over de opstartperiodes van de Dexcom G6 CGM-sensor naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

Tijdens de opstartperiode geeft het *CGM-startscherm* van uw pomp rechtsboven op het scherm een aftelsymbool van 2 uur weer. Het aftelsymbool wordt geleidelijk ingevuld om aan te geven dat u de actieve sensorsessie nadert.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ™-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur tijdens de opstartperiode van de sensor. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens het opstarten van de sensor.

Tijdlijn van de opstartperiode van de sensor

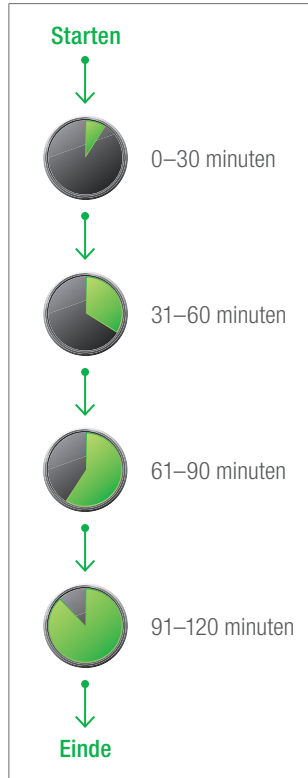

⚠ WAARSCHUWING

Blijf tijdens de opstartperiode van 2 uur een BG-meter en teststrips gebruiken voor behandelingsbeslissingen.

⚠ OPMERKING

Tijdens de opstartperiode van de sensor zal de Control-IQ-technologie de basaalsnelheden niet aanpassen en geen automatische correctiebolussen toedienen. De sensor moet actief metingen leveren om de Control-IQ-technologie te kunnen gebruiken.

Voorbeeld opstartschermen


Als u bijvoorbeeld 20 minuten geleden uw sensor sessie hebt gestart, ziet u dit aftelsymbool op het CGM-startscherm.



Als u 90 minuten geleden uw sensor sessie heeft gestart, ziet u dit aftelsymbool op het CGM-startscherm.



Aan het einde van de opstartperiode van 2 uur wordt het aftelsymbool vervangen door de actuele CGM-waarde.

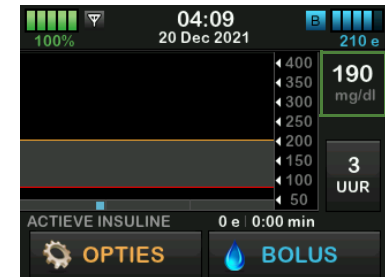

Volg de instructies in het volgende hoofdstuk om uw sensor te kalibreren. Sla de kalibratieaanwijzingen over als u een sensorcode hebt ingevoerd. U kunt altijd een kalibratie in de pomp invoeren, zelfs als u al een sensorcode hebt ingevoerd. Let op uw symptomen: als ze niet overeenstemmen met de CGM-waarden op dat moment, zou u een kalibratie kunnen invoeren.

Uw sensorsessie beëindigen

Wanneer de sensorsessie is beëindigd, moet u de sensor vervangen en een nieuwe sensorsessie starten. In sommige gevallen kan de sensorsessie vroeg eindigen. U kunt er ook voor kiezen om de sensorsessie voortijdig te beëindigen. Als u een sensorsessie echter voortijdig beëindigt, kunt u de sessie niet opnieuw starten met dezelfde sensor. Er moet een nieuwe sensor worden gebruikt.

OPMERKING

Gooi de zender **NIET** weg na afloop van een sensorsessie. Blijf de zender gebruiken tot de pomp u meldt dat de batterij van de zender bijna leeg is. Veeg de buitenkant van de zender tussen twee sensorsessies af met isopropylalcohol.

Glucosewaarschuwingen en -alarmen van de sensor werken niet nadat de sensorsessie is beëindigd. Zodra de sensorsessie is beëindigd, zijn CGM-metingen niet beschikbaar. Als u Control-IQ-technologie gebruikt, wordt deze inactief wanneer een CGM-sensorsessie wordt beëindigd.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur nadat de sensorsessie is beëindigd. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen nadat de sensorsessie is beëindigd.

23.5 Automatisch uitschakelen Dexcom G6-sensor

Uw t:slim X2™-pomp geeft aan hoelang het nog duurt tot de sensorsessie is voltooid. Het scherm *Sensor verloopt spoedig* verschijnt 24 uur, 2 uur en 30 minuten voordat de sessie ten einde is. Na elke herinnering blijft u glucosemetingen van uw sensor ontvangen.

Als u het scherm *Sensor verloopt spoedig* ziet:

1. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.
- ✓ Het scherm *Sensor verloopt spoedig* verschijnt opnieuw wanneer er 2 uur resteren en wanneer er 30 minuten resteren.
- ✓ Na de laatste 30 minuten wordt het scherm *Vervang de sensor* weergegeven.
2. Tik op .
- ✓ Het *CGM-startscherm* verschijnt met het pictogram *Vervang de sensor* op de plaats waar de sensorglucosemetingen normaliter worden weergegeven.

Er worden geen nieuwe sensorglucosewaarden op uw pomp of in de Tandem t:slim-app weergegeven nadat uw sensorsessie is beëindigd. U moet uw sensor verwijderen, een nieuwe sensor inbrengen en een nieuwe sensorsessie starten.

23.6 Een Dexcom G6-sensorsessie beëindigen vóór automatisch uitschakelen

U kunt uw sensorsessie op elk gewenst moment vóór de automatische uitschakeling van de sensor beëindigen. Uw sensorsessie voortijdig beëindigen:

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
 2. Tik op **pijl-omlaag**
 3. Tik op **Mijn CGM**.
 4. Tik op **G6-SENSOR STOPPEN**.
 5. Tik op  om te bevestigen.
- ✓ Het scherm *SENSOR GESTOPT* wordt tijdelijk weergegeven.
 - ✓ Het *CGM-startscherm* verschijnt met het pictogram Vervang de sensor op de plaats waar de sensorglucosemetingen normaliter worden weergegeven.

Er worden geen nieuwe sensorglucosewaarden op uw pomp of in de Tandem t:slim-app weergegeven

nadat uw sensorsessie is beëindigd. U moet uw sensor verwijderen, een nieuwe sensor inbrengen en een nieuwe sensorsessie starten.

23.7 De Dexcom G6-sensor en -zender verwijderen

▲ WAARSCHUWING

Negeer **GEEN** gebroken of losgekomen sensordraden. Een sensordraad zou onder uw huid kunnen achterblijven. Als er een sensordraad onder uw huid afbreekt en u deze niet kunt zien, probeer dan niet om hem te verwijderen. Neem contact op met uw zorgverlener. Roep ook professionele medische hulp in als u symptomen van infectie of ontsteking (roodheid, zwelling of pijn) ondervindt op de inbrengplaats. Meld het aan de klantenservice in uw regio als u met een gebroken sensor te maken krijgt.

Kijk voor informatie over het verwijderen van de Dexcom G6-sensor en Dexcom G6-zender op de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

23.8 De Dexcom G7-sensor starten

Volg de onderstaande stappen om een Dexcom G7-CGM-sessie te starten.

1. Tik op het CGM-*startscherm* op **OPTIES**.
 2. Tik op **pijl-omlaag**
 3. Tik op **Mijn CGM**.
 4. Tik op **G7-SENSOR STARTEN**.
- ✓ Nadat u een sensorsessie hebt gestart, wordt de optie **G7-SENSOR STARTEN** vervangen door **G7-SENSOR STOPPEN**.
5. Voer uw koppelingscode in. Tik op  om te bevestigen.
 6. Voer uw koppelingscode opnieuw in en tik op  om te bevestigen.
 7. Start uw sensor. Tik op  om te bevestigen.
- ✓ Het scherm *SENSOR GESTART* verschijnt om u te laten weten dat de opstartperiode is begonnen.

- ✓ Uw pomp keert terug naar het *CGM-startscherm* met daarop de trendgrafiek van 3 uur en het aftelsymbool voor het opstarten van de sensor.

Kijk 10 minuten na het begin van de sensorsessie op het *CGM-startscherm* van uw pomp om te controleren of de pomp en de CGM met elkaar communiceren. Het antennesymbool hoort rechts van de batterij-indicator te worden weergegeven en hoort wit te zijn.

Als u het symbool Buiten bereik onder de indicator voor het insulineniveau ziet en het antennesymbool grijs is, volg dan de volgende tips voor het oplossen van problemen:

- Zorg dat de pomp en CGM niet verder dan 6 meter (20 voet) van elkaar zijn verwijderd, zonder obstakels. Controleer na 10 minuten opnieuw of het symbool voor Buiten bereik nog steeds actief is.
- Als de pomp en CGM nog steeds niet met elkaar communiceren, neem dan contact op met de klantenservice in uw regio.

23.9 Opstartperiode Dexcom G7-sensor

De Dexcom G7-sensor heeft een opstartperiode van 30 minuten nodig om zich aan te passen onder uw huid. Deze opstartperiode begint automatisch wanneer de sensor wordt geplaatst.


U krijgt geen bloedglucosemetingen of waarschuwingen van de sensor tot de 30 minuten durende opstartperiode voorbij is. Ga voor informatie over de opstartperiodes van de Dexcom G7 CGM-sensor naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

Tijdens de opstartperiode geeft het *CGM-startscherm* van uw pomp rechtsboven op het scherm een aftelsymbool van 30 minuten weer. Het aftelsymbool wordt geleidelijk ingevuld om aan te geven dat u de actieve sensorsessie nadert.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ™-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur tijdens de opstartperiode van de sensor. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens het opstarten van de sensor.

Tijdlijn van de opstartperiode van de sensor

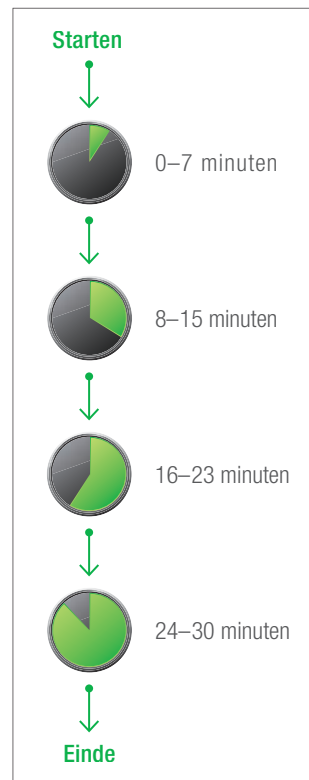

⚠ WAARSCHUWING

Blijf tijdens deze opstartperiode van 30 minuten een BG-meter en teststrips gebruiken voor behandelingsbeslissingen.

📌 OPMERKING

Tijdens de opstartperiode van de sensor zal de Control-IQ-technologie de basaalsnelheden niet aanpassen en geen automatische correctiebolussen toedienen. De sensor moet actief metingen leveren om de Control-IQ-technologie te kunnen gebruiken.

Aan het einde van de opstartperiode van 30 minuten wordt het aftelsymbool vervangen door de actuele CGM-waarde.

23.10 Automatisch uitschakelen Dexcom G7-sensor

Uw t:slim X2-pomp laat u weten hoeveel tijd u nog hebt voordat uw sensorsessie wordt beëindigd. Het scherm *Sensor verloopt spoedig* verschijnt wanneer er 24 uur en 2 uur resterend is. Nadat de sensor is verlopen, begint er een respijtp periode van 12 uur. Tijdens de respijtp periode blijft u bloedglucosemetingen van de

sensor ontvangen. Tijdens de respijtp periode geeft de pomp aan wanneer er nog 2 uur resteren en nog een keer wanneer er 30 minuten resteren.

Als u het scherm *Sensor verloopt spoedig* ziet:

1. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm.
- ✓ Als u ervoor kiest de sensor niet te stoppen wanneer u het scherm *Sensor verloopt spoedig* ziet. Dit scherm verschijnt opnieuw als er nog 12 uur over zijn en nogmaals als er nog 2 uur over zijn.
- ✓ De sensor is dan de respijtp periode van 12 uur ingegaan en het scherm *Sensor verloopt spoedig* verschijnt als er nog 2 uur over zijn en nog eens als er nog 30 minuten over zijn.

Na de laatste 30 minuten wordt het scherm *Vervang de sensor* weergegeven.

2. Tik op .

- ✓ Het CGM-startscherm verschijnt met het pictogram Vervang de sensor op de plaats waar de sensorglucosemetingen normaliter worden weergegeven.

Er worden geen nieuwe sensorglucosewaarden op uw pomp of in de Tandem t:slim-app weergegeven nadat uw sensorsessie is beëindigd. U moet uw sensor verwijderen, een nieuwe sensor inbrengen en een nieuwe sensorsessie starten.

23.11 Een Dexcom G7-sensorsessie beëindigen vóór automatisch uitschakelen

U kunt uw sensorsessie op elk gewenst moment vóór de automatische uitschakeling van de sensor beëindigen. Uw sensorsessie voortijdig beëindigen:

1. Tik op het CGM-startscherm op **OPTIES**.
2. Tik op **pijl-omlaag**.
3. Tik op **Mijn CGM**.
4. Tik op **G7-SENSOR STOPPEN**.

5. Tik op  om te bevestigen.

- ✓ Het scherm *SENSOR GESTOPT* wordt tijdelijk weergegeven.
- ✓ Het *CGM-startscherm* verschijnt met het pictogram Vervang de sensor op de plaats waar de sensorglucosemetingen normaliter worden weergegeven.

Er worden geen nieuwe sensorglucosewaarden op uw pomp of in de Tandem t:slim-app weergegeven nadat uw sensorsessie is beëindigd. U moet uw sensor verwijderen, een nieuwe sensor inbrengen en een nieuwe sensorsessie starten.

hulp in als u symptomen van infectie of ontsteking (roodheid, zwelling of pijn) ondervindt op de inbrengplaats. Meld het aan de klantenservice in uw regio als u met een gebroken sensor te maken krijgt.

Ga voor informatie over het verwijderen van de Dexcom G7 CGM naar de website van de fabrikant voor de betreffende productinstructies.

23.12 De Dexcom G7-sensor verwijderen

⚠ WAARSCHUWING

Negeer **GEEN** gebroken of losgekomen sensordraden. Een sensordraad zou onder uw huid kunnen achterblijven. Als er een sensordraad onder uw huid afbreekt en u deze niet kunt zien, probeer dan niet om hem te verwijderen. Neem contact op met uw zorgverlener. Roep ook professionele medische

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 24

Het kalibreren van uw Dexcom CGM-systeem

Kalibratie is vereist voor de Dexcom G6 CGM als u geen sensorcode hebt ingevoerd bij het starten van de sensorsessie. Op alle andere momenten is dit optioneel.

Kalibratie is optioneel voor de Dexcom G7 CGM en kan worden uitgevoerd als u symptomen hebt die niet overeenkomen met de geregistreerde CGM-waarden.

24.1 Kalibratieoverzicht

Als u de Dexcom G6 gebruikt en aan het begin van een sensorsessie geen CGM-sensorcode hebt ingevoerd, wordt u telkens na de volgende perioden gevraagd om een kalibratie te verrichten:

- opstartperiode van 2 uur: 2 kalibraties 2 uur na het starten van uw sensorsessie
- update na 12 uur: 12 uur na de opstartkalibratie na 2 uur
- update na 24 uur: 24 uur na de opstartkalibratie na 2 uur
- Om de 24 uur: om de 24 uur na de update na 24 uur
- Als dit wordt gemeld

Op de eerste dag na uw sensorsessie moet u vier bloedglucosewaarden (BG-waarden) in uw pomp invoeren om te kalibreren. Na uw eerste opstartkalibratie moet u elke 24 uur een BG-waarde invoeren om te kalibreren. De pomp geeft een melding wanneer deze kalibraties nodig zijn. Daarnaast kan het gebeuren dat u, wanneer nodig, wordt gevraagd om aanvullende BG-waarden in te voeren voor kalibratie.

Tijdens het kalibreren moet u de BG-waarden handmatig in de pomp invoeren. U kunt elke in de handel verkrijgbare bloedglucosemeter gebruiken. U moet kalibreren met nauwkeurige bloedglucosemeterwaarden om nauwkeurige sensorglucosemetingen te krijgen.

Volg deze belangrijke instructies om BG-waarden te verkrijgen als kalibratie nodig is:

- BG-waarden die worden gebruikt voor kalibratie moeten tussen 40 en 400 mg/dl liggen en moeten binnen de laatste 5 minuten zijn verkregen.
- Uw sensor kan niet worden gekalibreerd als de bloedglucosewaarde van uw meter

lager is dan 40 mg/dl of hoger dan 400 mg/dl. Om veiligheidsredenen adviseren wij u om uw BG-waarde te behandelen voordat u de kalibratie uitvoert.

- Controleer of rechtsboven op het *CGM-startscherm* een sensorglucosewaarde wordt weergegeven voordat u gaat kalibreren.
- Controleer voordat u gaat kalibreren of rechts van de batterij-indicator op het *CGM-startscherm* het antennesymbool zichtbaar en actief is (wit, niet grijs).
- Gebruik voor het kalibreren altijd dezelfde bloedglucosemeter die u normaal gesproken voor uw BG-metingen gebruikt. Stap gedurende een sensorsessie niet over op een andere BG-meter. De nauwkeurigheid van de bloedglucosemeter en de strip kan variëren tussen de verschillende merken bloedglucosemeters.
- De nauwkeurigheid van de bloedglucosemeter die wordt gebruikt voor kalibratie kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de sensorglucosemetingen.

Volg de instructies van de fabrikant van uw bloedglucosemeter voor het testen van BG.

24.2 Opstartkalibratie

Als u bij het opstarten van de Dexcom G6 CGM geen sensorcode hebt ingevoerd, vraagt de pomp u om kalibratie om nauwkeurige informatie te kunnen verstrekken. Als u kiest voor het kalibreren van de Dexcom G6 CGM of de Dexcom G7 CGM, begint u bij stap 1 hieronder.

OPMERKING

De instructies in dit onderdeel zijn niet van toepassing als u de sensorcode hebt ingevoerd toen u de sensorsessie startte, tenzij u een optionele kalibratie uitvoert.

Nadat de opstartperiode van de CGM is voltooid, wordt het scherm *CGM kalibreren* weergegeven, met de melding dat u twee afzonderlijke BG-waarden van uw BG-meter moet invoeren. De bloedglucosewaarden van uw sensor verschijnen pas nadat de pomp de BG-waarden heeft geaccepteerd.

1. Tik op het scherm *CGM kalibreren* op .
- ✓ Het *CGM-startscherm* wordt weergegeven met twee bloeddruppels rechtsboven op het scherm. De twee bloeddruppels blijven op het scherm staan tot u twee afzonderlijke BG-waarden hebt ingevoerd om te kalibreren.
2. Was en droog uw handen, controleer of uw bloedglucose teststrips op een juiste manier zijn bewaard en niet zijn verlopen en controleer of uw meter correct is gecodeerd (indien vereist).
3. Voer een BG-meting uit met uw bloedglucosemeter. Breng het bloedmonster voorzichtig aan op de teststrip en volg hierbij de instructies van de fabrikant van uw bloedglucosemeter.

⚠ PRECAUTION

Gebruik uw **VINGERTOPPEN** om te kalibreren met behulp van uw bloedglucosemeter. Bloed van andere locaties zal minder nauwkeurig zijn en minder gemakkelijk verkregen kunnen worden.

4. Tik op **OPTIES**.
5. Tik op de **Pijl omlaag**.
6. Tik op **Mijn CGM**.
7. Tik op **CGM kalibreren**.
8. Voer de BG-waarde van uw bloedglucosemeter in met het toetsenbord op het scherm.

⚠ PRECAUTION

Om de CGM te kalibreren, **MOET** u de door uw bloedglucosemeter aangegeven BG-waarde binnen 5 minuten na een zorgvuldig verrichte BG-meting invoeren. Voer geen sensorglucosewaarden in voor kalibratie. Als u onjuiste BG-waarden invoert, BG-waarden invoert die meer dan 5 minuten voor het invoeren zijn verkregen, of bloedglucosemetingen van de sensor invoert, kan dit de prestaties van de sensor beïnvloeden en kan dit leiden tot het niet opmerken van ernstige hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

9. Tik op .
10. Tik op  om de kalibratie te bevestigen.

Tik op  als de BG-waarde niet exact gelijk is aan de waarde van uw bloedglucosemeter. Het toetsenbord verschijnt weer op het scherm. Voer de exacte waarde van uw bloedglucosemeter in.

- ✓ Het scherm *KALIBRATIE GEACCEPTEERD* wordt weergegeven.
 - ✓ Het scherm *Mijn CGM* wordt weergegeven.
11. Tik op **CGM kalibreren** om uw tweede BG-waarde in te voeren.
 - ✓ Het toetsenbord verschijnt op het scherm.
 12. Was en droog uw handen, controleer of uw bloedglucoseteststrips op een juiste manier zijn bewaard en niet zijn verlopen en controleer of uw meter correct is gecodeerd (indien vereist).
 13. Voer een BG-meting uit met uw bloedglucosemeter. Breng het bloedmonster voorzichtig aan op de teststrip en volg hierbij de instructies van de fabrikant van uw bloedglucosemeter.

14. Volg stap **8 – 10** om uw tweede BG-waarde in te voeren.

24.3 Kalibratie van BG-waarde en correctiebolus

Uw t:slim X2™-pomp gebruikt de BG-waarde die voor kalibratie is ingevoerd om te bepalen of een correctiebolus nodig is, of om andere belangrijke informatie te geven over uw actieve insuline en BG.

- Als u een kalibratiewaarde invoert die hoger is dan uw doel-BG in Pers. profielen:
 - » Als Control-IQ-technologie is uitgeschakeld, wordt het bevestigingsscherm *Boven het doel correctiebolus* weergegeven. Tik op  om een correctiebolus toe te voegen en volg daarna de instructies in [Deel 8.3 Berekening van een correctiebolus](#).
 - » Als Control-IQ is ingeschakeld, keert de pomp terug naar het scherm *Mijn CGM*.
- Als u een kalibratiewaarde invoert die lager is dan uw doel-BG in

Persoonlijke profielen, verschijnt er een berichtenscherm met de melding “Uw BG is onder het doel” en wordt er andere belangrijke informatie op het scherm weergegeven.

- Als u uw doel-BG als kalibratiewaarde invoert, keert de pomp terug naar het *CGM-startscherm*.

24.4 Redenen waarom kalibreren nodig kan zijn

Mogelijk moet u kalibreren als uw symptomen niet overeenkomen met de bloedglucosewaarden van uw CGM.

Als u het scherm *KALIBRATIEFOUT* ziet, krijgt u binnen 15 minuten of 1 uur, afhankelijk van de fout, een oproep om een BG-waarde in te voeren voor kalibratie.

OPMERKING

Hoewel dit niet nodig is en u niet wordt gevraagd om te kalibreren, kunt u op elk gewenst moment een kalibratie in de pomp invoeren, zelfs als u al een sensorcode hebt ingevoerd. Let op uw symptomen: als ze niet overeenstemmen met de CGM-waarden op dat moment, zou u een kalibratie kunnen invoeren.

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 25

CGM-gegevens
weergeven op uw
t:slim X2-insulinepomp

25.1 Overzicht

⚠ WAARSCHUWING

Negeer **GEEN** symptomen van een te hoge of te lage bloedglucose. Als de bloedglucosewaarschuwingen en -waarden van de sensor niet overeenkomen met uw symptomen, moet u uw BG meten met een bloedglucosemeter, zelfs als uw sensor waarden weergeeft die niet binnen het hoge of lage bereik vallen.

De pompschermen in dit deel tonen het scherm wanneer de Control-IQ-technologie™ is uitgeschakeld. Voor informatie over CGM-schermen wanneer de Control-IQ-technologie is ingeschakeld: zie [Deel 31.9 Control-IQ-technologie-informatie op uw scherm](#).

Tijdens een actieve sensor sessie worden er om de 5 minuten CGM-waarden naar uw pomp gestuurd. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de glucosemetingen van uw sensor en trendinformatie moet interpreteren. De trendgrafiek geeft aanvullende informatie die uw bloedglucosemeter niet geeft. Deze toont uw actuele sensorglucosewaarde, de richting

waarin deze verandert en hoe snel deze verandert. De trendgrafiek kan ook laten zien waar uw sensorglucosewaarde is geweest gedurende een bepaalde periode.

Uw bloedglucosemeter meet glucose in uw bloed. Uw sensor meet glucose in uw interstitiële vloeistof (de vloeistof onder uw huid). Omdat de bloedglucose in verschillende vloeistoffen wordt gemeten, kunnen de waarden van de bloedglucosemeter en die van de sensor van elkaar verschillen.

Het grootste voordeel van continue glucosemonitoring is de trendinformatie. Het is belangrijk dat u zich concentreert op de trends en de veranderingssnelheid op uw zender of pomp in plaats van op de exacte sensorglucosewaarde.

Druk op de knop **Scherf aan/Snelle bolus** om het scherm aan te zetten. Als er een CGM-sessie actief is, ziet u het

CGM-startscherm met daarop de trendgrafiek van 3 uur.



- De actuele tijd en datum worden bovenaan op het scherm in het midden weergegeven.
- Elke "stip" in de trendgrafiek is een bloedglucosemeting van uw sensor, die om de 5 minuten wordt gemeld.
- Uw instelling voor de waarschuwing bij hoge bloedglucose wordt in de trendgrafiek weergegeven als een oranje lijn.
- Uw instelling voor de waarschuwing bij lage bloedglucose wordt in de trendgrafiek weergegeven als een rode lijn.
- De grijze zone geeft uw glucosestreefbereik aan, het bereik

tussen de waarschuwingen voor Hoog en Laag die u hebt ingesteld.

- Sensorglucosewaarden worden weergegeven in milligram per deciliter (mg/dl).
- Als uw sensorglucosewaarde tussen uw instellingen voor de waarschuwingen bij hoge en lage glucose ligt, wordt de waarde in het wit weergegeven.
- Als uw sensorglucosewaarde hoger is dan uw instelling voor de waarschuwing bij hoge glucose, wordt de waarde oranje weergegeven.
- Als uw sensorglucosewaarde lager is dan uw instelling voor de waarschuwing bij lage glucose, wordt de waarde rood weergegeven.
- Als de waarschuwing bij lage glucose niet is ingesteld en uw sensorglucosespiegel 55 mg/dl of lager is, wordt deze in het rood weergegeven.

25.2 CGM-trendgrafieken

U kunt eerdere trendinformatie van de glucosesensor bekijken op uw *CGM-startscherm*.

Trends over 1, 3, 6, 12 en 24 uur worden weergegeven. De trendgrafiek van 3 uur is de standaardweergave en wordt weergegeven op het *CGM-startscherm*, zelfs als er een andere trendgrafiek werd weergegeven toen het scherm werd uitgeschakeld.

Uw trendgrafiek laat een vlakke lijn of stippen zien bij 40 of 400 mg/dl als uw bloedglucose zich buiten dit bereik bevindt.

Om verschillende tijden op de trendgrafiek te bekijken, tikt u op de trendgrafiektijd (UUR) om de opties te doorlopen.

De trendgrafiek van 3 uur (standaardweergave) toont uw actuele sensorglucosewaarde samen met de

sensorglucosewaarden van de afgelopen 3 uur.



De trendgrafiek van 6 uur toont uw actuele sensorglucosewaarde samen met de sensorglucosewaarden van de afgelopen 6 uur.



De trendgrafiek van 12 uur toont uw actuele sensorglucosewaarde samen

met de sensorglucosewaarden van de afgelopen 12 uur.



De trendgrafiek van 24 uur toont uw actuele sensorglucosewaarde samen met de sensorglucosewaarden van de afgelopen 24 uur.




De trendgrafiek van 1 uur toont uw actuele sensorglucosewaarde samen


met de sensorglucosewaarden van het afgelopen uur.



LAAG wordt weergegeven wanneer de meest recente sensorglucosemeting lager is dan 40 mg/dl.

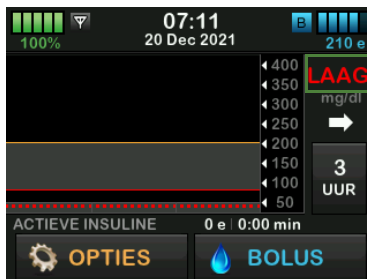

HOOG wordt weergegeven wanneer de meest recente sensorglucosemeting hoger is dan 400 mg/dl.

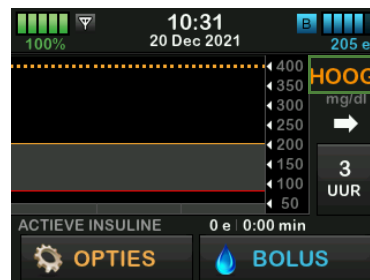

25.3 Pijlen voor veranderingssnelheid

Uw pijlen voor veranderingssnelheid geven extra informatie over de richting en snelheid waarmee de sensorglucosespiegel de afgelopen 15–20 minuten is veranderd.

De trendpijl wordt onder de actuele sensorglucosewaarde weergegeven.



Reageer niet te sterk op de pijlen voor veranderingssnelheid. Houd rekening met recente insulinetoedieningen, activiteit, voedselinname, de trendgrafiek als geheel en uw BG-waarde voordat u actie onderneemt.

Als er tijdens de afgelopen 15–20 minuten sprake was van onderbroken communicatie tussen de CGM en uw pomp omdat ze buiten bereik van elkaar waren of als gevolg van een fout, wordt er mogelijk geen pijl weergegeven. Als de trendpijl ontbreekt en u bezorgd bent over het stijgen of dalen van uw BG-spiegel, neem dan een BG-meting met uw bloedglucosemeter.

De onderstaande tabel toont de verschillende trendpijlen die uw ontvanger of pomp weergeeft:

Definities van de trendpijlen

	Constant: uw bloedglucosewaarde is stabiel (stijgt/daalt met niet meer dan 1 mg/dl per minuut). Uw sensorglucosewaarde zou binnen 15 minuten kunnen stijgen of dalen met max. 15 mg/dl.
	Langzaam stijgend: uw sensorglucosewaarde stijgt elke minuut met 1-2 mg/dl. Als deze stijging aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen stijgen met max. 30 mg/dl.
	Stijgend: uw sensorglucosewaarde stijgt elke minuut 2-3 mg/dl. Als deze stijging aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen stijgen met max. 45 mg/dl.
	Snel stijgend: uw sensorglucosewaarde stijgt elke minuut met meer dan 3 mg/dl. Als deze stijging aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen stijgen met meer dan 45 mg/dl.

	Langzaam dalend: uw sensorglucosewaarde daalt elke minuut 1-2 mg/dl. Als deze daling aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen dalen met max. 30 mg/dl.
	Dalend: uw sensorglucosewaarde daalt elke minuut 2-3 mg/dl. Als deze daling aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen dalen met max. 45 mg/dl.
	Snel dalend: uw sensorglucosewaarde daalt elke minuut met meer dan 3 mg/dl. Als deze daling aanhoudt, zou uw sensorglucosewaarde binnen 15 minuten kunnen dalen met meer dan 45 mg/dl.
Geen pijl	Geen informatie over veranderingssnelheid: de CGM kan niet berekenen hoe snel uw sensorglucosewaarde momenteel stijgt of daalt.

25.4 CGM-geschiedenis

CGM-geschiedenis geeft het historische logboek van CGM-gebeurtenissen weer. Er kunnen ten minste 90 dagen aan gegevens worden weergegeven in Geschiedenis. Wanneer het maximale aantal gebeurtenissen is bereikt, worden de oudste gebeurtenissen uit het geschiedenislogboek verwijderd en vervangen door de meest recente gebeurtenissen. De volgende geschiedenisdelen kunnen worden weergegeven:

- Sessies en kalibraties
- Waarschuwingen en fouten
- Volledig

Elk bovengenoemd deel is chronologisch geordend. Als er geen gebeurtenissen aan een datum zijn gekoppeld, wordt die dag niet in de lijst weergegeven.

Het gedeelte Sessies en kalibraties omvat de starttijd en -datum voor elke sensor sessie, de stoptijd en -datum voor elke sensor sessie en alle ingevoerde BG-waarden voor kalibratie.

Het gedeelte Waarschuwingen en fouten bevat de datum en tijd voor alle waarschuwingen en fouten die zijn opgetreden. De letter "D" (D: waarschuwing) bij een waarschuwing of alarm geeft het bijbehorende tijdstip aan. De letter "C" (C: waarschuwing) geeft het tijdstip van wissen aan.

Het gedeelte Volledig bevat alle informatie uit de gedeelten Sessies en kalibraties en Waarschuwingen en fouten, evenals alle wijzigingen van instellingen.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op de **Pijl omlaag**.
3. Tik op **Geschiedenis**
4. Tik op **CGM-geschiedenis**.
5. Tik op het deel dat u wilt bekijken. Elk deel is chronologisch geordend. Tik op de datum om de gebeurtenissen van die dag weer te geven. Gebruik de **pijl omlaag** om door meer data te bladeren.

25.5 Gemiste waarden

Als uw pomp de CGM-waarden een tijd lang niet ontvangt, ziet u drie streepjes op de plaats waar de CGM-waarde gewoonlijk wordt weergegeven op het *CGM-startscherm* en op het *CGM-vergrendelingsscherm*. De pomp probeert automatisch om ontbrekende datapunten uit de afgelopen 6 uur aan te vullen als de verbinding is hersteld en er weer waarden beginnen te verschijnen. Als de sensor glucosewaarde of de trendpijl ontbreekt en u bezorgd bent over het stijgen of dalen van uw BG-spiegel, verricht dan een BG-meting met uw bloedglucosemeter.

OPMERKING

De Control-IQ-technologie blijft nog 15 minuten werken nadat er geen CGM-waarden meer worden ontvangen. Als de connectiviteit na 20 minuten niet wordt hersteld, stopt de Control-IQ-technologie totdat CGM-metingen beschikbaar zijn. Hoewel de Control-IQ-technologie niet werkt, blijft uw pomp insuline toedienen volgens de instellingen voor uw persoonlijk profiel. Zodra CGM-metingen beschikbaar zijn, wordt de Control-IQ-technologie automatisch hervat. Voor meer informatie: zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 26

CGM-waarschuwingen en -fouten

De informatie in dit gedeelte helpt verduidelijken hoe u op CGM-waarschuwingen en -foutmeldingen moet reageren. Het is alleen van toepassing op het CGM-gedeelte van uw pomp. CGM-waarschuwingen en -fouten volgen niet hetzelfde patroon van trillingen en pieptonen als herinneringen, waarschuwingen en alarmen voor de toediening van insuline.

De Tandem t:slim™-app kan ook berichten, waarschuwingen en alarmen van uw t:slim X2™-pomp weergeven als pushmeldingen op uw smartphone. Deze pushmeldingen zijn identiek aan het scherm van uw pomp, tenzij anders aangegeven in dit hoofdstuk.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmen en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Voor meer informatie over het aansluiten van uw pomp en smartphone, zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) of tik op **Help** op het scherm

Instellingen van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.

Zie [hoofdstuk 13 Waarschuwingen van de t:slim X2-insulinepomp](#), [14 Alarmen van de t:slim X2-insulinepomp](#) en [15 Storing van de t:slim X2-insulinepomp](#) voor informatie over herinneringen, waarschuwingen en alarmen voor insulinetoeediening.

Voor informatie over de waarschuwingen van de Control-IQ™-technologie: zie [Hoofdstuk 32 Waarschuwingen Control-IQ-technologie](#).

⚠️ WAARSCHUWING

Als een sensor sessie wordt beëindigd, hetzij automatisch of handmatig, is de Control-IQ-technologie niet beschikbaar en zal deze de insuline niet aanpassen. Om de Control-IQ-technologie in te schakelen, moet een sensor sessie worden gestart en sensorwaarden naar de pomp worden verzonden.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEL

De CGM-waarschuwingen op de t:slim X2-pomp en in de Dexcom CGM-apps moeten afzonderlijk worden ingesteld. De waarschuwinginstellingen gelden afzonderlijk voor de telefoon en de pomp.

📌 OPMERKING

Niet alle waarschuwingen zijn van toepassing op alle CGM-typen. Een waarschuwingsscherm kan enigszins verschillen afhankelijk van het type CGM dat u gebruikt.

26.1 Waarschuwing opstartkalibratie – Alleen Dexcom G6

Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	CGM-opstartperiode van 2 uur is voltooid. Deze melding verschijnt alleen als u geen sensorcode hebt ingevoerd.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 15 minuten totdat u kalibreert.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK en voer 2 afzonderlijke BG-waarden in om de CGM te kalibreren en uw CGM-sessie te starten.

26.2 Waarschuwing tweede opstartkalibratie – Alleen Dexcom G6

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De CGM heeft een extra BG-waarde nodig om de opstartkalibratie te voltooien. Deze melding verschijnt alleen als u geen sensorcode hebt ingevoerd.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 15 minuten totdat de tweede kalibratie is ingevoerd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  en voer een BG-waarde in om de CGM te kalibreren en uw CGM-sessie te starten.

26.3 Kalibratiewaarschuwing na 12 uur – Alleen Dexcom G6

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De CGM heeft een BG-waarde nodig om te kalibreren. Deze melding verschijnt alleen als u geen sensorcode hebt ingevoerd.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen via het scherm, zonder trillingen of pieptonen.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 15 minuten.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  en voer een BG-waarde in om de CGM te kalibreren.

26.4 Kalibratie niet voltooid

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Indien u een kalibratiewaarde invoert met het toetsenbord en het invoeren niet binnen 90 seconden voltooid, wordt dit scherm weergegeven.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 pieptonen of trillingen, afhankelijk van het geselecteerde geluidsvolume.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  en voltooi uw kalibratie door de waarde in te voeren met het toetsenbord op het scherm.

26.5 Time-out kalibratie

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Indien u een kalibratiewaarde invoert met het toetsenbord en het invoeren niet binnen 5 minuten voltooit, wordt dit scherm weergegeven.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	2 pieptonen of trillingen, afhankelijk van het geselecteerde geluidsvolume.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK en meet een nieuwe BG-waarde met uw bloedglucosemeter. Voer de waarde in met behulp van het toetsenbord op het scherm om de CGM te kalibreren.

26.6 Waarschuwing kalibratiefout

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De CGM kan niet kalibreren met behulp van de laatst ingevoerde BG-meterwaarde.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK om te bevestigen. Geef de CGM en uw bloedglucose de tijd om zich aan te passen door ten minste 15 minuten te wachten. Als kalibratie nog steeds gewenst is of als er geen waarden verschijnen, probeert u het opnieuw. Als er na de laatste kalibratie geen sensorglucosemetingen verschijnen, gaat u naar de website van de fabrikant van de CGM voor de betreffende productinstructies.

26.7 Waarsch. kalibratie vereist – Alleen Dexcom G6

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De CGM heeft een BG-waarde nodig om te kalibreren. Er worden nu geen sensorglucosemetingen weergegeven.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 15 minuten.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  en voer een BG-waarde in om de CGM te kalibreren.


26.8 CGM-waarschuwing hoog

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De meest recente glucosemeting van uw sensor is gelijk aan of hoger dan de instelling voor de waarschuwing bij hoge glucose.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer en trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd of totdat uw glucosewaarde is gedaald tot onder het waarschuwningsniveau.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Alleen als u de functie Herhalen hebt ingeschakeld.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.

26.9 CGM-waarschuwing laag

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?		
Wat betekent het?	De meest recente glucosemeting van uw sensor is gelijk aan of lager dan de instelling voor de waarschuwing laag.	
Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 3 keer en trilt/piept vervolgens 3 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd of totdat uw sensorglucosewaarde is gestegen tot boven het waarschuwningsniveau.	
Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Alleen als u de functie Herhalen hebt ingeschakeld.	
Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.	

26.10 Vaste CGM-waarschuwing laag

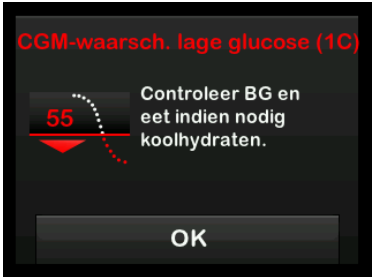Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?		
Wat betekent het?	De meest recente sensorglucosemeting van uw sensor is gelijk aan of lager dan 55 mg/dl.	
Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 4 keer en trilt/piept vervolgens 4 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd of totdat uw sensorglucosewaarde is gestegen tot boven 55 mg/dl.	
Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, 30 minuten na elke bevestiging, totdat uw sensorglucosewaarde is gestegen tot boven 55 mg/dl.	
Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.	

26.11 CGM-waarschuwing bij stijging

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw glucosespiegel stijgt met 2 mg/dl per minuut of sneller (ten minste 30 mg/dl binnen 15 minuten).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten of totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.

26.12 CGM-waarschuwing snel stijgend

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw glucosespiegel stijgt met 3 mg/dl per minuut of sneller (ten minste 45 mg/dl binnen 15 minuten).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten of totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.


26.13 CGM-waarschuwing bij daling

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw sensorglucosespiegel daalt met 2 mg/dl per minuut of sneller (ten minste 30 mg/dl binnen 15 minuten).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 3 keer, trilt/piept vervolgens 3 keer om de 5 minuten of totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.

26.14 CGM-waarschuwing snel dalend

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw sensorglucosespiegel daalt met 3 mg/dl per minuut of sneller (ten minste 45 mg/dl binnen 15 minuten).
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 3 keer, trilt/piept vervolgens 3 keer om de 5 minuten of totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen.

26.15 Onbekende sensorglucosewaarde

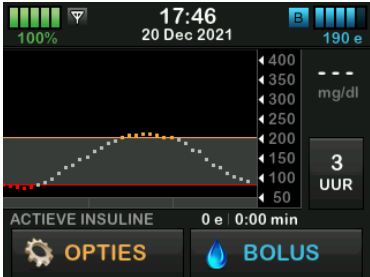Scherm	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De sensor verzendt sensorglucosemetingen die de pomp niet begrijpt. U ontvangt geen glucosemetingen van uw sensor.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Alleen via het scherm, zonder trillingen of pieptonen.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	De 3 streepjes blijven op het scherm totdat een nieuwe sensorglucosewaarde is ontvangen en deze in plaats van de streepjes wordt weergegeven. Als er na 20 minuten geen glucosemetingen van de sensor worden ontvangen, wordt de CGM-waarschuwing Niet beschikbaar geactiveerd. Zie Deel 26.21 CGM niet beschikbaar.
	Hoe moet ik reageren?	Wacht 30 minuten op meer informatie van de pomp. Voer geen BG-waarden in voor kalibratie. De pomp gebruikt geen BG-waarden voor kalibratie wanneer “ - - - ” op het scherm wordt weergegeven.

26.16 Waarschuwing Buiten bereik

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?		
Wat betekent het?		De CGM en de pomp communiceren niet. Afhankelijk van de CGM die u gebruikt, kunt u verschillende foutschermen zien. De pomp ontvangt geen sensorglucosewaarden en de Control-IQ-technologie is niet in staat om sensorglucosespiegels te voorspellen of de insulinetoeiding aan te passen.
Hoe waarschuwt de pomp mij?		Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat de CGM en de pomp weer binnen het bereik zijn.
Waarschuwt de pomp mij opnieuw?		Ja, indien de CGM en de pomp buiten bereik blijven.
Hoe moet ik reageren?		Tik op OK om te bevestigen en zet de CGM en de pomp dicht bij elkaar of verwijder het obstakel ertussen.

⚠ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie kan de insulinetoeiding alleen aanpassen als de CGM binnen bereik is. Als u tijdens het aanpassen van de insuline buiten het bereik komt, zal uw basale insulinetoeiding terugkeren naar de instellingen voor basaalsnelheid in uw actieve persoonlijke profiel, beperkt tot 3 eenheden/uur. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen terwijl de sensor niet met de pomp communiceert.

26.17 Waarschuwing zenderbatterij zwak – Alleen Dexcom G6

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De batterij van de Dexcom G6-zender is bijna leeg.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, het alarm laat het u weten wanneer er 21, 14 en 7 dagen batterijduur voor de zender resteren.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  om te bevestigen. Vervang de zender zo snel mogelijk.

26.18 Zenderfout – Alleen Dexcom G6

Scherf	Uitleg	
	Wat betekent het?	De Dexcom G6-zender is uitgevallen en de CGM-sessie is gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op MEER INFO . Er verschijnt een scherm waarin staat dat uw CGM-sessie is gestopt en dat de toediening van insuline zal worden voortgezet met de basaalsnelheid in uw persoonlijke profiel. Vervang de zender onmiddellijk.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval van een zenderfout. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens een zenderfout.

26.19 Foutmelding Sensor defect

Scherf	Uitleg	
	Wat betekent het?	De sensor werkt niet goed en de CGM-sessie is gestopt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op MEER INFO . Er verschijnt een scherm waarin staat dat uw CGM-sessie is gestopt en dat de toediening van insuline zal worden voortgezet met de basaalsnelheid in uw persoonlijke profiel. Vervang de sensor en start een nieuwe CGM-sessie.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval van een defecte sensor. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen wanneer een sensor defect is.

26.20 Waarschuwing incompatibele sensor – Alleen Dexcom G7

Scherms	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?  	Wat betekent het?	De Dexcom G7 CGM die u probeert te koppelen, is niet compatibel met uw pomp.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij piept/trilt 1 keer en piept/trilt vervolgens om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op VOLGENDE STAPPEN. Een scherm geeft aan dat u contact moet opnemen met de technische ondersteuning van Dexcom. Tik op  om de waarschuwing te sluiten.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval van een defecte sensor. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen wanneer een sensor defect is.

26.21 CGM niet beschikbaar

Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw CGM-sessie is langer dan 20 minuten gestopt en de CGM kan niet meer worden gebruikt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten of totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee. Als de toestand 3 uur aanhoudt, wordt de waarschuwing Sensor defect weergegeven. Zie Deel 26.19 Foutmelding Sensor defect .
	Hoe moet ik reageren?	Tik op  en neem contact op met de fabrikant van de CGM.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval CGM niet beschikbaar is. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen wanneer de CGM niet beschikbaar is.

26.22 CGM-fout – Alleen Dexcom G7

Scherf	Uitleg	
 CGM-fout (20T) Fout bijwerken CGM-software. Ga naar tandemdiabetes.com/contact. VS: 1-877-801-6901 CAN: 1-833-509-3598 Storingscode: 16404 MEER INFO	Wat betekent het?	Uw Dexcom G7 CGM-sensor werkt niet goed; de CGM-sessie is gestopt en de CGM kan niet langer worden gebruikt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Neem eerst contact op met de technische ondersteuning. Om de waarschuwing te bevestigen, tikt u op MEER INFO en vervolgens op OK .

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval CGM niet beschikbaar is. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen wanneer de CGM niet beschikbaar is.

26.23 Kan niet koppelen – Alleen Dexcom G7

Schermb	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw Dexcom G7 CGM heeft te vaak geprobeerd om te koppelen op een plaats met te veel Dexcom G7-sensoren.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK en ga naar een plaats met minder sensoren om opnieuw te proberen te koppelen.

OPMERKING

Als de waarschuwing wordt weergegeven en de pomp begint aan een CGM-sessie, wordt de waarschuwing gewist.

26.24 CGM-systeemfout

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Uw CGM-systeem werkt niet goed; de CGM-sessie is gestopt en CGM kan niet langer worden gebruikt.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Nee.
	Hoe moet ik reageren?	• Noteer de storingscode die op het scherm verschijnt. • Tik op MEER INFO. Er verschijnt een scherm waarin staat dat uw CGM-sessie is gestopt en dat de toediening van insuline zal worden voortgezet met de basaalsnelheid in uw persoonlijke profiel. • Neem telefonisch contact op met de klantenservice in uw regio.

⚠ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur in het geval van een CGM-fout. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens een CGM-fout.

3 CGM-functies

HOOFDSTUK 27

CGM Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat handige tips en instructies om problemen op te lossen die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van het CGM-gedeelte van uw pomp.

Neem contact op met de klantenservice in uw regio als de stappen voor probleemoplossing in dit hoofdstuk het probleem niet oplossen.

De volgende tips gelden specifiek voor het oplossen van problemen met de Dexcom CGM die op uw pomp is aangesloten. Ga voor meer informatie over het oplossen van problemen met de Dexcom CGM naar de website van de fabrikant voor de betreffende gebruikershandleidingen.

27.1 Problemen koppeling met CGM oplossen

Mogelijk probleem:

Probleem met koppeling van uw Dexcom CGM met uw t:slim X2™-insulinepomp.

Tip voor het oplossen van het probleem:

De Dexcom CGM kan slechts met één medisch hulpmiddel tegelijk worden

gekoppeld. Zorg dat uw CGM niet is gekoppeld met de Dexcom-ontvanger voordat u hem met de pomp koppelt. U kunt nog steeds de Dexcom G6- of Dexcom G7-app tegelijkertijd met uw pomp blijven gebruiken. Zie [Deel 21.2 De koppeling met de Dexcom-ontvanger verbreken](#).

27.2 Kalibratieproblemen oplossen

Volg de volgende belangrijke tips om voor een goede kalibratie van uw CGM te zorgen.

Voordat u een BG-waarde voor kalibratie meet: was uw handen, controleer of uw BG-teststrips goed bewaard zijn en niet verlopen zijn en controleer of uw BG-meter correct is gecodeerd (indien vereist). Breng het bloedmonster voorzichtig aan op de teststrip en volg hierbij de instructies van uw bloedglucosemeter of teststrips.

Voer geen kalibratie uit als u het symbool Buiten bereik ziet op de plaats waar uw sensorglucosemetingen normaliter op het scherm worden weergegeven.

Voer geen kalibratie uit als u “- - -” ziet op de plaats waar uw sensorglucosemetingen normaliter op het scherm worden weergegeven.

Verricht geen kalibratie als uw BG-waarde lager dan 40 mg/dl of hoger dan 400 mg/dl is.

27.3 Probleem Onbekende sensorwaarde oplossen

Wanneer uw CGM geen sensorglucosewaarde kan geven, wordt “- - -” weergegeven op de plaats waar uw sensorglucose normaliter op het scherm wordt weergegeven. Dit betekent dat de pomp het sensorsignaal tijdelijk niet begrijpt.

Vaak kan de pomp het probleem verhelpen en doorgaan met het leveren van sensorglucosemetingen. Neem contact op met de fabrikant van de CGM als uw laatste sensorglucosemeting tenminste 3 uur geleden is.

Voer geen BG-waarden voor kalibratie in als u “- - -” op uw scherm ziet. De pomp gebruikt geen BG-waarden voor kalibratie als dit symbool op uw scherm wordt weergegeven.

Als u vaak “- -” ziet tijdens een sensorsessie, volg dan de tips voor het oplossen van problemen voordat u een andere sensor plaatst.

- Controleer of uw sensor niet is verlopen.
- Controleer of uw sensorhouder niet is losgeraakt of loslaat.
- Alleen Dexcom G6: controleer of de zender goed is vastgeklemd.
- Zorg dat er niets tegen de sensorhouder wrijft (d.w.z. kleding, autogordels enz.).
- Zorg ervoor dat u een goede inbrenglocatie kiest.
- Zorg dat uw inbrenglocatie schoon en droog is voordat u de sensor inbrengt.
- Alleen Dexcom G6: reinig de onderkant van de zender met een vochtige doek of een doekje met isopropanol. Plaats de zender op een schone, droge doek en laat hem 2–3 minuten aan de lucht drogen.

27.4 Probleem Buiten bereik/geen antenne oplossen

⚠ WAARSCHUWING

De Control-IQ™-technologie kan de insulinetoediening alleen aanpassen als de CGM binnen bereik is. Als u tijdens het aanpassen van de insuline buiten het bereik komt, zal uw basale insulinetoediening terugkeren naar de instellingen voor basaalsnelheid in uw actieve persoonlijke profiel, beperkt tot 3 eenheden/uur. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen terwijl de sensor niet met de pomp communiceert.

⚠ VOORZORGSMATREGEL

VOORKOM dat de CGM en pomp meer dan 6 meter (20 voet) van elkaar verwijderd raken. Het zendbereik van de CGM naar de pomp bedraagt maximaal 6 meter (20 voet), zonder obstakels. Draadloze communicatie door water werkt niet goed, waardoor het zendbereik veel kleiner is in een zwembad of bad of op een waterbed enz. Er bestaan verschillende soorten obstakels die niet zijn getest. Als uw CGM en ontvanger meer dan 6 meter (20 voet) van elkaar verwijderd zijn of worden gescheiden door een obstakel, communiceren de onderdelen mogelijk niet met elkaar of is de communicatieafstand kleiner, wat kan leiden tot het niet opmerken van voorvallen van ernstige hypoglykemie (lage BG) of hyperglykemie (hoge BG).

Als u het pictogram Buiten bereik op het scherm ziet op de plaats waar normaliter uw sensorglucosemeting wordt weergegeven, dan communiceert uw t:slim X2-pomp niet met uw CGM en worden er geen sensorglucosemetingen weergegeven op uw scherm. Wacht telkens wanneer u met een nieuwe sensorsessie begint 10 minuten tot uw t:slim X2-pomp begint te communiceren met uw CGM. Wanneer een sensorsessie actief is, kan soms verlies van communicatie voorkomen gedurende 10 minuten per keer. Dat is normaal.

Als u het pictogram Buiten bereik gedurende meer dan 10 minuten ziet, plaatst u uw t:slim X2-pomp en CGM dicht bij elkaar en verwijdert u eventuele obstructies. Na 10 minuten moet de communicatie hersteld zijn.

U moet de zender-ID of koppelingscode correct invoeren op uw pomp om sensorglucosemetingen te kunnen ontvangen (zie [Deel 23.2 Uw Dexcom G6 zender-ID invoeren](#)). Zorg dat u uw sensor hebt verwijderd en uw sensorsessie hebt gestopt voordat u uw zender-ID of koppelingscode wijzigt. U kunt uw zender-ID of koppelingscode niet wijzigen tijdens een sensorsessie.

Neem contact op met de klantenservice in uw regio als u nog steeds problemen ondervindt bij het ophalen van de sensorglucosewaarden.

27.5 Probleem Sensor defect oplossen

De pomp kan problemen met uw sensor detecteren wanneer hij uw glucosespiegel niet kan vaststellen. De sensor sessie wordt beëindigd en het scherm *Sensor defect* wordt op uw t:slim X2-pomp weergegeven. Als u dit scherm ziet, betekent dit dat uw CGM-sessie is beëindigd.

- Verwijder uw sensor en plaats een nieuwe sensor.
- Volg de volgende tips voor het oplossen van problemen om de werking van de sensor in de toekomst te verbeteren.
- Controleer of uw sensor niet is verlopen.
- Controleer of uw sensorhouder niet is losgeraakt of loslaat.

- Als u een Dexcom G6-sensor gebruikt, controleer dan of de zender volledig is vastgeklit.
- Zorg dat er niets tegen de sensorhouder wrijft (d.w.z. kleding, autogordels enz.).
- Zorg ervoor dat u een goede inbrenglocatie hebt gekozen.

27.6 Sensoron nauwkeurigheden

Onnauwkeurigheden zijn vaak alleen te wijten aan uw sensor en niet aan uw CGM of pomp. Uw sensorglucosemetingen zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van trends. De zender meet glucose in de vloeistof onder de huid, niet in het bloed, en de sensorglucosemetingen zijn niet identiek aan de metingen van uw bloedglucosemeter.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Om de CGM te kalibreren **MOET** u de door uw bloedglucosemeter aangegeven BG-waarde binnen 5 minuten na een zorgvuldig verrichte BG-meting invoeren. Voer geen sensorglucosewaarden in voor kalibratie. Als u onjuiste BG-waarden invoert, BG-waarden invoert

die meer dan 5 minuten voor het invoeren zijn verkregen, of bloedglucosemetingen van de sensor invoert, kan dit de prestaties van de sensor beïnvloeden en kan dit leiden tot het niet opmerken van ernstige hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG).

Als het verschil tussen uw sensorglucosemeting en BG-waarde groter is dan 20% van de BG bij een sensorwaarde >80 mg/dl of groter dan 20 mg/dl bij een sensorwaarde <80 mg/dl, was dan uw handen en voer een nieuwe BG-meting uit. Als het verschil tussen deze tweede BG-meting en de sensor nog steeds groter is dan 20% bij een sensorwaarde >80 mg/dl of groter dan 20 mg/dl bij een sensorwaarde <80 mg/dl, kalibreer uw sensor dan opnieuw met de tweede BG-waarde. De sensorglucosemeting wordt gedurende de daaropvolgende 15 minuten gecorrigeerd. Als u verschillen buiten dit aanvaardbare bereik waarneemt tussen uw sensorglucosemetingen en uw BG-waarden, volg dan de tips voor het oplossen van problemen voordat u een nieuwe sensor plaatst:

- Controleer of uw sensor niet is verlopen.
- Voer geen kalibratie uit als “- -” of het pictogram Buiten bereik op het scherm wordt weergegeven.
- Gebruik geen andere plaats voor uw BG-meting (handpalm, onderarm enz.) voor kalibratie, omdat op een andere plaats gemeten glucosewaarden kunnen afwijken van een BG-waarde. Gebruik voor kalibratie alleen een BG-waarde die u met een vingerprik hebt verkregen.
- Gebruik alleen BG-waarden tussen 40–400 mg/dl voor kalibratie. Als een of meer waarden buiten dit bereik vallen, kalibreert de ontvanger niet.
- Gebruik voor de kalibratie dezelfde bloedglucosemeter die u normaal gesproken voor uw BG-metingen gebruikt. Stap gedurende een sensor sessie niet over op een andere BG-meter. De nauwkeurigheid van de bloedglucosemeter en de strip kan variëren tussen de verschillende merken bloedglucosemeters.
- Voordat u een BG-waarde voor kalibratie meet: was uw handen, controleer of uw glucoseteststrips goed bewaard zijn en niet verlopen zijn en controleer of uw bloedglucosemeter correct is gecodeerd (indien vereist). Breng het bloedmonster voorzichtig aan op de teststrip en volg hierbij de instructies bij uw bloedglucosemeter of teststrips.
- Zorg dat u uw bloedglucosemeter gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant om nauwkeurige BG-waarden te verkrijgen voor de kalibratie.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

4 Functies van Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 28

Belangrijke
veiligheidsinformatie
in verband met
Control-IQ technologie

Hieronder volgt belangrijke veiligheidsinformatie over uw Control-IQ™-technologie. De informatie in dit hoofdstuk omvat niet alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in verband met de pomp. Besteed aandacht aan de andere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding, omdat ze verband houden met speciale omstandigheden, functies of gebruikers.

28.1 Waarschuwingen in verband met Control-IQ-technologie

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie is niet geëvalueerd bij zwangere vrouwen of personen die dialyse ondergaan. Sensorglucosemetingen kunnen in deze populaties onnauwkeurig zijn, waardoor u ernstige voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) mogelijk niet opmerkt.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie is niet geëvalueerd bij ernstig zieke patiënten. Het is niet bekend hoe verschillende aandoeningen of geneesmiddelen die gangbaar zijn bij ernstig zieken de prestaties van Control-IQ-technologie kunnen beïnvloeden.

Bij ernstig zieke patiënten kunnen sensorglucosemetingen onnauwkeurig zijn en als geheel wordt vertrouwd op sensorglucosewaarschuwingen en -waarden kan dat ertoe leiden dat ernstige voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) niet worden opgemerkt.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt door mensen die minder dan 10 eenheden insuline per dag gebruiken of minder dan 25 kilogram (55 Am. pond) wegen. Dit is de minimale input die nodig is om de Control-IQ-technologie te laten starten en veilig te laten werken.

▲ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie vervangt niet het begrip van uw diabetesbehandeling en het op elk moment gereed zijn om de handmatige controle over uw huidige of toekomstige behandeling over te nemen.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie is niet ontworpen om alle voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) te voorkomen.

▲ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie past de toediening van insuline aan, maar behandelt geen lage BG. Let altijd goed op uw symptomen, houd uw BG onder controle en behandel volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik geen Control-IQ-technologie tenzij dit door uw zorgverlener is aanbevolen.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik de Control-IQ-technologie niet voordat u in het gebruik ervan bent getraind.

▲ WAARSCHUWING

De t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.

▲ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie beperkt de basaalsnelheid tot 3 eenheden/uur wanneer de pomp gedurende 20 minuten geen CGM-meting heeft ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer de pomp en CGM buiten bereik zijn, tijdens de opstartperiode van de sensor, wanneer een sensor sessie eindigt of wanneer er een zender- of sensorfout is. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen tijdens deze scenario's.

▲ WAARSCHUWING

Als een sensorsessie wordt beëindigd, hetzij automatisch of handmatig, is de Control-IQ-technologie niet beschikbaar en zal deze de insuline niet aanpassen. Om de Control-IQ-technologie in te schakelen, moet een sensorsessie worden gestart en sensorwaarden naar de pomp worden verzonden.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** handmatige injecties of geïnhalerde insulines terwijl u de Control-IQ-technologie gebruikt. Door het gebruik van insuline die niet door de pomp wordt toegediend tijdens gebruik van closed loop-therapie, kan de pomp te veel insuline toedienen, wat kan leiden tot ernstige hypoglycemie (lage BG).

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** Control-IQ-technologie als u hydroxyurea gebruikt, een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van ziekten als kanker en sikkelcelanemie. Het gebruik van hydroxyurea zal resulteren in sensorglucosewaarden die hoger zijn dan de werkelijke bloedglucosewaarden. De mate van onnauwkeurigheid in sensorglucosemetingen is gebaseerd op de hoeveelheid hydroxyurea in het lichaam. De Control-IQ-technologie is afhankelijk van sensorglucosemetingen om

insuline aan te passen, automatische correctiebolussen te bieden en waarschuwingen voor hoge en lage glucose te geven. Als de Control-IQ-technologie sensorwaarden ontvangt die hoger zijn dan de werkelijke bloedglucosespiegels kan dit leiden tot gemiste hypoglycemiewaarschuwingen en fouten bij diabetesmanagement, zoals de toediening van overtollige basale insuline en correctiebolussen, waaronder automatische correctiebolussen. Hydroxyurea kan ook leiden tot fouten bij het beoordelen, analyseren en interpreteren van historische patronen voor het beoordelen van bloedglucosecontrole. Gebruik uw BG-meter en overleg met uw zorgverlener over alternatieve benaderingen voor bloedglucosebewaking.

28.2 Voorzorgsmaatregelen in verband met Control-IQ technology

▲ VOORZORGSMATREGEL

U moet doorgaan met het nemen van bolussen om ingenomen voedsel te compenseren of om een hoge sensorglucosewaarde te corrigeren. Lees alle instructies van de Control-IQ-technologie voordat u de Control-IQ-technologie activeert.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Als u uw pomp gedurende 30 minuten of langer verwijdert, wordt aanbevolen de insulinetoediening op te schorten. Als de insuline niet wordt opgeschort, blijft de Control-IQ-technologie werken en insuline doseren terwijl de pomp is verwijderd.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Het wordt aanbevolen om de waarschuwing Buiten bereik van de CGM ingeschakeld te houden zodat u wordt gewaarschuwd als de CGM van de pomp is losgekoppeld wanneer u de pompstatus niet actief monitort. Uw CGM levert de gegevens die Control-IQ-technologie nodig heeft om voorspellingen te doen om de insulinedosering te automatiseren.

▲ VOORZORGSMATREGEL

Wij bevelen aan om de waarschuwing hoge bloedglucosewaarde en lage bloedglucosewaarde in te schakelen als u Control-IQ-technologie gebruikt, zodat u wordt gewaarschuwd als de door de sensor gemeten bloedglucosewaarden buiten uw doelbereik vallen, en u de lage BG kunt behandelen volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

4 Functies van de Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 29

Vertrouwd raken met de Control-IQ-technologie

29.1 Verantwoord gebruik van de Control-IQ-technologie

Systemen zoals de t:slim X2™-insulinepomp met Control-IQ™-technologie zijn geen vervanging voor het actieve beheer van diabetes, inclusief het toedienen van handmatige bolussen voor maaltijden. Er zijn veelvoorkomende scenario's waarin geautomatiseerde systemen een hypoglykemisch voorval niet kunnen voorkomen. De Control-IQ-technologie is voor goed functioneren afhankelijk van de huidige CGM-sensormetingen en zal de sensorglucosewaarden niet kunnen voorspellen en de insulinetoediening kunnen onderbreken als de CGM van een patiënt niet goed functioneert of als de pomp het CGM-signaal niet kan ontvangen. Patiënten moeten instructies krijgen om de componenten van het t:slim X2-insulinepompsysteem (pomp, reservoirs, CGM, infusiesets en app) altijd volgens de toepasselijke gebruiksinstructies te gebruiken en moeten deze instructies regelmatig doorlezen om er zeker van te zijn dat ze functioneren zoals het moet. Patiënten

moeten altijd op hun glucosewaarden van de sensor letten, de BG actief controleren en beheren en dienovereenkomstig behandelen.

29.2 Verklaring van de pictogrammen van Control-IQ-technologie

Als er een CGM-sessie actief is en u Control-IQ-technologie gebruikt, ziet u mogelijk de volgende extra pictogrammen op uw pompscherm:

Definities van de pictogrammen voor Control-IQ-technologie

Symbool	Betekenis
	Control-IQ-technologie is ingeschakeld, maar verhoogt of verlaagt niet actief de toediening van basale insuline.
	Control-IQ-technologie verhoogt de basale insulinetoediening.
	Control-IQ-technologie verlaagt de basale insulinetoediening.
	De Control-IQ-technologie heeft de basale insulinetoediening gestaakt.
	Control-IQ-technologie dient een automatische correctiebolus toe.
	De activiteit Slaap is ingeschakeld.
	Control-IQ-technologie heeft een automatische correctiebolus toegediend.

Symbool	Betekenis
	Basale insuline is geprogrammeerd en wordt toegediend.
	Control-IQ-technologie verhoogt de basale insulinetoediening.
	Control-IQ-technologie verlaagt de basale insulinetoediening.
	De basale insulinetoediening wordt gestopt en een basaalsnelheid van 0 eenheden/uur is actief.
	Control-IQ-technologie dient een automatische correctiebolus toe.
	De activiteit Beweging is ingeschakeld.

29.3 Control-IQ-vergrendelingsschermb

Het *Control-IQ-vergrendelingsschermb* verschijnt altijd als u het scherm aanzet wanneer u uw pomp met een CGM gebruikt en de Control-IQ-technologie is ingeschakeld. Het *Control-IQ-vergrendelings* scherm komt overeen met het *CGM-vergrendelingsschermb*, met de volgende toevoegingen. Zie [Deel 19.3 CGM-vergrendelingsschermb](#).

1. **Status Control-IQ-technologie:**
geeft de status van de Control-IQ-technologie aan.
2. **Kleur in CGM-grafiek:** rood geeft aan dat de Control-IQ-technologie 0 eenheden insuline voor de aangegeven periode levert of leverde.



29.4 Control-IQ-startscherm

Het *startscherm* met Control-IQ-technologie ingeschakeld is hetzelfde als het *CGM-startscherm*, met de volgende toevoegingen. Zie [Deel 19.4 CGM-startscherm](#).

1. **Status Control-IQ-technologie:** geeft de status van de Control-IQ-technologie aan.
2. **Activiteitsstatus Control-IQ:** geeft aan dat een activiteit is ingeschakeld.
3. **Kleur in CGM-grafiek:** rood geeft aan dat de Control-IQ-technologie 0 eenheden insuline voor de aangegeven periode levert of leverde.



29.5 Control-IQ-scherm

1. **Control-IQ-technologie aan/uit:** schakelt de Control-IQ-technologie in of uit.
2. **Gewicht:** geeft uw huidige gewicht weer. Deze waarde wordt handmatig ingevoerd op het numerieke toetsenbord.

OPMERKING

Uw gewicht moet representatief zijn voor wat u weegt wanneer u de Control-IQ-technologie start. Gewicht kan worden bijgewerkt tijdens een bezoek aan uw zorgverlener. De minimumwaarde voor gewicht is 25 kilogram (55 Am. pond). De maximumwaarde voor gewicht is 140 kilogram (308 Am. pond).

3. **Totale dagelijkse insuline:** geeft uw huidige totale dagelijkse insulinewaarde weer in eenheden. Deze waarde wordt handmatig ingevoerd op het numerieke toetsenbord.

OPMERKING

Als u uw totale dagelijkse insuline (TDI) niet weet, neem dan contact op met uw zorgverlener om deze waarde te krijgen. De minimumwaarde voor TDI is 10 eenheden. De maximumwaarde voor TDI is 100 eenheden.



Deze pagina is met opzet leeg gelaten

4 Functies van de Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 30

Inleiding tot de Control-IQ-technologie

30.1 Overzicht van Control-IQ-technologie

Control-IQ™-technologie is een functie van de pomp die automatisch de insulinedosering aanpast als reactie op metingen van een CGM. De pomp kan worden gebruikt met of zonder ingeschakelde Control-IQ-technologie. In de volgende delen wordt beschreven hoe de Control-IQ-technologie werkt en hoe deze reageert op CGM-waarden overdag, wanneer u slaapt en tijdens beweging.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEEL

U moet doorgaan met het nemen van bolussen om ingenomen voedsel te compenseren of om een hoge sensorglucosewaarde te corrigeren. Lees alle instructies van de Control-IQ-technologie voordat u de Control-IQ-technologie activeert.

📌 OPMERKING

De doelbereiken die door Control-IQ-technologie in CGM worden gebruikt, kunnen niet worden aangepast.

📌 OPMERKING

Voordat u een tijdelijke snelheid activeert (zie [Deel 6.9 Een tijdelijke basaalsnelheid starten](#)), moet u de Control-IQ-technologie uitschakelen.

📌 OPMERKING

De resterende tijd actieve insuline (AI), die aangeeft hoelang de totale eenheden insuline uit voedsel en correctiebolussen in het lichaam actief zullen zijn, wordt niet weergegeven wanneer Control-IQ-technologie is ingeschakeld, vanwege de variabiliteit van de insulinetoediening bij automatische respons op CGM-waarden. De AI-eenheden worden altijd weergegeven op het *startscherm* en *vergrendelingsscherm*.

30.2 Hoe Control-IQ-technologie werkt

⚠️ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie vervangt niet het begrip van uw diabetesbehandeling en het op elk moment gereed zijn om de handmatige controle over uw huidige of toekomstige behandeling over te nemen.

⚠️ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie is niet ontworpen om alle voorvallen van hypoglycemie (lage BG) of hyperglycemie (hoge BG) te voorkomen.

⚠️ WAARSCHUWING

Control-IQ-technologie past de toediening van insuline aan, maar behandelt geen lage BG. Let altijd goed op uw symptomen, houd uw BG onder controle en behandel volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

⚠️ WAARSCHUWING

Gebruik geen Control-IQ-technologie tenzij dit door uw zorgverlener is aanbevolen.

⚠️ WAARSCHUWING

Gebruik de Control-IQ-technologie niet voordat u in het gebruik ervan bent getraind.

⚠️ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie maakt gebruik van de actuele CGM-sensorwaarden en kan de BG-waarden niet correct voorspellen of de insulinetoediening aanpassen als de CGM om de een of andere reden niet goed werkt of als de pomp gedurende 21 minuten geen CGM-waarden heeft ontvangen.

⚠️ VOORZORGSMAATREGEEL

Wij bevelen aan om de waarschuwing hoge bloedglucosewaarde en lage bloedglucosewaarde in te schakelen als u Control-IQ-technologie gebruikt, zodat u wordt gewaarschuwd als de door de sensor gemeten bloedglucosewaarden buiten uw doelbereik vallen, en u de lage BG kunt behandelen volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

Control-IQ-technologie reageert op de werkelijke CGM-metingen en voorspelt CGM-waarden 30 minuten in de toekomst. De insulinetoediening wordt automatisch aangepast op basis van

de voorspelde CGM-waarde, uw actieve persoonlijke profiel en of een activiteit in Control-IQ-technologie al dan niet is ingeschakeld.

OPMERKING

Er worden in Control-IQ-technologie niet automatisch activiteitstypen ingeschakeld, en deze moeten worden ingesteld als geplande gebeurtenis of worden ingeschakeld als dit nodig is. Zie [deel 31.5 Slaap inplannen](#), [31.7 Het handmatig starten of stoppen van Slaap](#) en [31.8 Beweging in- of uitschakelen](#) voor meer informatie.

De Control-IQ-technologie past de insulinetoediening op verschillende manieren aan om uw actuele bloedglucosewaarde binnen het doelbereik te houden. De insulinetoediening wordt verlaagd of onderbroken wanneer de voorspelde sensorglucosewaarden onder een vooraf ingestelde behandelwaarde liggen, verhoogd wanneer de voorspelde sensorglucosewaarden boven een vooraf ingestelde behandelwaarde liggen, en indien nodig wordt automatisch eenmaal per uur een correctiebolus toegediend. De automatische correctiebolus is gebaseerd op een voorspelde

sensorglucosewaarde. Er zijn maximale limieten voor insulinetoediening op basis van de instellingen voor uw persoonlijk profiel. Deze verschillende acties voor insulinetoediening worden hieronder beschreven. Elke aanpassing van de insulinetoediening vindt op verschillende manieren plaats, afhankelijk van of u de activiteit Slaap, de activiteit Beweging, of geen van beide gebruikt. Voor meer informatie over hoe aanpassingen aan de insulinetoediening worden gedaan voor verschillende activiteiten: zie [paragraaf Control-IQ-technologie zonder ingeschakelde activiteit](#), [Control-IQ-technologie tijdens Slaap](#) en [Control-IQ-technologie tijdens de activiteit Lichaamsbeweging](#) in dit hoofdstuk.

Toediening volgens basaalsnelheid in het persoonlijk profiel



Als de voorspelde CGM-waarde binnen het behandelbereik (112,5 mg/dl - 160 mg/dl) ligt, zal de pomp insuline toedienen met de snelheid die wordt bepaald door de instellingen in het actieve persoonlijk profiel.

Alle instellingen van het persoonlijk profiel moeten worden ingevuld om de Control-IQ-technologie te gebruiken.

Zie [Hoofdstuk 6 Instellingen insulinetoediening](#) voor meer informatie over persoonlijke profielen.

Verlaagde toediening van insuline

Wanneer de Control-IQ-technologie voorspelt dat uw bloedglucosewaarde 30 minuten in de toekomst op of onder een ingestelde behandelwaarde (112,5 mg/dl) zal uitkomen, zal worden begonnen met het verlagen van de snelheid van de insulinetoediening, om te proberen de werkelijke sensorglucosewaarden binnen het doelbereik te houden. In de volgende diagrammen kunt u zien hoe de pomp voorspellingen van 30 minuten gebruikt om de insulinetoediening geleidelijk te verlagen in vergelijking met de basaalsnelheid in het persoonlijk profiel. In het diagram aan de linkerkant ziet u de voorspelling, terwijl in het diagram aan de rechterkant staat hoe de insuline- en CGM-metingen eruit zouden kunnen zien als de CGM-grafiek op de trend doorgaat.

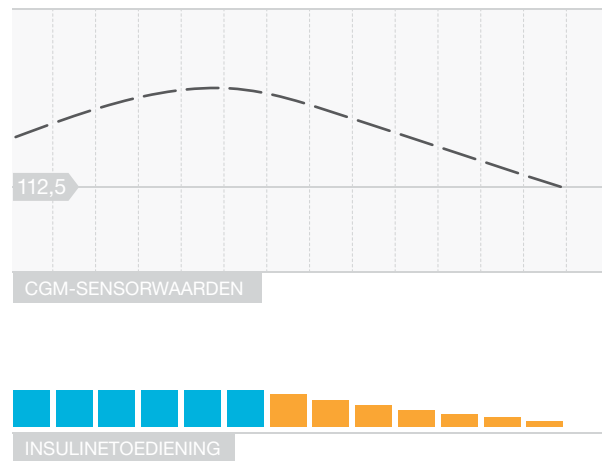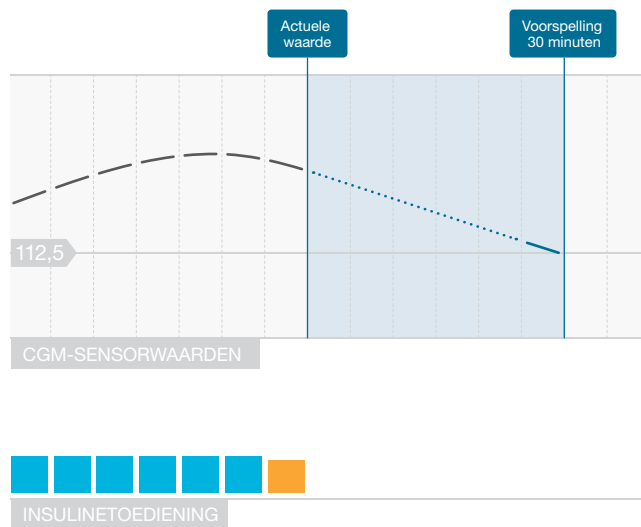

— Interval van 5 minuten CGM-voorspelling ■ Basaalsnelheid persoonlijk profiel ■ Door Control-IQ verlaagde basaalsnelheid

OPMERKING



Diagrammen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld om werkelijke resultaten weer te geven.

Insuline verlaagd of toediening van 0 eenheden per uur

Control-IQ-technologie kan de basaaltoediening verlagen tot een percentage van de basaalsnelheid, maar kan deze ook volledig opschorten. Wanneer de Control-IQ-technologie voorspelt dat uw sensorglucosewaarde 30 minuten in de toekomst onder een vooraf ingestelde behandelwaarde (70 mg/dl) zal liggen, zal de insulinetoediening worden verlaagd en kan indien nodig op een basaalsnelheid van 0 eenheden per uur worden ingesteld, om te proberen de werkelijke sensorglucosewaarden binnen het doelbereik te houden. Handmatige bolussen kunnen nog steeds worden toegediend als de Control-IQ-technologie de insuline verlaagt of opschort. In de volgende diagrammen ziet u een voorbeeld van wanneer Control-IQ-technologie de insulinetoedieningssnelheid op 0 eenheden per uur zou kunnen zetten en wanneer deze met een verlaagde snelheid zal worden hervat nadat de voorspelling van 30 minuten boven de beoogde sensorglucosewaarde ligt.

OPMERKING

Als de Control-IQ-technologie de basaalsnelheid op 0 eenheden per uur instelt, gaat de toediening van bolussen door. Hieronder valt ook het starten van een nieuwe bolus en een eventuele resterende bolus van een verlengde bolustoediening.

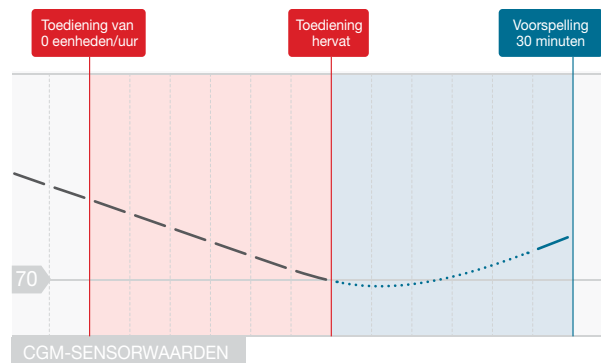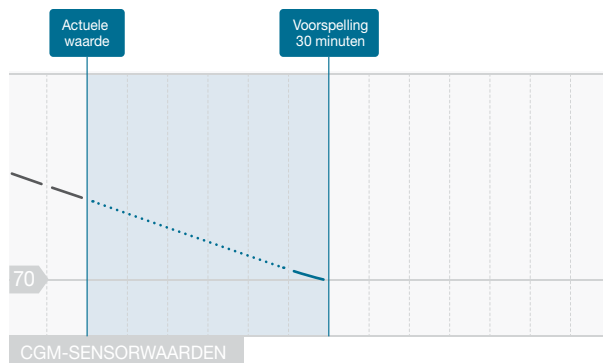

— Interval van 5 minuten CGM-voorspelling ■ Door Control-IQ verlaagde basaalsnelheid

OPMERKING

Diagrammen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld om werkelijke resultaten weer te geven.



Verhogen van insulinetoediening

Wanneer de Control-IQ-technologie voorspelt dat uw sensorglucosewaarde 30 minuten in de toekomst op of boven een ingestelde behandelwaarde (160 mg/dl) zal uitkomen, zal worden begonnen met het verhogen van de snelheid van de insulinetoediening, om te proberen de werkelijke CGM-waarden binnen het CGM-doelbereik te houden. De volgende diagrammen laten zien wanneer Control-IQ-technologie de toediening mogelijk verhoogt en met de maximale verhoogde basaalsnelheid toedient.

Maximale insulinetoediening

Als de Control-IQ-technologie voorspelt dat uw sensorglucosewaarde 30 minuten in de toekomst boven een vooraf ingestelde behandelwaarde (160 mg/dl) zal liggen, maar de maximale insulinetoediening is bereikt, stopt de Control-IQ-technologie met het verhogen van de snelheid van de insulinetoediening. De maximale insulinetoedieningssnelheid is een berekende waarde die afhankelijk is van de instelling van de Correctiefactor van een persoon (te vinden in het actieve

persoonlijke profiel), de totale dagelijkse insuline geschat door Control-IQ-technologie op basis van de werkelijke totale dagelijkse insulinewaarden en de huidige hoeveelheid actieve insuline (AI).

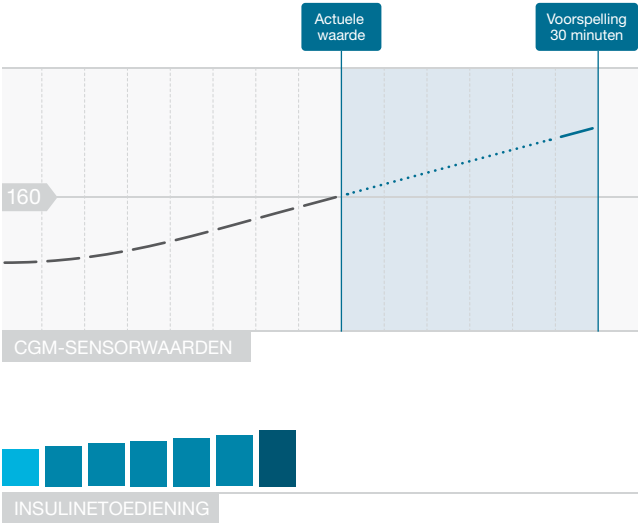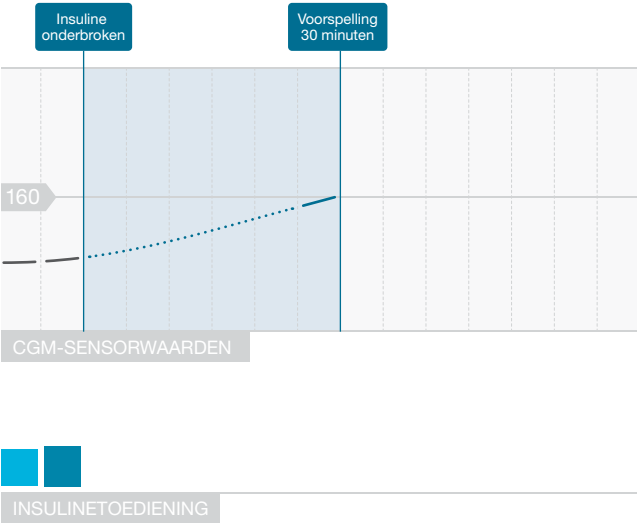

Interval van 5 minuten CGM-voorspelling

■ Basaalsnelheid persoonlijk profiel ■ Door Control-IQ verhoogde basaalsnelheid ■ Door Control-IQ gemaximaliseerde basaalsnelheid

OPMERKING

Diagrammen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld om werkelijke resultaten weer te geven.

Automatische toediening van correctiebolussen

Als de Control-IQ-technologie voorspelt dat uw CGM-waarde 30 minuten in de toekomst op of boven een vooraf ingestelde behandelwaarde (180 mg/dl) zal uitkomen en als de Control-IQ-technologie de insulinetoediening verhoogt of de maximale insulinetoediening uitvoert, zal de pomp automatisch correctiebolussen toedienen om te proberen het doelbereik te bereiken.

De automatische correctiebolus dient een totale correctiebolus toe, berekend op basis van de correctiefactor in het persoonlijke profiel en de voorspelde CGM-meting. De doelsensorglucosewaarde voor de automatische correctiebolus is 110 mg/dl. Automatische toediening van een correctiebolus vindt niet vaker plaats dan eens in de 60 minuten en vindt niet plaats binnen 60 minuten na het starten, annuleren of voltooien van een automatische bolus of een handmatige bolus. Voor een verlengde bolus begint deze 60 minuten pas nadat de tijd **NU TOEDIENEN** is verstreken. Het percentage en de tijd

tussen bolussen zijn ontworpen om stapeling van insuline te vermijden, wat een onveilige verlaging van de sensorglucosewaarden kan veroorzaken.

OPMERKING

Elke automatische toediening van een correctiebolus kan tijdens de toediening handmatig worden geannuleerd of gestopt op dezelfde manier als een handmatige bolus kan worden gestopt. Zie [Deel 8.10 Een bolus annuleren of afbreken met de pomp](#) of [Deel 8.15 Een bolus annuleren of afbreken met de Tandem t:slim-app](#).

OPMERKING


De maximale hoeveelheid insuline die een automatische correctiebolus toedient, is 6 eenheden. Deze waarde kan niet worden verhoogd, maar u kunt ervoor kiezen om een handmatige bolus toe te dienen nadat de toediening van de automatische correctiebolus is voltooid.

VOORZORGSMAAATREGEL

De pomp activeert geen geluid of trillingen om aan te geven wanneer een automatische correctiebolustoediening is gestart. De volgende pompschermen geven aan dat er een

automatische correctiebolus wordt, respectievelijk is, toegediend.



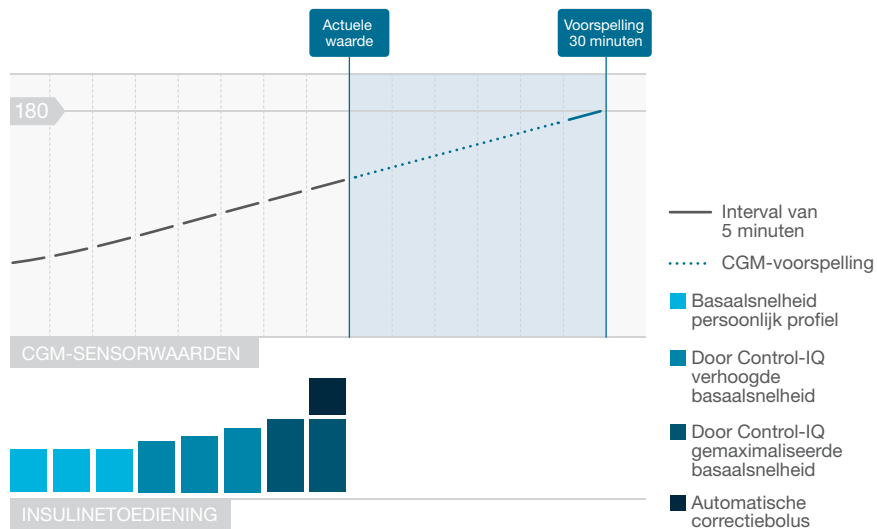

OPMERKING

Diagrammen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet bedoeld om werkelijke resultaten weer te geven.

30.3 Control-IQ-technologie en activiteit

Als de Control-IQ-technologie is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om de activiteit Slaap of Lichaamsbeweging te activeren om de pomp te helpen bij het aanpassen van de geautomatiseerde instellingen voor insulinedosering, zoals beschreven in de vorige delen.

Als u Slaap of Beweging niet hebt geactiveerd, gebruikt de pomp de instellingen die in onderstaand deel worden beschreven.

Control-IQ-technologie zonder ingeschakelde activiteit

Het CGM-bereik dat door de Control-IQ-technologie wordt beoogd zonder dat Activiteit is ingeschakeld, is 112,5–160 mg/dl. Dit bereik is breder dan het slaap- en bewegingsbereik om rekening te houden met de variabiliteit van factoren die de CGM-waarden beïnvloeden terwijl mensen wakker zijn en niet actief bewegen.

Insuline verlagen zonder activiteit ingeschakeld

Insuline wordt verlaagd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van $\leq 112,5$ mg/dl voorspelt.

Insuline opschorten zonder activiteit ingeschakeld

Insuline wordt op 0 eenheden/uur ingesteld wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≤ 70 mg/dl voorspelt.

Insuline verhogen zonder activiteit ingeschakeld

Insuline wordt verhoogd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≥ 160 mg/dl voorspelt.

Automatische correctiebolus zonder activiteit

Als er geen activiteit is ingeschakeld, dient Control-IQ-technologie automatische correctiebolussen toe zoals beschreven in het Deel [Automatische toediening van correctiebolussen](#) van dit hoofdstuk.

Control-IQ-technologie tijdens Slaap

Het bereik van de activiteit Slaap van de Control-IQ-technologie is gericht op geplande slaaptijden en wanneer de activiteit Slaap handmatig wordt gestart (totdat deze wordt gestopt). Zie [Hoofdstuk 31 Configureren en gebruiken van Control-IQ-technologie](#) en [Deel 31.6 Een slaapschema in- of uitschakelen](#) voor instructies over het instellen van de uren die u van plan bent te slapen en [Deel 31.7 Het handmatig starten of stoppen van Slaap](#) voor het handmatig starten van de activiteit Slaap in dat hoofdstuk.

Het CGM-bereik dat de Control-IQ-technologie tijdens de activiteit Slaap beoogt, is 112,5 mg/dl–120 mg/dl. Dit bereik is kleiner dan het doelbereik zonder ingeschakelde activiteit, omdat er minder variabelen zijn die de CGM-waarden beïnvloeden terwijl u slaapt. Tijdens de activiteit Slaap dient de Control-IQ-technologie geen automatische correctiebolussen toe.

Insuline verlagen tijdens de activiteit Slaap

Insuline wordt verlaagd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in

de toekomst een CGM-waarde van $\leq 112,5$ mg/dl voorspelt.

Insuline opschorten tijdens de activiteit Slaap

Insuline wordt op 0 eenheden/uur ingesteld wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≤ 70 mg/dl voorspelt.

Insuline verhogen tijdens de activiteit Slaap

Insuline wordt verhoogd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≥ 120 mg/dl voorspelt.

Automatische correctiebolussen tijdens de activiteit Slaap

Automatische correctiebolussen worden niet toegediend als Slaap is ingeschakeld.

Wanneer Control-IQ-technologie terugschakelt naar de instellingen zonder ingeschakelde activiteit, hetzij volgens ingeplande wektijd of als gevolg van het handmatig stoppen van de slaap, verloopt de overgang van het beoogde CGM-bereik bij slaap naar de beoogde instellingen met een CGM-bereik zonder activiteit

ingeschakeld langzaam en kan 30-60 minuten duren. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke CGM-waarden geleidelijk overgaan.

Control-IQ-technologie tijdens de activiteit Lichaamsbeweging

Tijdens de activiteit Lichaamsbeweging gebruikt de Control-IQ-technologie het CGM-doelbereik van 140 mg/dl–160 mg/dl. Dit doelbereik is kleiner en ligt hoger dan het doelbereik zonder ingeschakelde activiteit om de waarschijnlijke natuurlijke daling van de bloedglucose na actief bewegen op te vangen.

Als de activiteit Lichaamsbeweging is ingeschakeld wanneer een slaapschema moet beginnen, start het slaapschema niet voordat de timer van Lichaamsbeweging stopt of u de activiteit Lichaamsbeweging handmatig beëindigt.

Insuline verlagen tijdens de activiteit Beweging

Insuline wordt verlaagd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≤ 140 mg/dl voorspelt.

Insuline opschorten tijdens de activiteit Beweging

Insuline wordt op 0 eenheden/uur ingesteld wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≤ 80 mg/dl voorspelt.

Insuline verhogen tijdens de activiteit Beweging

Insuline wordt verhoogd wanneer de Control-IQ-technologie 30 minuten in de toekomst een CGM-waarde van ≥ 160 mg/dl voorspelt.

Automatische correctiebolussen tijdens de activiteit Beweging

Als de activiteit Beweging is ingeschakeld, dient Control-IQ-technologie automatische correctiebolussen toe zoals beschreven in het deel [Automatische toediening van correctiebolussen](#) van dit hoofdstuk.

Zie [Hoofdstuk 31 Configureren en gebruiken van Control-IQ-technologie](#) voor instructies over het starten of stoppen van Beweging.

Zie het diagram op de volgende pagina voor een overzicht van alle behandelwaarden en hoe deze verschillen voor elke activiteit.

		 Control-IQ	 Slaapactiviteit	 Lichaams- bewegingsactiviteit
 Levert	Levert een automatische correctiebolus als wordt voorspeld dat de sensorglucose hoger is dan ____ mg/dl	180	--	180
 B Verhoogt	Verhoogt de basale insulinetoediening als wordt voorspeld dat de sensorglucose hoger is dan ____ mg/dl	160	120	160
 B Behoudt	Behoudt de instellingen voor het actieve persoonlijk profiel wanneer de sensorglucose ligt tussen ____ - ____ mg/dl	112,5 - 160	112,5 - 120	140 - 160
 B Verlaagt	Verlaagt de basale insulinetoediening als wordt voorspeld dat de sensorglucose lager is dan ____ mg/dl	112,5	112,5	140
 0 Stopt	Stopt de basale insulinetoediening als wordt voorspeld dat de sensorglucose lager is dan ____ mg/dl	70	70	80

*Basaalsnelheid beperkt tot 3 eenheden/uur.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

4 Functies van de Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 31

Configureren en gebruiken van Control-IQ-technologie

31.1 Vereiste instellingen

Vereiste instellingen voor persoonlijk profiel

Om de Control-IQ™-technologie te gebruiken, moeten de volgende instellingen van het persoonlijk profiel worden geconfigureerd. Zie [Hoofdstuk 6 Instellingen insulinetoediening](#) voor instructies over het instellen van deze waarden.

- Basaalsnelheid
- Correctiefactor
- Koolhydratenratio
- Doel-BG
- Koolhydraten ingeschakeld in Bolusinstellingen

Vereiste pompinstellingen voor Control-IQ-technologie

Naast de vereiste instellingen van het persoonlijk profiel zijn er twee specifieke waarden voor Control-IQ-technologie die moeten worden ingesteld. Dit zijn:

- Gewicht
- totale dagelijkse insuline

Aanbevolen pompinstellingen voor Control-IQ-technologie

Hoewel Slaap handmatig kan worden gestart en gestopt, is het raadzaam om slaap in te plannen. In dit hoofdstuk worden beide uitgelegd. De volgende instellingen zijn vereist om slaap in te plannen:

- geselecteerde dagen
- starttijd
- eindtijd

31.2 Gewicht instellen

Control-IQ-technologie kan alleen worden ingeschakeld als Gewicht is ingevoerd. De waarde voor gewicht kan worden bijgewerkt tijdens een bezoek aan uw zorgverlener.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Control-IQ**.
 - ✓ Het *Control-IQ*-scherm wordt weergegeven.



4. Tik op **Gewicht**.
5. Tik op **Am. pond** of **Kilogram** om de gewichtseenheid in te stellen.
6. Tik op .
7. Voer de waarde voor gewicht in op het numerieke toetsenbord. Het gewicht kan worden ingesteld van minimaal 25 kilogram (55 Am. pond) tot maximaal 140 kilogram (308 Am. pond).
8. Tik op .
9. Als u klaar bent met de Control-IQ-instellingen, tikt u op .
 - ✓ Het scherm *INSTELLING OPGESLAGEN* wordt tijdelijk weergegeven.

31.3 Het instellen van totale dagelijkse insuline

Control-IQ-technologie kan alleen worden ingeschakeld als Totale dagelijks insuline is ingevoerd. De totale dagelijks insuline-waarde wordt door Control-IQ-technologie gebruikt om de maximale insulinetoedieningssnelheid te berekenen en om een veilige en effectieve verhoging van de insulinedosis te handhaven.

De waarde voor totale dagelijks insuline kan worden bijgewerkt tijdens een bezoek aan uw zorgverlener.

OPMERKING

Als u eenmaal de Control-IQ-technologie hebt gebruikt, zal deze de werkelijk toegediende totale insuline behouden en gebruiken, inclusief de aanpassingen die zijn aangebracht aan de basale en alle andere bolussen tijdens het gebruik van de pomp. Het is belangrijk om de instelling voor totale dagelijkse insuline in het *Control-IQ*-scherm bij te werken wanneer u uw zorgverlener bezoekt. Deze waarde wordt gebruikt voor de waarschuwing maximale insuline na 2 uur.

Er moet een schatting van de totale dagelijkse insuline worden ingevoerd.

Alle soorten insuline (basaal en bolus) inbegrepen die binnen een periode van 24 uur worden toegediend. Raadpleeg uw zorgverlener als u hulp nodig heeft bij het inschatten van uw insulinebehoefte.

Het invoeren van uw totale dagelijkse insulinewaarde

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Control-IQ**.
4. Tik op **Totale dagelijkse insuline**.
5. Gebruik het numerieke toetsenbord om het totale aantal eenheden insuline in te voeren die normaal gesproken binnen een periode van 24 uur nodig zijn. De totale dagelijkse insuline kan worden ingesteld van minimaal 10 eenheden tot maximaal 100 eenheden.
6. Tik op .
7. Als u klaar bent met de Control-IQ-instellingen, tikt u op .

✓ Het scherm *INSTELLING OPGESLAGEN* wordt tijdelijk weergegeven.

8. Als u klaar bent met het instellen van Control-IQ, tikt u op het **Tandem-logo** om terug te keren naar het *CGM-startscherm*.

31.4 Het in- en uitschakelen van Control-IQ-technologie

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Mijn pomp**.
3. Tik op **Control-IQ**.
4. Tik op de wisselknop naast **Control-IQ** om Control-IQ in te schakelen.

OPMERKING

Als een actieve tijdelijke snelheid of verlengde bolus actief is wanneer u de Control-IQ-technologie inschakelt, krijgt u een melding dat als u doorgaat, de tijdelijke snelheid of verlengde bolus wordt gestopt.

5. Tik op de wisselknop naast **Control-IQ** om Control-IQ uit te schakelen.
 - Tik op  om te bevestigen en Control-IQ uit te schakelen.
 - Tik op  om Control-IQ aan te laten.

31.5 Slaap inplannen

De Control-IQ-technologie werkt tijdens Slaap anders dan wanneer geen activiteit is ingeschakeld. Slaap kan worden ingepland om automatisch aan en uit te gaan, of het kan handmatig worden in- en uitgeschakeld. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Slaap kunt instellen om automatisch in en uit te schakelen. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Control-IQ-technologie: zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

U kunt twee verschillende slaapschema's configureren om met veranderingen in levensstijl rekening te houden, zoals een slaapschema voor weekdays en een slaapschema in het weekend.

OPMERKING


Als u Slaap handmatig start voordat een slaapschema begint, heeft dit geen invloed op de geplande wektijd. Als uw slaapschema bijvoorbeeld is ingesteld van 22:00 tot 6:00 uur (10 PM tot 6 AM) en u Slaap handmatig start om 21:00 uur (9 PM), eindigt Slaap om 06:00 uur (6 AM) zoals gepland; tenzij handmatig gestopt.

OPMERKING

Beweging en Slaap kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld. Als Lichaamsbeweging is ingeschakeld wanneer een slaapschema moet beginnen, start het slaapschema niet voordat de timer van Lichaamsbeweging stopt of u de activiteit Lichaamsbeweging handmatig beëindigt.

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Slaap**.
4. Tik op **Slaapschema's**.
5. Selecteer welk slaapschema u wilt configureren.
 - Als er geen slaapschema's zijn geconfigureerd, tikt u op **Slaapschema 1**.

- Als u een bestaand schema wilt bewerken, tikt u op het schemaoverzicht dat rechts van het slaapschema dat u wilt bewerken wordt weergegeven.

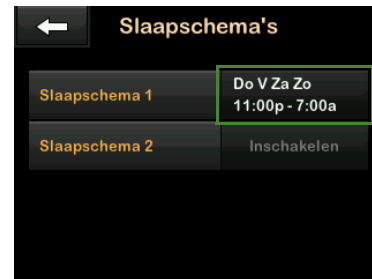

6. Tik vanaf het scherm Slaapschema op **Geselecteerde dagen**. De standaardwaarde is de huidige dag van de week, afhankelijk van de dag van de week die op de pomp is ingesteld.
7. Tik vanaf het scherm Dagen selecteren op het **vinkje** rechts van elke dag van de week die u in het slaapschema wilt opnemen.

Als een vinkje groen is, is de overeenkomstige dag van de week actief. Tik nogmaals op het

bijbehorende vinkje om een dag uit te schakelen, zodat deze grijs wordt.

Tik op **pijl-omlaag** om meer dagen van de week te zien.



8. Tik op als u klaar bent met het selecteren van de dagen.

OPMERKING

Als er geen dagen zijn geselecteerd wanneer u op tikt, wordt het schema uitgeschakeld en worden de resterende instellingen voor het slaapschema niet weergegeven. De overige instructies zijn niet van toepassing op een onvolledig schema.

9. Tik op **Starttijd**.
10. Tik op **Tijd**. Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven.

11. Voer de tijd in waarop u wilt dat het slaapschema begint door de cijfers in te voeren voor de uren en vervolgens de minuten. Tik bijvoorbeeld op 9 3 0 om de tijd in te stellen op 9:30 uur of 2 1 0 0 om de tijd in te stellen op 21:00 uur.

12. Tik op . U keert terug naar het scherm *Starttijd*.

13. Tik zo nodig op **AM** of **PM** om het tijdstip in te stellen.

14. Tik op . U keert terug naar het scherm *Slaapschema 1*.

15. Tik op **Eindtijd**.

16. Tik op **Tijd**. Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven.

17. Voer de tijd in waarop u wilt dat het slaapschema eindigt en tik op . U keert terug naar het scherm *Eindtijd*.

18. Tik zo nodig op **AM** of **PM** om het tijdstip in te stellen.

19. Tik op . Het scherm *Slaapschema 1* wordt weergegeven.

20. Tik op om het schema op te slaan.

- ✓ Het scherm *INSTELLING OPGESLAGEN* wordt tijdelijk weergegeven, gevolgd door het scherm *Slaapschema's*.

21. Als u klaar bent met het configureren van Slaap, drukt u op om terug te keren naar het scherm *Activiteit* of tikt u op het **Tandem-logo** om terug te keren naar het *startscherm*.

31.6 Een slaapschema in- of uitschakelen

Zodra een slaapschema is geconfigureerd, wordt het standaard ingeschakeld wanneer het wordt opgeslagen. Als u meerdere slaapschema's hebt geconfigureerd, kunt u het geactiveerde slaapschema wijzigen of slaapschema's volledig uitschakelen.

Een slaapschema inschakelen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.

3. Tik op **Slaap**.
4. Tik op **Slaapschema's**.
5. Tik op het schemaoverzicht naast de naam van het slaapschema dat u wilt inschakelen. (Als er geen slaapschema's zijn geconfigureerd: zie [Deel 31.5 Slaap inplannen](#).)
6. Tik op .

Een slaapschema uitschakelen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Slaap**.
4. Tik op **Slaapschema's**.

Tik op het schemaoverzicht naast het slaapschema dat u wilt uitschakelen.



5. Tik op de wisselknop naast de naam van het schema.
6. Tik op .

31.7 Het handmatig starten of stoppen van Slaap


Naast het inplannen van Slaap, kan Slaap handmatig worden gestart en/of gestopt.

Slaaptijd bepaalt wanneer Control-IQ-technologie, indien ingeschakeld, overschakelt naar de slaapactiviteit. Control-IQ-technologie

moet zijn ingeschakeld en er moet een CGM-sessie actief zijn om Slaap te starten.

Het handmatig starten van Slaap

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Slaap**.
4. Tik op **START**.

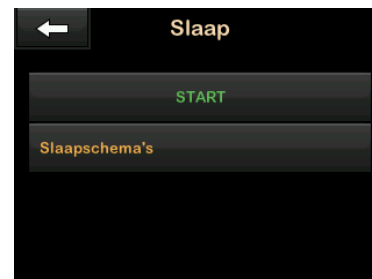

- ✓ Een scherm *SLAAP GESTART* wordt tijdelijk weergegeven. Het slaappictogram wordt weergegeven op het *startscherm*.

Slaap wordt automatisch uitgeschakeld als Beweging is ingeschakeld.

Het handmatig stoppen van Slaap

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op .



- ✓ Een bericht *SLAAP GESTOPT* wordt tijdelijk weergegeven. Het slaappictogram verdwijnt van het *startscherm*.


31.8 Beweging in- of uitschakelen

U kunt kiezen uit twee soorten Beweging. Beweging kan handmatig worden in- en uitgeschakeld of worden ingesteld op een aangepaste duur.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Control-IQ-technologie: zie [Hoofdstuk 30 Inleiding tot de Control-IQ-technologie](#).

Beweging met een timer inschakelen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Beweging**.
4. Tik op **Een timer instellen**.
5. De standaardduur is 30 minuten. Tik **START** om de bewegingsactiviteit gedurende 30 minuten te starten. Als u de duur wilt bewerken, gaat u verder met stap 6.

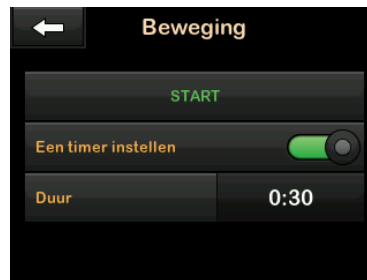

6. Tik op **Duur**. Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven. U kunt bewegingsduur invoeren tussen 30 minuten en 8 uur. De pomp slaat deze nieuwe tijdsduur op voor de volgende keer dat u Beweging inschakelt.

7. Tik op .
 8. Tik op **START**.
- ✓ Een bericht *BEWEGING GESTART* wordt tijdelijk weergegeven. Het bewegingspictogram wordt weergegeven op het *startscherm*.

Beweging wordt automatisch uitgeschakeld zodra de ingestelde duur eindigt, of als Slaap handmatig wordt ingeschakeld. Indien ingeschakeld, start het slaapschema pas nadat de bewegingstimer is afgelopen.

Handmatig Beweging uitschakelen voordat de timer eindigt

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.

3. Tik op .




- ✓ Een bericht *BEWEGING GESTOPT* wordt tijdelijk weergegeven. Het bewegingspictogram verdwijnt van het *startscherm*.

Beweging zonder een ingestelde timer inschakelen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.
3. Tik op **Beweging**.

4. Tik op **START**.

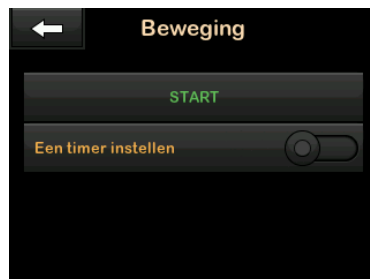

- ✓ Een bericht *BEWEGING GESTART* wordt tijdelijk weergegeven. Het bewegingspictogram verdwijnt van het *startscherm*.

Beweging is nu ingeschakeld en blijft ingeschakeld totdat het handmatig wordt uitgeschakeld of als Slaap handmatig wordt ingeschakeld. Indien ingeschakeld, start het slaapschema pas nadat de bewegingstimer handmatig wordt uitgeschakeld.

Voortdurende beweging zonder een ingestelde timer inschakelen

1. Tik op het *startscherm* op **OPTIES**.
2. Tik op **Activiteit**.

3. Tik op .



- ✓ Een bericht *BEWEGING GESTOPT* wordt tijdelijk weergegeven. Het bewegingspictogram verdwijnt van het *startscherm*.

31.9 Control-IQ-technologie-informatie op uw scherm

Statuspictogram Control-IQ-technologie

Als de Control-IQ-technologie is ingeschakeld, ziet u linksboven in de CGM-trendgrafiek een ruitpictogram. Dit pictogram gebruikt verschillende kleuren om informatie over de werking van Control-IQ-technologie door te geven. In [Deel 29.2 Verklaring van de](#)

[pictogrammen van Control-IQ-technologie](#) vindt u de verschillende kleuren en hun betekenis.

Als de Control-IQ-technologie ingeschakeld maar niet actief is (m.a.w. de insuline wordt normaal toegediend), is het ruitpictogram grijs zoals hieronder afgebeeld. Ongeacht de kleur verschijnt het pictogram altijd op dezelfde plaats.



De pictogrammen Beweging en Slaap

Als Beweging of Slaap zijn ingeschakeld, wordt het respectieve pictogram op dezelfde plaats op het scherm weergegeven omdat ze nooit tegelijkertijd actief kunnen zijn. De volgende afbeelding toont dat het

slaappictogram actief is op het CGM-trendgrafiekscherm.



Als Beweging is ingeschakeld, wordt het bewegingspictogram op dezelfde locatie weergegeven.

Het pictogram Basaalstatus

Er zijn verschillende basaalstatuspictogrammen die in verschillende kleuren worden weergegeven. Deze geven aan hoe de Control-IQ-technologie werkt. In [Deel 29.2 Verklaring van de pictogrammen van Control-IQ-technologie](#) vindt u de verschillende kleuren en hun betekenis.

De volgende afbeelding laat zien waar de basaalstatuspictogrammen worden weergegeven.



Het pictogram Automatische correctiebolusstatus

Als de Control-IQ-technologie is ingeschakeld en een automatische correctiebolus toedient, wordt links van het basale statuspictogram een pictogram weergegeven. (Het pictogram voor de handmatige bolus wordt op dezelfde plaats op het scherm weergegeven; zie [Deel 3.3 Verklaring van de pictogrammen op de t:slim X2-insulinepomp](#) voor een afbeelding van het pictogram voor handmatige bolus.) De volgende afbeelding toont de locatie van het boluspictogram.

OPMERKING

De tekst **BOLUS** gevolgd door 3 punten wordt onder de CGM-grafiek weergegeven. De **Control-IQ**-tekst die onder **BOLUS** verschijnt, geeft aan dat er een automatische correctiebolus wordt toegediend door Control-IQ-technologie. De hoeveelheid van de bolus wordt ook weergegeven.



CGM-trendgrafiek Insulinetoediening opgeschort

Delen van de CGM-trendgrafiek die een rode band op de achtergrond weergeven, geven de tijden aan waarop Control-IQ-technologie 0 eenheden/uur leverde.

4 Functies van de Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 32

Waarschuwingen Control-IQ-technologie

De informatie in dit deel helpt verduidelijken hoe u moet reageren op waarschuwingen en foutmeldingen van Control-IQ™-technologie. Het is alleen van toepassing op de Control-IQ-technologie in uw pomp. De waarschuwingen voor Control-IQ-technologie volgen hetzelfde patroon als de andere pompwaarschuwingen volgens uw instellingen voor geluidsvolume.

De Tandem t:slim™-app kan ook berichten, waarschuwingen en alarmen van uw t:slim X2™-pomp weergeven als pushmeldingen op uw smartphone. Deze pushmeldingen zijn identiek aan het scherm van uw pomp, tenzij anders aangegeven in dit hoofdstuk.

VOORZORGSMAATREGEEL

Schakel meldingen **ALTIJD** in om waarschuwingen, alarmen en meldingen van uw pomp op uw smartphone te ontvangen. Meldingen moeten op uw smartphone zijn ingeschakeld en de Tandem t:slim-app moet op de achtergrond geopend zijn om meldingen van de pomp op uw smartphone te kunnen ontvangen. Voor meer informatie over het aansluiten van uw pomp en smartphone, zie [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) of tik op **Help** op het scherm

*Instellingen van de Tandem t:slim-app en tik vervolgens op **App-handleiding**.*

Zie [hoofdstuk13 Waarschuwingen van de t:slim X2-insulinepomp](#), [14 Alarmen van de t:slim X2-insulinepomp](#) en [15 Storing van de t:slim X2-insulinepomp](#) voor informatie over herinneringen, waarschuwingen en alarmen voor insulinetoeediening.

Voor informatie over CGM-waarschuwingen en -fouten: zie [Hoofdstuk 26 CGM-waarschuwingen en -fouten](#).

32.1 Waarschuwing Buiten bereik – Control-IQ-technologie uitgeschakeld

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?		
Wat betekent het?	De CGM en de pomp communiceren niet. De pomp ontvangt geen sensorglucosewaarden en de Control-IQ-technologie is niet in staat om sensorglucosespiegels te voorspellen of de insulinetoediening aan te passen.	
Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat de CGM en de pomp weer binnen het bereik zijn.	
Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, indien de CGM en de pomp buiten bereik blijven.	
Hoe moet ik reageren?	Tik op OK om te bevestigen en zet de CGM en de pomp dicht bij elkaar of verwijder het obstakel ertussen.	

▲ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie kan de insulinetoediening alleen aanpassen als de CGM binnen bereik is. Als u tijdens het aanpassen van de insuline buiten het bereik komt, zal uw basale insulinetoediening terugkeren naar de instellingen voor basaalsnelheid in uw actieve persoonlijke profiel, beperkt tot 3 eenheden/uur. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen terwijl de sensor niet met de pomp communiceert.

32.2 Waarschuwing Buiten bereik – Control-IQ-technologie ingeschakeld

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm?	Wat betekent het?	Control-IQ-technologie is ingeschakeld, maar de CGM en de pomp communiceren niet. De pomp ontvangt geen glucosemetingen van uw sensor. De Control-IQ-technologie zal de basale doseringen blijven aanpassen en gedurende de eerste 20 minuten dat de zender en de pomp buiten bereik zijn automatische correctiebolussen toedienen. De Control-IQ-technologie hervat de automatische insulinedosering zodra de CGM en de pomp weer binnen het bereik zijn.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 1 keer en trilt/piept vervolgens om de 5 minuten totdat de CGM en de pomp weer binnen het bereik zijn.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, indien de CGM en de pomp buiten bereik blijven.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op OK om te bevestigen en zet de CGM en de pomp dicht bij elkaar of verwijder het obstakel ertussen.


⚠ WAARSCHUWING

De Control-IQ-technologie kan de insulinetoeiening alleen aanpassen als de CGM binnen bereik is. Als u tijdens het aanpassen van de insuline buiten het bereik komt, zal uw basale insulinetoeiening terugkeren naar de instellingen voor basaalsnelheid in uw actieve persoonlijke profiel, beperkt tot 3 eenheden/uur. Schakel de Control-IQ-technologie uit om meer dan 3 eenheden/uur te ontvangen terwijl de sensor niet met de pomp communiceert.


📌 OPMERKING

Het wordt aanbevolen om de waarschuwing Buiten bereik ingeschakeld te houden en in te stellen op 20 minuten. Als uw pomp en CGM gedurende 20 minuten niet zijn verbonden, werkt de Control-IQ-technologie niet. De Control-IQ-technologie begint meteen te werken zodra de CGM en de pomp weer binnen bereik zijn.

32.3 Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie

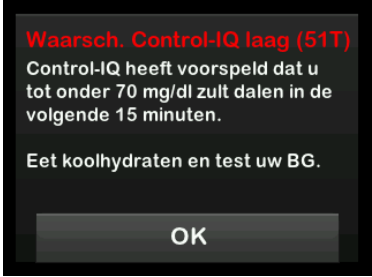Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	Control-IQ-waarschuwing Laag heeft voorspeld dat de sensorglucosewaarde de komende 15 minuten onder 70 mg/dl zal dalen of onder 80 mg/dl als Lichaamsbeweging is ingeschakeld.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Eet koolhydraten en test uw BG. Tik op  om het waarschuwingsscherf te sluiten.

32.4 Waarschuwing hoog door Control-IQ

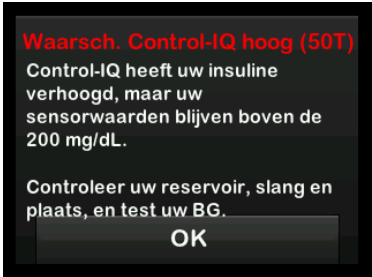Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het?	De Control-IQ-technologie heeft drie uur aan CGM-data en heeft de insulinetoediening verhoogd, maar detecteert een sensorglucosewaarde hoger dan 200 mg/dl en voorspelt niet dat de sensorglucosewaarde de komende 30 minuten zal dalen.
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat het wordt bevestigd en vervolgens elke 2 uur als het probleem aanhoudt.
	Hoe moet ik reageren?	Controleer uw reservoir, slangetjes en plaats en test uw BG. Behandel de sensorglucosewaarde indien nodig. Tik op  om het waarschuwingsscherf te sluiten.

32.5 Waarschuwing bij maximale insuline

Scherf	Uitleg	
Wat zie ik op het scherm? 	Wat betekent het? De pomp heeft de maximaal toegestane hoeveelheid insuline binnen 2 uur toegediend op basis van uw instellingen voor totale dagelijks insuline. U ziet deze waarschuwing wanneer Control-IQ-technologie 50% van uw totale dagelijkse insuline in de afgelopen 2 uur heeft afgegeven (via basale en/of bolustoediening) en deze situatie gedurende 20 minuten achter elkaar detecteert. Control-IQ-technologie onderbreekt de insulinetoeiening gedurende minimaal 5 minuten en hervat vervolgens de insulinetoeiening zodra deze situatie niet langer wordt gedetecteerd.	
	Hoe waarschuwt de pomp mij?	Hij trilt 2 keer, trilt/piept vervolgens 2 keer om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Waarschuwt de pomp mij opnieuw?	Ja, om de 5 minuten totdat wordt bevestigd.
	Hoe moet ik reageren?	Tik op .

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

4 Functies van de Control-IQ-technologie

HOOFDSTUK 33

Overzicht van klinische studies met Control-IQ-technologie

33.1 Inleiding

De volgende gegevens vertegenwoordigen de klinische prestaties van de t:slim X2™-insulinepomp met Control-IQ™-technologie in twee onderzoeken. Het eerste kernonderzoek (de DCLP3) omvatte deelnemers ≥ 14 jaar oud. Een tweede kernonderzoek (de DCLP5) omvatte deelnemers van ≥ 6 jaar tot 13 jaar oud. In beide onderzoeken werd de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie vergeleken met alleen Sensor Augmented Pump-therapie (SAP-therapie) (de controlegroep). Alle deelnemers aan beide onderzoeken gebruikten de Dexcom G6 CGM.

33.2 Overzicht klinisch onderzoek

Het doel van zowel de DCLP3 als de DCLP5 was om de veiligheid en werkzaamheid van Control-IQ-technologie te beoordelen bij gebruik tijdens 24 uur per dag gedurende 4 tot 6 maanden onder normale omstandigheden. De systeemprestaties

werden geëvalueerd in deze twee gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken waarin het gebruik van Control-IQ-technologie werd vergeleken met het gebruik van SAP gedurende dezelfde periode. De twee onderzoeksprotocollen leken erg op elkaar. In de DCLP3 werden deelnemers ($n=168$) willekeurig toegewezen om Control-IQ of SAP voor het onderzoek te gebruiken in een verhouding van 2:1. De Control-IQ-groep bestond uit 112 deelnemers en de SAP-groep uit 56 deelnemers. Alle 168 deelnemers hebben de proef voltooid. De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten met de klinische diagnose type 1 diabetes in de leeftijd van 14 tot 71 jaar die al ten minste een jaar lang waren behandeld met insuline via een insulinepomp of injecties. Er namen geen vrouwen deel waarvan bekend was dat zij zwanger waren. In de samenvattende statistieken voor de DCLP3 wordt de primaire uitkomstmaat van de sensorglucosetijd in een bereik tussen 70 en 180 mg/dl gerapporteerd per behandelingsgroep beschreven. Er werd ook een analyse van de secundaire eindpunten en aanvullende statistieken uitgevoerd.

In de DCLP5 werden deelnemers ($n=101$) willekeurig toegewezen aan Control-IQ of SAP in een verhouding van 3:1. In dit onderzoek bestond de Control-IQ-groep uit 78 deelnemers en de SAP-groep uit 23 deelnemers. De onderzoekspopulatie was vergelijkbaar met de DCLP3 doordat deelnemers een klinische diagnose hadden van diabetes type 1, maar ze waren jonger; 6 tot 13 jaar. Ze werden al minimaal een jaar behandeld met insuline via een insulinepomp of injecties. Ze wogen ≥ 25 kg en ≤ 140 kg en namen ten minste 10 eenheden insuline/dag. Er namen geen vrouwen deel waarvan bekend was dat zij zwanger waren. Deelnemers moesten bij ten minste één ouder of voogd wonen die kennis had op het gebied van diabetes, kon reageren op diabetesgerelateerde noodsituaties en bereid was deel te nemen aan alle trainingen.

Tijdens beide klinische onderzoeken kregen proefpersonen de gelegenheid om aan een trainingsperiode mee te doen om vertrouwd te raken met de t:slim X2-insulinepomp en CGM voordat ze in het onderzoek werden gerandomiseerd. Drieëntachtig (83)

deelnemers aan de DCLP3 en 68 deelnemers aan de DCLP5 maakten geen gebruik van de training, terwijl 85 deelnemers aan de DCLP3 en 33 deelnemers aan de DCLP5 de training voltooiden. Degenen die de training voltooiden, waren met name pas gestart met het gebruik van de pomp- of CGM-therapie, of beide.

Er was in de DCLP3-Control-IQ-groep één episode van diabetische ketoacidose (DKA), veroorzaakt door falen van de infusieplaats. Er waren geen gebeurtenissen van DKA in de DCLP5. Er deden zich in beide onderzoeksgroepen geen ernstige voorvallen van hypoglykemie voor. Er werden geen andere bijwerkingen met betrekking tot het apparaat gemeld.

33.3 Demografie

De kenmerken op de basislijn, waaronder de demografie van de onderzoeksdeelnemers, staan in onderstaande tabel vermeld.

DCLP3: basislijkenkenmerken inclusief demografie bij inschrijving (n=168)

	Gemiddelde leeftijd (jaar)	Geslacht	Gemiddeld HbA _{1c} (bereik)	MDI-gebruikers	CGM-gebruikers	Mediane duur van diabetes (jaar)
Control-IQ	33 (14–71)	48% Vrouw 52% Man	7,4% (5,4%–10,6%)	20%	70%	17 (1–62)
SAP	33 (14–63)	54% Vrouw 46% Man	7,4% (6,0%–9,0%)	23%	71%	15 (1–53)

DCLP5: basislijkenkenmerken inclusief demografische gegevens bij inschrijving (n=101)

	Gemiddelde leeftijd (jaar)	Geslacht	Gemiddeld HbA _{1c} (bereik)	MDI-gebruikers	CGM-gebruikers	Mediane duur van diabetes (jaar)
Control-IQ	11 (6–13)	49% Vrouw 51% Man	7,6% (5,7%–10,0%)	21%	92%	5 (1–12)
SAP	10 (6–13)	52% Vrouw 48% Man	7,9% (6,0%–10,1%)	17%	91%	6 (1–12)

Er namen geen deelnemers met de volgende aandoeningen deel aan het DCLP5-onderzoek:
psychiatrische opname in de afgelopen 6 maanden, aanwezigheid van een bekende bijnieraandoening, onbehandelde schildklieraandoening, cystische fibrose, ernstig infectieus proces dat naar verwachting niet zal verdwijnen vóór de onderzoeksprocedures (bijv. meningitis, longontsteking, osteomyelitis), elke huidaandoening op de inbrenglocatie die een veilige plaatsing van de sensor of pomp verhindert (bijv. ernstige zonnebrand, reeds bestaande dermatitis, intertrigo, psoriasis, uitgebreide littekens, cellulitis), gebruik van iedere medicatie, elke carcinogene ziekte, of andere significante medische aandoening als dat letsel, medicatie of ziekte naar het oordeel van de onderzoeker de voltooiing van het protocol zal beïnvloeden, abnormale leverfunctietesten (transaminase > 3 maal de bovengrens van normaal), abnormale nierfunctietestresultaten (geschat GFR <60 ml/min/1,73 m²)
De veiligheid en/of effectiviteit van Control-IQ bij pediatrische gebruikers met de bovenstaande aandoeningen is onbekend.

33.4 Interventienaleving

De volgende tabellen geven een overzicht van hoe vaak de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie, Dexcom G6 CGM- en BG-meters tijdens de onderzoeken werden gebruikt, respectievelijk. De analyse voor het gebruik van de Control-IQ-technologie is specifiek voor de Control-IQ-groep, terwijl de analyse voor het gebruik van CGM- en BG-meters zowel de Control-IQ-groep als de SAP-groep vertegenwoordigt.

DCLP3: percentage van t:slim X2-insulinepomp met gebruik van Control-IQ-technologie gedurende een periode van 6 maanden (n=112)

	Gemiddeld pompgebruik*	Gemiddelde tijd Control-IQ beschikbaar**
Week 1–4	100%	91%
Week 5–8	99%	91%
Week 9–12	100%	91%
Week 12–16	99%	91%
Week 17–20	99%	91%
Week 21 tot einde	99%	82%
Totaal	99%	89%

**Het gemeenschappelijke kenmerk is de totaal mogelijke tijd binnen de onderzoeksperiode van 6 maanden.*
***Control-IQ beschikbaar wordt berekend als het percentage van de tijd dat de Control-IQ-technologie beschikbaar was en normaal functioneerde tijdens de onderzoeksperiode van 6 maanden.*

DCLP5: percentage van t:slim X2-insulinepomp met gebruik van Control-IQ-technologie gedurende een periode van 4 maanden (n=78)

	Gemiddelde tijd Control-IQ beschikbaar*
Week 1–4	93,4%
Week 5–8	93,8%
Week 9–12	94,1%
Week 13 tot einde	94,4%
Totaal	92,8%
*Control-IQ beschikbaar wordt berekend als het percentage van de tijd dat de Control-IQ-technologie beschikbaar was en normaal functioneerde tijdens de onderzoeksperiode van 4 maanden.	

DCLP3: percentage van CGM-gebruik gedurende de periode van 6 maanden (n=168)

	Control-IQ*	SAP*
Week 1–4	96%	94%
Week 5–8	96%	93%
Week 9–12	96%	91%
Week 12–16	96%	90%
Week 17–20	97%	91%
Week 21 tot einde	95%	90%
Totaal	96%	91%
*Het gemeenschappelijke kenmerk is de totaal mogelijke tijd binnen de onderzoeksperiode van 6 maanden. CGM-gebruik bevat opwarmtijd.		

DCLP5: percentage van CGM-gebruik gedurende de periode van 4 maanden (n=101)

	Control-IQ*	SAP*
Week 1–4	98%	95%
Week 5–8	98%	96%
Week 9–12	98%	96%
Week 13 tot einde	97%	97%
Totaal	97%	96%
<i>*Het gemeenschappelijke kenmerk is de totaal mogelijke tijd binnen de onderzoeksperiode van 4 maanden. CGM-gebruik bevat opwarmtijd.</i>		

DCLP3: dagelijks gebruik van BG-meter gedurende periode van 6 maanden (n=168)

	Control-IQ	SAP
Gebruik van BG-meter per dag (gemiddeld)	0,67	0,73

DCLP5: Dagelijks gebruik van BG-meter gedurende periode van 4 maanden (n=101)

	Control-IQ	SAP
Gebruik van BG-meter per dag (gemiddeld)	0,37	0,36

33.5 Primaire analyse

De primaire uitkomst van zowel de DCLP3- als DCLP5-onderzoeken was het vergelijken van de CGM-sensorwaarden in het bereik tussen 70 en 180 mg/dl tussen de Control-IQ-groepen en de SAP-groepen. De gegevens vertegenwoordigen de algehele systeemprestaties gedurende 24 uur per dag.

DCLP3: vergelijking van CGM-waarden tussen Control-IQ- en SAP-gebruikers (n=168)

Kenmerk	Control-IQ	SAP	Verskil tussen onderzoeksgroep en controlegroep
Gemiddelde sensorglucosewaarde (standaardafwijking)	156 mg/dl (19 mg/dl)	170 mg/dl (25 mg/dl)	-14 mg/dl
Gemiddeld % 70–180 mg/dl (std dev)	71,4% (11,7%)	59,2% (14,6%)	+11%
Gemiddeld % >180 mg/dl (std dev)	27% (12%)	38,5% (15,2%)	-10%
Gemiddeld % <70 mg/dl (std dev)	1,59% (1,15%)	2,25% (1,46%)	-0,88%
Gemiddeld % <54 mg/dl (std dev)	0,29% (0,29%)	0,35% (0,32%)	-0,10%

DCLP5: vergelijking van CGM-waarden tussen Control-IQ- en SAP-gebruikers (n=101)

Kenmerk	Control-IQ	SAP	Vershil tussen onderzoeksgroep en controlegroep
Gemiddelde sensorglucosewaarden (standaardafwijking)	162 mg/dl (18 mg/dl)	179 mg/dl (26 mg/dl)	-17 mg/dl
Gemiddeld % 70–180 mg/dl (std dev)	67% (10%)	55% (13%)	+11%
Gemiddeld % >180 mg/dl (std dev)	31% (10%)	43% (14%)	-10%
Gemiddeld % <70 mg/dl (std dev)	1,8% (1,38%)	2,1% (1,18%)	-0,40%
Gemiddeld % <54 mg/dl (std dev)	0,34% (0,35%)	0,38% (0,35%)	-0,07%

De onderstaande tabellen beschrijven de gemiddelde tijd die deelnemers in zowel de Control-IQ-groep als de SAP-groep doorbrachten met een sensorglucosespiegel tussen 70 en 180 mg/dl per maand op de basislijn en tijdens de onderzoeksperiode.

DCLP3: percentage van tijd binnen bereik per onderzoeksgroep per maand (n=168)

Maand	Control-IQ	SAP
Basislijn	61%	59%
Maand 1	73%	62%
Maand 2	72%	60%
Maand 3	71%	60%
Maand 4	72%	58%
Maand 5	71%	58%
Maand 6	70%	58%

DCLP5: percentage van tijd binnen bereik per onderzoeksgroep per maand (n=101)

Maand	Control-IQ	SAP
Basislijn	53%	51%
Maand 1	68%	56%
Maand 2	68%	54%
Maand 3	67%	56%
Maand 4	66%	55%

33.6 Secundaire analyse

In de volgende tabellen wordt het percentage tijd vergeleken dat deelnemers overdag en 's nachts met de aangegeven sensorglucosespiegels hebben doorgebracht. De definities van dag en nacht verschillen enigszins tussen de twee onderzoeken en zijn in de tabellen gedefinieerd.

DCLP3: secundaire analyse per tijdstip (n=168)

Kenmerk	Meeteenheid	Overdag (06:00 – 24:00 uur)		's Nachts (24:00 – 06:00 uur)	
		Control-IQ	SAP	Control-IQ	SAP
Algehele beheersing van de sensorglucosewaarde	Gemiddelde sensorglucosewaarde (standaardafwijking)	158 mg/d (20 mg/dl)	170 mg/dl (26 mg/dl)	150 mg/dl (18 mg/dl)	170 mg/dl (27 mg/dl)
	Gemiddeld % van de sensorglucosewaarde 70 – 180 mg/dl(standaardafwijking)	69,8% (12,4%)	59,4% (14,6%)	76,1% (12,4%)	58,5% (16,2%)

DCLP5: secundaire analyse per tijdstip (n=101)

Kenmerk	Meeteenheid	Overdag (06:00 – 22:00 uur)		's Nachts (22:00 – 06:00 uur)	
		Control-IQ	SAP	Control-IQ	SAP
Algehele beheersing van de sensorglucosewaarde	Gemiddelde sensorglucosewaarde (standaardafwijking)	167 mg/dl (21 mg/dl)	179 mg/dl (27 mg/dl)	146 mg/dl (16 mg/dl)	180 mg/dl (27 mg/dl)
	Gemiddeld % van de sensorglucosewaarde 70 – 180 mg/dl(standaardafwijking)	63% (11%)	56% (14%)	80% (9%)	54% (16%)

In de volgende tabel wordt het percentage tijd vergeleken waarin de deelnemers tussen 70 en 180 mg/dl hebben doorgebracht over de verschillende HbA1c-waarden op de basislijn die in het DCLP3-onderzoek in beide behandelingsarmen werden waargenomen.

Percentage van tijd in bereik per onderzoeksarm per HbA1c op de basislijn (n=168)

HbA1c op de basislijn	Tijd binnen bereik	
	Control-IQ	SAP
≤6,5	85%	78%
6,6–7,0	76%	69%
7,1–7,5	71%	49%
7,6–8,0	69%	56%
≥8,1	60%	47%

In de volgende tabel worden de gemiddelde HbA1c-waarden voor alle DCLP3-deelnemers op de basislijn vergeleken met na 13 weken en na 26 weken. Er was een relatief verschil van -0,33% tussen de Control-IQ-arm en de SAP-arm.

Vergelijking van HbA1c-waarden (n=168)

Tijdsperiode	Control-IQ	SAP
Basislijn	7,40	7,40
Na 13 weken	7,02	7,36
Na 26 weken	7,06	7,39

33.7 Verschillen in insulinetoediening

In de volgende tabel worden de insulinetoedieningsstatistieken binnen het DCLP3-onderzoek vergeleken tussen de Control-IQ-arm en de SAP-arm.

DCLP3: vergelijking van insulinetoediening (n=168)

Kenmerk	Tijdstip	Control-IQ	SAP
Totaal aantal eenheden insuline	Na 2 weken gemiddeld (std dev)	50 (25)	50 (21)
	Na 13 weken gemiddeld (std dev)	54 (27)	50 (19)
	Na 26 weken gemiddeld (std dev)	55 (27)	51 (20)
Verhouding basaal-bolus	Na 2 weken gemiddeld (std dev)	1,1 (0,5)	1,2 (0,8)
	Na 13 weken gemiddeld (std dev)	1,1 (0,6)	1,3 (1,6)
	Na 26 weken gemiddeld (std dev)	1,1 (0,7)	1,2 (0,6)

In de volgende tabel worden de insulinetoedieningsstatistieken binnen het DCLP5-onderzoek vergeleken tussen de Control-IQ-arm en de SAP-arm. De totale dagelijkse insuline wordt weergegeven als eenheden insuline per lichaamsgewicht van de deelnemer, in kilogram (kg) per dag.

DCLP5: vergelijking van insulinetoediening (n=101)

Kenmerk	Tijdstip	Control-IQ	SAP
Totale hoeveelheid insuline (eenh/kg/dag)	Basislijn	0,89 (0,24)	0,94 (0,24)
	Na 16 weken gemiddeld (standaarddeviatie)	0,94 (0,25)	0,98 (0,32)
Verhouding basaal-bolus	Basislijn	0,73 (0,26)	0,89 (0,33)
	Na 16 weken gemiddeld (standaarddeviatie)	0,87 (0,30)	0,84 (0,38)

33.8 Nauwkeurigheid van waarschuwingen hoog en laag door Control-IQ-technologie

In de volgende gegevenstabel wordt de nauwkeurigheid weergegeven van respectievelijk de hoge en lage waarschuwingen door Control-IQ-technologie. Deze analyse toont het percentage waarschuwingen dat werd geactiveerd in verhouding tot de resulterende sensorglucosewaarde die het niveau bereikte dat de waarschuwing voorspelde.

De waarschuwing Laag van de Control-IQ-technologie waarschuwt de gebruiker wanneer de Control-IQ-technologie voorspelt dat de sensorglucosewaarde de komende 15 minuten onder 70 mg/dl of onder 80 mg/dl als de activiteit Lichaamsbeweging is ingeschakeld zal uitkomen.

De waarschuwing Hoog van de Control-IQ-technologie waarschuwt de gebruiker wanneer de Control-IQ-technologie voorspelt dat de sensorglucosewaarde voor 30 minuten of langer boven 200 mg/dl zal blijven.

DCLP3: percentage valse en gemiste waarschuwingen voor waarschuwingen door de Control-IQ-technologie (n=112)

Voorspellende waarschuwing	Valse waarschuwingen	Gemiste waarschuwingen
Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie	57%	41%
Waarschuwing hoog door Control-IQ-technologie	16%	23%

DCLP5: percentage valse en gemiste waarschuwingen voor waarschuwingen door Control-IQ-technologie (n=78)

Voorspellende waarschuwing	Valse waarschuwingen	Gemiste waarschuwingen
Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie	50%	54%
Waarschuwing hoog door Control-IQ-technologie	17%	25%

In de onderstaande tabel worden de prestaties weergegeven van de waarschuwingen Hoog en Laag van de Control-IQ-technologie bij het evalueren van de resulterende sensorglucosewaarde na 15 minuten en 30 minuten.

DCLP3: percentage nauwkeurige waarschuwingen door Control-IQ-technologie (n=112)

Voorspellende waarschuwing	Prestatie	
	15 minuten	30 minuten
Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie	49%	59%
Waarschuwing hoog door Control-IQ-technologie	75%	77%

DCLP5: percentage nauwkeurige waarschuwingen door Control-IQ-technologie (n=78)

Voorspellende waarschuwing	Prestatie	
	15 minuten	30 minuten
Waarschuwing laag door Control-IQ-technologie	38%	46%
Waarschuwing hoog door Control-IQ-technologie	78%	63%

33.9 Aanvullende analyse van het automatisch invullen van de sensorglucosewaarde met CGM

Na voltooiing van de cruciale studie werd een evaluatie van het automatisch invullen van de CGM-metingen in de boluscalculator uitgevoerd. De resultaten van de analyse geven aan dat wanneer er een sensorglucosewaarde >250 mg/dl was, er een verhoogde incidentie was van CGM-waarden <70 mg/dl vijf uur nadat een bolus was toegediend met behulp van automatisch ingevulde CGM-waarden in vergelijking met de vijf uur nadat de bolus werd toegediend met handmatig ingevoerde sensorglucosewaarden.

DCLP3: CGM-aflezingen na correctie van bolus (5 uur): alle bolussen

Type vermelding	Een of meer CGM-waarden <54 mg/dl (95% CI)	Drie opeenvolgende CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)	Vijf of meer CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)
Automatisch ingevuld (n=17,023)	4% (3,6, 4,2)%	8% (7,5, 8,3)%	12% (11,2, 12,2)%
Handmatig ingevuld (n=1,905)	5% (3,8, 5,7)%	9% (7,4, 10,0)%	12% (10,3, 13,2)%

DCLP5: CGM-aflezingen na correctie van bolus (5 uur): alle bolussen

Type vermelding	Een of meer CGM-waarden <54 mg/dl (95% CI)	Drie opeenvolgende CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)	Vijf of meer CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)
Automatisch ingevuld (n=12,323)	6% (5,7, 6,5)%	15% (14,4, 15,6)%	9% (8,4, 9,4)%
Handmatig ingevuld (n=1,630)	6% (4,9, 7,3)%	14% (12,1, 15,5)%	9% (7,4, 10,2)%

DCLP3: CGM-waarden na correctie van bolus (5 uur): gebaseerd op startglucosemetingen

CGM-waarde	Type vermelding	Een of meer CGM-waarden <54 mg/dl (95% CI)	Drie opeenvolgende CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)	Vijf of meer CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)
70–180 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=8,700)	3% (2,8, 3,5)%	7% (6,6, 7,6)%	11% (10,3, 11,6)%
	Handmatig ingevuld (n=953)	5% (3,2, 5,8)%	9% (7,4, 11,1)%	13% (10,4, 14,6)%
181–250 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=6,071)	4% (3,9, 5,0)%	9% (8,0, 9,4)%	12% (11,3, 13,0)%
	Handmatig ingevuld (n=568)	5% (3,4, 7,1)%	9% (6,6, 11,3)%	12% (9,5, 14,8)%
>250 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=2,252)	5% (4,0, 5,8)%	9% (7,5, 9,8)%	13% (11,9, 14,7)%
	Handmatig ingevuld (n=384)	4% (2,4, 6,5)%	7% (4,5, 9,6)%	9% (6,5, 12,3)%

DCLP53: CGM-waarden na correctie van bolus (5 uur): gebaseerd op startglucosemetingen

CGM-waarde	Type vermelding	Een of meer CGM-waarden <54 mg/dl (95% CI)	Drie opeenvolgende CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)	Vijf of meer CGM-waarden <70 mg/dl (95% CI)
70–180 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=5,646)	6% (5,5, 6,7)%	16% (15,0, 17,0)%	9% (8,4, 10,0)%
	Handmatig ingevuld (n=627)	7% (4,7, 8,7)%	16% (13,2, 19,0)%	11% (8,6, 13,4)%
181–250 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=3,622)	7% (6,0, 7,6)%	16% (14,4, 16,8)%	10% (9,1, 11,1)%
	Handmatig ingevuld (n=437)	6% (3,4, 7,6)%	14% (10,9, 17,5)%	7% (4,5, 9,2)%
>250 mg/dl	Automatisch ingevuld (n=3,035)	6% (4,7, 6,3)%	13% (11,5, 13,9)%	7% (6,2, 8,0)%
	Handmatig ingevuld (n=566)	6% (3,9, 7,7)%	11% (8,4, 13,6)%	8% (5,6, 10,0)%

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

5 Technische specificaties en garantie

HOOFDSTUK 34

Technische specificaties

34.1 Overzicht

Dit deel bevat tabellen met technische specificaties, prestatiekenmerken, opties, instellingen en informatie over elektromagnetische compatibiliteit voor de t:slim X2™-pomp. De specificaties in dit deel voldoen aan de internationale normen zoals beschreven in IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-11 en IEC 60601-2-24.

34.2 Specificaties t:slim X2-pomp

Specificaties t:slim X2-pomp

Specificatietype	Specificatiedetails
Classificatie	Externe voedingseenheid: klasse II, infusiepomp. Inwendig gevoede apparatuur, toegepast onderdeel van type BF. Het risico van ontsteking van ontvlambare anesthetica en explosieve gassen door de pomp is klein. Hoewel dit risico klein is, wordt afgeraden om de t:slim X2-pomp te gebruiken in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica of explosieve gassen.
Afmetingen	7,95 cm x 5,08 cm x 1,52 cm (3,13" x 2,0" x 0,6") (L x B x H)
Gewicht (met volledig wegwerpbaar onderdeel)	112 gram (3,95 ounce)
Bedrijfsomstandigheden	Temperatuur: 5 °C (41 °F) tot 37 °C (99 °F) Vochtigheid: 20% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Opslagomstandigheden	Temperatuur: -20 °C (-4 °F) tot 60 °C (140 °F) Vochtigheid: 20% tot 90% RH, niet-condenserend
Atmosferische druk	-396 meter tot 3.048 meter (-1.300 voet tot 10.000 voet)
Bescherming tegen vocht	IP27: Maximaal 30 minuten waterdicht tot een diepte van 0,91 meter (3 voet)
Reservoirvolume	3,0 ml of 300 eenheden
Vulhoeveelheid canule	0,1 tot 1,0 eenheden insuline

Specificaties t:slim X2-pomp (vervolg)

Specificatietype	Specificatiedetails
Insulineconcentratie	U-100
Gebruikslevensduur	De gebruikslevensduur van de pomp is vier jaar. Neem contact op met de klantenservice in uw regio voor instructies over het veilig afvoeren van de pomp.
Alarmtype	Zichtbaar, hoorbaar en trillend
Nauwkeurigheid van de basale toediening bij alle stroomsnelheden (getest volgens IEC 60601-2-24)	±5% De pomp is ontworpen om automatisch te ontlichten wanneer er een drukverschil bestaat tussen de binnenkant van het reservoir omringende lucht. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een geleidelijke verandering van hoogte van 305 meter (1000 voet), is het mogelijk dat de pomp niet onmiddellijk ontlicht en de nauwkeurigheid van de toediening kan tot 15% variëren totdat er 3 eenheden insuline zijn toegediend of de hoogte met meer dan 305 meter (1000 voet) is veranderd.
Nauwkeurigheid van de bolustoediening bij alle volumes (getest volgens IEC 60601-2-24)	± 5%
Bescherming van de patiënt tegen infusie van lucht	De pomp levert subcutane toediening in interstitieel weefsel en geen intraveneuze injecties. Doorzichtige slangen helpen bij het detecteren van lucht.
Maximaal gegenereerde infuusdruk en drempelwaarde voor verstoppingalarm	30 psi
Frequentie van basale toediening	5 minuten voor alle basaalsnelheden
Retentietijd van elektronisch geheugen wanneer de batterij van de interne pomp volledig leeg is (inclusief alarminstellingen en alarmgeschiedenis)	Meer dan 30 dagen
Voor het testen gebruikte infuusset	Unomedical VariSoft-infusieset

Specificaties t:slim X2-pomp (vervolg)

Specificatietype	Specificatiedetails
Gebruikelijke bedrijfstijd wanneer de pomp werkt met een middelhoge snelheid	Bij normaal gebruik is de gemiddelde snelheid 2 eenheden/uur; van de batterij kan redelijkerwijs worden verwacht dat deze tussen 4 en 7 dagen meegaat, afhankelijk van uw gebruik van de functies van de CGM en de Tandem t:slim™-app van volledig opgeladen tot volledig ontladen toestand
Omgaan met te overmatige infusie of ontoereikende infusie	De toedieningsmethode isoleert de insulinekamer van de patiënt, en de software zorgt voor regelmatige bewaking van de pompstatus. Meerdere softwaremonitors bieden redundante bescherming tegen onveilige omstandigheden. Overmatige infusie wordt beperkt door bloedglucose te bewaken (via CGM, BG-meter of beide), gelaagdheid van overtolligheden en bevestigingen en tal van andere beveiligingsalarmen. Gebruikers moeten de details van alle bolustoedieningen, basaalsnelheden en tijdelijke snelheden controleren en bevestigen om zeker te zijn voordat een toediening wordt gestart. Nadat bolustoedieningen zijn bevestigd, krijgt de gebruiker bovendien 5 seconden de tijd om de toediening te annuleren voordat deze wordt gestart. Een optioneel alarm Autom. uitschakelen wordt geactiveerd als de gebruiker gedurende een vooraf ingestelde periode niet heeft gecommuniceerd via de gebruikersinterface van de pomp. Ontoereikende infusie wordt beperkt door verstoppingdetectie en BG-monitoring terwijl de BG-waarden worden geregistreerd. Gebruikers krijgen de opdracht om hoge BG-waarden te behandelen met een correctiebolus.
Bolusvolume bij het opheffen van een verstopping (2 eenheden per uur basaal)	Minder dan 3 eenheden voor Unomedical VariSoft-infusieset (110 cm)
Resterende insuline in het reservoir (onbruikbaar)	Ongeveer 15 eenheden
Minimaal hoorbaar alarmvolume	45 dBA op 1 meter

 OPMERKING

De in deze tabel vermelde nauwkeurigheidswaarden gelden voor alle infusiesets van de merken van Tandem Diabetes Care, Inc., waaronder infusiesets van de merken AutoSoft™ 90, AutoSoft™ XC, AutoSoft™ 30, VariSoft en TruSteel™.

Specificaties USB-oplaad-/gegevenskabel

Specificatietype	Specificatiedetail
Tandem-onderdeelnummer	004113
Lengte	2 meter (6 voet)
Type	USB A naar USB Micro B

Specificaties elektrische voeding/lader, netspanning, wandmontage, USB

Specificatietype	Specificatiedetail
Tandem-onderdeelnummer	007866
Ingang	100 tot 240 volt AC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning	5 volt DC
Max. uitgangsvermogen	5 watt
Uitgangsconnector	USB type A

Computer, USB-connector, specificaties

Specificatietype	Specificatiedetail
Uitgangsspanning	5 volt DC
Uitgangsconnector	USB type A
Overeenstemming met veiligheidsnormen	60601-1 of 60950-1 of gelijkwaardig

Vereisten voor het opladen vanaf een computer

De t:slim X2-pomp is ontworpen om te worden aangesloten op een hostcomputer voor het opladen van de batterij en gegevensoverdracht. Voor de hostcomputer zijn minimaal de volgende kenmerken vereist:

- USB 1.1-poort (of nieuwer)
- Computer die voldoet aan 60950-1 of een gelijkwaardige veiligheidsnorm

Het aansluiten van de pomp op een hostcomputer die is aangesloten op andere apparatuur kan leiden tot niet eerder bepaalde risico's voor de patiënt, de gebruiker of derden. De gebruiker moet deze risico's identificeren, analyseren, evalueren en beheersen.

Latere wijzigingen in de hostcomputer kunnen nieuwe risico's met zich meebrengen en aanvullende analyse vereisen. Mogelijke wijzigingen zijn het aanpassen van de configuratie van de computer, het aansluiten van extra apparatuur op de computer, het loskoppelen van apparatuur van de

computer en het bijwerken of upgraden van de apparatuur die op de computer is aangesloten.

WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** de USB-kabel die bij uw t:slim X2-insulinepomp is geleverd om het risico op brand of brandwonden te minimaliseren.

34.3 t:slim X2 Opties en instellingen pomp

Opties en instellingen t:slim X2-pomp

Type optie/instelling	Details optie/instelling
Tijd	Kan op 12- of 24-uursklok worden ingesteld (standaard 12-uursklok)
Instelbereik basaalsnelheid	0,1 – 15 eenheden/uur
Profielen voor insulinetoediening (basaal en bolus)	6
Basaalsnelheidssegmenten	16 per toedieningsprofiel
Stapgrootte bij instellen basaalsnelheid	0,001 bij geprogrammeerde snelheden gelijk aan of groter dan 0,1 eenheden/uur.
Tijdelijke basaalsnelheid	15 minuten tot 72 uur met een resolutie van 1 minuut en een bereik van 0% tot 250%.
Bolusinstellingen	Toediening mogelijk op basis van koolhydraten (gram) of insuline (eenheden). Het bereik voor koolhydraten is 1 tot 999 gram; het bereik voor insuline is 0,05 tot 25 eenheden.
Insuline-koolhydratenratio	16 tijdsegmenten per periode van 24 uur; verhouding: 1 eenheid insuline per x gram koolhydraten; 1:1 tot 1:300 (kan onder 10 worden ingesteld in stappen van 0,1)
BG-doelwaarde	16 tijdsegmenten: 70 tot 250 mg/dl in stappen van 1 mg/dl.
Correctiefactor	16 tijdsegmenten; verhouding: 1 eenheid insuline vermindert BG x mg/dl; 1:1 tot 1:600 (stappen van 1 mg/dl)
Duur van insulinewerking	1 tijdsegment; 2 tot 8 uur in stappen van 1 minuut (standaard 5 uur).
Bolusstap	0,01 bij volumes van meer dan 0,05 eenheden.
Stappen snelle bolus	Wanneer ingesteld op eenheden: 0,5, 1, 2, 5 eenheden (standaard 0,5 eenheden); of wanneer ingesteld op gram koolhydraten: 2, 5, 10, 15 gram (standaard 2 g)

Opties en instellingen t:slim X2-pomp (vervolg)

Type optie/instelling	Details optie/instelling
Maximale tijd verlengde bolus	8 uur (2 uur wanneer Control-IQ™-technologie is ingeschakeld)
Maximale bolusgrootte	25 eenheden
Maximale automatische bolusgrootte	6 eenheden
Volume-indicator Reservoir laag	Statusindicator zichtbaar op <i>startscherm</i> ; waarschuwing bij lage insuline kan door de gebruiker worden ingesteld tussen 10 en 40 eenheden (standaard 20 eenheden).
Alarm Autom. uitschakelen	Aan of Uit (standaard is Uit); door de gebruiker in te stellen (5 tot 24 uur, standaard is 12 uur, aanpasbaar wanneer de optie is ingesteld op Aan).
Opslag van geschiedenis	Ten minste 90 dagen aan gegevens
Taal	Afhankelijk van gebruiksregio. Kan worden ingesteld op Engels, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans of Zweeds (standaard is Engels).
Beveiligingspin	Biedt bescherming tegen onbedoelde toegang en blokkeert toegang tot snelle bolus indien ingeschakeld (standaard is uit).
Schermsgrendeling	Beschermt tegen onbedoelde scherminteractie.
Herinnering locatie	Roept de gebruiker op om de infuusset te vervangen. Kan worden ingesteld op 1 tot 3 dagen op een door de gebruiker geselecteerd tijdstip (standaard is uit).
Herinnering gemiste-maaltijdbolus	Geeft de gebruiker een melding als er geen bolus is toegediend tijdens de periode waarvoor de herinnering is ingesteld. 4 herinneringen beschikbaar (standaard is uit).
Herinnering na bolus	Roept de gebruiker op om BG te testen op een geselecteerd tijdstip nadat een bolus is toegediend. Kan worden ingesteld op 1 tot 3 uur (standaard is uit).
Herinnering hoge BG	Roept de gebruiker op om BG opnieuw te testen nadat een hoge BG is ingevoerd. Gebruiker selecteert hoge BG-waarde en tijd voor herinnering (standaard is uit).
Herinnering lage BG	Roept de gebruiker op om BG opnieuw te testen nadat een lage BG is ingevoerd. Gebruiker selecteert lage BG-waarde en tijd voor herinnering (standaard is uit).

34.4 t:slim X2 Prestatiekenmerken pomp

De t:slim X2-insulinepomp dient op twee manieren insuline toe: basaal (continu) en als een bolus. De volgende nauwkeurigheidsgegevens zijn verzameld over beide soorten toediening in laboratoriumonderzoeken uitgevoerd door Tandem.

Basaaltoediening

Om de nauwkeurigheid van de basaaltoediening te beoordelen, werden 32 t:slim X2-pompen getest door toediening met lage, gemiddelde en hoge basaalsnelheden (0,1, 2,0 en 15 eenh./uur). Zestien van de pompen waren nieuw en 16 waren verouderd om te simuleren dat deze vier jaar regelmatig waren gebruikt. Voor zowel de gebruikte als niet-gebruikte pompen werden acht pompen getest met een nieuw reservoir en acht met een reservoir dat twee jaar realtime veroudering had ondergaan. Water werd gebruikt als vervanging voor insuline. Het water werd in een container op een weegschaal gepompt en het gewicht van de vloeistof werd op verschillende tijdstippen gebruikt om de pompnauwkeurigheid te beoordelen.

In de volgende tabellen worden de typische waargenomen basale prestaties (mediaan) weergegeven, samen met de laagste en hoogste resultaten die zijn waargenomen voor lage, gemiddelde en hoge basaalsnelheidsinstellingen voor alle geteste pompen. Voor de gemiddelde en hoge basaalsnelheden werd de nauwkeurigheid gerapporteerd vanaf het moment dat de basaaltoediening startte, zonder opwarmperiode. Voor de minimale basaalsnelheid wordt de nauwkeurigheid gerapporteerd na een opwarmperiode van 1 uur. Voor elke periode tonen de tabellen het volume van de aangevraagde insuline in de eerste rij en het toegediende volume zoals gemeten door de weegschaal in de tweede rij.

Toedieningsprestatie lage basaalsnelheid (0,1 eenheden/u)

Basale duur (aantal geleverde eenheden met een instelling van 0,1 eenheden/uur)	1 uur (0,1 eenheden)	6 uur (0,6 eenheden)	12 uur (1,2 eenheden)
Toegediende hoeveelheid [min, max]	0,12 e [0,09, 0,16]	0,67 e [0,56, 0,76]	1,24 e [1,04, 1,48]

Toedieningsprestatie gemiddelde basaalsnelheid (2,0 eenheden/uur)

Basale duur (aantal geleverde eenheden met een instelling van 2 eenheden/uur)	1 uur (2 eenh.)	6 uur (12 eenh.)	12 uur (24 eenh.)
Toegediende hoeveelheid [min, max]	2,1 e [2,1, 2,2]	12,4 e [12,0, 12,8]	24,3 e [22,0, 24,9]

Toedieningsprestatie hoge basaalsnelheid (15 eenheden/uur)

Basale duur (aantal geleverde eenheden met een instelling van 15 eenheden/uur)	1 uur (15 eenh.)	6 uur (90 eenh.)	12 uur (180 eenheden)
Toegediende hoeveelheid [min, max]	15,4 e [14,7, 15,7]	90,4 e [86,6, 93,0]	181 e [175,0, 187,0]

Bolustoediening

Om de nauwkeurigheid van de bolustoediening te beoordelen, werden 32 t:slim X2-pompen getest door opeenvolgende toediening met lage, gemiddelde en hoge bolusvolumes te leveren (0,05, 2,5 en 25 eenheden). Zestien van de pompen waren nieuw en 16 waren verouderd om te simuleren dat deze vier jaar regelmatig waren gebruikt. Voor zowel de gebruikte als niet-gebruikte pompen werden acht pompen getest met een nieuw reservoir en acht met een reservoir dat twee jaar realtime veroudering had ondergaan. Voor deze test werd water gebruikt als vervanging voor insuline. Het water werd in een container op een weegschaal gepompt en het gewicht van de vloeistof werd op verschillende tijdstippen gebruikt om de pompnauwkeurigheid te beoordelen.

Toegediende bolusvolumes werden vergeleken met de aangevraagde bolusvolumetoediening voor minimale, gemiddelde en maximale bolusvolumes. De onderstaande tabellen tonen de gemiddelde, minimale en maximale waargenomen bolusgroottes, evenals het aantal waargenomen bolussen binnen het gespecificeerde bereik van elk doelbolusvolume.

Prestatieoverzicht bolustoediening (n=32 pompen)

Prestatie individuele bolusnauwkeurigheid	Bolusgrootte doel [Units]	Bolusgrootte gemiddeld [Units]	Bolusgrootte minimaal [Units]	Bolusgrootte maximaal [Units]
Toedieningsprestatie minimale bolus (n = 800 bolussen)	0,050	0,050	0,000	0,114
Toedieningsprestatie gemiddelde bolus (n = 800 bolussen)	2,50	2,46	0,00	2,70
Toedieningsprestatie maximale bolus (n = 256 bolussen)	25,00	25,03	22,43	25,91

Toedieningsprestaties lage bolus (0,05 eenheden) (n=800 bolussen)

	Eenheden insuline geleverd na een bolusverzoek van 0,05 eenheden									
	<0,0125 (<25%)	0,0125– 0,0375 (25–75%)	0,0375– 0,045 (75–90%)	0,045– 0,0475 (90–95%)	0,0475– 0,0525 (95–105%)	0,0525– 0,055 (105–110%)	0,055– 0,0625 (110–125%)	0,0625– 0,0875 (125–175%)	0,0875– 0,125 (175–250%)	>0,125 (>250%)
Aantal en percentage bolussen binnen bereik	21/800 (2,6%)	79/800 (9,9%)	63/800 (7,9%)	34/800 (4,3%)	272/800 (34,0%)	180/800 (22,5%)	105/800 (13,1%)	29/800 (3,6%)	17/800 (2,1%)	0/800 (0,0%)

Toedieningsprestaties gemiddelde bolus (2,5 eenheden) (n=800 bolussen)

	Eenheden insuline geleverd na een bolusverzoek van 2,5 eenheden									
	<0,625 (<25%)	0,625– 1,875 (25–75%)	1,875– 2,25 (75–90%)	2,25– 2,375 (90–95%)	2,375– 2,625 (95–105%)	2,625– 2,75 (105–110%)	2,75– 3,125 (110–125%)	3,125– 4,375 (125–175%)	4,375– 6,25 (175–250%)	>6,25 (>250%)
Aantal en percentage bolussen binnen bereik	9/800 (1,1%)	14/800 (1,8%)	11/800 (1,4%)	8/800 (1,0%)	753/800 (94,1%)	5/800 (0,6%)	0/800 (0,0%)	0/800 (0,0%)	0/800 (0,0%)	0/800 (0,0%)

Toedieningsprestaties hoge bolus (25 eenheden) (n=256 bolussen)

	Eenheden insuline geleverd na een bolusverzoek van 25 eenheden									
	<6,25 (<25%)	6,25– 18,75 (25–75%)	18,75– 22,5 (75–90%)	22,5– 23,75 (90–95%)	23,75– 26,25 (95–105%)	26,25– 27,5 (105–110%)	27,5– 31,25 (110–125%)	31,25– 43,75 (125–175%)	43,75– 62,5 (175–250%)	>62,5 (>250%)
Aantal en percentage bolussen binnen bereik	0/256 (0,0%)	0/256 (0,0%)	1/256 (0,4%)	3/256 (1,2%)	252/256 (98,4%)	0/256 (0,0%)	0/256 (0,0%)	0/256 (0,0%)	0/256 (0,0%)	0/256 (0,0%)

Toedieningssnelheid

Kenmerk	Waarde
Toedieningssnelheid bolus van 25 eenheden	Gewoonlijk 2,97 eenheden/min.
Toedieningssnelheid bolus van 2,5 eenheden	Gewoonlijk 1,43 eenheden/min.
Voorvullen met 20 eenheden	Gewoonlijk 9,88 eenheden/min.

Duur van bolus

Kenmerk	Waarde
Duur bolus van 25 eenheden	Gewoonlijk 8 minuten en 26 seconden
Duur bolus van 2,5 eenheden	Gewoonlijk 1 minuut en 45 seconden

Tijd tot verstoppingalarm*

Bedrijfsnelheid	Gewoonlijk	Maximum
Bolus (3 eenheden of meer)	1 minuut en 2 seconden	3 minuten
Basaal (2 eenheden/uur)	1 uur en 4 minuten	2 uur
Basaal (0,1 eenheden/uur)	19 uur en 43 minuten	36 uur
*De tijd tot het verstoppingalarm is gebaseerd op het insulinevolume dat niet is toegediend. Tijdens een verstopping activeren bolussen van minder dan 3 eenheden mogelijk geen verstoppingalarm als er geen basale insuline wordt toegediend. De bolushoeveelheid vermindert de tijd tot verstopping afhankelijk van de basaalsnelheid.		

34.5 Elektromagnetische compatibiliteit

De informatie in dit deel geldt specifiek voor de pomp en de CGM. Deze informatie biedt een redelijke mate van zekerheid dat het systeem normaal zal werken, maar garandeert niet dat dit onder alle omstandigheden het geval zal zijn. Als de pomp en CGM in de directe nabijheid van andere elektrische apparatuur moeten worden gebruikt, moeten de pomp en CGM in deze omgeving worden geobserveerd om te controleren of ze normaal werken. Bij het gebruik van medische elektrische apparatuur moeten speciale voorzorgsmaatregelen voor elektromagnetische compatibiliteit worden genomen. De pomp en CGM moeten in gebruik worden genomen met inachtneming van de EMC-informatie die hier wordt gegeven.

▲ WAARSCHUWING

Het gebruik van andere accessoires, kabels, adapters en laders dan gespecificeerd of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur, wat kan leiden tot een onjuiste werking.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** de USB-kabel die bij uw t:slim X2-insulinepomp is geleverd om het risico op brand of brandwonden te minimaliseren.

Voor IEC 60601-1-testen wordt essentiële prestatie voor de pomp als volgt gedefinieerd:

- De pomp dient niet klinisch significant te veel insuline toe.
- De pomp dient niet klinisch significant te weinig insuline toe zonder dit aan de gebruiker te melden.
- De pomp dient geen klinisch significante hoeveelheid insuline toe na het verwijderen van een verstopping.
- De pomp stopt niet met het rapporteren van CGM-gegevens zonder kennisgeving aan de gebruiker.

Dit deel bevat de volgende tabellen met informatie:

- Elektromagnetische emissies
- Elektromagnetische immuniteit

- Draadloze technologie

34.6 Draadloze co-existentie en gegevensbeveiliging

De pomp en CGM zijn ontworpen om veilig en effectief te werken in de nabijheid van draadloze apparaten die veel thuis, op het werk, in winkels en op locaties voor vrijetijdsbesteding waar mensen hun dag doorbrengen voorkomen.

▲ WAARSCHUWING

Draagbare RF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur als antennekabels en externe antennes) mag niet worden gebruikt binnen een afstand van 30,5 cm (12 inch) van enig onderdeel van de t:slim X2-pomp; dit geldt ook voor kabels gespecificeerd door de fabrikant. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van deze apparatuur.

De pomp en CGM zijn ontworpen voor verzending en ontvangst van draadloze communicatie met Bluetooth-technologie. De communicatie wordt pas tot stand gebracht als de juiste aanmeldgegevens op de pomp zijn ingevoerd.

De pomp en CGM en hun onderdelen zijn ontworpen om de gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid van de patiënt te garanderen met behulp van een reeks cyberbeveiligingsmaatregelen, waaronder apparaatverificatie, berichtversleuteling en berichtvalidatie.

34.7 Veiligheid van de Tandem t:slim-app

De biometrische beveiliging van de smartphone of een ander eigen verificatiesysteem voorkomt ongeoorloofde toegang. Deel nooit uw beveiligingspin/wachtwoord en machtig niemand anders om toegang te krijgen tot uw smartphone via diens biometrische gegevens om onbedoelde wijzigingen in uw toediening van insuline te voorkomen.

WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** smartphone die jailbroken of geroot is, of waarbij de Android-ontwikkelaarsmodus ingeschakeld is. Gegevens kunnen kwetsbaar worden als u de mobiele Tandem t:slim-app op een telefoon installeert die jailbroken of geroot is, of werkt met een niet-vrijgegeven of voorlopig vrijgegeven

besturingssysteem. Download de Tandem t:slim-app alleen op Google Play™ of uit de App Store. Raadpleeg [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) voor de installatie van Tandem t:slim-app.

Als de app beschadigd of aangetast raakt, verwijder dan de Tandem t:slim-app en volg de instructies in [Deel 4.3 Verbinding maken met een smartphone](#) om een bekende configuratie van de Tandem t:slim-app terug te krijgen.

Eenmaal ondersteund, is Tandem bedoeld voor ondersteuning voor een bepaalde combinatie van smartphone en besturingssysteem gedurende ten minste één jaar. Als de mobiele app niet langer compatibel is met een bepaalde smartphone of besturingssysteem, worden er verder geen beveiligingsupdates meer aangeboden.

OPMERKING

Ga voor een actuele lijst met ondersteunde smartphones naar tandemdiabetes.com/mobilesupport of tik op **Help** op het scherm *Instellingen* in de Tandem t:slim-app en tik daarna op **App-handleiding**.

Meld eventuele cyberbeveiligingsincidenten of -kwetsbaarheden aan de Klantenservice technische ondersteuning zodra u dit ontdekt.

34.8 Elektromagnetische emissies

De pomp en CGM zijn bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. Zorg er altijd voor dat de pomp en CGM in een dergelijke omgeving worden gebruikt.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies

Emissietest	Overeenstemming	Elektromagnetische omgeving – richtlijn
RF-emissies, CISPR 11	Groep 1	De pomp gebruikt alleen RF-energie voor de interne werking. Hierdoor zijn de RF-emissies zeer laag en is het niet waarschijnlijk dat deze interferentie in elektronische apparatuur in de directe omgeving zullen veroorzaken.
RF-emissies, CISPR 11	Klasse B	De pomp is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet.
Harmonische emissies, IEC 61000-3-2	N.v.t.	
Spanningsvariaties/flikkeremissies, IEC 61000-3-3	N.v.t.	

34.9 Elektromagnetische immuniteit

De pomp en CGM zijn bedoeld voor gebruik in elektromagnetische omgevingen van gezondheidszorg in woningen.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit


Immuniteitstest	Testniveau volgens IEC 60601	Niveau van overeenstemming
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	± 8 kV contact ± 15 kV lucht
Snelle elektrische transiënt/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor voedingskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels (100 kHz herhalingsfrequentie)	± 2 kV voor voedingskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels (10 kHz herhalingsfrequentie)
Stootspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gedeelde modus	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gedeelde modus
Geleide RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz	10 Vrms
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz	10 V/m

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit (vervolg)

Immuniteitstest	Testniveau volgens IEC 60601	Niveau van overeenstemming
Nabijheidsveld van draadloze zenders	385 MHz: 27 V/m bij 18 Hz pulsmodulatie 450 MHz: 28 V/m bij FM-modulatie 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz: 9 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz: 28 V/m bij 18 Hz pulsmodulatie 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz: 28 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 2450 MHz: 28 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz: 9 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie	385 MHz: 27 V/m bij 18 Hz pulsmodulatie 450 MHz: 28 V/m bij FM-modulatie 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz: 9 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz: 28 V/m bij 18 Hz pulsmodulatie 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz: 28 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 2450 MHz: 28 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie 5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz: 9 V/m bij 217 Hz pulsmodulatie
Spanningsdalingen, kortstondige onderbrekingen en spanningsverschillen in elektriciteitslijnen IEC 61000-4-11	70% Ur (30% afname Ur) gedurende 25 cycli 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 1 cyclus bij 0 graden 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 0,5 cyclus bij 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, en 315 graden 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 250 cycli	70% Ur (30% afname Ur) gedurende 25 cycli 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 1 cyclus bij 0 graden 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 0,5 cyclus bij 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, en 315 graden 0% Ur (100% afname Ur) gedurende 250 cycli
Magnetisch veld op netfrequentie (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	400 A/m (IEC 60601-2-24)

34.10 IEC 60601-1-10: Systeem met fysiologisch gesloten regelaars

Control-IQ beheert insulinetherapie met behulp van een gesloten-lus-regelalgoritme dat de basale toediening moduleert en periodieke automatische correctiebolussen start op basis van de voorspelde bloedglucose, de insulinetoeieningsgeschiedenis en de invoervariabelen van de gebruiker. Het regelalgoritme gebruikt continue feedback van de geschatte bloedglucosewaarden (EGV's) van een continue glucosemeter (CGM), de door de gebruiker gerapporteerde koolhydraten, de geschiedenis van de insulinetoeiening en het gebruikersgewicht om de geschatte bloedglucose 30 minuten in de toekomst te voorspellen. Het regelalgoritme gebruikt vervolgens deze voorspelde bloedglucosewaarden, de huidige streefwaarden in de gebruikersmodus (bijv. lichaamsbeweging, slaap) en de pompinstellingen die de gebruiker invoert om de insulinetoeieningsdosis te berekenen. Alle doses worden gevalideerd door een insulineveiligheidssysteem om een te hoge toediening van insuline te voorkomen. Het regelalgoritme is ingebed in de toepassingscode van de pomp. EGV-waarden worden door de pomp ontvangen via draadloze Bluetooth-technologie van een compatibele CGM-sensor. In het volgende blokdiagram wordt deze werkingstheorie beschreven.

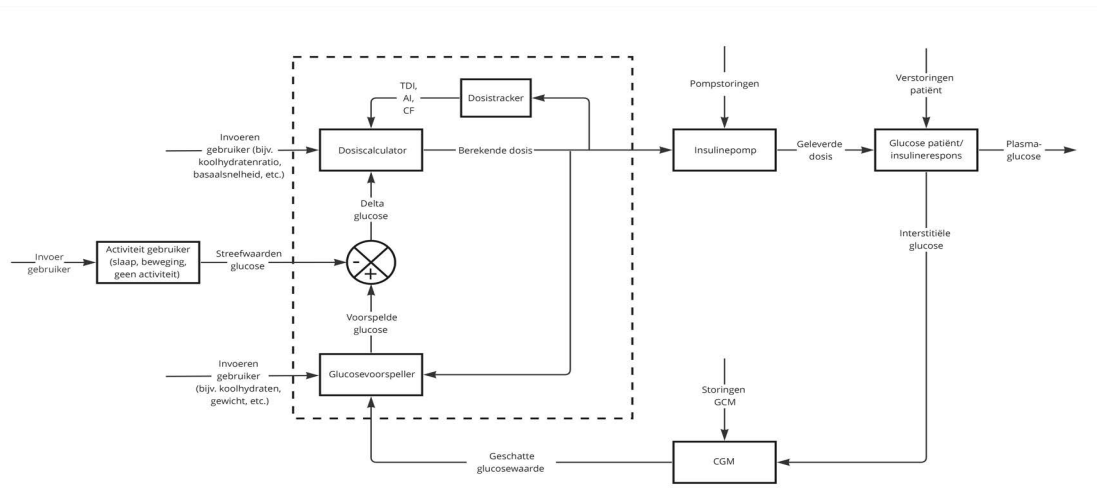

34.11 Kwaliteit van draadloze verbinding

De kwaliteit van de draadloze service tussen de pomp en CGM wordt gedefinieerd als het percentage CGM-metingen dat met succes door de pomp is ontvangen. Een van de essentiële prestatievereisten is dat de pomp de rapportage van gegevens en/of informatie van de CGM aan de gebruiker niet zonder kennisgeving stopt.

De pomp waarschuwt de gebruiker op verschillende manieren bij een gemiste waarde of wanneer de CGM en de pomp buiten elkaars bereik zijn. De eerste is wanneer er een punt wordt gemist op de CGM-trendgrafiek, wat plaatsvindt binnen vijf minuten na de vorige meting. De tweede indicatie treedt op na 10 minuten wanneer het pictogram Buiten bereik wordt weergegeven op het *CGM-startscherm*. De derde is een door de gebruiker in te stellen waarschuwing die de gebruiker op de hoogte stelt wanneer de CGM en de pomp zich buiten het bereik van elkaar bevinden. Het instellen van deze

waarschuwing wordt gedefinieerd in [Deel 22.6 Uw waarschuwing buiten bereik instellen](#).

De minimale kwaliteit van de draadloze verbinding van de pomp en de CGM bepalen dat 90% van de CGM-waarden met succes naar het pompscherm moeten worden verzonden als de CGM en de pomp zich binnen 6 meter (20 voet) van elkaar bevinden, en dat niet meer dan 12 opeenvolgende waarden (1 uur) mogen worden gemist.

Voor een juist gebruik van de Tandem t:slim-app is elke 5 minuten draadloze communicatie tussen de pomp en de smartphone vereist. De kwaliteit van de draadloze verbinding tussen de pomp en de smartphone met de Tandem t:slim-app is gegarandeerd binnen 6 meter (20 voet), tenzij er draadloze interferentie is die wordt veroorzaakt door andere apparaten in de 2,4 GHz-band. Deze interferentie kan van invloed zijn op het vermogen van de smartphone om deze servicekwaliteit te behouden. Verminder de afstand tussen de smartphone en de pomp om de servicekwaliteit te verbeteren in aanwezigheid van andere

apparaten die in de 2,4 GHz-band werken. Als de verbinding verloren gaat, zal de Tandem t:slim-app een melding geven; gebruik uw pomp totdat de connectiviteit verbeterd is.

34.12 Draadloze technologie

De pomp en CGM maken gebruik van draadloze technologie met de volgende kenmerken:

Specificaties van draadloze technologie

Specificatietype	Specificatiedetail
Draadloze technologie	Bluetooth Low Energy (BLE) versie 5.0
Frequentiebereik Tx/Rx	2,360 tot 2,500 GHz
Bandbreedte (per kanaal)	2 MHz
Uitgestraald uitgangsvermogen (maximaal)	+8 dBm
Modulatie	Gauss-frequentieverschuivingsmodulatie
Gegevensbereik	2 Mbps
Datacommunicatiebereik (maximaal)	20 voet

34.13 Kennisgeving van de FCC met betrekking tot interferentie

Het apparaat waarop deze gebruikershandleiding van toepassing is, is gecertificeerd volgens FCC ID: 2AA9B04.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Gebruik is toegestaan op de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
2. Dit apparaat moet alle eventueel ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

34.14 Garantie-informatie

Ga voor informatie over de pompgarantie voor uw regio naar tandemdiabetes.com/warranty.

34.15 Beleid retourgezonden goederen

Ga voor informatie over het beleid voor retournering van goederen in uw regio naar tandemdiabetes.com/warranty.

34.16 Voorvalgegevens t:slim X2-insulinepomp (zwarte doos)

De voorvalgegevens van de t:slim X2-pomp worden gemonitord en op de pomp gelogd. De op de pomp opgeslagen gegevens kunnen door de klantenservice in uw regio worden verkregen en gebruikt voor het oplossen van problemen indien een pomplog wordt opgeladen naar een app voor gegevensbeheer die gebruik van de t:slim X2-pomp ondersteunt, of als de pomp wordt geretourneerd. Ook andere personen die wettelijke gronden kunnen hebben voor inzage en die uw toestemming voor inzage van deze informatie verkrijgen, kunnen toegang hebben om deze gegevens te lezen en gebruiken. De privacyverklaring is beschikbaar op tandemdiabetes.com/privacy/privacy-policy.

34.17 Productenlijst

Neem voor een volledige productenlijst contact op met de klantenservice in uw regio.

Insulinetoediening

- t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie
- t:case (pomphoes met clip)
- t:slim X2-gebruikershandleiding
- USB-kabel
- USB-oplader met stekkers
- Hulpmiddel voor verwijdering reservoir

verbruiksartikelen

- t:slim X2-reservoir (t:lock-connector)
- infuusset (allen met t:lock-connector)

Infuussets zijn verkrijgbaar in verschillende canulegroottes, slanglengtes, inbrenghoeken en kunnen met of zonder inbrenginstrument worden geleverd. Sommige infuussets

hebben een zachte canule en andere hebben een stalen naald.

Neem contact op met de klantenservice in uw regio voor beschikbare groottes en lengtes van de volgende infuussets met t:lock-connectoren:

- AutoSoft 90-infuusset
- AutoSoft 30-infuusset
- AutoSoft XC-infusieset
- VariSoft-infuusset
- TruSteel-infuusset

optionele accessoires/vervangende onderdelen

- t:case-pomphoes (zwart, blauw, roze, paars, turkoois, olijfgroen)
- t:holster
- t:slim USB-oplaadkabel
- t:slim USB-oplader
- stekker voor t:slim USB-oplader
- Hulpmiddel voor verwijdering reservoir

- t:slim-schermbehouder
- rubberen klep van de USB-poort

INDEX

A

Accessoires	98
Actieve insuline (AI), in Persoonlijke profielen	110
Actuele status-scherm	58
Adapter, netstroom	99
Afvoeren van systeemcomponenten	208, 369
Alarm Autom. uitschakelen	162
Alarm hervatten pomp	191
Alarm hoogte	200
Alarm leeg reservoir	193
Alarm reservoirfout	194
Alarm resetten	201
Alarm verwijdering reservoir	195
Alarm zwakke voeding	192
Alarmen	189
Alarm Autom. uitschakelen	162
Alarm hervatten pomp	191
Alarm hoogte	200
Alarm leeg reservoir	193
alarm reservoirfout	194
alarm resetten	201
alarm verwijdering reservoir	195

alarm zwakke voeding	192
knop alarm Scherm aan/Snelle bolus	199
temperatuur alarm	196
Verstoppingalarmen	197, 198

Apparaatinstellingen	66, 103
-----------------------------------	---------

B

Basaal	46
actuele basaalsnelheid	58
getimede instellingen	109
in persoonlijke profielen	111
nauwkeurigheid toediening	369
tijdelijke basaalsnelheid	47
tijdelijke snelheid instellen	115
Tijdelijke snelheid stoppen	116
Toedieningsfrequentie	369
waarschuwing basaalsnelheid verplicht	177
Batterij	98
batterijniveau	54, 56
Tips voor opladen	100
Batterij, opladen	99
Beleid retourgezonden goederen	388
Berekening	60
Berekening weergeven	60

Bestellen van benodigdheden	46
Beveiligingscode	28
Beveiligingspin	104
Bewerken	
Datum bewerken	102
herinnering locatie	128
tijd bewerken	101
BG	46
Doel-BG	108
doel-BG	46
doel-BG in persoonlijke profielen	111
Herinnering hoge BG	159
herinnering lage BG	158
BG na bolus-herinnering	159
BG-herinnering	159
Bluetooth	236
Bolus	47, 129
bolus annuleren	140, 145
bolusoverzicht	130
Bolusscherm	60
correctiebolus	47
Getimede instellingen	109
In persoonlijke profielen	112
nauwkeurigheid toediening	369
Pictogram Actieve bolus	54, 222

snelle bolus	47
verlengde bolus	48
voedingsbolus in eenheden	135
voedingsbolus in gram	135

bolus

BG na bolus-herinnering	159
bolus stoppen	140, 145
verlengde bolus	136

bolus annuleren	140, 145
------------------------	----------

bolus stoppen	140, 145
----------------------	----------

C

Canule	47
---------------	----

Canule vullen	127
---------------	-----

CGM

bloedglucosewaarde kalibreren	260
buiten bereik/geen antenne, problemen oplossen	297
CGM niet beschikbaar	291
CGM-info	239
CGM-instellingen	236
CGM-systeemfout	292
CGM-waarschuwing bij daling	283
CGM-waarschuwing bij hoge glucose	278
CGM-waarschuwing bij lage glucose	280

correctiebolus instellen	260
Dexcom G6 Automatische uitschakeling van de sensor Dexcom G6	252
Dexcom G6 starten	249
Dexcom G6 stoppen	253
Dexcom G7	255
Dexcom G7 starten	253
Dexcom G7 stoppen	255
een CGM-sensor starten of stoppen	247
Gegevens weergeven op de pomp, overzicht	262
Geschiedenis, weergeven	267
Glucosetrendgrafieken	263
Herhaling waarschuwing hoge BG	242
herhalingswaarschuwing lage BG	243
kalibratie starten	259
kalibratie van uw CGM-systeem	257
kalibratiemeldingen	220
kalibratieoverzicht	258
kalibratiewaarschuwing na 12 uur	272
klinische onderzoeken, sensor	348
onbekende sensorwaarde	285
onbekende sensorwaarde, problemen oplossen . .	296
Ontvanger	233
Opstartperiode Dexcom G6-sensor Dexcom G6	250
Opstartperiode Dexcom G7-sensor	254

Pijlen voor veranderingssnelheid	264
Scherm Mijn CGM	226
sensor	219
sensor defect	289
sensor defect, problemen oplossen	298
Sensorcode	219
sensoron nauwkeurigheden, problemen oplossen	298
Sensortype selecteren	248
Standaardvolume	236
Standaardwaarschuwing hoge BG	242
standaardwaarschuwing lage BG	243
statussymbolen	220
Systeemoverzicht	232
Trendpijlen glucose	264
Uw CGM koppelen	236
Volume instellen	236
waarschuwing bij lage bloedglucose, instellen . . .	243
waarschuwing buiten bereik	341, 342
Waarschuwing hoge glucose, instellen	242
waarschuwing kalibratie niet voltooid	274
waarschuwing kalibratiefout	276
waarschuwing opstartkalibratie	271
waarschuwing zenderbatterij zwak	287
Waarschuwingen bij stijging en daling	244
waarschuwingen en foutmeldingen	269

Zender-ID	248
Zender-ID invoeren	236
CGM niet beschikbaar	291
CGM, waarschuwing buiten bereik, instellen	245
CGM-ID	248
CGM-koppelingscode	218
CGM-problemen oplossen	295
CGM-sensorsessie starten	
Dexcom G7	253
CGM-systeemfout	292
CGM-volume instellen	236
CGM-waarschuwing bij daling	283
CGM-waarschuwing bij hoge glucose	278
CGM-waarschuwing bij lage glucose	280
Code voor koppelen via mobiele app	47
Control-IQ-technologie	
automatische toediening van correctiebolussen	323
beweging starten of stoppen	335
gewicht	312
gewicht instellen	330
handmatig slaap starten of stoppen	334
hoe werkt het	316
in- en uitschakelen	331
informatie op uw scherm	336
insuline opgeschort	319

maximale insulinetoediening	321
overzicht	316
slaap inroosteren	332
startscherm	310
tijdens beweging	326
tijdens slaap	325
toediening volgens basaalsnelheid in het persoonlijk profiel	317
totale dagelijkse insuline	312
totale dagelijkse insuline berekenen	331
verantwoord gebruik	306
vereisten instellingen	330
verhoogde insulinetoediening	321
verlaagde insuline	317
waarschuwing hoog	344
waarschuwing laag	343
waarschuwing maximale insuline	345
zonder activiteit ingeschakeld	325
Correctiebolus	47
Correctiefactor	47, 109
getimede instellingen	109
in persoonlijke profielen	111

D

Datum

Datum bewerken	102
weergave datum en tijd	54

Doel-BG	46
getimede instellingen	109
in Persoonlijke profielen	108
in persoonlijke profielen	111

E

Een bloedglucosemeting op een andere plaats	218
---	-----

Een GGM-sensorsessie starten

Dexcom G6	249
-----------------	-----

Een GGM-sensorsessie stoppen

Dexcom G6	253
Dexcom G7	255

Eenheden	47
-----------------------	----

voedingsbolus, op bolusscherm	60
-------------------------------------	----

eenheden

voedingsbolus in eenheden	135
---------------------------------	-----

Eenheden, op bolusscherm	60
---------------------------------------	----

Elektromagnetische compatibiliteit	380
---	-----

Elektromagnetische emissies	382
--	-----

Elektromagnetische immuniteit	383
--	-----

F

foutmelding sensor defect	289
--	-----

G

Garantie

pompgarantie	388
--------------------	-----

Geforceerd afsluiten	82
-----------------------------------	----

Gegevens, overzicht CGM weergeven	262
--	-----

Geluid	103
---------------------	-----

Geschiedenis

CGM-geschiedenis	267
------------------------	-----

geschiedenis Control-IQ-technologie	154
---	-----

Pompgeschiedenis	154
------------------------	-----

Getimede instellingen	109
------------------------------------	-----

in persoonlijke profielen	111
---------------------------------	-----

Glucosetrendgrafieken	263
------------------------------------	-----

Gram

voedingsbolus in	135
------------------------	-----

Voedingsbolus, op bolusscherm	60
-------------------------------------	----

H

Handmatige bolus	130
Herinnering hoge BG	159
Herinnering lage BG	158
Herinnering locatie	
Instellen herinnering locatie	160
Herinnering locatie, instellen	128
Herinnering voor bolus bij gemiste maaltijd	160
Herinneringen	157
BG na bolus	159
Bolus bij gemiste maaltijd	160
Herinnering locatie	160
herinnering locatie	128
Hoge BG	159
Lage BG	158
waarschuwingen en herinneringen	64
Het scherm ontgrendelen	101
Hoogte	210

I

Inhoud van pomppakket	46
Instellingen, specificaties pompinstellingen	373
Insuline	

Actieve insuline (AI)	46, 54
Insulineduur	109
Toediening van insuline hervatten	151
Toediening van insuline stoppen	150, 151
weergave actieve insuline (AI)	54
Weergave insulineniveau	54, 126

Insulineduur, in Persoonlijke profielen	109
--	-----

Interferentie, FCC-kennisgeving	388
--	-----

K

kalibratiewaarschuwing, 12 uur	272
---	-----

Kleuren

verklaring van pompkleuren	51
----------------------------------	----

Knop alarm Scherm aan/Snelle bolus	199
---	-----

Koolh.	47
---------------------	----

Koolhydraten	47
---------------------------	----

Koolhydraten, in persoonlijke profielen	110
---	-----

voedingsbolus in gram	135
-----------------------------	-----

Voedingsbolus, op bolusscherm	60
-------------------------------------	----

Koolhydraten, op bolusscherm	60
---	----

Koolhydratenratio	47
--------------------------------	----

actuele status	58
----------------------	----

Getimed instellingen	109
----------------------------	-----

In persoonlijke profielen	111
---------------------------------	-----

Koppelingscode

CGM	218
mobiele app	47

L

LED	51
LED, locatie op startscherm	56
Loskoppelen tijdens vullen	125
Luchtbellen	
Slang controleren	127
Verwijderen voor toediening	121
Luchthavenbeveiliging	211

M

Max. bolus	138
Mijn pompscherm	64
Mobiele app	
Dashboard	83
Een smartphone koppelen	76
Een smartphone ontkoppelen	78
Installeren	75
Meldingen	79

opnieuw opstarten	82
Overzicht	74
Pompverbinding verbroken	80
Verbinding maken met een smartphone	76

mobiele app

geforceerd afsluiten	82
Mobiele app installeren	75

N

Netadapter	99
------------------	----

O

Ontvanger, CGM	233
Opladen	
autoadapter	99
computer	99
stopcontact	99
Tips voor opladen	100
Opladen met computer, specificaties	372
Optiesscherm	62
Overzicht	
CGM-overzicht	232

P

Pediatriisch

verzorging infusieplaats 28

pediatrisch 28

beveiligingscode 28

Persoonlijk profiel verwijderen 115

Persoonlijke profielen

Bewerken of weergeven 113

Kopiëren van een bestaand 114

naam van een profiel wijzigen 114

Nieuw profiel aanmaken 110

Overzicht persoonlijke profielen 108

Persoonlijk profiel programmeren 111

Profiel activeren 114

profiel verwijderen 115

Profielen toevoegen 113

Pictogram Actieve bolus 54, 222

Pictogrammen

uitleg van pictogrammen 220

Verklaring van pictogrammen 49, 307

Pijlen

CGM-trends 266

pijlen omhoog/omlaag 62

Pijlen voor glucoseveranderingssnelheid 264

Pomp onderhouden 207

Pomp opladen 98

Pomp verzorgen 207

Pompgeschiedenis 154

Pompgeschiedenis, samenvatting toediening 154

Pompinfo 154

Pompinfo, serienummer 154

Pompinstellingen, specificaties 373

Pomppakketinhoud 46

Pompprestaties, specificaties 375

Pompspecificaties 368

Problemen in verband met levensstijl 209

problemen oplossen 295

R

Reizen 211

Reizen, per vliegtuig 211

Reservoir 120

Reservoir laden 120, 124

reservoir laden 47

Reservoir vervangen 124

Reservoir vullen 122

Reservoirslang 56

Reservoir laden	120, 124
Risico's infusieset	118
Risico's in verband met de infuusset	43
Risico's van het gebruik van de pomp	43
Risico's van het gebruik van het systeem	215

S

Samenvatting toediening	154
Schermbeschermer	46
Schermen	
Apparaatinstellingen	66
Bolusscherm	60
CGM-startscherm	224
CGM-vergrendelingsscherm	222
Control-IQ-technologie	312
Control-IQ-technologie startscherm	310
Control-IQ-technologie vergrendelingsscherm	308
lettertoetsenbord	70
Mijn pompscherm	64
Ontgrendelen	101
Optiesscherm	62
scherm Actuele status	58
Scherm met cijfertoetsenbord	68
Scherm Mijn CGM	226

Startscherm	56
vergrendelingsscherm	54
Selecteer taal	100
Sensor	
applicator	218
Dexcom G6 starten	249
Dexcom G6 stoppen	253
Dexcom G7 starten	253
Dexcom G7 stoppen	255
sensor	219
buiten bereik/geen antenne, problemen oplossen ..	297
CGM klinische onderzoeken	348
onbekende waarde	285
problemen oplossen	295
problemen sensorwaarde oplossen	296
sensor defect, problemen oplossen	298
waarschuwing buiten bereik	341, 342
sensor, kalibratie starten	259
Sensorcode	219
Sensortype selecteren	248
Serienummer	22, 154
Slang	
Reservoirslang	56
slangconnector	56, 121
Vulslang	125

Snelle bolus	47
pediatrisch	28
Specificaties	
Elektromagnetische compatibiliteit	380
Elektromagnetische emissies	382
Elektromagnetische immuniteit	383
Opladen met computer	372
Pomp	368
Pompprestaties	375
Waterbestendigheid	368
Standaard	
Alarm Autom. uitschakelen	162
CGM-standaardvolume	236
CGM-waarschuwing bij stijging	244
CGM-waarschuwing Buiten bereik	246
Herinnering hoge BG	159
Herinnering lage BG	158
Herinnering locatie	160
snelle bolus	139
Tijdelijke basaalsnelheid	115
Time-out scherm	103
Waarschuwing bij hoge glucose	242
Waarschuwing bij lage insuline	162
waarschuwing lage bloedglucose	243
standaard	
verlengde bolus	136

Startscherm	56
Startscherm, CGM-	224
Startscherm, Control-IQ-technologie	310
Storing	204

T

Taal	100
Tandem-logo	56, 100
Temperatuur alarm	196
Temperatuur, extreme	211
Tijd	
tijd bewerken	101
Tijdsegmenten	108
Tijdsegmenten, in persoonlijke profielen	111
weergave datum en tijd	54
Tijdelijke snelheid	
Tijdelijke snelheid stoppen	116
Tijdelijke snelheid stoppen	116
Tijdelijke snelheid, een tijdelijke basaalsnelheid	
instellen	115
Tijdsegmenten	
toevoegen aan persoonlijk profiel	112
Time-outschermb, instellen	103
Toediening van insuline hervatten	151

Toediening van insuline stoppen	150, 151
Toetsenbord	68, 70
Cijfertoetsenbord	68
lettertoetsenbord	70
Trendgrafieken, glucosetrends, pijlen	263

U

USB	
USB-adapter	99
USB-kabel	46, 99
USB-poort	56, 99
Uw systeem opslaan	208
Uw systeem reinigen	208

V

Veiligheid bij beeldvorming met magnetische resonantie (MRI)	35
Veiligheidsinformatie	
pomp	31
Veiligheidsinformatie Control-IQ-technologie	302
Veiligheidsinformatie over CGM	214
Verlengde bolus	48, 136

verlengde bolus	
standaard	136
Verstoppingalarmen	197, 198
Verzorging infusieplaats	118
Verzorging infusieplaats, pediatrisch	28
Volume	103
Vullen	
Canule vullen	127
Reservoir vullen	122
Vulpoort	121, 122
Vulslang	125

W

Waarschuwing basaalsnelheid verplicht	177
Waarschuwing bij daling, instellen	245
Waarschuwing bij lage insuline	162, 167
Waarschuwing bij stijging, instellen	245
Waarschuwing bolus niet voltooid	170
waarschuwing buiten bereik	341, 342
Waarschuwing canule vullen niet voltooid	175
Waarschuwing datafout	187
Waarschuwing energiebron	186

waarschuwing hoog	
Control-IQ-technologie	344
Waarschuwing instelling niet voltooid	176
waarschuwing kalibratie niet voltooid	274
waarschuwing kalibratiefout	276
Waarschuwing max. bolus per uur	178
waarschuwing maximale insuline	
Control-IQ-technologie	345
waarschuwing opstartkalibratie	271
Waarschuwing reservoir vervangen niet voltooid	173
Waarschuwing slang vullen niet voltooid	174
Waarschuwing tijdelijke snelheid niet voltooid	172
Waarschuwing verbindingfout	184
waarschuwing zenderbatterij zwak	287
Waarschuwingen	54, 165
CGM	241
CGM stijging en daling	244
Control-IQ-technologie	339
Control-IQ-technologie, waarschuwing hoog	344
Control-IQ-technologie, waarschuwing laag	343
Control-IQ-technologie, waarschuwing maximale insuline	345
waarschuwing basaalsnelheid verplicht	177
Waarschuwing bij lage insuline	162, 167
waarschuwing bolus niet voltooid	170

Waarschuwing buiten bereik, instellen	245
Waarschuwing canule vullen niet voltooid	175
Waarschuwing datafout	187
waarschuwing energiebron	186
Waarschuwing hoge glucose, instellen	242
Waarschuwing instelling niet voltooid	176
waarschuwing lage bloedglucose, instellen	243
waarschuwing max. bolus per uur	178
Waarschuwing persoonlijk profiel niet voltooid	176
Waarschuwing reservoir vervangen niet voltooid	173
Waarschuwing slang vullen niet voltooid	174
Waarschuwing tijdelijke snelheid niet voltooid	172
waarschuwing verbindingfout	184
waarschuwingen en herinneringen	64
Waarschuwingen max. bolus	179, 180
Waarschuwingen min. basaal	182, 183
Waarschuwingen onvoltooide laadprocedure	173
Waarschuwingen zwakke voeding	168, 169
waarschuwingen	
CGM	269
CGM, kalibratiewaarschuwing na 12 uur	272
CGM, niet beschikbaar	291
CGM, sensor defect	289
CGM, systeemfout	292
CGM, waarschuwing bij daling	283
CGM, waarschuwing bij hoge glucose	278

CGM, waarschuwing bij lage glucose	280
CGM, waarschuwing buiten bereik	341, 342
CGM, waarschuwing kalibratie niet voltooid	274
CGM, waarschuwing kalibratiefout	276
CGM, waarschuwing opstartkalibratie	271
CGM, waarschuwing zenderbatterij zwak	287
Waarschuwingen Max. basaal	182
Waarschuwingen max. bolus	179, 180
Waarschuwingen min. basaal	182, 183
Waarschuwingen onvoltooide laadprocedure	173
Waarschuwingen zwakke voeding	168, 169
Waarschuwingspictogram, waar te vinden	54
Wateractiviteiten, pomp	210
Waterbestendigheid, pomp	210
Waterdicht, pomp	210
Weergave-instellingen	103

Z

Zender-ID	248
Zorgverlener	43

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

OCTROOIEN EN HANDELSMERKEN

Gedekt volgens een of meer octrooien. Zie www.tandemdiabetes.com/legal/patents voor een lijst van octrooien.

Tandem Diabetes Care, het Tandem Diabetes Care-logo, Control-IQ, Tandem Source, t:lock, t:slim, t:slim X2, AutoSoft, TruSteel en VariSoft zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Tandem Diabetes Care, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7, G6 en G7 en alle gerelateerde logo's en ontwerpmerken zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het Bluetooth-woordmerk en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze merken door Tandem Diabetes Care, Inc. vindt met toestemming plaats.

Alle andere merken van derden zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Duitsland

UK REP

MDSS-UK RP Ltd.
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester
M14 5TP
Engeland, Verenigd Koninkrijk

CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Zwitserland

AUSTRALISCHE SPONSOR

Australasian Medical & Scientific Ltd
Suite 4.01, Building A
The Park, 5 Talavera Rd,
Macquarie Park, Sydney,
NSW 2113, Australië

CE 2797

UK
CA 0086



CONTACTINFORMATIE:

tandemdiabetes.com/contact

VERENIGDE STATEN:

(877) 801-6901

tandemdiabetes.com

CANADA:

(833) 509-3598

tandemdiabetes.ca



1014136_A

AW-1014137_A

2025-JAN-30